



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

PI - Produktinformation

Kudu, Combi Frame:x og Multi Frame:x

Drivringene på 20", 22" og 24" drivhjul på Kudu, Combi Frame:x og Multi Frame:x er monteret med to små distanceskiver under hver af de seks monteringspunkter. Dette giver mulighed for at indsnævre eller eliminere afstanden mellem drivhjul og drivring.

Fjernes den mindste af de to distanceskiver, rykkes drivringen $\frac{1}{2}$ cm tættere på drivhjulet og fastgøres med de eksisterende skruer.

Fjernes den største af de to distanceskiver, rykkes drivringen helt op ad drivhjulet og fastgøres med kortere skruer (se nedenfor).



Produkt

Varenr.

Kit for flytning af drivhjul

31951902661

Leveres fra

Uge 42. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

The logo for etac, featuring the lowercase letters 'etac' in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.