

FASE 2 Zorgverlener of mantelzorger helpt de cliënt

Situatie 1: Cliënt hogerop helpen in bed




Stap 1

- Laat de cliënt de knieën optrekken of help daarbij



Stap 2


- Cliënt zet voeten af op het katoenen deel van het basislaken Midi Corner of omgeslagen Maxi Corner

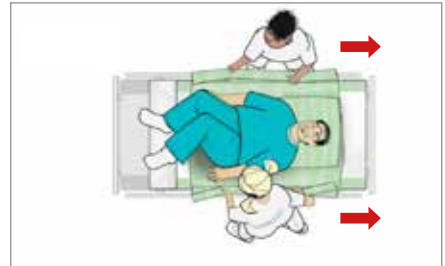

Stap 3


- Pak het treklaken t.h.v. schouders en heupen
- Verplaats je gewicht naar achterste been en neem het treklaken mee zonder fysieke kracht te gebruiken

Situatie 2: Cliënt draaien op de zij

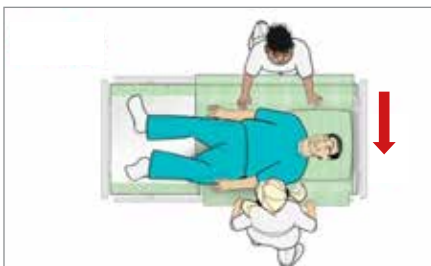


Stap 1

- Schuif het been van cliënt naar je toe
- Pak het treklaken t.h.v. schouders en heupen
- Verplaats je gewicht naar achterste been en neem het treklaken mee zonder fysieke kracht te gebruiken

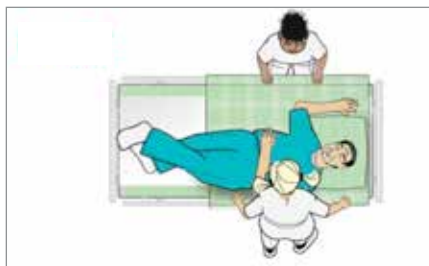

Stap 2


- Kruis de armen van cliënt of plaats één arm naast het hoofd
- Verplaats het kussen
- Kruis de benen of plaats buitenste knie omhoog

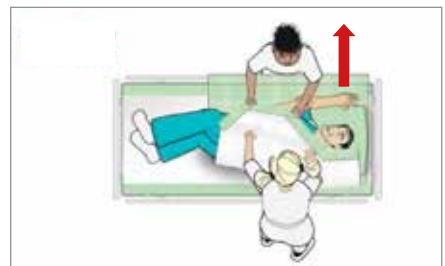

Stap 3

- Leg het treklaken deels over cliënt
- Pak het treklaken aan de andere kant t.h.v. schouders en heupen
- Verplaats je gewicht naar achterste been en neem het treklaken mee zonder fysieke kracht te gebruiken

Situatie 3: Hoofdeinde omhoog brengen/zitten in bed

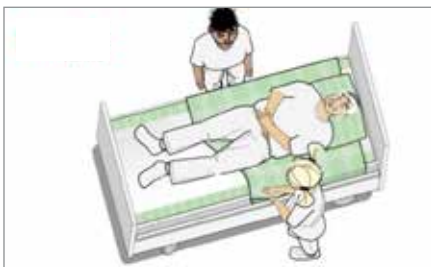

Stap 1

- Vouw het treklaken dubbel tot net onder het zitvlak van cliënt
- Stop het treklaken op dit punt in
- Je hebt nu een 'lock' gecreëerd



Stap 2

- Plaats het bed in de Fowlerstand: eerst de kniesteen en daarna het hoofdeinde



Stap 3

- Stop nu de rest van het treklaken in

Bekijk de video's op etac.nl/immedia-support

Immedia SatinSheet Set: Basislaken en Treklaken



Zorg dat het treklaken ten alle tijde is ingestopt. Bij een verplaatsing haal je het treklaken los, daarna stop je het weer in. Bovenstaande instructies gelden ook voor Immedia SatinSheet Set Inco.



Label 'This side up' zichtbaar bij het hoofdeinde.

Wasvoorschriften:

- Maximaal 80 graden
- Gebruik geen wasmiddel met bleek
- Gebruik geen wasverzachter
- Drogen in een wasdroger mag alleen op een hele lage temperatuur