


Cross/Cross XL

Körbygel / Körbygel Lille Viking

Bow handle / Bow handle Lille Viking

Schiebestange / Schiebestange Lille Viking

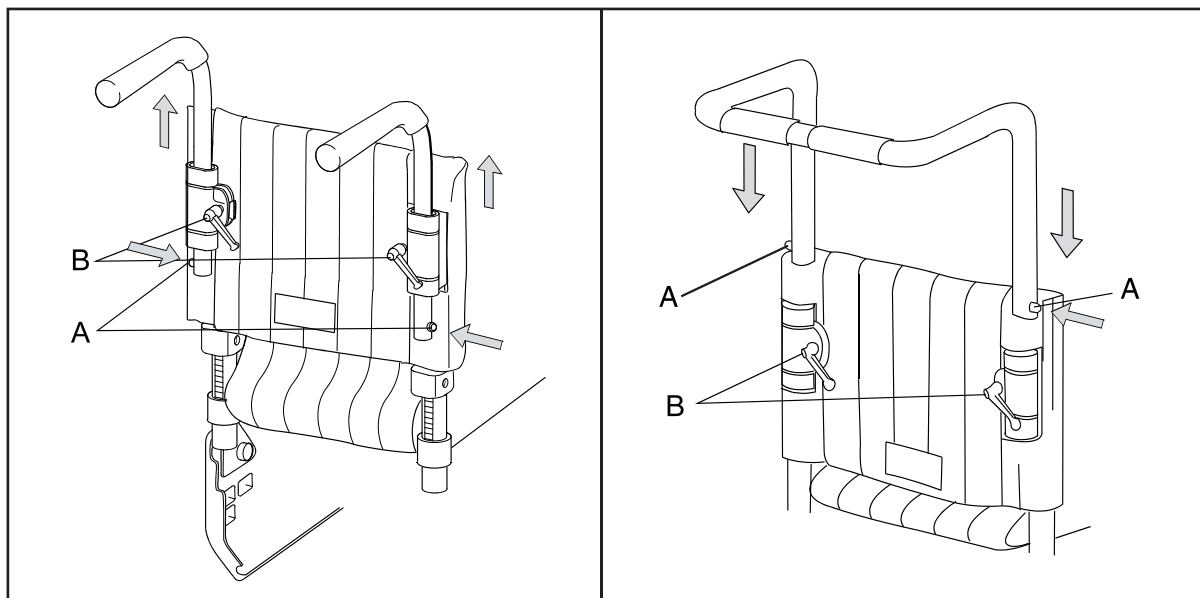

Monteringsanvisning Körbygel

1. Lossa vreden (B)
2. Demontera körhandtagen genom att dra upp och tryck in snäplås (A)
3. Montera körbygelgen genom att trycka in snäplås (A). Tryck ner och se till att körbygelgen hamnar i rätt "snäpläge".
4. Ställ in efter önskad höjd.
5. Drag åt vreden (B) ordentligt.

Assembly instructions bow handle

1. Loosen lock handle (B).
2. Remove push handle by putting up and pressing the snap lock (A).
3. Mount the bow handle by pressing the snap lock (A). Press down. Make sure the bow handle locks into "position".
4. Adjust to desired height.
5. Tighten lock handle (B) firmly.

Montage Anweisung Schiebestange

1. Befestigungsschraube (B) lösen.
2. Schiebegriffe nach oben ziehen, hierbei Schnappverschluss (A) drücken.
3. Montage der Schiebestange. Schnappverschluss (A) drücken. Einrasten der Schiebestange überprüfen.
4. Höhe der Schiebestange justieren.
5. Befestigungsschraube (B) festziehen.

74127B

05-09-28

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com