

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatte produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

Cross & Prio - Fodpladesystem

Vi foretager løbende opdateringer og forbedringer på vores produkter for at opnå større modularitet. I den forbindelse tilbyder vi nu mere tilbehør til vores eksisterende Cross fodplader. Samt en ydre knæstøtte til Cross benstøtterne.

Fodplade forlænger - eksisterende tilbehør

Vores fodplade forlænger, som er eksisterende tilbehør ligger til grund for de nye hele fodplader, som præsenteres på side 3.

Fodplade forlængerne findes i tre størrelser

Small - 250 x 225 mm (hel plade)
 Medium - 150 x 225 mm (højre og venstre)
 Large - 200 x 225 mm (højre og venstre)

- Skruer og bolte samt 30 cm anti-slip tape leveres med.

Generelt:

Benyt bred forgaffelfæste, så hjulene ikke går imod.
 Alle fodplader kræver boring
 Skabelon hertil medfølger.



Fodplade forlænger i str. small er udformet som en hel fodplade. Fodplade forlængerne i str. medium og large (højre og venstre) kan benyttes styk- eller parvis og kan kobles sammen til en hel fodplade.

Varenr.	Small	Medium	Large
28774	Prio SB 40-45 cm Cross SB 35-50 cm		
28775-1/2		Prio SB 40-45 cm Cross SB 40-47,5 cm	
28776-1/2			Prio 50-55 cm Cross 50-52,5 cm



Fodplade forlænger højre side

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

Fodplade forlænger small erstatter hel fodplade, aftagelig og benyttes med snæver benstøtte og bred forgaffelfæste.

SB: 35-37,5 cm = 5" forhjul

SB: 40-50 cm = 6,5" forhjul.



Varenr. 28774: Fodplade forlænger small, hel fodplade



Hel fodplade, aftagelig - UDGÅET

Sidebeskytter for fodplade forlænger - nyt tilbehør

Sidebeskytteren monteres på fodplade forlænger og forhindrer foden i at komme i kontakt med forhjulet. Højde = 3,5 cm.



Sidebeskytter for fodplade, varenr. 28772

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatte produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

Hel fodplade str. medium og large - nyt tilbehør

Hvor den hele fodplade før var en tilbehørsdel, der erstattede de delte fodplader på kørestolen, er den nye udformning af den hele fodplade konstrueret som en "add-on" dvs. som en ekstra tilbehørsdel, der monteres direkte på de eksisterende delte fodplader på kørestolen. Således er det fodplade forlængerne beskrevet i starten af denne produktinformation, der benyttes.


For at samle en hel fodplade skal følgende dele benyttes (med undtagelse af str. small der er udformet som en hel plade - se ovenfor):

- 1 stk højre og 1 stk. venstre fodplade forlænger
- Styr for hel fodplade inkl. skruer.

Styret kan monteres både i højre og venstre side, afhængigt af hvilken side man ønsker at kunne klappe fodpladen op til. Den hele fodplade kan kombineres med valgfrie benstøtter (selv eleverbare).



De delte fodplade forlængere bliver sat sammen med skruer.

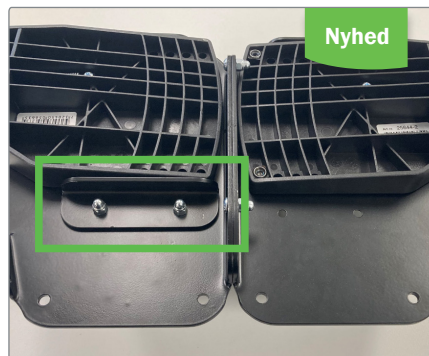

Styr for hel fodplade kan placeres i højre eller venstre side.



Hel fodplade klappet op til den ene side.

De hele fodplader kan også bestilles som komplet sæt inkl. delte fodplader, dvs. et komplet sæt med: højre og venstre fodplade forlænger, styr for hel fodplade inkl. skruer, samt de delte fodplader, som forlængerne monteres på. Disse komplet sæt vil erstatte de hele fodplader til Prio.



Hel fodplade til Prio - UDGÅR.

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår

Fodkasse - nyt tilbehør

Fodkassen er polstret for at mindske trykket, ved sårbare fødder. Det er en skånsom støtte, der hjælper med at placere fødderne mere behageligt på de eksisterende fodstøtter. Den fastgøres nemt til kørestolen, mens den holder fødderne sikkert og komfortabelt.

Der er plads i kassen, så bruger stadig kan lave små bevægelser med fødderne, for at undgå uro. Fodkassen kan leveres i to størrelser - Medium og Large.

En komplet fodkasse består af:


- Fodplade forlængere, højre og venstre
- Sideplader, højre og venstre
- Polstring




Fodkasse, kan leveres i str. medium og large.

Ydre knæstøtte, distalt og lateralt - nyt tilbehør

Denne knæstøtte kan monteres på vores Cross benstøtter, og erstatter dermed de faste Prio benstøtter, som udgår.

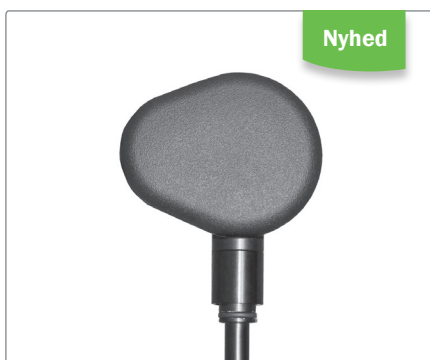

Ydre knæstøtte.

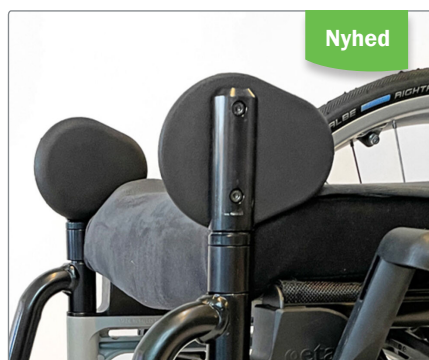

Ydre knæstøtte monteret.



Benstøtte fast vinkel, Prio - UDGÅR.

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgået

Eksisterende varenumre:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Fodplade forlænger S, hel fodplade	Passer til: Prio SB: 40-45 cm, Cross SB: 35-50 cm	28774
Fodplade forlænger M, delt fodplade højre	Passer til: Prio SB: 40-45 cm, Cross SB: 40-47,5 cm	28775-1
Fodplade forlænger M, delt fodplade venstre	Passer til: Prio SB: 40-45 cm, Cross SB: 40-47,5 cm	28775-2
Fodplade forlænger L, delt fodplade højre	Passer til: Prio SB: 50-55 cm, Cross SB: 50-52,5 cm	28776-1
Fodplade forlænger L, delt fodplade venstre	Passer til: Prio SB: 50-55 cm, Cross SB: 50-52,5 cm	28776-2

Nye varenumre:

Varenavn nyt produkt	Beskrivelse	Nyt varenr.
Sidebeskytter for fodplade	Monteres på fodplade forlænger (H:3,5 cm)	28772
Hel fodplade SB40	Passer til: Prio SB: 40 cm	28662
Hel fodplade SB45	Passer til: Prio SB: 45 cm	28663
Hel fodplade SB50	Passer til: Prio SB: 50 cm	28664
Hel fodplade SB55	Passer til: Prio SB: 55 cm	28665
Styr hel fodplade	Monteres så fodpladen kan klappes op	28773
Fodkasse M	Passer til: Prio SB: 40-45 cm, Cross SB: 40-47,5 cm	28642
Fodkasse L	Passer til: Prio SB: 50-55 cm, Cross SB: 50-52,5 cm	28643
Polstring til fodkasse M	Løs polstring til fodkasse M	28778
Polstring til fodkasse L	Løs polstring til fodkasse L	28779
Ydre knæstøtte, højre	Passer til Cross benstøtter ikke låsbar	28777-1
Ydre knæstøtte, venstre	Passer til Cross benstøtter ikke låsbar	28777-2

Gælder fra Uge 44.2023

Udgåede varenumre:

Varenavn udgået produkt	Beskrivelse	Udgået varenr.
Hel fodplade, aftagelig til SB 35 cm		26306
Hel fodplade, aftagelig til SB 37,5 cm		26307
Hel fodplade til Prio: SB 40 cm		28342
Hel fodplade til Prio: SB 45 cm		28343
Hel fodplade til Prio: SB 50 cm		28344
Hel fodplade til Prio: SB 55 cm		28345
Benstøtte fast vinkel, Prio, højre		27729-1
Benstøtte fast vinkel, Prio, venstre		27729-2

Gælder fra Uge 44.2023