

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

## Cross 6 - Opklappeligt armlæn


Vi lancerer hermed et nyt opklappeligt armlæn til Cross 6 kørestolen.

Armlænet passer kun på Cross 6, da monteringen foretages via det spor i kørestolens ramme, der også benyttes til montage af hoftebælte (dette spor findes ikke på Cross 5XL). Armstøttefæstet hertil er udformet, for at gøre kombinationen af det opklappelige armlæn med et hoftebælte mulig, men position, vinkel og trækretningen på bæltet kommer i konflikt med sidebeskytteren monteret på armlænet. Hvis det er muligt bør hoftebæltet derfor monteres i sporet på kørestolens ramme, hvor også bremsen er monteret.

Vær opmærksom på at det opklappelige armlæn kun passer sammen med Prio armstøttefæstet (medfølger ved levering). Armstøttefæstet skal monteres i sin højeste position, længst fremme på rammen.



Det nye opklappelige armlæn.

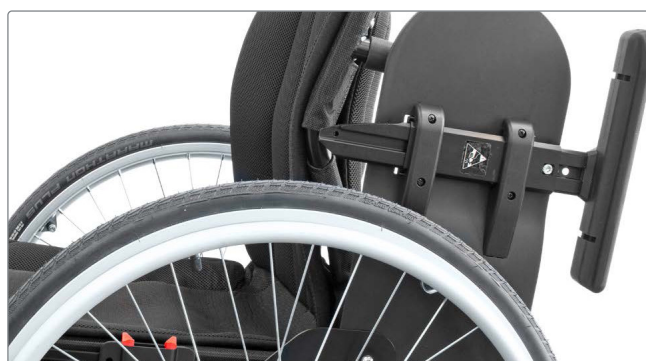

### Ny vare:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Kort armlæn, opklappeligt, højre, L=25 cm	Passer til Cross 6	28842-1
Kort armlæn, opklappeligt, venstre, L=25 cm	Passer til Cross 6	28842-2
Langt armlæn, opklappeligt, højre, L=38 cm	Passer til Cross 6	28843-1
Langt armlæn, opklappeligt, venstre, L=38 cm	Passer til Cross 6	28843-2
<b>Gælder fra</b>		Uge 2 2024

### Udgået vare:

Varenavn	Beskrivelse	Varenr.
Armlæn opklappeligt, højdejusterbart, højre	Passer til Cross	25546-1
Armlæn opklappeligt, højdejusterbart, venstre	Passer til Cross	25546-2
Armlæn opklappeligt, højre	Passer til Cross	25551-1
Armlæn opklappeligt, venstre	Passer til Cross	25551-2
<b>Gælder fra</b>		Uge 2 2024