

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

Nye veste & seler

etac[®]

Veste og seler kan være altafgørende i forhold til en produktløsning, der hjælper et barns siddestilling og kan give det uafhængighed i forhold til kommunikation, og brug af hænder.

Vi har opdateret og forbedret vores program af veste og seler. Det nye program indeholder; krydsveste, torsoveste, y-seler, skridtseler og ankelseler.

- Et omfattende produktprogram sikrer korrekt støtte til de flese brugere.
- Nem at montere og justere.
- Kan benyttes på alle vores R82 juniorprodukter m.m.
- Nem at tørre af og vaske for bedre hygiejne. Kan vaskes ved op til 60 °C.
- Neopren under spænderne for ekstra komfort.
- Udført i en kombination af neopren og komfort stof, hvilket gør dem fleksible og holdbare.
- Målguide gør det nemt at vælge den rigtige størrelse.



Kan indstilles to steder

Y-selen og skridtselen kan indstilles både på spændet i midten og på spændestropperne på hver side. Dette gør det muligt at stramme selen efter spændet er lukket, og at justere den ens i begge sider.



Nem at rengøre

Alle veste og seler er nemme at aftøre og rengøre og de kan alle vaskes ved 60 °C.



Komfort

Alle veste og seler er med neopren under spænderne, hvilket gør dem mere behagelige for bruger. Endvidere åbnes spænderne ved at trykke på siden, så det ikke er nødvendigt at trykke ind mod barnet.




Bedre holdbarhed

Forstærket på punkter hvor stropper og spænder er fastgjort for bedre holdbarhed.

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

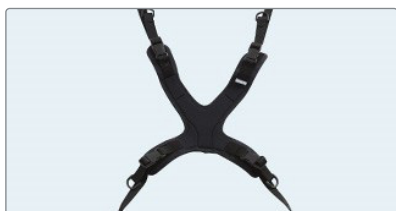

Torsovest

Torsovesten yder et fast men fleksibelt hold mod brystet. Forhindrer barnet i at falde fremover.




Krydsvest

Krydsvesten yder et fast fleksibelt hold mod brystet og siderne af truncus. Forhindrer barnet i at falde fremover og til siden.



Y-sele

Y-selen trækkes nedad og/eller bagud for at bibeholde lårenes og bækkenets position mod sædet og ryggen. Selen forhindrer barnet i at skifte bækkenstilling og glide fremad i sædet.

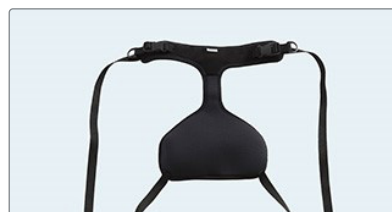

Skridtsele

Skridtselen trækker bækkenet bagud. Neoprendelen af selen dækker området fra det øverste af bækkenet til sædet. Selen forhindrer barnet i at glide fremad og ud af sædet. Kan anvendes til mindre børn.



Ankelsele

Ankelselen minimerer bevægelser for ankler og ben, herunder løft af hæle.

Produkt information

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

Produkt navn ny vare		Art. nr.	HMinr.
Krydsvest str. XS	S:200 - P: 315 mm	3185720-XS	127248
Krydsvest str. S	S:260 - P: 345 mm	3185720-S	127250
Krydsvest str. M	S:345 - P: 450 mm	3185720-M	127251
Krydsvest str. L	S:450 - P: 530 mm	3185720-L	127252
Krydsvest str. XL	S:530 - P: 620 mm	3185720-XL	127253
Torsovest str. XS	S:200 - P:270 mm, neopren	3185705-XS	127254
Torsovest str.	S:270 - P:320 mm, neopren	3185705-S	127255
Torsovest str. M	S:320 - P:405 mm, neopren	3185705-M	127256
Torsovest str. L	S:405 - P:470 mm, neopren	3185705-L	127259
Torsovest str. XL	S:470 - P:520 mm, neopren	3185705-XL	127260
Torsovest str. XXL	S:520 - P:600 mm, neopren	3185705-XXL	127263
Y-sele str. XS	H:170 - 320 mm	3185725-XS	127264
Y-sele str. S	H:210 - 350 mm	3185725-S	127267
Y-sele str. M	H:250 - 410 mm	3185725-M	127270
Y-sele str. L	H:320 - 440 mm	3185725-L	127273
Y-sele str. XL	H:410 - 520 mm	3185725-XL	127276
Skridtsele str. XS	H:160 - H:200 mm, neopren	3185735-XS	127277
Skridtsele str. S	H:200 - H:240 mm, neopren	3185735-S	127280
Skridtsele str. M	H:240 - H:280 mm, neopren	3185735-M	127283
Ankel sele str. XS	160-230 mm	3185745-XS	127284
Ankel sele str. M	230-310 mm	3185745-M	127287
Ankel sele str. XL	290-380 mm	3185745-XL	127290
Indfases fra			Uge 48, 2020

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

 etac®

Produktnavn udgående vare	Art. nr.	HMI nr.
Krydsvest str 0,sort	3189625-060	39390
Krydsvest str 1,sort	3189625-160	39391
Krydsvest str 2,sort	3189625-260	39392
Krydsvest str 3,sort	3189625-360	39393
Krydsvest str 4,sort	3189625-460	39394
Neopren vest str. 1	3189113-1	46988
Neopren vest str. 2	3189113-2	46989
Neopren vest str. 3	3189113-3	46990
Y-sele str 0,polstret	3185427-0	47545
Y-sele str 1,polstret	3185427-1	39415
Y-sele str 2,polstret	3185427-2	39431
Y-sele str 3,polstret	3185427-3	39416
Y-sele str 4,polstret	3185427-4	39417
Neopren skridtsele str. 1	3189114-1	46991
Neopren skridtsele str. 2	3189114-2	46992
Neopren skridtsele str. 3	3189114-3	46993
Ankelsele m/spænde str. 1	3185426-1B	46981
Ankelsele m/spænde str. 2	3185426-2B	46982
Ankelsele m/spænde str. 3	3185426-3B	46983
Ankelsele m/spænde str. 4	3185426-4B	46984
Ankelsele m/spænde str. 5	3185426-5B	46986

Udfases fra Uge 48, 2020