

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Molift Raiser PRO - 2 nye tilbehørsdele!

etac®

Vi tilbyder nu to nye tilbehørsdele til Molift Raiser PRO. En ny ståplade og et nyt hælbånd.

Ståplade 9 cm

Ståpladen til Molift Raiser PRO benyttes, når bruger har behov for at stå med fødderne i et højere niveau. Benyttes til brugere der er 130 - 150 cm høje. Ståpladen placeres ovenpå fodpladen, og den øger således højden med 9 cm. Der er ikke behov for skruer el. lign. til fastgørelse, da ståpladen passer præcist ned på fodpladen.



Produktnavn vare	Beskrivelse	Art.nr.
Ståplade til Molift Raiser PRO	Øger højden 9 cm	28612
Leveres fra		Uge 20 2021

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®


Hælbånd

Hælbåndet benyttes til brugere, der har behov for støtte til at fastholde deres fødder i den rette position, når de står på fodpladen på Molift Raiser PRO. Hælbåndet monteres på grebene/ fingerskruerne på fodpladen.

Kan indstilles i tre forskellige længder

Hælbåndet har to huller i hver side, og kan indstilles i tre forskellige længder.

1. **Kort:** Benyt inderste hul i begge sider.
2. **Mellem:** Benyt inderste hul i den ene side, og det yderste hul i den anden side.
3. **Lang:** Benyt yderste hul i begge sider.

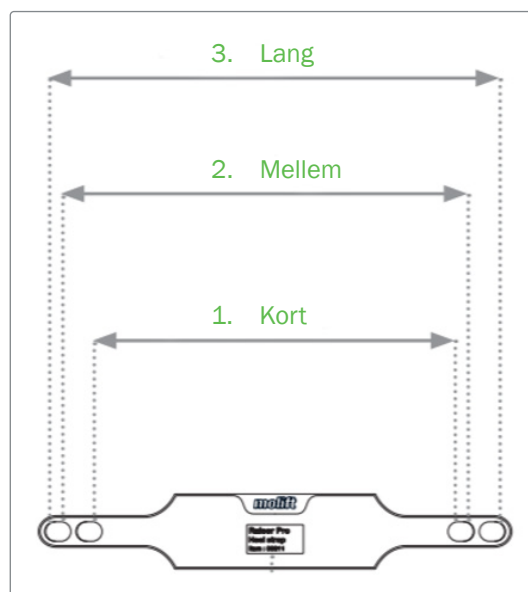

Materiale og rengøring

- Materiale: Silicone.
- Kan aftørres med 70% alkohol eller 45% isopropanol for rengøring eller desinficering.

Produktnavn vare	Beskrivelse	Art.nr.
Hælbånd til Molift Raiser PRO	Indstilling i tre længder	83211
Leveres fra		Uge 20 2021