

etac[®]
Creating Possibilities



R82[®]


R82 Cricket

Der funktionelle und moderne Rebuggy mit kleinstem Faltnaß

Innovation, Qualität und Komfort

Lernen Sie unseren R82 Cricket kennen - den leichten und kompakten Rehabuggy mit dem kleinsten Faltmaß seiner Klasse! Bei der Entwicklung des Cricket standen Innovation, Qualität und Komfort im Vordergrund. Unsere Produktdesigner, Physiotherapeuten und Ingenieure haben den funktionellen und innovativen Buggy entwickelt, um den Nutzer zu unterstützen und optimale Arbeitsbedingungen für die Begleitperson zu schaffen.

Das Produktdesign ähnelt einer Grille und entfaltet sich so, wie das Insekt seine Flügel öffnet. Der Cricket bewegt sich mühelos von Ort zu Ort, genau wie eine echte Grille.

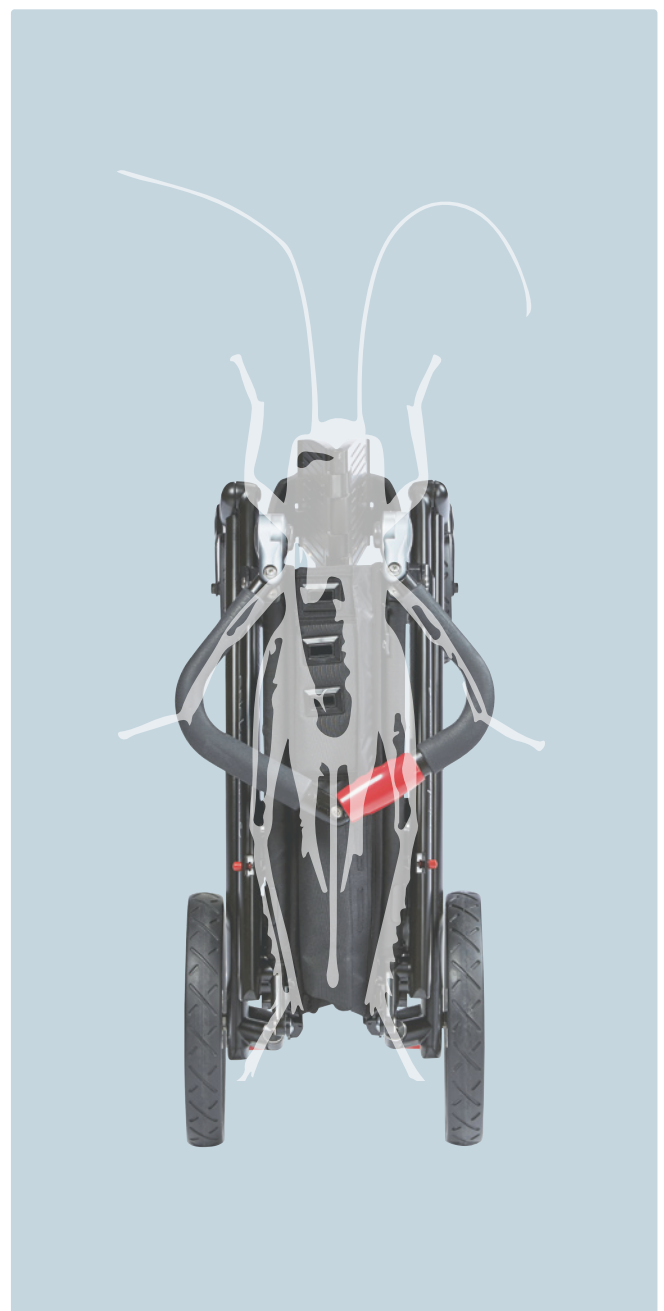

Fokus auf Details

Schiebebügel

Durchgehender Schiebebügel, höhenverstellbar und mitfaltend.

Metallgelenke

Hochwertige Gelenke sorgen für Stabilität.

Armlehnen

Die Armlehnen sind einfach abnehmbar und in zwei Größen erhältlich. Sie passen jeweils an den Cricket beider Größen.

Sitzpolster, mitfaltend

Das hochwertige Sitzpolster ist einfach abnehmbar und bis zu 60 Grad waschbar.

Hinterräder, pannensicher

Die großen 12" Räder sorgen für gute Rolleigenschaften und Fahrkomfort.

Haltebügel

Den Haltebügel gibt es in zwei Varianten: zum Einschub in die Armlehnen oder zum Einstecken in den Rahmen.

Einstellbare Sitztiefe

Die Sitztiefe lässt sich in 2 cm-Schritten bis zu 12 cm verstellen – für ein langes Mitwachsen und eine optimale Sitzposition.

Durchgehendes Fußbrett, mitfaltend

Die Metallfußplatte sorgt für Stabilität und eine gute Sitzposition.

Radbremse

Feststellbremse an beiden Hinterrädern.

Lenkräder

Mit pannensicherer Bereifung, optional mit Lenkstopp.

Produktseite

R82 Cricket

Der Cricket ist ein Reha-Buggy, der sich sehr einfach und schnell zusammenfalten lässt, sowohl in der Höhe, als auch in der Breite. Er hat das kleinste faltmaß seiner Klasse! Dank einer großen Zubehörpalette lässt er sich sehr gut anpassen und wächst über die einstellbare Sitztiefe und Fußplatte lange mit.

Optimale Unterstützung

Der Cricket ist ein funktioneller und moderner Reha-Buggy, der dem Kind und der Begleitperson optimale Unterstützung und Komfort bietet. Er ist in zwei Größen erhältlich, individuell anpassbar, mitwachsend und kann das Kind mehrere Jahre begleiten. Der leichte Aluminiumrahmen ist sehr einfach zu falten und zu verstauen – der Cricket ist der kompakteste auf dem Markt! Die Sitztiefeinstellung und das stabile, multieinstellbare Fußbrett sind eine Klasse für sich. Ein durchgehender, einstellbarer Schiebegriff und schwenkbare, arretierbare Vorderräder optimieren Fahrkomfort und Mobilität.



340–395 mm



210–430 mm



max. 13,4 kg



max. 50 kg



Maße

	Größe 1	Größe 2
Sitzbreite, maximal	340 mm	395 mm
Sitztiefe	210–310 mm	310–430 mm
Rückenhöhe	500 mm	570 mm
Unterschenkellänge	180–360 mm	225–370 mm
Fußstützenwinkel	360°	360°
Sitzbreite innen	270 mm	330 mm
Sitzbreite außen	340 mm	395 mm
Breite	525 mm	575 mm
Länge	750 mm	750 mm
Höhe	1000 mm	1050 mm
Rückenwinkel	110–125°	110–125°
Sitzneigung	20°	20°
Armlehnenhöhe (von Sitzfläche gemessen)	160–190 mm	160–190 mm
Länge der Armlehne	200 mm	275 mm
Wendekreis	725 mm	763 mm
Breite, faltmaß	355 mm	355 mm
Höhe, faltmaß	485 mm	485 mm
Länge, faltmaß	760 mm	760 mm
Spurbreite bei 90° Korridor (benötigt)	815 mm	815 mm
Nutzergewicht, max.	35 kg	50 kg
Nutzergewicht, max. beim Transport	35 kg	43 kg
Gewicht, Grundmodell	12,4 kg	13,4 kg

Eigenschaften



Rückenlehnenwinkel

Die Rückenlehne kann in zwei Positionen eingestellt werden, 110° für eine aufrechte Sitzposition oder 125° für eine entspannte Ruheposition.



Einfach faltbar & leicht

Der Buggy verfügt über eine dreidimensionale Faltung, die ein extrem kompaktes Faltmaß ermöglicht. Man kann ihn flach zusammenlegen und zusätzlich in der Breite falten und stehend lagern.



Mitwachsend

Der Cricket kann in Sitzbreite, Sitztiefe und Höhe der Fußstützen an die Größe des Kindes angepasst werden. Mit Hilfe von umfangreichem Zubehör kann er individuell an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.



Armlehnen, abnehmbar

Für den Cricket sind optionale Armlehnen in zwei Größen erhältlich. An den Armlehnen lässt sich zusätzlich ein Haltegriff oder ein Therapietisch montieren.

Highlights (USP)

- 2 Größen für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche bis 50 kg
- Sehr leicht und kompakt zu falten
- Flach zusammenlegbar und zusätzlich in der Breite faltbar (3D-Faltung)
- Sitztiefe ab 180 mm und in 20 mm Schritten mitwachsend
- Durchgehender Schiebebügel, mitfaltend
- Aluminium-Fußbrett – durchgehend, mitfaltend und abklappbar
- Fußbrett proportional zur Sitztiefe einstellbar
- Rückenlehne einstellbar von 110–115° für eine entspannte Ruheposition
- Hochwertige, atmungsaktive Sitzbezüge – einfach abnehmbar, bis 60°C waschbar, in 7 Farben erhältlich
- Crashgetestet nach DIN ISO 7176-19/2001



Dürfen wir vorstellen: Isabella

Isabella ist ein leuchtender Stern – kein Zweifel! Eine Prinzessin mit einem großen “P” und einer gewinnenden Persönlichkeit, die durchscheint. Sie ist vier Jahre alt und hat eine beidseitige spastische Zerebralparese mit einem GMFCS-Level II als Folge einer Frühgeburt.

Isabellas Spastik betrifft in erster Linie ihre Beine, vor allem das linke, aber sie hat eine fast normale Funktion der Hände, trotz kleiner unwillkürlicher Bewegungen. Isabella ist ein hochsensibles Mädchen, was für ihre Art von Hirnverletzung nicht untypisch ist.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie den vollständigen Bericht über Isabella und ihre Familie auf unserer Website - ergreifend und inspirierend!

Wir hatten das Vergnügen, einen Tag zusammen mit Isabella und ihrer Familie in Aarhus zu verbringen. Besuchen Sie uns, wenn Sie die Gelegenheit haben, und verbringen Sie einige Zeit bei Dokk1, so wie wir es mit Isabella und ihrer Familie getan haben.



R82 Cricket – bringt dich weiter!

Isabella wird leicht müde und ihre Beine brauchen ab und zu eine Pause. Der Cricket schafft eine stabile Basis und gewährleistet gute Unterstützung für das Becken und sorgt für eine hervorragende Sitzbalance - genau das, was Isabella braucht.

Der leichte Rahmen des Cricket ist einer der kompaktesten auf dem Markt. Das robuste Gestell ist so

konzipiert, dass es den Buggy stützt und ihm Stabilität verleiht. Die um 360° drehbaren Vorderräder sorgen für gute Manövrierbarkeit und lassen sich leicht lenken. Pannensichere Räder für außergewöhnliche Leistung.

Der Cricket lässt sich leicht in jedem Auto verstauen und entspricht der ISO 7176-19 für den sicheren Transport in Fahrzeugen.



Der Cricket passt perfekt zu Isabella! Sie braucht eine bequeme, aufrechte Sitzposition mit Hüftunterstützung. Dies ermöglicht ihr der Cricket.

- Camilla, Isabellas Mutter

3 wichtige Tipps!

Um eine gute Sitzposition zu gewährleisten, müssen wir eine stabile Basis schaffen:



Becken

Wenn der Sitz leicht nach hinten geneigt ist, wird das Becken im Sitz nach hinten geführt, so dass es nicht nach vorne rutschen kann. Die Verwendung von Keilen sorgt dafür, dass Sitz, Becken und Oberschenkel in der Mittellinie gestützt werden.

Oberschenkel

Der Sitz kann in der Tiefe verstellt werden, wenn das Kind wächst. Wenn die gesamte Länge der Oberschenkel des Kindes gestützt wird, bietet er Stabilität und der Druck wird auf eine größere Fläche verteilt, was zu einem besseren Komfort führt.

Füße

Die Fußplatte muss fest, aber in Höhe und Winkel verstellbar sein.

Farben

Es ist einfach, den Bezug gegen eine andere Farbe auszutauschen und den Look Ihres stilvollen Buggys sofort zu verändern. Wählen Sie aus 5 Farben:



Blau



Rot



Grün



Grau



Pink

Integriertes Wachstum

Die motorischen Fähigkeiten Ihres Kindes entwickeln sich stetig weiter und führen zu neuen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Autonomie. Den Cricket gibt es in zwei Größen und jede bietet Wachstumspotenzial, sodass er mit dem Kind mitwachsen kann. Der Cricket ermöglicht eine Vielzahl von Sitzpositionen, so dass Ihr Kind eine aktive und abwechslungsreiche Haltung einnehmen kann.



Zubehör



Wetterschutzdach



Regenschutz, transparent



Rückenverlängerung



Kopfstützenpolster



Rumpfgürt



Armlehnen, Paar



Haltebügel für Armlehnen



Haltebügel, Montage am Gestell



Tisch



Beckenpelotten zur Sitzbreitenreduktion



Seitenführungspolster



Rucksack



Westen und Gurte



Transportbeschläge



Richtungsfeststeller für die Vorderräder



Einkaufskorb



Wadenband



Fersenstopp



Fußbrettverriegelung

Westen & Gurte – für zusätzliche Unterstützung!

Rumpfunterstützung



Brust-Schulter-Gurt




Kreuzweste

Beckenunterstützung



2-Punkt-Beckengurt

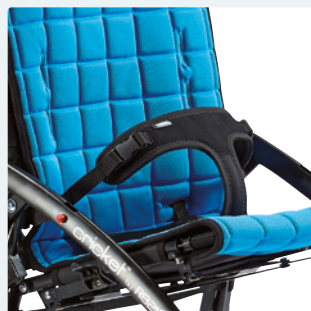

T-Sitzhose

Fußunterstützung



Sprunggelenkgurte



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

 **etac**[®]
Creating Possibilities