


# Molift Quick Raiser 205

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

## Määräaikaistarkastuksen muistilista (FI)




Standardin ISO:10535 mukaisesti

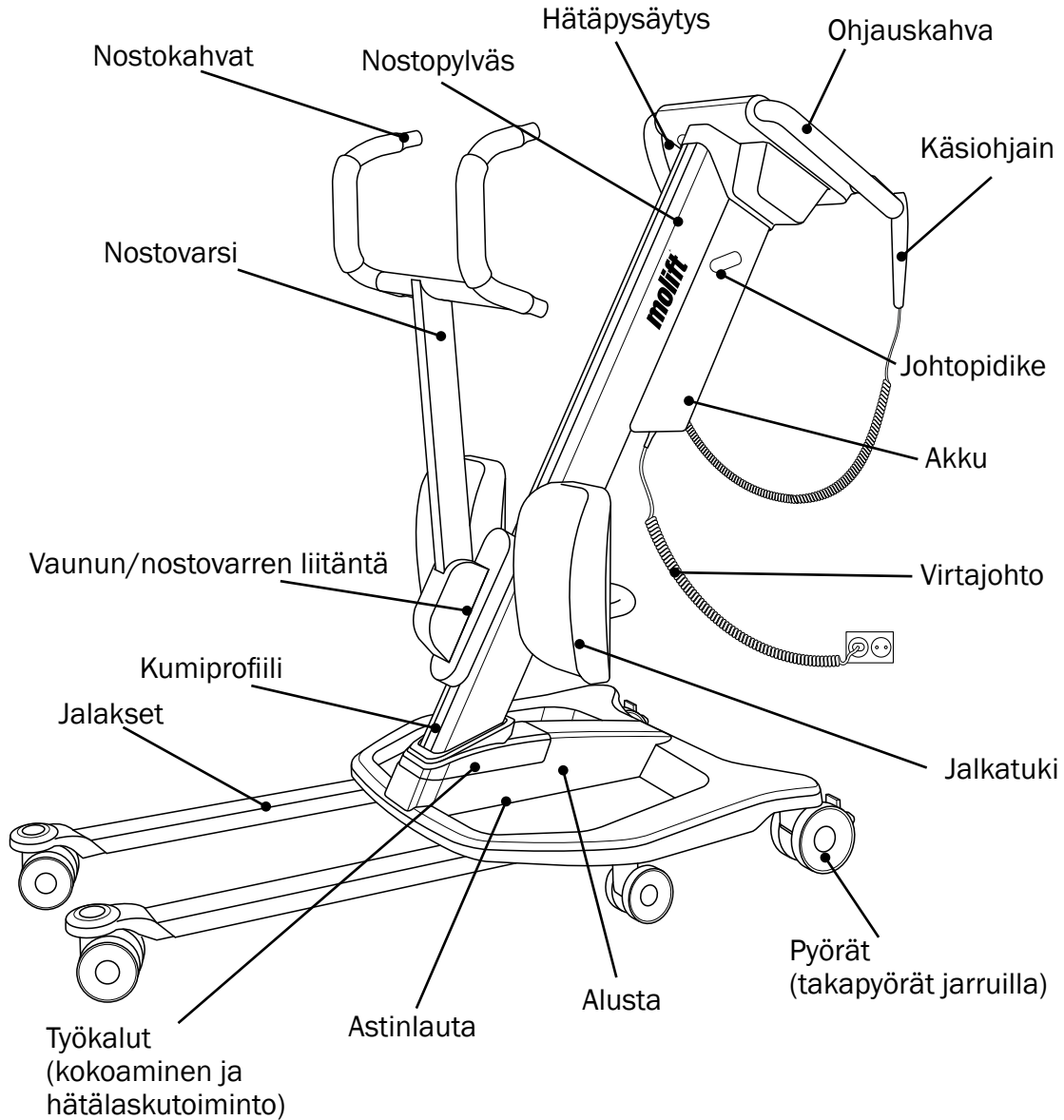PI13005 Ver. A 2022-06-16



### Tuotetarra

**Quick Raiser 205**  
Gross weight 249kg / 549lbs  
SWL 205kg / 452lbs  
24V DC 7A (SLA), 25.6V DC 7A (LiFePO4)  
IP24, Duty cycle 10%, 2 min. ON/18 min. OFF



Suurin turvallinen kuorma (SWL)

### Tyyppikilpi



(01)XXXXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

REF	ABCDEFGHIJ	MD
SN	XXXXXX	CE

YYY-MM-DD

Etac A/S  
Parallevej 3  
DK-8751 Gedved  
www.etac.com

Sarjanumero Tuotenumero Valmistuspäivä

Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta  
www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa  
oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien  
osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

.....

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

.....

Valmistuspäivä:

.....

Omistaja:

.....

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se  
on tarkastettava erikseen.

## Käyttökohteet

Koti  
Sairaala  
Hoitolaitos  
Muu



**Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon.**



**Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool-sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla.**

## Huollon merkkivalo (01.01.2018 alkaen)

Huomioi huollon merkkivalon väri:

<i>Tila</i>	<i>Huollon merkkivalo</i>	<i>Toiminto</i>
	Ei valoa	Huolto ei ole tarpeen
	Vilkkuu vihreänä	Varaa huolto
	Keltainen	Suorita määräaikaistarkastus
	Punainen	Huolla laite
	Punainen (ja äänimerkki, jos käytössä)	Huolla laite heti

## Huollon merkkivalo (31.12.2017 asti)

<i>Tila</i>	<i>Huollon merkkivalo</i>	<i>Toiminto</i>
	Ei valoa	Huolto ei ole tarpeen
	Keltainen	Varaa huolto
	Vilkkuu keltaisena	Suorita määräaikaistarkastus
	Punainen	Huolla laite
	Punainen (ja äänimerkki, jos käytössä)	Huolla laite heti

## Silmämääräinen tarkastus



**Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja vääntymiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.**

OK    Ei OK

Nostopylväs

Nostovarsi

Nostokahvat

Nostovarren liitäntä  
(irrota kotelo tarkastusta varten)

Jalakset

Tuotetarra

Muovisuojat

Kumiprofili

OK	Ei OK
	Käsiohjain
	Ohjauspaneeli
	Pyörät
	Pyörien jarrut
	Johdot
	Akku
	Muu elektroniikka
	Jalkatuki
	Korroosiovauriot
	Jalasten säätömekanismi
	Hitsausaumamat
	Käyttöopas on tallessa/ saatavilla

### Toiminnan tarkastus



**Testaa TOIMINTA ja tarkasta kulumien ja vaurioiden varalta. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuntoon.**

OK	Ei OK
	Pyörät
	Pyörien jarrut
	Jalaket sisäasennossa (samansuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin.
	Nostopylväs on täysin lukittu paikalleen.
	Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä. Nollaa painikkeen asetukset.
	Sähköinen hätälaskutoiminto
	Manuaalisen hätälaskutoiminnon työkalu
	Sähköinen hätälaskutoiminto

OK	Ei OK
	Käsiohjain (kaikki painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)
	Ohjauspaneeli (kaikki painikkeet, lukuun ottamatta sähköistä hätälaskutoimintoa)
	Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL).
	Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa 75% suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs). Moottori ja akseli eivät saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen), ja liikkeen on oltava tasainen ja vakaa.
	Jalasten säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)
	Tee silmämääräinen tarkastus uudelleen vaurioiden, vääntymien ja löysien liitosten varalta. Kaikki vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja nostolaite on testattava uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että se toimii asianmukaisesti.
	Akku: Kun täyteen ladattu akku on asetettu paikalleen, akun merkkivalo palaa vihreänä ja työkalun kuvake / huollon merkkivalo sammuu ensimmäisen kierroksen jälkeen.

Lisävarusteet:

.....

.....

.....

## Tarkastajan tiedot

Nimi:

Päiväys/paikka:

Allekirjoitus:

Hyväksytty ilman vikoja

Seuraava tarkastus  
(VVV / KK):        /

Nollaa nostolaitteen asetukset.

Nostolaite on merkitty "Epäkunnossa"-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi

Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä


Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu.

Asiasta on ilmoitettu omistajalle



**Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa.**

Mikäli laite hyväksytään ilman vikoja, kiinnitä laitteeseen tarkastustarra, johon merkitään seuraavan tarkastuksen ajankohta (kuukausi ja vuosi). Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306.

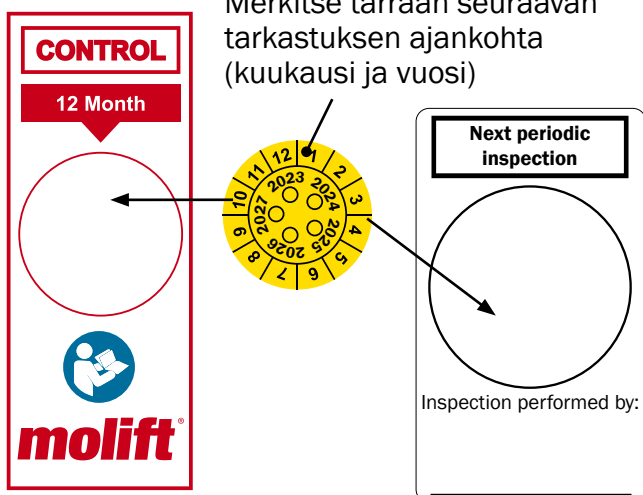


## Nostolaitteen asetusten nollaus

1


Varmista, että nostolaite on päällä ja hätäpysäytys on deaktivoitu.

2

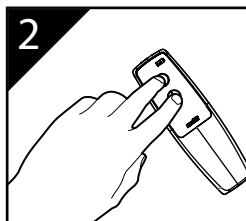


Pidä molempia painikkeita painettuna noin 4 sekuntia: Ensimmäinen piippaus kuuluu, kun painat painikkeita. Kun kuulet toisen piippauksen, vapauta painikkeet.

3

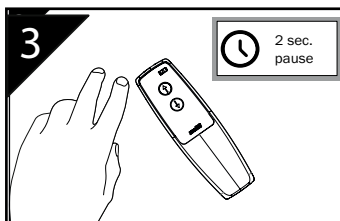

Odota noin 2 sekuntia.

4

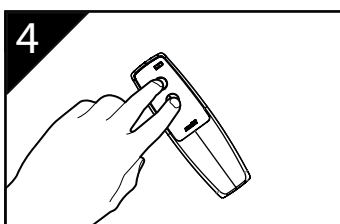

Pidä molempia painikkeita painettuna noin 4 sekuntia: Kun kuulet ensimmäisen piippauksen, vapauta painikkeet. Tarkastuksen merkkivalo sammuu. Asetukset on nollattu.

## Muistiinpanot ja havainnot

