


Molift Quick Raiser 205

molift[®]
by Etac


Kontrolni seznam za periodični pregled (SI)

skladno z ISO:10535

PI13012 Rev. A 2022-06-16

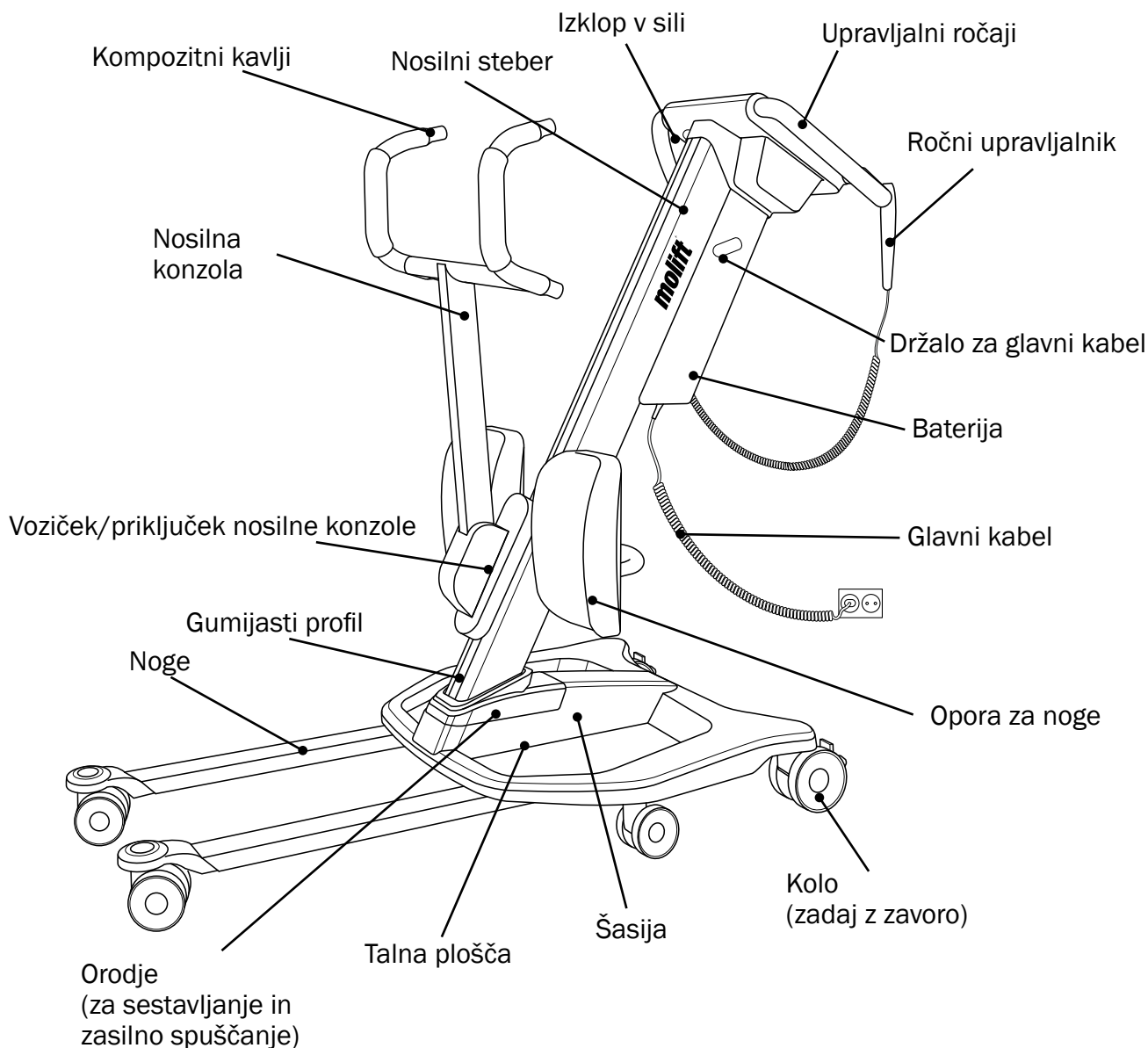

Etiketa izdelka

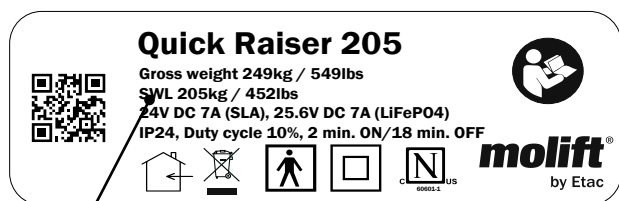

Masa SWL

Identifikacijska etiketa



Serijska št.

Št. izdelka

Datum proizvodnje

Kopija tega dokumenta je na voljo za prenos na www.etac.com.

Za dostop do domače strani izdelka odčitajte QR-kodo na etiketi izdelka. Navodila za uporabo najdete v razdelku z dokumentacijo.

Št. izdelka (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Serijska št. (glejte identifikacijsko etiketo):

.....

Leto proizvodnje:

.....

Lastnik:

.....

Zanke je treba pregledati ločeno in niso vključene v tem pregledu.

Mesto uporabe

Domača uporaba
Bolnišnica
Dom za starejše
Drugo



Periodični pregled mora opraviti ustrezno usposobljena oseba, ki je dobro seznanjena z zasnovo, uporabo in vzdrževanjem dvigala.



Programska oprema dvigala Molift Service tool omogoča vnos datuma periodičnega pregleda ter imena in priimka preglednika skupaj z dodatnimi informacijami. Molift priporoča, da za celotno zgodovino dvigala vse ugotovitve/pripombe v zvezi z dvigalom vnesete v Molift Service tool.

Servisni indikator (od 01.01.2018)

Označite stanje servisnega indikatorja:

Stanje	Servisna lučka	Stanje
(Ne sveti nobena lučka)		Servis ni potreben
Utripa zeleno		Naročite servis
Rumena		Potreben je periodični pregled
Rdeča		Izvedite servis
Rdeča (in zvočno opozorilo pri aktiviranju)		Nujno izvedite servis

Servisni indikator (do 31.12.2017)

Stanje	Servisna lučka	Stanje
(Ne sveti nobena lučka)		Servis ni potreben
Rumena		Naročite servis
Utripa rumeno		Potreben je periodični pregled
Rdeča		Izvedite servis
Rdeča (in zvočno opozorilo pri aktiviranju)		Nujno izvedite servis

Vizualni pregled



Preglejte stanje nosilnih ležajev glede morebitnih poškodb, razpok, obrabe ali deformacije. Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno Neustrezno

	Nosilni steber
	Nosilna konzola
	Kompozitni kavli
	Priključek nosilne konzole (za pregled odstranite pokrov)
	Noge
	Etiketa izdelka
	Plastični pokrovi
	Gumijasti profil

Ustrezno Neustrezno

Ročni upravljalnik
Upravljalna plošča
Kolesa
Zavore na kolesih
Kabli
Baterija
Druga elektronika
Opora za noge
Nobene korozije
Mehanizem za razširjanje nog
Zvari
Navodila za uporabo/ uporabniški priročnik so prisotna/na voljo

Ustrezno Neustrezno

Ročni upravljalnik (vsi gumbi, razbremenitev napetosti na kablu ročnega upravljalnika, kavelj in indikator napolnjenosti baterije)
Upravljalna plošča (vsi gumbi razen električnega zasilnega spuščanja)
Če so vse točke ocenjene z »Ustrezno«, je treba dvigalo preizkusiti z maso SWL
Izvedite en cikel dvigovanja z maso, enako vrednosti 75% SWL (za vrednost v kg glejte etiketo izdelka). V obremenjenem stanju motor in vreteno ne smeta drseti (posledica je spuščanje nosilne konzule) in gibanje mora biti gladko in enakomerno
Preizkusite mehanizem za razširjanje nog z maso SWL, navzven in navznoter

Funkcionalni preizkus



Preizkusite DELOVANJE in preglejte opremo glede morebitne obrabe ali poškodb. Za potrditev ustreznosti dvigala za nadaljnjo uporabo je treba pregledati vse kontrolne točke.

Ustrezno Neustrezno

Kolesa
Zavore zadnjih koles
Z nogami v notranjem položaju (vzporedno): Preverite, da se razdalja med nogama ne more zmanjšati, če ju stisnete skupaj.
Nosilni steber je popolnoma pritrjen
Gumb za izklop v sili je popolnoma funkcionalen in prekine napajanje, ko je sprožen. Ponastavite stikalo
Električno zasilno spuščanje
Orodje za sestavljanje in zasilno spuščanje
Električno zasilno spuščanje

Izvedite vizualni pregled glede morebitnih poškodb, zračnosti in deformacij skladno s spodnjim opisom. Vsak poškodovani del je treba popraviti ali zamenjati in ponoviti preizkus, dokler dvigalo ne deluje pravilno
Baterija Z vstavljenjo popolnoma napolnjeno baterijo, po začetnem ciklu lučka za baterijo sveti zeleno, lučka s ključem/lučka za servis pa UGASNE

Dodatna oprema:

.....

.....

.....

Pregled opravil

Ime in priimek:

Datum/kraj:

Podpis:

Odobreno brez napak

Naslednji pregled
(LLLL/MM): /

Izvedite »Ponastavitev dvigala«

Dvigalo je označeno z »V okvari« in poslano na popravilo

Dvigala ni mogoče popraviti in je odstranjeno iz uporabe


Če so na periodičnem pregledu ugotovljene okvare, obraba ali druge poškodbe, ki ogrožajo bolnikovo varnost, dvigala do odprave pomanjkljivosti ni dovoljeno uporabljati

Lastnik je opozorjen



Zaradi zakonskih zahtev je treba ta dokument ali kopijo vložiti v lastnikov servisni dnevnik.

Če je dvigalo odobreno brez napak, namestite preizkusno etiketo in na njej označite mesec in leto **naslednjega** pregleda. Pri naročanju etiket uporabite št. izdelka 1100306

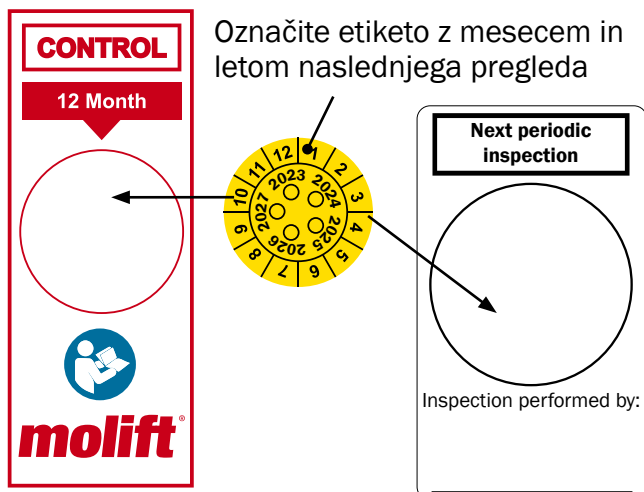


Ponastavitev dvigala

1


Zagotovite, da je dvigalo **VKLOPLJENO** in da je izklop v sili deaktiviran.

2

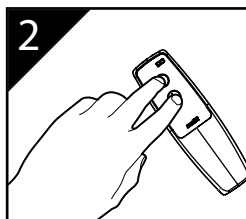


Pridržite oba gumba pritisnjena približno 4 sekunde:
Prvi opozorilni zvočni signal – na začetku pritiskanja gumbov.
Drugi opozorilni zvočni signal – na koncu pritiskanja gumbov.

3

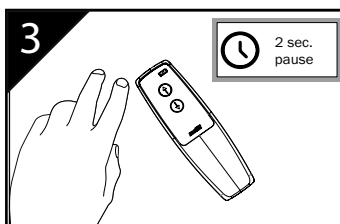

Premor približno 2 sekundi.

4

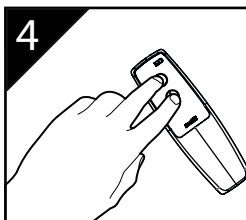

Pridržite oba gumba pritisnjena približno 4 sekunde:
Prvi opozorilni zvočni signal – na koncu pritiskanja gumbov.
Lučka za servis je **UGASNJENA** – ponastavitev je končana.

Opombe in ugotovitve

.....