

Version 1 2018

Produkterne bør kontrolleres efter brug og især efter hver vask eller rens.
Anvend aldrig et defekt produkt.

3B-Board, E-Board, Butterfly Board, Dolphin ToiletBoard, 2Move Transfer Board, PediTurn Hard, Non-Slip Square, CloverFoot



4WayGlide, TwinSheet4Glide, MultiGlide, TurningMattress, TransferMattress, GlideCushions, OneWayGlide, Swan, HandyTrans, Nylon Covers, SlingOn, WiseMover, MiniBoard, MultiGlide Glove, Rescue, BedString, OneManSling, Sling, HandyGrip



SupportBelt, SmartMove, Positioning Wedge



SatinSheet, In2Sheet



EasyTurn, AutoTurn, PediTurn Soft



SYMBOLFORKLARING TIL VASKEVEJLEDNING



Vask/temperatur celsius



Tåler ikke rens



Må ikke bleges



Produktet kan rengøres med et opløsningsfrit rengøringsmiddel med en pH værdi mellem 5-9, eller er max 70 % desinfektionsmiddel.



Tørretumbling ved lav temperatur



Aftørring



Strygning ved lav temperatur

PERIODISK INSPEKTION

- Sørg altid for, at dit Manual Transfer produkt er i en perfekt stand.
- Efter vask - kontroller altid materiale, syninger, håndtag, samt spænder.
- Hvis produktet viser tegn på slidtage skal det omgående fjernes fra service.

BEMÆRK

- Kontroller venligst, at der ikke er skader på hverken søm eller stof.
- Vaskes ved max 80°C og hvis muligt gerne ved lavere temperatur.
- Undgå tørretumbling for en optimal udnyttelse af produktets levetid. Hvis produktet tørres, så brug lav temperatur.
- Tilsæt hverken skyllemiddel eller blegemiddel.
- Anbefales, at vaske før brug.
- Luk velcroen før vask.

FABRIKANT:
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens
etac.immedia@etac.com
www.etac.com