


# **molift**<sup>®</sup>

## **MOVER 300**

### **SNABBGUIDE**

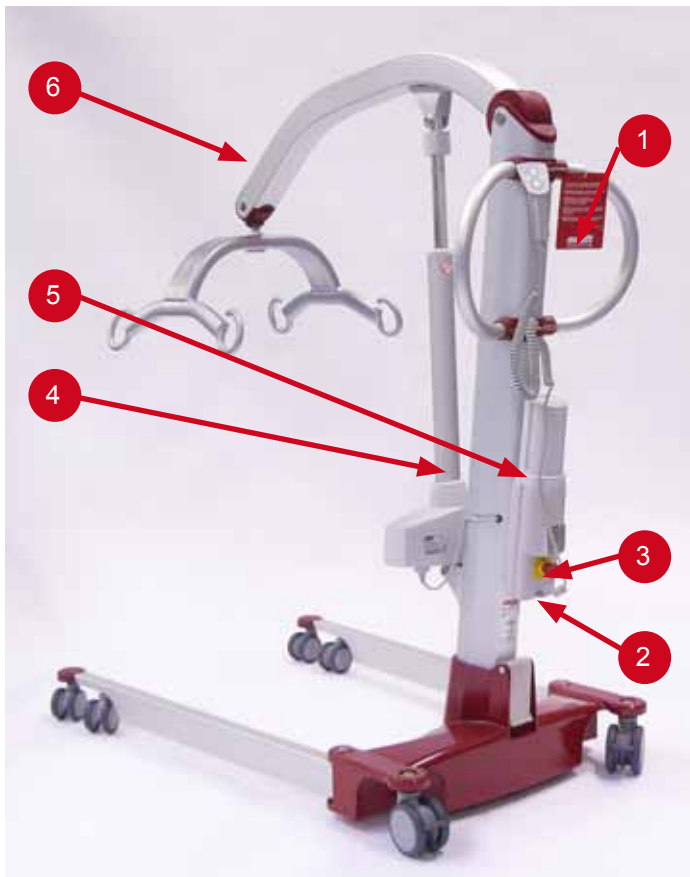

### **HANDKONTROLL ①**



Batteriindikator, lyser när batteriet behöver laddas

▲ UPP

▶ ◀ Flytta ihop benen

◀ ▶ Flytta isär benen

▼ NER

Lyften aktiveras genom en tryckning på någon av knapparna. Handkontrollen är kopplad till undersidan av batterihållaren.

### **NÖDSTOPP ②**



Genom att trycka in nödstoppet bryts strömmen till motorn och lyften stannar. Vrid knappen medurs för att återställa.

### **SÄKERHETSFORESKRIFTER**

- Läs bruksanvisningen till både personlyft och tillbehör före användning.
- SWL (Safe Working Load) är 300 kg.
- Försäkra dig om att både lyften och lyfttillbehören är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott skick.
- Kontrollera att lyftmast och lyftbygel är ordentligt fastsatta.
- Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att alla 4 öglorna på lyftselen är korrekt fastsatta på lyftkrokarna.

### **NÖDSÄNKNING ③ och ④**



Om lyften slutar att fungera normalt kan man göra en nödsänkning.

**Elektrisk nödsänkning:** Tryck in knappen och håll in den tills patienten har sänkts ner.



**Manuell nödsänkning:** Skall bara användas när elektrisk nödsänkning inte fungerar. Vrid i pilens riktning för att sänka ner lyftarmen.




#### **VIKTIGT!**

**Denna Snabbguide ersätter inte lyftens bruksanvisning. Bruksanvisningen kan laddas ner från [www.molift.net](http://www.molift.net)**

## BATTERI OCH LADDNING ⑤



Miljövänligt NiMH 26,4 V batteri. När batteriet behöver laddas lyser batterilampan på lyften och batteriindikatorn på handkontrollen.

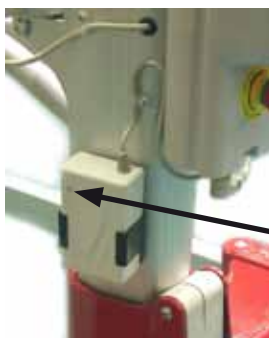

Laddaren skall vara inkopplad på elnätet när batteriet skall laddas. Alla nya batterier skall laddas före användning. En lysdiod på batteriladdaren indikerar laddningsstatusen på batteriet.

Beskrivning av batteriladdarens indikatorlampa:

Indikatorlampa	Status
Gul	Klart för laddning
Orange	Snabbladdning
Grön/Gul	Toppladdning
Grön	Färdigladdat
Orange/Grön	Fel

## SERVICE



Lyften har en serviceindikator som varnar när lyften behöver service. Lampan lyser grönt när lyften kan användas normalt.

Serviceindikator	Status
Inget ljus	Energisparläge
Grön	Klart för användning
Gul	Beställ service, lyften fungerar
Röd	Utför service
Röd + ljud	Utför service snarast

Service skall utföras av Molift-certifierad servicepersonal.

## QUICK RELEASE LYFTBYGEL ⑥



Molift Mover 300 har en lyftbygel med snabbkoppling som gör det lätt att snabbt byta lyftbygel.

Lyftbygeln kan bara tas av och hakas på när den är vänd uppåt. Lyftbygeln låses fast på armen när den hänger normalt.



## RENGÖRING

Lyften rengörs utvändigt med en lätt fuktad trasa med PH-neutralt rengöringsmedel. För desinficering används isopropylalkohol.

## ENKEL FELSÖKNING

Om lyften inte fungerar, kontrollera att:

- nödstoppet inte är intryckt,
- batteriet är laddat,
- handkontrollen är rätt inkopplad.

Kontakta certifierad servicepersonal om lyften är behäftad med fel eller inte fungerar.

## LYFT OCH FÖRFLYTTNING

- Undvik manuella lyft - använd lyften.
- Tänk på korrekt arbetsställning för att skona din rygg! Använd sängens höj- och sänkfunktion.
- Planera lyftet och informera den som skall lyftas/förflyttas.
- Den som förflyttas skall sitta så lågt som möjligt med ansiktet vänt mot masten, gärna med fötterna på chassit.

Etac AS  
Etac Supply Gjøvik  
Hadelandsveien 2  
N-2816 Gjøvik  
NORGE  
Tel: +47 4000 1004  
www.molift.com

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac