



# Star Stabil Air

Högpresterande luftcellsdyna

 **etac**<sup>®</sup>



# Star Stabil Air

Stabil Air kombinerar den väl etablerade luftcellstekniken med inbyggda skumplastcylindrar för extra trygghet och stabilitet.

## Den nya generationens luftcelldyna

De mjuka skumplastcylindrarna låter luftcellerna anpassa sig till brukarens kropp, men ger en extra stabilitet och trygghet om lufttrycket skulle sjunka. Den ökade stabiliteten underlättar även förflyttning till och från sittdynan. Stabil Air är en kammardyna med god stabilitet och som är enkel att använda.



Star Stabil Air sittdynor levereras kompletta med ett mjukt och elastiskt överdrag, handpump, manual och reparationsssats.

### Stabil air - en kammare

### 7.5 cm

26 x 26 cm	ESSA30909-1
26 x 30 cm	ESSA30911-1
26 x 34 cm	ESSA30913-1
30 x 26 cm	ESSA31109-1
30 x 30 cm	ESSA31111-1
30 x 34 cm	ESSA31113-1
30 x 39 cm	ESSA31115-1
34 x 26 cm	ESSA31309-1
34 x 30 cm	ESSA31311-1
34 x 34 cm	ESSA31313-1
34 x 39 cm	ESSA31315-1
34 x 44 cm	ESSA31317-1
39 x 30 cm	ESSA31511-1
39 x 34 cm	ESSA31513-1
39 x 39 cm	ESSA31515-1
39 x 44 cm	ESSA31517-1
39 x 49 cm	ESSA31519-1
39 x 53 cm	ESSA31521-1
44 x 34 cm	ESSA31713-1
44 x 39 cm	ESSA31715-1
44 x 44 cm	ESSA31717-1
44 x 49 cm	ESSA31719-1
44 x 53 cm	ESSA31721-1
49 x 39 cm	ESSA31915-1
49 x 44 cm	ESSA31917-1
49 x 49 cm	ESSA31919-1
49 x 53 cm	ESSA31921-1

### Stabil air - en kammare

### 7.5 cm

53 x 39 cm	ESSA32115-1
53 x 44 cm	ESSA32117-1
53 x 49 cm	ESSA32119-1
53 x 53 cm	ESSA32121-1

### Brukarvikt

Ingen maxvikt men dynans storlek måste anpassas till brukarens storlek.

### Dynmaterial

Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. Följsam och brandsäker.

### Överdrag

Ovandel och sidor: 83 % ripstop-nylon (icke-absorberande material som underlättar avdunstning) 17 % lycra.

Bottendel: vävt polyesterig klätt med polyvinyl (antimikrobiell behandling som hämmar lukt som orsakas av bakterier och mögel). Brandsäker.

### Hygienöverdrag

Ovandel och sidor: 78 % nylon 22 % spandex klätt med en polyuretanfilm.

Bottendel: Vävt polyesterig klätt med polyvinyl (se standardöverdrag).

### Rengöring

Dyna och överdrag: Handtvätt alternativt maskin max. 60°C. För mer information, se rekond.information.




## Egenskaper




### Perfekt omslutning

Låt brukaren sjunka ner i sittdynan. StarLock med höga celler ger optimal omslutning av sätet.

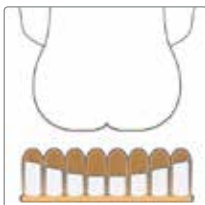

### Inbyggda mjuka skumplastcylindra

Ökar stabiliteten och underlättar förflyttning till och från sittdynan. Om lufttrycket skulle sjunka, ger cylindrarna en extra trygghet.

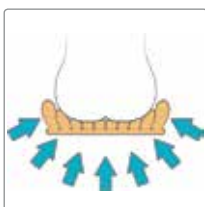

### Omfördelning av trycket

Utmärkta tryckfördelande egenskaper, upp till och med sårkategori 4. För brukare med uttalad atrofi i den gluteala regionen rekommenderar vi StarLock med 13 cm cellhöjd.

## Tillbehör




### Hygienöverdrag

Smidigt och elastiskt i fyra riktningar. Luftgenomsläppligt.


## Så här justeras lufttrycket



- Pumpa upp sittdynan.
- Placera brukaren på sittdynan.
- Släpp ut luft.

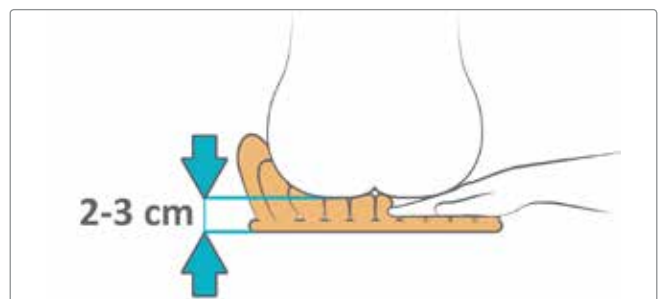

- Kontrollera med handen att det finns ett avstånd på 2–3 cm mellan dynans botten och brukarens säte.
- Vid skevt bäcken, kontrollera den lägsta sidan först.
- Vid behov kan dynan enkelt fyllas med mer luft medan brukaren sitter på dynan.
- Högre luftceller ger djupare nedsjunkning och omslutning av sätet vilket ger än bättre tryckfördelande egenskaper.

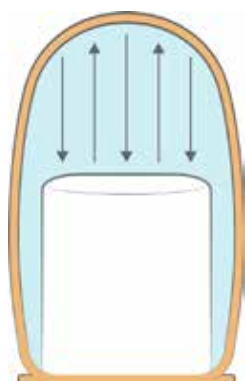

- En mjuk skumplastcylinder i varje luftcell.
- Alla luftceller är 7,5 cm höga.



- Cylindrarna ger en anatomisk form med högre cylindrar lateralt.
- Stabil Air är den nya generationens enkammardyna.





Den sittande positionen är i högsta grad beroende av sittunderlaget. Bra tryckfördelning och form är viktigt för att erhålla komfort och förbättra sittoleransen över tid. Luftcellsdynor har bevisats vara det bästa alternativet. Stars unika luftcellsdynor erbjuder även bästa stabilitet, vilket är nödvändigt för den posturala kontrollen och för att möjliggöra aktivitet.

Vi kallar det "Ability based Seating" - sittande baserat på förmåga.



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)