



Turtle

Specialtilpassede løsninger
for bedre livskvalitet

 **etac**[®]



Etac, Horsens



Etac, Taastrup (Handicaporganisationernes Hus)

Velkommen hos Etac A/S

Etac er en af verdens førende udviklere af ergonomiske hjælpemidler. Vores klare mål er at skabe muligheder. For brugerne og for dem, der hjælper dem. Vi sætter brugerne først og er altid tæt på deres ønsker og behov. Derfor er alle vores produkter udviklet i tæt samarbejde med eksperter på genoptræningsområdet, industrielle designere og brugere.

Etac skaber muligheder

I løbet af det seneste årti er Etacs portefølje vokset gennem flere opkøb. Det betyder, at vi kan tilbyde et bredt udvalg af mobilitetsløsninger med kørestole, avancerede sædeløsninger, løsninger til manuel og mekanisk forflytning samt løsninger til hverdagslivet, inklusive klassiske produkter til bad og toilet. Vi har også et sortiment i verdensklasse af avancerede løsninger til pædiatrisk brug.

Kompetent kundeservice – hurtig levering

Høj kundeservice og hurtige leveringer er nøgleord i konceptet for Etac. I vores interne salgsafdeling bestræber vi os altid på at ekspedere bestillingerne samme dag, som ordren indgår. Når du ringer til os, kan du være sikker på at tale med medarbejdere, der kender Etacs sortiment indgående, så de kan give dig professionel vejledning og anbefale hjælpemidler.

Rådgivning fra erfarne konsulenter

Hos Etac har det høj prioritet, at hjælpemidlerne passer perfekt til brugerne. Rådgivning af kunderne er derfor vores erfarne konsulents primære opgave. Konsulenterne står til rådighed med professionel vejledning, der matcher både brugernes og plejernes behov. Mange af vores konsulenter har en sundhedsfaglig baggrund, og alle har stor erfaring inden for hjælpemiddelområdet.

Hurtig service, hvis uheldet er ude

Etacs dygtige serviceteknikere sørger for, at produkterne virker og bliver repareret, hvis uheldet er ude. Vi har stor forståelse for, at både bruger og plejer er afhængige af hjælpemidlerne, og bestræber os derfor på at gøre responstiden kortest mulig.

Få det bedste ud af hjælpemidlerne

Etac tilbyder undervisning for både terapeuter og teknikere, så I får mest muligt ud af produkterne. Undervisningen tilpasser vi den enkelte målgruppe i samarbejde med jer. Derudover afholder Etac relevante faglige kurser indenfor f.eks. forflytning og siddestillinger.

Sikkerhed i alle detaljer

Hver enkelt produktdetalje er designet med velvære og sikkerhed for øje. Etac tilbyder sikre løsninger med stor komfort og funktionalitet. Vi stræber altid efter at være på forkant med design og funktion. Vores vision er, at alle skal kunne leve et frit og uafhængigt liv og forfølge sine drømme uafhængigt af de fysiske omstændigheder.



Etac produkt brands

etac

Manuelle kørestole, hverdagens hjælpemidler og hjælpemidler til bad og toilet

RB2

Pædiatriske mobilitetshjælpemidler til at sidde, stå og gå samt transport, bad og toilet

Convaid

Pædiatriske sæder og hjælpemidler til transport

Ki

Aktive kørestole til voksne og børn

AXIOM

Kørestolspuder og positioneringsløsninger

STAR

Trykfastende luftpuder

molift

Lite, sejl og forflytningshjælpemidler

immedia

Manuelle forflytnings- og positioneringshjælpemidler

HOVERTECH

Luftassisterede forflytnings- og repositioneringshjælpemidler

Der er intet som et smil!

Når vi ser smilende brugere sidde i vores produkter, ved vi, at vi har gjort en forskel. Brugere, der anvender vores formstøbte Turtle-sæder, viser tydelige tegn på lettelse, hver gang formstøbningen tager form omkring dem. Derfor ved vi, at der ikke er noget som et sæde, der er støbt efter den enkelte brugers form.

Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte produkter. Vi har i fællesskab opbygget stor

erfaring, som kommer vores brugere til gode gennem nøje tilpassede personlige løsninger. Vores formstøbte produkter har fået navnet Turtle, da de fungerer som et beskyttende skjold omkring brugeren.

Etacs erfarne ergo- og fysioterapeuter rådgiver om, hvornår et formstøbt produkt er den rette løsning. Brugeren er i trygge hænder hos terapeuterne, som med deres store indsigt og engagement finder den optimale løsning. Målet for brugeren er stabilitet, et højere funktionsniveau og øget livsglæde.

Derfor skal du vælge Etac:

- Mange års erfaring giver specialviden og stor faglighed
- Personalet er uddannede fysioterapeuter
- Som eneste leverandør kan vi med 2 støbepuder tage individuelle aftryk af over- og underkrop, så selv svære formstøbninger bliver lette.
- Vi tilbyder både plast- og skumstøb og har markedets korteste leveringstid
- Vores formstøbte sæder er crashtestet og godkendt
- Specialløsninger er vores speciale!



Hvem har brug for en formstøbning?

Vores formstøbte produkter kan anvendes til en bred målgruppe. De typiske brugere har en af følgende problemstillinger:

- Cerebral parese
- Para-, tetra- og hemiplegikere
- Sclerose
- Rygmarvsbrok
- Muskelsvind
- Knogleskørhed
- Amputation
- Tryksår
- H.S. borgere der har behov for beskyttelse ved ufrivillige bevægelser
- Alle brugere med øget behov for stabilitet i den siddende stilling
- Brugere der har behov for øget sensorisk input, f.eks. dem der har kugle/kæde dyner.



Formstøbningens fordele

Vi bestræber os på at balancere den enkelte bruger i forhold til tyngdekraften, så der opnås balance i kroppen. Udgangspunktet er, at hovedet er i balance og kroppen støttes af formstøbningen.

Formstøbningen giver mange fordele

- Giver god trykfordeling og er komfortabel
- Korrigerer og stabiliserer fejlstillinger
- Giver stabilitet til bevægelsesfrihed
- Giver mulighed for social aktivitet
- Forebygger og aflaster tryksår
- Forbedrer respiration
- Sikrer god spise- og synkefunktion.

Vores formstøbte produkter giver øget livsglæden for både brugeren selv og dennes familie.

Vi er stolte af at kunne sige, at vi faktisk gør brugerne i stand til at deltage mere aktivt i deres liv.



Her er bækkenet vandret, men hovedet er i ubalance.



Her er hovedet i balance og kroppen vil blive støttet af formstøbningen.




Specialiserede håndværkere

På R82's værksted i Horsens fremstiller specialiserede håndværkere de formstøbte produkter til børn og voksne. Håndværkerne har, sammen med erfarne terapeuter, alle været på besøg hos brugere for at se og forstå, mennesket bag formstøbningen. Det giver dem en større forståelse for deres rolle og en stærkere interaktion med deres kollegaer.

Fordelene ved at have vores produktion tæt på kan ikke undervurderes.

Konsulenten fra Etac følger altid op på den enkelte formstøbning med rådgivning og vejledning. Vi tilbyder tillige at træne og uddanne hjælpere i de bedste metoder til forflytning og placering af brugeren i formstøbningen.

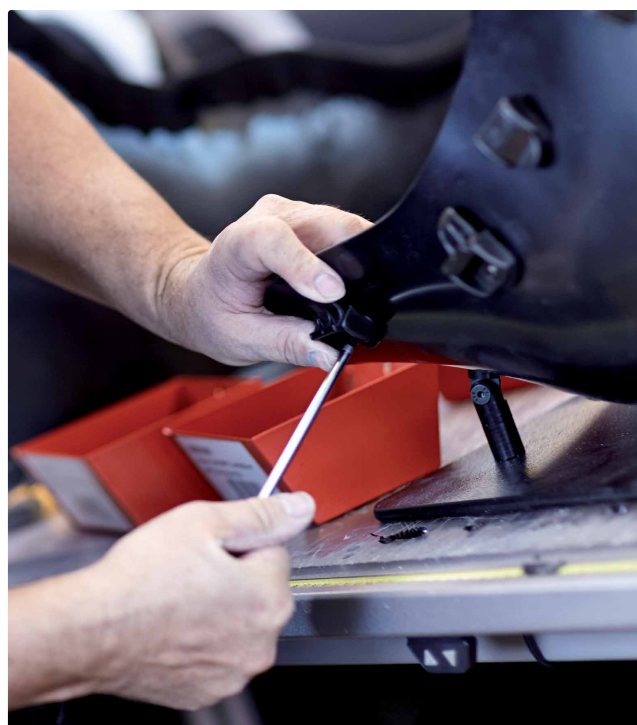

Bestilling



Formstøbning i plast
HMI-nr. 63391 Varenr. 3198801-28

Formstøbning i skum
HMI-nr. 63392 Varenr. 3198250-XX



Formstøbning til toilet og bad
HMI-nr. 62515 Varenr. 3198715

Vi leverer produkter, der opfylder følgende standarder:

EN 1021-1 og EN 1021-2
(Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler)

EN ISO 10993-1
(Biologisk vurdering af medicinsk udstyr)

ISO 16840-4:2009 and ISO 7176-19:2008
(Sæder til brug i motorkøretøjer)

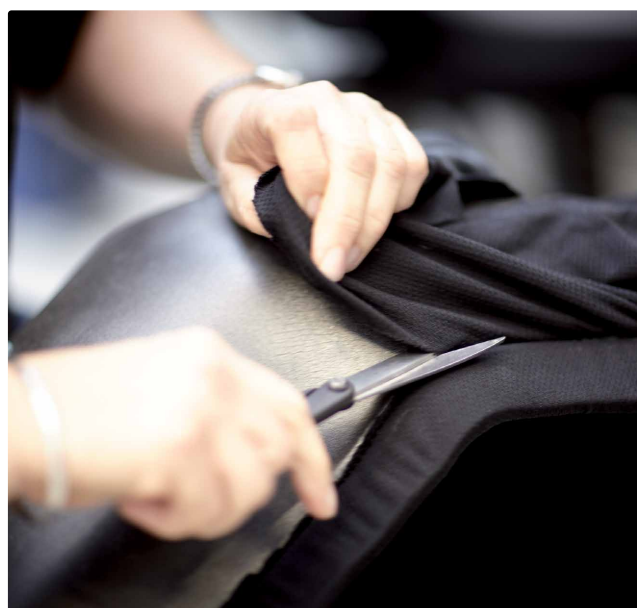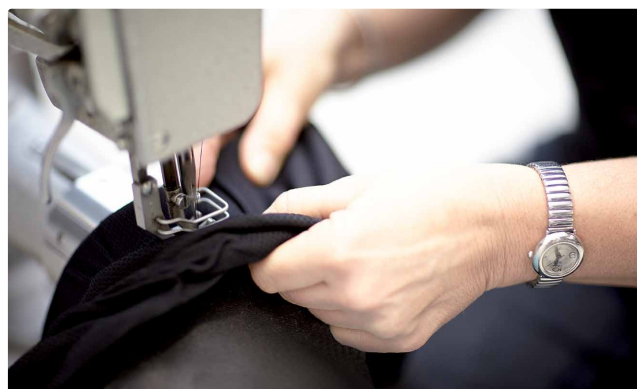

Vores erfarne konsulenter



Konsulent vest for Storebælt

Jesper Bøgehave
Fysioterapeut & konsulent ved Etac

Jesper er uddannet fysioterapeut i 1999 og har arbejdet med handicappede med forskellige funktionsniveauer. Umiddelbart før Jesper kom til Etac var han ansat i "Fysioterapien i Hammer Bakker", hvor han varetog træning af børn og unge på boenheder og specialinstitutionerne i Nordjyllands amt.

Arbejdet var mangeartet og bestod bl.a. af udredning, planlægning, samt vejledning af forældre og personale. Endvidere varetog han tilpasning og vedligehold af hjælpemidler.



Konsulent øst for Storebælt

Lars Grønfeldt Welle
Fysioterapeut & konsulent ved Etac

Lars er uddannet fysioterapeut i 1989 og arbejdede herefter på Kommunehospitalet København, og 11 år på "Skolen på Taxvej" – en skole for børn med multiple funktionsnedsættelser. Lars fik erfaring med undervisningsrelateret terapi, hjælpemidler og den direkte behandling, samt samarbejde med ergoterapeuter, lærere, pædagoger, psykologer, læger og ikke mindst pårørende.

Lars og Jesper har arbejdet med formstøbninger ved Etac siden henholdsvis 2002 og 2005. De gør hver dag brug af deres brede og specialiserede erfaring for at skabe de bedste vilkår for mennesker med særlige behov.

En unik løsning til hver enkelt bruger

Når formstøbningen er den rette løsning, starter vi altid med at få afklaret hvilke behov der er i dagligdagen, så bruger og hjælpemiddel fungerer i hverdagen.

Hos Etac har vi mange muligheder for forskellige løsninger i forhold til udformning og fremstilling. Vi er med jer hele vejen i forløbet og i fællesskab finder vi den bedste løsning.

Vi glæder os til at hjælpe jer!

De bedste hilsner fra
Jesper & Lars, Etac A/S



En formstøbning bliver til

1.

Konsulenten undersøger brugeren omhyggeligt for at bestemme den enkeltes behov for støtte og aflastning. Konsulenterne guider omhyggeligt brugeren, terapeuten, hjælperne eller de pårørende gennem valgmulighederne. Skal den formes i skum eller plast? Hvor megen støtte er der behov for? Hvilket stel passer bedst? I forlængelse af undersøgelsen fastlægges en målsætning.



2.

Brugeren positioneres i vakuumpuderne og der moduleres en detaljeret form efter brugeren. Formen defineres, og alt udmåles specifikt, så det bedste mulige slutprodukt kan fremstilles. Yderligere kan en trykmålende måtte placeres i stolen for præcist at definere trykpunkter.



3.


Brugeren fotograferes i puderne, så produktionspersonalet får et klart billede af, hvordan det endelige produkt skal bruges. Der markeres placering for seler, nakkestøtte, fodstøtte osv. inden brugeren tages ud af puderne.



4.

Når brugeren er taget ud af puderne, udføres en komplet 3D-scanning af vakuumpuderne for at sikre et detaljeret og præcist billede af hele formen og dennes vinkler.


Den færdige scanning uploades via en sikker forbindelse til R82's server sammen med alle andre relevante mål og bemærkninger.

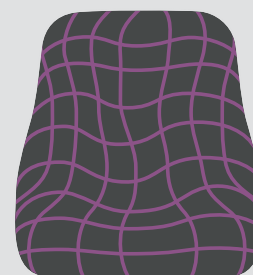

5.

Når konsulentens scanning er uploadet, tager produktionsholdet over. På baggrund af 3D-scanningen, udfræser en avanceret robot det præcise støb i skum. Ved plaststøb foretages en vakuumsugning til plastformstøbning.

Ved skumafstøb indbygges forstærkninger, og en stabil individuel justerbar skumramme fremstilles. Derefter polstres sædet.

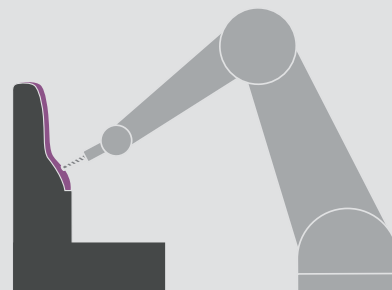

6.

Sædet monteres på det valgte stel, og standardtilbehør som fx hovedstøtte, armlæn, bord, fodstøtte, sele eller vest monteres. Ved behov fremstilles og monteres individuelt tilpasset tilbehør.



7.

For at sikre alle brugere den højeste kvalitet bliver hver enkelt stol kvalitetssikret, og relevante dokumenter udfyldes, bl.a. fabrikanterklæring.



8.

Det færdige formstøb leveres til brugeren. Konsulenten sikrer, at brugeren positioneres optimalt, og at målsætningen er opnået. Brugeren og hjælperne rådgives i brugen af formstøbningen.

Mål og andre specifikationer gemmes elektronisk, så nye eller supplerende produkter kan bestilles let og hurtigt.



Skum- eller plaststøb

Da Etac startede med at producere formstøbninger i 1997, var formstøbning i plast den eneste mulighed på markedet. Flere års erfaring og produktudvikling har resulteret i, at formstøbninger fra Etac tilbydes i både plast og skum.

Skal man vælge skum- eller plaststøb?

Det er umuligt at give et entydigt svar på dette, da det i høj grad er en smagssag. Den indledende formgivning i vakuumpuderne er den samme arbejdsgang. Stabiliteten og trykfordelingen i Etac formstøbninger er den samme, uanset om der vælges plast- eller skumstøb.

Ofte spiller historikken en stor rolle, og kunden vælger den løsning, som brugeren eller institutionen er vant til og tryk ved. Nogle brugere foretrækker modtrykket i skumstolen, som de oplever mere komfortabelt i forhold til det mere kontante tryk, som indlæggene i plasten giver. Andre oplever det modsatte. Produkternes visuelle forskelligheder gør også, at nogle foretrækker den ene løsning frem for den anden.

Ud fra ovenstående betragtninger kan vi ikke på forhånd definere, hvad den rigtige løsning er for den enkelte bruger. Som en gratis service kommer vi gerne ud og rådgiver og hjælper med at træffe den rigtige beslutning.



Kudu stel med et formstøbt skumsæde



Combi Frame:x stel med formstøbt plaststøb

Individuelle muligheder i formstøbninger

Indimellem skal der tages individuelle hensyn i formstøbningerne. Det kan være SI udfordringer, inkontinens, varme/kulde regulering, promenerende knogler osv.

For at imødekomme disse udfordringer, kan vores formstøbte produkter leveres med forskellige typer indlæg eller betræk.



Celsiuskum

Temperaturfølsomt skum, der tilpasser sig brugerens krop. Særligt velegnet til brugere med høj risiko for at udvikle tryksår.



Kubeskum

Det øverste lag er skåret ud i små firkanter (kuber), der sikrer en kontinuerlig luftgennemstrømning.



Net

Mikrofiberstof, der giver suveræn åndbarhed for brugere, der har det varmt eller sveder.



Gel

Gel er god til punktaflastning.



Star puder

Trykaflastende luftpuder til forebyggelse af tryksår og shear.



Naturlig latex

Åndbar latex med høj elasticitet.

Vandtætte løsninger

Vi tilbyder vandtæt og hygiejnisk beskyttelse af sædedelen på dit formstøbte skumsæde. En coating-behandling af skummet beskytter mod væsker, er nem at tørre af og øger holdbarheden.

Ydermere tilbyder vi standard og skræddersyede vandtætte indlæg, som placeres ovenpå sædehynden. Indlæg kan vaskes ved 60° og 90°C.



Stel til vores formstøbte produkter

Etac har et bredt udvalg af stel. I nedenstående skema vises hvilke muligheder i Etac sortimentet, der er de mest velegnede. Yderligere er der mulighed for at montere på stel/el-stel af andre fabrikater.

Læs om de enkelte stel på vores hjemmeside www.etac.dk

Stel til formstøbning	Til voksne	Til børn
Kørestole		
Etac Prio	•	
Etac Cross 5	•	•
R82 Combi Frame:x	•	•
R82 High-low Frame		•
R82 High-low:x Frame		•
R82 Multi Frame	•	•
R82 Multi Frame:x	•	•
R82 Cougar	•	•
R82 Kudu		•
Toilet- og badestole:		
Etac Swift Mobil	•	
R82 Heron	•	•
Ståstativer		
R82 Caribou	•	•



Stellet Cougar, som fås i forskellige størrelser til både børn og voksne

Kørestol

Valg af stel afhænger af brugerens behov. Vi kan montere på alle typer stel fra alle fabrikater. Oftest leverer vi totalløsninger, hvor stel og formstøbning er en samlet enhed fra Etac, hvilket giver mindre koordinering, et kortere sagsforløb og en mere komplet stol, da vi følger produktionen af alle delene.

Stellet skal danne en perfekt basis for formstøbningen, og Etacs stel har mange justeringsmuligheder og et stort tilbehørsprogram. Til højre vises børnestellet Kudu med skumstøb. En unik egenskab ved Kudu er bl.a. den selvcentrerende tilt-in-space funktion, som betyder, at sædet nemt kan tiltes, mens det forbliver stabilt og med uændret tyngdepunkt.



Toilet og bad

Ved toiletbesøg og bad er det ligeledes vigtigt, at kroppen er støttet, og brugeren sidder komfortabelt. Med et formstøbt bade- og toiletsæde fra Etac har brugere og hjælpere et mere sikkert og behageligt bade- og toiletbesøg.

Med en formstøbt bade- og toiletstol fra Etac prioriteres hygiejnen højt og for at lette rengøringen, er indlæg og sæde lette at adskille.

Det formstøbte sæde kan bl.a. monteres på bade- og toiletstolen Heron, der er højdejusterbar og har hele 30 graders tilt. Det store tilt og højdejusteringen gør det let at foretage forflytninger med lift til og fra bade- og toiletstolen.



Aktiv hverdag og nye funktioner

Stellet Caribou er en vipbar ståstøtte, der kan bruges både i stående og liggende position. Gennemtænkt design og mulighed for et formstøbt skumleje, giver brugeren de bedste forudsætninger for en aktiv og funktionel hverdag.

Den stående stilling kan give:

- Bedre mulighed for at spise og drikke
- Øget velvære og livskvalitet
- Mulighed for at betjene nul-et kontakter
- Aktiv deltagelse ved dagens aktiviteter
- Forbedring af basale funktioner.



Tilbehør

Turtle-produkterne er kompatible med vores store tilbehørsprogram. Dette gør produktionsprocessen nemmere og holder omkostningerne nede. Nedenfor ses et lille udvalg af de muligheder vi tilbyder.



Neoprenvest




Polstret hoftesele, Y-model



Anatomisk hovedstøtte



Specialfremstillet hovedstøtte

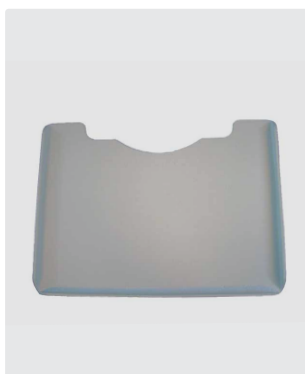

Bord med kant



Specialfremstillet bord med polstring



Sejl




Lille Viking hjælpemotor



Armlæn



Lommer til sejlstropper

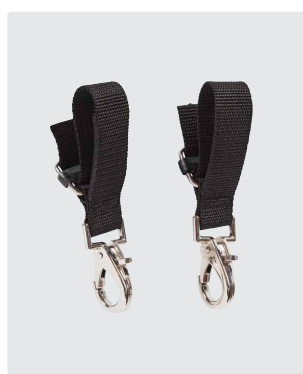

Taskekroge



Du kan se hele vores sortiment af standardtilbehør på vores hjemmeside:

www.etac.dk



Combi Frame stel med formstøbt skumsæde



*Hos os er du
i trygge hænder*

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac, afdeling øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

**etac**[®]
Creating Possibilities