

**MJ Autosadmager ApS**

Holmstrupgårdvej 250, 8210 Århus

**BRUGSANVISNING**

**MJ Junior Løftesejl**



Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden ibrugtagning af MJ Junior Løftesejl, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges, for at opnå den optimale udnyttelse af løftesejlet.

MJ Junior Løftesejl er konstrueret til anvendelse som personløft sammen med en mobil personløfter eller kran. MJ Junior Løftesejl anvendes sammen med løfteåg og lift/kran, der er godkendt til personløft.

MJ Junior Løftesejl anvendes til børn og voksne, når der anvendes et løftesejl der passer til personens højde.

MJ Junior Løftesejl må kun anvendes under løft, når personen er under overvågning af kompetent person.

MJ Junior Løftesejl må kun anvendes til personløft, anvendes MJ Junior Løftesejl til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse.

***Indholdsfortegnelse:***

1. CE-Overensstemmelseserklæring.
2. Anvendelse.
3. Vedligeholdelse.
4. Garanti.



## 2. Anvendelse:

MJ Junior Løftesejl anvendelse:

- Sejlet anvendes af personale der er instrueret i sejlets brug
- At der anvendes den korrekte størrelse sejl.
- Anvendes til person i siddende stilling.
- Må kun anvendes til personer under 350 kg.
- Anvendes i forbindelse med godkendte løfteåg og personløfter eller kran.
- Stropper skal være fri af hals og hoved inden løft, arme og ben skal have fri bevægelse.
- Bruger må ikke sidde i sejlet uden opsyn.

Valg af sejl størrelse

Artikel no.	Størrelse	Alder
1690101T	90 – 100 cm.	2 - 3 år.
1690102T	100 – 110 cm.	3 - 5 år.
1690103T	110 – 130 cm.	5 - 8 år.
1690104T	120 – 155 cm.	6 -12 år

OBS: Kategorierne er kun retningsgivende, brugers vægt og kropsbygning kan betyde, at en anden størrelse skal vælges en den angivne alder.



Løftesejlet nederste del trækkes ned til bækkenet med de 2 lårstøtter til hver side

Centreringsbånd med velcrolukning

Lårstøtter



Når sejlet er placeret ved bækkenet, lukkes sejlets centreringsbånd med velcrolukning om kroppen.



Lårstøtterne trækkes under låret og fastgøres til løfteågets kroge.

Inden løft,- vær sikker på, at stropper er placeret korrekt i løfteågets kroge.

Vær forsigtig under løftet, undgå, at arme, ben og hoved kommer i kontakt med møbler og andre genstande, der kan forårsage klemning eller slag mod personen.

Inden løft, -vær sikker på, at løftesejlet sidder korrekt på personen, samt at stropper ikke tvinder.

Inden løft, -vær sikker på, at stropper ikke er omkring hals eller hoved. ***Der er kvælningsfare***

Maks. løftekapacitet er på 350 kg.

Løftesejlet må kun anvendes til person løft.

Brug kun godkendt løfteudstyr.

Undgå, at stropper er omkring hals eller hoved på personen, inden løft - der er kvælningsfare

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er placeret i løftesejlet.

### **3. Vedligeholdelse.**

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning: Efterse MJ Junior Løftesejl for snavs, skader og slitage, kontroller syninger, stof og stropper for sprængninger, rivninger.

Ved skader eller slitage skal MJ Junior Løftesejl kasseres.

Bortskaffelse.

Når MJ Junior Løftesejl ikke længere skal anvendes, kan dette sendes til destruktion for genanvendeligt affald eller brændbart stof.

*Sejlet kan vaskes ved 40°C, med brug af almindeligt vaskemiddel, brug ikke blegning, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask og anvend ikke kemisk rensning.*

### **4. Garanti.**

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisningen og til det formål, hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.