



# Meine ersten Schritte

R82 Crocodile  
Starter-Kit

 **etac**<sup>®</sup>

# R82 Crocodile Starter-Kit

Wir haben ein neues Zubehör entwickelt, welches unseren Crocodile Größe 1 noch kleiner und wendiger macht: Das "Starter-Kit"! Dieses ermöglicht auch den kleinsten Kindern, ihre ersten Schritte zu machen und ihren Bewegungsradius zu vergrößern. Das Crocodile fördert in allen Größen das Gehen in aufrechter Körperhaltung und bietet jedem Nutzer die benötigte Stabilität und Sicherheit bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit.

## Im Starter-Kit enthalten



## Meine ersten Schritte

Mit dem Zubehör aus dem Starter-Kit kann das Crocodile Größe 1 in eine noch kleinere Größe umgebaut werden. Dies ist sowohl bei Neubestellungen, als auch mit einem bereits vorhandenen Crocodile möglich.

## Zwei Produkte in einem

Mit dem neuen Starter-Kit kann das Crocodile Größe 1 bereits für Kinder ab ca. 70 cm Körpergröße eingesetzt werden. Wächst das Kind über die Maße des Starter-Kits hinaus, kann das Crocodile wieder in den Originalzustand umgebaut und somit länger genutzt werden.



**Starter-Kit**

**Größe 1**

90–250 mm

190–350 mm

### Breite zwischen den Griffen

Verglichen mit dem oberen Haltebügel des R82 Crocodile Größe 1 sind die Griffe am Rahmen des Starter-Kits 10 cm näher zueinander positioniert. So können die Griffe an die Anatomie der kleinsten Nutzer perfekt angepasst werden.



**Starter-Kit**

**Größe 1**

380–700 mm

420–715 mm

### Höhe vom Boden bis zu den Griffen

Wie bei allen Größen des R82 Crocodiles ist der Haltebügel im Starter-Kit in der Höhe verstellbar. Durch die Höhenverstellbarkeit kann das Crocodile mit dem Kind mitwachsen. Wenn das Starter-Kit entfernt wird kann das Crocodile Größe 1 noch bis zu einer Körpergröße von 115 cm weitergenutzt werden.

## Förderung der Selbstständigkeit

Das R82 Crocodile fördert die Eigenaktivität und Mobilität des Kindes und gibt ihm die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen und mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe zu interagieren.















Schauen Sie sich die Montage des Starter-Kits im Video an!



Weitere Informationen zum Produkt und unserer Zubehörpalette finden auf [www.r82.de](http://www.r82.de)



## Abmessungen

		Starter-Kit	Größe 1	Größe 2	Größe 3
	Breite zwischen den Griffen	90-250 mm	190-350 mm	320-600 mm	330-640 mm
	Höhe vom Boden bis zu den Griffen	380-700 mm	420-715 mm	550-840 mm	750-1045 mm
	Max. Benutzergröße	1150 mm	1150 mm	1500 mm	1800 mm
	Mind. Benutzergröße (ca.)	700 mm	850 mm	1100 mm	1400 mm
	Max. Benutzergewicht	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
	Länge	660 mm	720 mm	840 mm	870 mm
	Gesamtbreite	620 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Länge, gefaltet	720 mm	720 mm	860 mm	1000 mm
	Breite, gefaltet	620 mm	620 mm	690 mm	690 mm
	Höhe, gefaltet	310 mm	310 mm	270 mm	290 mm
	Wendekreis, Minimum	1000 mm	1000 mm	1140 mm	1140 mm
	Gewicht	5,5 kg	5,5 kg	6,5 kg	12 kg

Weitere Abmessungen finden Sie auf unserer Website: [www.r82.de](http://www.r82.de)

## Kennen Sie unsere R82 Crocodile Familie?

Das R82 Crocodile ist eine äußerst benutzerfreundliche Gehhilfe, da es leicht aber dennoch stabil ist und sich sehr einfach falten lässt. Mit drei Größen begleitet es den Nutzer das ganze Leben lang. Im Grundmodell ist das Crocodile ein einfacher und unkomplizierter Posterior-Walker; durch die Montage von vielfältigem Zubehör wird es zum individuellen Gehtrainer für alle, die mehr Unterstützung benötigen.



Starter-Kit

Crocodile Größe 1

Crocodile Größe 2

Crocodile Größe 3