



etac[®] | R82[®]

Etac Alto & R82 Heron

Informationen zur Bedarfsermittlung

Etac Alto & R82 Heron

Eigenschaften und technischen Daten der Dusch- und Toilettenrollstühle Alto und Heron.

Eigenschaften und technische Daten	Etac Alto	R82 Heron
Nutzerkreis	Erwachsene	Jugendliche, Erwachsene
Einsatzbereiche	Dusche, Toilette	Dusche, Toilette
Sitzbreite, maximal	500 mm	550 mm
Sitzbreite mit Beckenpelotten (Zubehör)	-	350-490 mm
Sitztiefe	465 mm	400/450 mm
Sitzhöhe	500-930 mm	510-780 mm
Sitzneigung	-5° bis +30°	-5° bis +25°
Rückenhöhe	540 mm	555-625 mm
Neigung der Rückenlehne	-	-10° bis +30°
Rückenmaterial	Mesh	Kunststoff, PUR Schaum
Unterschenkellänge	340-465 mm	300-560 mm
Maße Hygieneausschnitt (Tiefe x Breite)	300 x 210 mm	265 x 135 mm
Max. Nutzergewicht	160 kg	100-130 kg*
Gewicht, Grundmodell	40 kg	28 kg / 31 kg*
Handfernbedienung	ja	ja*
Abstand vom Boden bis zum Sitz	445 mm	510 mm / 560 mm*
Gesamtbreite	600-640 mm	670 mm
Länge	972 mm	710 mm
Breite zwischen den Armlehnen	420 / 480 / 540 mm	fest
Lenkrollen	125 mm	100 mm / 125 mm
Wendekreis	1005 mm	900 mm

**nur bei elektrischer Variante!*

Fazit: Alto

Erhöhter Komfort für Benutzer und Pflegende durch die einfache Bedienung. Verbesserte Pflegequalität durch stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung. Die Vielzahl an Zubehör ermöglicht ein breites Spektrum an Unterstützung für Nutzer und Pflegende, wodurch das Wohlbefinden, als auch die Pflegebedingungen verbessert werden.

Fazit: Heron

Einer der großen Vorteile des Heron ist die Möglichkeit zum hydraulischen oder elektrischen Verstellen von Sitzhöhe und Sitzneigung, wodurch sich der Stuhl problemlos in die richtige Position bringen lässt, ohne die betreuende Person durch eine unnatürliche Arbeitshaltung zu belasten. Zusätzlich lässt sich bei jedem Heron die Rückenlehne per Gasdruckfeder verstellen; die anatomischen Drehpunkte wurden hierbei berücksichtigt und Scherkräfte so minimiert.



Etac Alto

Das Grundmodell ist ausgestattet mit:

- Elektrische Höhenverstellung
- Elektrische Neigungsverstellung
- Feststellbremse an allen vier Rädern
- Intuitive Handfernbedienung

Produktseite



R82 Heron

Das Grundmodell ist ausgestattet mit:

- Untergestell höhenverstellbar:
hydraulisch oder elektrisch
- Einstellbarer Sitzneigung:
hydraulisch oder elektrisch
- Einstellbarer Rückenneigung:
per Gasdruckfeder
- Feststellbremse an allen vier Rädern
- Schiebegriff
- Silikonspritzschutz unter dem Sitz
- Klappschnallen und Gurtschlitze zur
Montage von Westen und Gurten
- Kopfstützenhalterung

Produktseite



Bedarfsermittlung

Dusch- und Toilettenrollstühle

<p>Kommission: _____</p> <p>Fachhändler: _____</p> <p>Größe: _____</p> <p>Gewicht: _____</p> <p>Einsatzort(e): _____</p>	<p>Erstversorgung: _____</p> <p>Zweitversorgung: _____</p> <p>Umversorgung, weil: _____</p>
---	--

Allgemeine Bedarfsanalyse:

Eingeschränkte Fähigkeit zur selbständigen Körperhygiene	Eingeschränkte Haltungskontrolle
Probleme bei der Nutzung konventioneller Sanitäreinrichtungen	Eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit
Eingeschränkte Mobilität	Schmerzempfindlichkeit bei bestimmten Bewegungen oder Positionen
Obere Extremitäten	Notwendigkeit für spezielle Lagerung zur Druckentlastung
Untere Extremitäten	Unkontrollierte Körperbewegungen (z. B. Zittern oder Spastiken)
Kopf- u. Nackenbeweglichkeit	Verminderte Rumpfstabilität
Notwendigkeit spezifischer Sitz- oder Liegehilfen	Atembeschwerden

Zielsetzung der Versorgung:	Zielerreichung:	
Förderung der Eigenmobilität durch selbständige Fortbewegung	voll	teilweise
Schaffung eines sicheren Transfers zur Dusche und zurück	voll	teilweise
Ermöglichung einer adäquaten Körper- und Hautpflege	voll	teilweise
Erleichterung der Durchführung der Körperpflege für die Pflegeperson	voll	teilweise
Erleichterung der selbstständigen Körperhygiene	voll	teilweise
Schaffung einer sicheren Sitzposition beim Toilettengang	voll	teilweise
Schaffung von Unterstützungsmöglichkeiten bei Darmentleerungsfunktionen	voll	teilweise
Schaffung einer atmungserleichterten Liegeposition (falls notwendig)	voll	teilweise
Schaffung verschiedener druckentlastenden Sitz- u. Liegepositionen	voll	teilweise
Verringerung von Schmerzen in einem oder mehreren Körperteilen	voll	teilweise
Support der muskuloskeletalen Strukturen (u.a. Gelenke/Muskeln)	voll	teilweise
Zusätzliche Unterstützung des Kopfes beim Dusch-/Toilettenvorgang	voll	teilweise
Sonstige Ziele:	voll	teilweise
	voll	teilweise
	voll	teilweise

Empfohlene Auswahl:
Dusch- und Toilettenrollstuhl zum Schieben, mit Kopfstütze, manueller oder elektrischer Höhenverstellung und Kantelung, für Jugendliche und Erwachsene
R82 Heron, manuelle Höhenverstellung und Kantelung, bis 100 kg

R82 Heron, elektrische Höhenverstellung und Kantelung, bis 130 kg

Dusch- und Toilettenrollstuhl zum Schieben, mit Kopfstütze, elektrischer Höhenverstellung und Kantelung
Etac Alto, Etac Swift Mobil-2

Erforderliches Zubehör zur Erreichung der Zielsetzung:

Sitz:	Rücken:
Hygieneausschnitt: hinten (C/S/A) / vorne (C/H) / mittig (H)	Seitenpelotten: fest (C/S/A/H) / abklappbar (H)
Sitzpolster, mit Öffnung hinten oder vorne (C)	Rückenlehne fest (C/S/A/H) / gepolstert (C/S/A/H)
Sitzpolster, anatomisch, mit Öffnung mittig (H)	Rückenlehne aus Netzmaterial, anpassbar (C/S/A)
Spritzschutz (S/A/H)	XL-Rücken zur Verbreiterung (S/A)
Sitzpolster, geschlossen (C/S/A) / Lochabdeckung (H)	Kopfstütze (S/A/H)
Eimer (C/S/A) , Becken (C/S/A) oder Topf (H)	
niedrige Aufhängung für Eimer oder Becken (C/S/A)	Arme:
Beckenpelotten (H)	Armlehnenverringern (S/A)
Abduktionskeil (H)	Armlehnverbreiterung (S/A)
Beckengurt, gepolstert: 2-Punkt (C/S/A/H) / 4-Punkt (H)	Schulterauflagen (H) , zusätzlich gepolstert (H)
Sitztiefenreduzierung (H)	Armauflagen gepolstert (C/S/A/H)
	Hemi-Armauflage(n): links / rechts (S/A)
Beinstützen:	Tisch (H)
Höhenverstellbare Beinstütze(n): links / rechts (C/S/A)	
Amputationsbeinstütze(n): links / rechts (C/S/A)	Rumpf:
Fußstützenverbreiterung (S)	Wasserfeste Sitzschale nach Scan/Körperabdruck (S/A/H)
Fußstützen mit speziellem Kniewinkel (S/A/H)	
Sonstiges:	
Kippschutz hinten (S), zusätzlich vorne (S)	

(Kompatibilitätsliste: C = Clean, S = Swift Mobil, A = Alto, H = Heron)

Praktische Erprobung durchgeführt?

Ja

Nein

Zusätzliche Bemerkungen:

Large empty grey rectangular area for additional remarks.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Montags – Donnerstags

8:30 – 17:00 Uhr

und

Freitags

8:30 – 16:00 Uhr

durchgehend für Sie erreichbar.

Kontakt:

Tel.: 02366 5006-0

Fax: 02366 5006-200

E-Mail: info@etac.de







Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities