


Wombat Living Messanleitung

Eine einfache Anleitung zur Auswahl der richtigen Größe des Wombat Living für Ihr Kind.

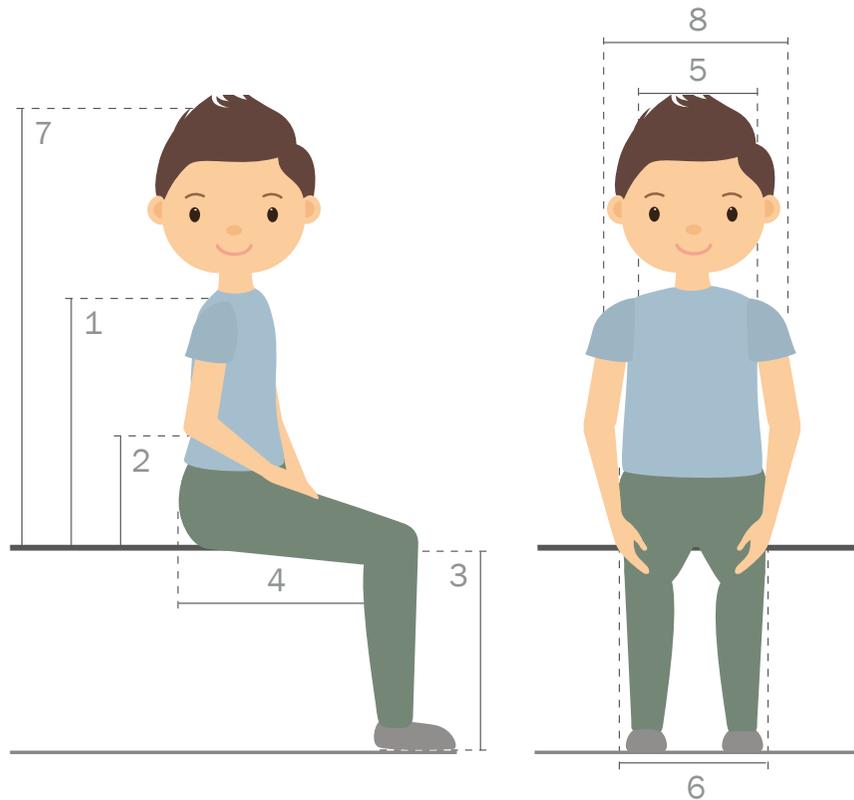

Dies ist eine einfache Anleitung, um sicherzustellen, dass der Stuhl für den Benutzer richtig konfiguriert ist. Um genau zu messen, muss der Benutzer auf einer festen, flachen Oberfläche liegen, wobei Hüfte, Knie und Knöchel einen 90-Grad-Winkel bilden müssen.

Erfassen Sie die Maße des Kindes

Nr.	Typ	Maße
1	Rückenhöhe	
2	Höhe der Arme	
3	Länge der Unterschenkel	
4	Sitztiefe	
5	Breite der Brust	
6	Sitzbreite	
7	Höhe vom Sitz bis zur Spitze des Kopfes	
8	Breite der Schultern	

Beispiel für die Verwendung der Anleitung

Schritt 1: Maße des Kindes erfassen

Rückenhöhe.....	350 mm
Höhe der Arme.....	130 mm
Länge der Unterschenkel.....	240 mm
Sitztiefe.....	270 mm
Breite der Brust.....	200 mm
Sitzbreite.....	220 mm
Höhe vom Sitz bis zur Spitze des Kopfes.....	550 mm
Breite der Schultern.....	270 mm

Schritt 2: Größe auswählen

Nun müssen Sie die richtige Größe für Ihr Kind auswählen. Wir haben die Maße von Dani erfasst (siehe links) und anhand der Maßtabelle unten konnten wir feststellen, dass die optimale Größe für Dani ein Wombat Living Größe 2 ist. Diese Größe bietet ihm Halt und sie kann noch einige Zentimeter in der Höhe wachsen.

Schritt 3: Maße doppelt prüfen

Vergleichen Sie anschließend die Maße des Kindes mit den Maßen des Wombat Living in der Tabelle unterhalb.

R82 Wombat Living Maße / die richtige Größe für Ihr Kind finden				
	Größe 1 Gas & elektrisch	Größe 2 Gas & elektrisch	Größe 3 Gas & elektrisch	Größe 3 Hydraulisch
Höhe der Rückenlehne	280-340 mm	310-380 mm	390-475 mm	390-475 mm
Sitzbreite	300 mm	370 mm	420 mm	420 mm
Sitztiefe	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm	320-500 mm
Höhe der Sitzfläche an der vorderen Kante	230-610 mm	230-610 mm	330-630 mm	390-630 mm
Max. Nutzergewicht	45 kg	45 kg	70 kg	70 kg

