

Situatie 1: Cliënt ondersteunen in zijlig (30-60graden)



Verplaats de cliënt met een glijlaken naar de zijkant van het bed. Zorg ervoor dat de cliënt het hoofd opzij draait en de hand op de schouder legt.



Leg het Basic XS kussen ter hoogte van de knie. Trek de knieën van de cliënt omhoog en draai de cliënt naar de zij met het glijlaken. De onderste knie ligt nu op het Basic XS kussen..




Leg het Wing kussen achter de cliënt en laat hem zachtjes met zijn rug in het kussen zakken. Plaats het Basic S kussen tussen de benen en vorm het kussen voor, zodat het bovenste been er goed in valt.




Kijk of de het lichaam in een mooie rechte lijn ligt. Ligt het hoofd nog wat naar achteren, trek dan het kussen nog een stukje naar je toe.

Benodigde kussens: LeanOnMe Wing, Basic XS en Basic S

Situatie 2: Benen van de cliënt ondersteunen

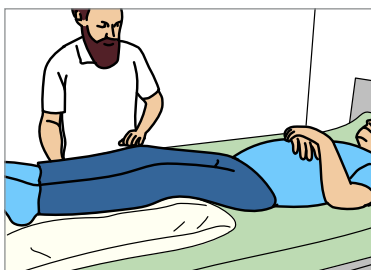


Optie 1
Plaats het Channel kussen onder de benen van de cliënt.

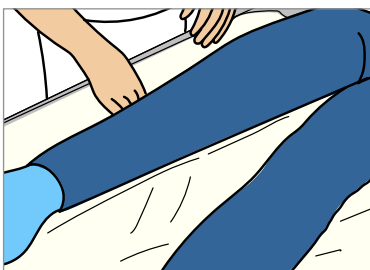

Positioneer de benen in de 'kanalen' van het Channel kussen.




Plaats het Basis S kussen onder de voeten.

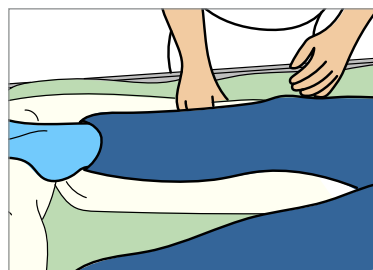

Optie 2
Plaats het Roll L kussen in een 'u-vorm' onder de benen. Vorm het kussen voor zodat de benen er goed in liggen. In de hoeken is ruimte voor de hielen.

Benodigde kussens: LeanOnMe Channel en Basic S of Roll L

Situatie 3: Cliënt ondersteunen in zit op rand van het bed

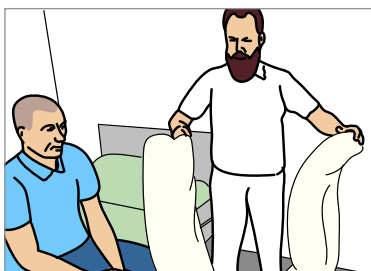

Optie 1
Bereid het Roll L kussen voor door het te schudden.



Leg het kussen om de cliënt heen.



Stop het uiteinde van het kussen achter de benen. Laat het bed indien nodig zakken zodat de voeten contact hebben met de vloer.



Optie 2
De cliënt kan nu stabiel zitten. Optie 2: plaats het Roll L kussen voorlangs, zodat de cliënt aan de voorkant extra steun heeft.

Benodigde kussens: LeanOnMe Roll L


Situatie 4: Cliënt ondersteunen in zit in bed



Zet het bed in de fowlerstand.
Plaats het Channel kussen bij de benen. Maak kuiltjes in het kussen voor de hielen.



Plaats een Basiskussen onder de knieholtes en maak kuiltjes zodat de benen stabiel liggen.

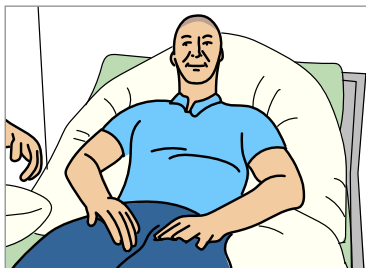

Leg de Roll L om de cliënt heen. Maak ruimte voor het hoofd en de schouders en leg de armen op het kussen



Tip: is de cliënt halfzijdig verlamd, dan kun je een Basiskussen onder de arm leggen voor extra ondersteuning.

Benodigde kussens: LeanOnMe Channel, Roll L, Basic XS en Basic L

Situatie 5: Cliënt veiligheid bieden bij draaien in bed



Verplaats cliënt zijwaarts, zodat er ruimte is om cliënt te draaien. Gebruik hiervoor Immedia SatinSheet.



Geef de cliënt het Roll L kussen en plaats het kussen tussen de benen.



Draai de cliënt vanaf de andere kant van het bed naar je toe met het SatinSheet Treklaken.



Positioneer het bovenste been in het kussen en stop het SatinSheet Treklaken in onder het matras.

Benodigde kussens: LeanOnMe Roll L

Benodigde kussens:



Roll L



Channel



Basic S



Basic XS



Wing

Bekijk de instructievideo's op www.etac.nl/leanonme-support

Vragen of advies?



John Walker
Regio Noord
Telefoon: 06 31 75 85 93
john.walker@etac.com



Marjan Kiers
Regio Midden
Telefoon: 06 50 24 34 00
marjan.kiers@etac.com



Jonah Dammers
Regio Zuid
Telefoon: 06 59 84 01 16
jonah.dammers@etac.com