



Comfortable en veilige
transfer oplossingen

 **etac**[®]

Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.

Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie. Waarbij we de cliënt zoveel mogelijk gebruiksgemak en comfort willen laten ervaren en de zorgverleners zoveel mogelijk ontzorgen.

- ✓ Slim ontworpen hulpmiddelen
- ✓ Altijd samen op zoek naar de beste oplossing
- ✓ Oprecht en persoonlijke service

Tillen & verplaatsen

Etac ontwikkelt en produceert een breed assortiment kwalitatieve hulpmiddelen waarmee de cliënt comfortabel wordt geplaatst en de zorgverlener veilig zijn of haar werk kan doen.



Etac Transfer Concept



Laat de cliënt altijd zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden maximaal en zo lang mogelijk benutten

Zolang uw cliënt zijn eigen spierkracht, balans en mobiliteit blijft aanwenden, blijft hij actief en betrokken en heeft hij invloed op zijn leven. Binnen het Etac Transfer Concept hebben wij diverse hulpmiddelen om uw cliënt te laten ervaren dat de transfer makkelijker en veiliger wordt, zonder de regie volledig uit handen te geven.

Respecteer de privacy en integriteit van de cliënt

Bij het verlies van functie (spierkracht, balans, mobiliteit) neemt de afhankelijkheid van de eindgebruiker van anderen toe. De impact van een passieve transfer op het gevoel van uw cliënt is niet te onderschatten! De tilfilosofie binnen het Etac Transfer Concept gaat uit van maximaal gemak voor de hulpverlener, zodat de transfer van uw cliënt snel en met respect is uit te voeren. Met slimme combinaties van hoge kwaliteit tilbanden, het biomechanisch kanteljuk en hulpmiddelen om de positionering in het bed of in de rolstoel te optimaliseren, wordt de transfer met maximaal comfort en discretie ondersteund.

Biedt maximaal comfort aan de cliënt

Etac geeft altijd voorrang aan het comfort van de cliënt. Als uw cliënt zich veilig, comfortabel en geborgen voelt tijdens de verplaatsing van bed naar stoel, of naar de douchestoel dan geeft dat voldoening aan de verzorgende. De open constructie van het vierpunts biomechanisch kanteljuk van de Molift liftenlijn geeft de cliënt een veel minder opgesloten gevoel dan veel van de bestaande tilsystemen. De afstand tussen de ophangpunten is zo gekozen dat de eindgebruiker niet het gevoel heeft 'opgevouwen' te worden. Ook de andere producten van Etac helpen om de zorgvrager dit maximale comfort te laten ervaren.

Samenvattend bieden wij met het Etac Transfer Concept met trots een zeer breed assortiment hulpmiddelen om de transfer van de cliënt met respect, met eigenwaarde en met maximaal comfort mogelijk te maken, in alle situaties.

Oplossingen voor actieve transfers

Een breed assortiment aan oplossingen die de spierkracht, balans en mobiliteit van uw cliënt ondersteunen om zo de transfer zo veilig en actief mogelijk te maken

Etac Turner Pro

De Etac Turner Pro is een sta-op-hulp met draaischijf die geschikt is voor cliënten die zelfstandig kunnen staan, goede rompstabiliteit hebben, maar hulp nodig hebben bij de draai naar bed of (rol)stoel.

Het belang van veilige transfers

Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij een transfer voelen zij zich vaak onzeker. Verzorgers kunnen daarbij blootgesteld worden aan hoge fysieke belastingen. Het risico op ongevallen en overbelasting is soms aanleiding om het aantal transfers te proberen reduceren.

Eenvoudig in gebruik

Etac Turner Pro is een uitstekend hulpmiddel in ziekenhuizen, instellingen of in de thuissituatie. Het intuïtieve ontwerp maakt de Etac Turner Pro eenvoudig in gebruik; het instellen van de handgreephoogte en de onderbeensteunen volstaat om de Etac Turner Pro te kunnen gebruiken.

De Etac Turner Pro kan zonder problemen worden gebruikt op verschillende ondergronden en zelfs op tapijt.



Kenmerken



Compact

Eenvoudig te vervoeren, eenvoudig vast te pakken. Licht en goed in balans.



Contrasterende handgreep

De opvallende kleur laat de handgreep duidelijk opvallen. Biedt diverse manieren om goed vast te pakken.



Onderbeensteunen

Zacht en comfortabel, bieden zijdelingse ondersteuning. Eenvoudig instelbaar tot de gewenste hoogte.



Functionele draaischijf

Gegoten aluminium draaischijf met geïntegreerde anti-slip functie. Zeer eenvoudig te draaien. De transportwielen worden alléén gebruikt bij transport van de Turner Pro.

Omschrijving	Artikelnr.	Afmetingen	
Etac Turner PRO	E16090106	Hoogte onderbeensteun Breedte onderbeensteun	150 mm 380 mm
Materiaal:	Staal, plastic, aluminium, TPR		
Gewicht			
Totaal gewicht	7.2 kg		
Maximaal gebruikersgewicht	200 kg		
			CE

Molift Raiser Pro

De Etac Raiser Pro is een sta-op-hulp die geschikt is voor cliënten die zelfstandig of met enige hulp kunnen staan, goede rompstabiliteit hebben, maar niet zelf naar het bed of (rol)stoel kunnen lopen.

Natuurlijk bewegingspatroon

De Molift Raiser Pro is een sta-op-hulp geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

Transfer in kleine ruimte

De Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

Geschikt voor alle zorginstellingen

De Molift Raiser Pro helpt bij een transfer van cliënten in een zorginstelling.



Kenmerken



Ergonomische greep

De zachte handgreep biedt een optimale, comfortabele en veelzijdige grip.



Comfortabele kniesteun

Zachte kniesteun die de beweging volgt van zitten naar staan.



Lage instap

De lage basisplaat van slechts 3,5 cm vergemakkelijkt een eenvoudige instap.



Centrale rem

Vergrendel de rem eenvoudig, zowel links als recht met één voet, veilig en functioneel.

Accessoires



Block

Het block kan gebruikt worden bij kleine volwassenen en kinderen.



Belt

Ondersteunt het werk van de verzorger bij het helpen van de gebruiker tot een staande positie.



Sling met glijstuk

Handige accessoire om de cliënt te ondersteunen bij het opstaan. Een slimme oplossing waardoor gebruik van een actieve tillift niet direct nodig is.

Omschrijving

Omschrijving	Artikelnr.
Molift Raiser Pro	E16090204
Molift Handgreep-lussen	2 stuks E82511
Molift Raiser Block	E28612
Molift Sling	Maat S/M E82508
Molift Sling	Maat L/XL E82509
Molift Sling met glijstuk	Maat S/M E82528 (E82508 + E82537)
Molift Sling met glijstuk	Maat L/XL E82529 (E82509 + E82537)
Molift Raiser Belt	Maat S/M E82964 (E82508 + E82963)
Molift Raiser Belt	Maat L/XL E82965 (E82509 + E82963)
Molift Raiser Pro Heel strap	E83211

Materiaal

Gepoedercoat staal, kunststof, aluminium, chrome

Gewicht

Totaal gewicht 10,7 kg
Maximaal gebruikersgewicht 170 kg



max 170 kg
max 375 lbs



Molift Quick Raiser 205

De Etac Quick Raiser 205 is een actieve tillift die geschikt is voor cliënten die hulp nodig hebben bij een transfer van zitten naar staan, maar nog een goede rompstabiliteit, schouderfunctie en cognitieve functies hebben.



Stabiel en compact

De Quick Raiser 205 is een compacte en stabiele actieve tillift, leverbaar met vast onderstel (FL), met elektrische pootspreiding en een grote hefcapaciteit. De specifieke wielstand, schuine kolom en de gewichtsverdeling van de basis zorgen ervoor dat de tillift eenvoudig manoeuvreerbaar is, zelfs in zeer kleine ruimtes.

Natuurlijk bewegingspatroon

Het 4-punts tiljuk en de tilbanden geven extra steun bij het tillen van zitten tot staan. De schuine kolom zorgt voor een natuurlijk bewegingspatroon en voldoet aan de behoefte van de cliënt om prettig ondersteund te worden tijdens de transfer. De tillift in combinatie met de tilbanden zorgen voor een comfortabele, stabiele en veilige tiloplossing.

Kenmerken



Ergonomisch design

De schuine kolom zorgt voor een natuurlijk bewegingspatroon.



Comfortabel, veilig en stabiel

Het 4-punts tiljuk geeft extra steun bij het tillen van zitten tot staan.



Automatische service-indicatie

Automatische waarschuwing voor (jaarlijkse) inspectie en service.

Accessoires




Voetenplaten

Verhoogt de voetsteunen met 10 cm en is eenvoudig te monteren of demonteren.



Inleg voor voetenplaat

Inleg met anti-slip materiaal voor een betere grip.

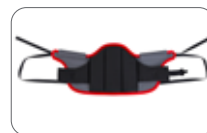

RGOSling Active

De ideale tilbandoplossing voor actieve transfers met Molift Quick Raiser 205.

Omschrijving	Artikelnr.	Oplaadtijd batterij
Active, wielmaat 50/75 mm (vaste poten)	N29150	6 uur
Active, wielmaat 50/75 mm	N29000	
Active, wielmaat 75/100 mm (vaste poten)	N29200	
Active, wielmaat 75/100 mm	N29100	
Gewicht		
Maximaal gebruikersgewicht	205 kg	
Totaal gewicht elektrische pootspreiding / vast onderstel	44 / 42,5 kg	
		Accessoires
		RGOSling Active, maat XS
		RGOSling Active, maat S
		RGOSling Active, maat M
		RGOSling Active, maat L
		Voetenplaat
		Inlay voetenplaten (set van 2)
		max 205 kg
		max 452 lbs
		N1720910
		N1720920
		N1720930
		N1720940
		N2910065
		N2920151
		CE

Verplaatsen en positioneren in bed

Immedia biedt een breed scala aan oplossingen om verplaatsingen in bed te vergemakkelijken en comfortabeler te maken. Voor uw cliënt verkleint dit de kans op decubitus en voor de zorgverlener vermindert de kans op werk-gerelateerde kwetsuren.

Immedia MultiGlide

Immedia MultiGlide heeft een uitgebreid assortiment producten om cliënten te positioneren in bed. Met name in situaties waar een lage wrijving onder drukpunten noodzakelijk is. MultiGlide wordt voor gebruik door de zorgverlener aangebracht en dient na gebruik weer te worden verwijderd.

MultiGlide SG glijzeilen

MultiGlide glijzeilen hebben een ultra-lage wrijvingscoëfficiënt aan zowel de binnen- als de buitenzijde en zijn in een groot aantal maatvoeringen te verkrijgen.

MultiGlide is geschikt voor verplaatsingen (omhoog/omlaag), draaien in bed en voor gebruik in CT- en MRI-scanners. De glijzeilen zijn eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.



Bent u al bekend met onze Immedia MultiGlide Single Patient Use glijzeilen?

Een glijzeil dat door één enkele patient gebruikt wordt om het risico op besmetting te verminderen. Na de gebruikperiode dient het glijzeil te worden weggegooid. Zie voor meer informatie etac.nl.



Meer weten ...

... over het gebruik van MultiGlide? Deze animatiefilm geeft handige tips voor het dagelijks gebruik van MultiGlide.



Omschrijving

B x L (cm)

Artikelnr.

Maat XXS - open zijde 40 cm	40 x 40	EIM0040
Maat S - open zijde 60 cm	60 x 60	EIM0066
Maat M - Open zijde 72 cm	72 x 70	EIM0077
Maat L - Open zijde 80 cm	80 x 80	EIM0088
Maat XL - Open zijde 72 cm	72 x 100	EIM0080
Maat XXL - Open zijde 72 cm	72 x 130	EIM0083
Maat XXS - Open zijde 100 cm	100 x 70	EIM00100
Maat M - Open zijde 108 cm	108 x 80	EIM00108
Maat XL - Open zijde 120 cm	120 x 90	EIM00120/1
Maat XXL - Open zijde 130 cm	130 x 90	EIM00139
Maat XXL mini - Open zijde 130 cm	130 x 80	EIM00130
Maat XXL wide - Open zijde 140 cm	140 x 120	EIM00170
Maat XXXL - Open zijde 200 cm	200 x 70	EIM00200

Materiaal

Nylon

Wasvoorschrift:

Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel



Maximaal gebruikersgewicht: 300kg

Immedia SatinSheet

Permanent glijlaken om cliënten te verplaatsen in bed op een ergonomisch verantwoorde en comfortabele manier die decubitus voorkomt.


Permanent in bed

Een assortiment aan comfortabele glijlakens die permanent op het bed van de cliënt aanwezig kunnen blijven. Hierdoor is de hulp bij positioneren in bed veel minder belastend voor de verzorger en veel prettiger voor de cliënt. Immedia SatinSheet heeft een breed scala toepassingen waardoor er minder handen aan bed nodig zijn.




SatinSheet Systeem: Basislaken en Treklaken

Het SatinSheet In-bed-systeem kan in diverse combinaties worden ingezet. Alleen als Basislaken voor cliënten die hierdoor zichzelf eenvoudiger kunnen verplaatsen in bed of gecombineerd met een 2D of 4D treklaken voor een systeem met twee of vier glijrichtingen, voor cliënten met een meer intensieve zorgvraag. Het 4D treklaken is ook verkrijgbaar als SatinSheet In2Sheet. Dit is een incontinentie treklaken, bedoelt voor cliënten met incontinentie ongelukjes, overmatig zweten of wondvocht.

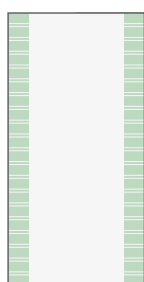


2Direction Basislaken

Start met een 2Direction Basislaken die rechtstreeks op het matras gelegd wordt. Het basislaken heeft een lage wrijving in het midden met twee glijrichtingen van links naar rechts. Op de rand van het basislaken is een strook met hoge wrijving waardoor de cliënt niet van het bed afglijdt.

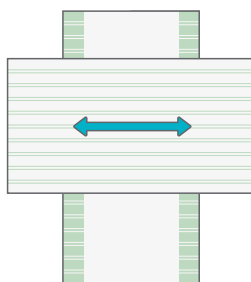

2Direction Treklaken

Plaats een 2Direction Treklaken voor de cliënt met (deels) afhankelijke zorg van links naar rechts (twee glijrichtingen). De treklakens gaan altijd in combinatie met een basislaken.

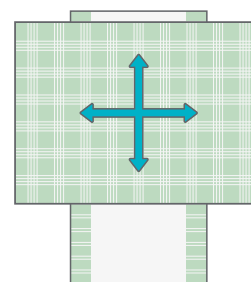

4Direction Treklaken

Plaats een 4D Treklaken voor een cliënt die afhankelijk is van zorg. De cliënt kan in alle richtingen (4-glijrichtingen) verplaatst worden. Het 4D treklaken is ook verkrijgbaar in een incontinentie variant. De treklakens gaan altijd in combinatie met een basislaken.



Meer weten ...

... over het gebruik van SatinSheet. Deze animatiefilm geeft handige tips voor het dagelijks gebruik van SatinSheet.



Immedia SatinSheet Set

Immedia SatinSheet kent een breed assortiment aan treklaken om te combineren met een basislaken. Hierin zijn veel mogelijkheden. Om de keuze eenvoudiger te maken zijn de meest ingezette combinaties ook verkrijgbaar in een kant-en-klare set. Een set bevat een Basislaken Maxi Corner en een 4D Treklaken Midi, waarmee een cliënt in alle richtingen verplaatst kan worden. Desgewenst ook verkrijgbaar in een incontinentie uitvoering.



EIM4115SH
Immedia SatinSheet 4Direction
Treklaken Midi met handgrepen



EIM4140SH
Immedia SatinSheet
In2Sheet 4Direction
Treklaken Midi met
handgrepen



EIM4237S SatinSheet SET EXTRA



EIM4231SRCNL SatinSheet Set



EIM4240S SatinSheet SET INCO

Hulp nodig bij de keuze van het juiste glijlaken?
Gebruik de Immedia Keuzehulp op pagina 12-13 voor
het kiezen van het juiste glijlaken of set.

Omschrijving

Immedia SatinSheet 2Direction Treklaken

		B x L (cm)	Art.nr.
Mini	+	200x100	EIM4116S
Midi	+	200x140	EIM4118S

Immedia SatinSheet 4Direction Treklaken

		B x L (cm)	Art.nr.
Midi	(Satin W147)	+	EIM4115S
Midi met handgrepen	(Satin W147)	+	EIM4115SH
Maxi	(Satin W147)	+	EIM4121S
Maxi met handgrepen	(Satin W147)	+	EIM4121SH

Omschrijving

Immedia SatinSheet In2Sheet 4Direction Treklaken

		B x L (cm)	Art.nr.
Mini	+	85x90	EIM4110S
Mini met handgrepen	+	85x90	EIM4110SH
Midi	+	120x140	EIM4140S
Midi met handgrepen	+	120x140	EIM4140SH

Omschrijving

Immedia SatinSheet 4Direction Treklaken Midi Set

		B x L	Art.nr.
SET INCO	incl EIM4107S + EIM4140SH		EIM4240S
SET	incl EIM4107S + EIM4115SH		EIM4231SRCNL
SET EXTRA	incl EIM4107S + EIM4115SH (2x)		EIM4237S

Immedia SatinSheet

Kussensloop

		B x L	Art.nr.
Kussensloop	+	70x60	EIM4117S

Specificaties

Materiaal: 55 % katoen / 45 % polyester

Satin: Polyester

Top: Polyester

Satin: Polyester

Vulling: 65% polyester / 35% rayon



Match bij kleur ● ● ● ● ● Volg de kleurcodering om het juiste basislaken met treklaken te combineren

max
200
kg

max
440
lbs

Onderzijde: Polyester met PU-coating

Lussen: Nylon

Max. gebruikersgewicht: 200kg




CE


Immedia 4WayGlide

Permanent glijmatras om (zwaarlijvige) cliënten te positioneren en te verplaatsen in bed.

Immedia 4WayGlide is een compleet in-bed systeem voor het positioneren en verplaatsen van (zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Door de zeer lage frictie is de cliënt gemakkelijk te verplaatsen en kan de cliënt zelf nog microbewegingen maken. Immedia 4WayGlide ligt permanent in bed en bestaat uit twee delen: een treklaken (Mattress) en een basislaken (NylonSheet) met een blokkeer-mechanisme voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen. Voor incontinentie ongelukjes, overmatig zweten en wondvocht is de TwinSheet4Glide set verkrijgbaar.

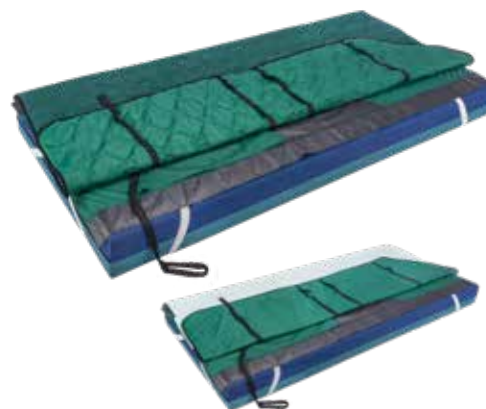


4WayGlide Systeem: NylonSheet en Mattress

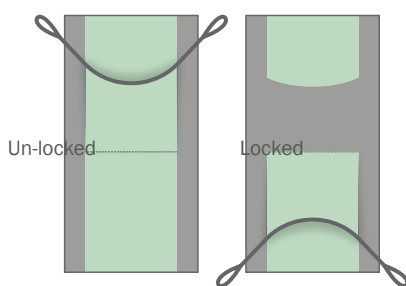

4WayGlide NylonSheet

Start met het basislaken (NylonSheet) dat goed past bij de breedte van het matras. Het basislaken heeft een laag wrijvingsoppervlak waardoor het 4WayGlide Mattress er gemakkelijk overheen glijdt. De elastieken op de hoeken worden gebruikt om te bevestigen aan je eigen matras.

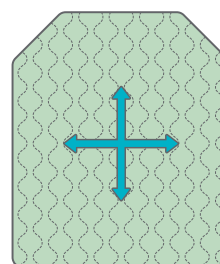

4WayGlide Mattress

Voeg het yreklaken(Mattress) toe voor draaien en positioneren in alle richtingen. Het treklaken heeft handgrepen voor extra grip en kunnen eventueel aan een tillift bevestigd worden. Het 4WayGlide Mattress wordt altijd gebruikt in combinatie met een 4WayGlide NylonSheet.



Meer weten ...

... over het gebruik van 4WayGlide? Deze animatiefilm geeft handige tips voor het dagelijks gebruik van 4WayGlide.



Omschrijving

Immedia 4WayGlide LPL (set, matras 80-90 cm)
Immedia TwinSheet4Glide (set, matras 80-80 cm)
Immedia 4WayGlide NylonSheet (matras 100-120 cm)
+ Immedia 4WayGlide Matras (matras 100-120 cm)

Artikelnr.

EIM4309
EIM4317
EIM110/200LPLNS
EIM180/200LPL

Materiaal

Top:
Vulling:
Onderzijde:

Polyester / Katoen
Polyester
Polyester met PU-Coating

Maximaal gebruikersgewicht: 200kg, Extra brede variant 300 kg

Keuzehulp in-bed-glijstelsysteem

Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklakens. De lakens blijven in bed liggen waardoor je fysieke belasting voor de zorgverlener voorkomt en het meer comfort biedt voor de cliënt. Voor elke fase is er een oplossing, van zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning. Ontdek welk glij- en treklaken het beste bij de situatie van uw cliënt past met behulp van onderstaande keuzehulp. De keuzehulp biedt een selectie van de meest gangbare glij- en treklakens uit het Immedia assortiment.

Fase 1: cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed

Hoe verplaatst de cliënt zich in bed bij het zijwaarts draaien?



Afzetten met voeten




SatinSheet Basislaken Midi Corner

Basislaken met katoenen met voeteneinde waarmee cliënt met de voeten kan afzetten.

EIM4157S



Schuiven met voeten

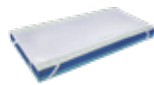

1. SatinSheet Basislaken Maxi Corner

Basislaken over volledige lengte matras.

EIM4107S




2. SatinSheet Basislaken Fit

Satijnen hoeslaken waarmee cliënt ook de benen gemakkelijk in en uit bed kan schuiven.

EIM4112S

Fase 2: zorgverlener of mantelzorger helpt cliënt

De cliënt kan in alle richtingen verplaatst worden

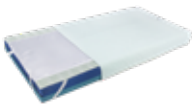

Ja


SatinSheet SET INCO

1x SatinSheet Basislaken
1x 4D Treklaken Midi In2Sheet



EIM4240S

Is absorberend glijmateriaal nodig?

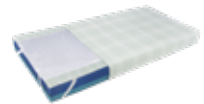

Nee



SatinSheet SET

1x SatinSheet Basislaken
1x 4D Treklaken Midi



EIM4231SRCNL

SatinSheet SET EXTRA

1x SatinSheet Basislaken
2x 4D Treklaken Midi



EIM4237S

Los bijbestellen

Inco
Basislaken Maxi Corner: EIM4107S
4D Treklaken Midi In2Sheet: EIM4140SH

Normaal
Basislaken Maxi Corner: EIM4107S
4D Treklaken Midi: EIM4115SH

Fase 3: cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners



Ja

Is absorberend glijmateriaal nodig?



Nee



TwinSheet4Glide Set

De incontinentieuitvoering van het in-bed-glijstelsysteem voor mensen met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Verplaatst in alle richtingen.



EIM4317

4WayGlide Set

Een in-bed-glijstelsysteem voor cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Verplaatst in alle richtingen.



EIM4309

Los bijbestellen Basis laken

- EIM85/200LPLNS,
Nylon sheet(normaal matras 80-90 cm breed)
- EIM110/200LPLNS,
Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

Treklaken

- EIM150/200N,
Twinsheet 4Glide pad Long(normaal matras 80-100 cm breed)

Los bijbestellen Basis laken

- EIM85/200LPLNS,
Nylon sheet(normaal matras 80-90 cm breed)
- EIM110/200LPLNS,
Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

Treklaken

- EIM140/200LPL,
Maxi matras (normaal matras 80-100 cm breed)
- EIM180/200LPL,
Maxi matras (extra breed matras 100-120 cm breed)

Accessoires

Positioneringswig

- EIM53/80NS (lang)
- EIM53NS (kort)



MultiGlide Gloves

- EIM35



SatinSheet Kussensloop

- EIM4117S



Advies & training

John Walker

Regio Noord
Telefoon: 06 31 75 85 93

Marjan Kiers

Regio Zuid
Telefoon: 06 50 24 34 00

Frank van Geffen

België
Telefoon: +31 (0)6 54 39 52 46

Ondersteunende accessoires

Veelzijdig assortiment aan accessoires voor extra ondersteuning bij kleine transfers, positioneren of ondersteuning van de cliënt



OneWayGlide lang velours
EIM38/8

Immedia OneWayGlide

De OneWayGlide is een glijmat met slechts één glijrichting, speciaal bedoeld om zitposities in (rol)stoelen te corrigeren of onderuitzakken te voorkomen. De materiaalkeuze voorkomt een voorwaartse glijbeweging en vergemakkelijkt een verplaatsing naar achteren. De OneWayGlide is verkrijgbaar in antislip en met een velours toplaag in diverse maten.

Immedia Transferplank

Een transferplank wordt gebruikt wanneer een kleine afstand overbrugd moet worden bij een zittende transfer. De gladde bovenzijde van de transferplank helpt de cliënt bij het maken van een transfer zelfstandig of met hulp. Het Immedia assortiment omvat diverse modellen transferplanken. Waaronder bijvoorbeeld de Immedia E-Board in diverse modellen of de Immedia Butterfly. Zie onze website voor meer informatie.



Butterfly Board
32 x 66 cm
EIM401



MultiGlide Glove
EIM35

Immedia MultiGlide Glove

De MultiGlide Glove is een slim hulpmiddel dat in verschillende situaties gebruikt kan worden om iemand te positioneren. Met de MultiGlide Glove is het eenvoudig om de hand tussen de cliënt en het matras of (zit)kussen te brengen voor o.a. kleine correcties van de ligpositie, verschuiven en straktrekken van lakens.

Immedia Positioneringswig

De Immedia Positioneringswig is een comfortabel wigvormig kussen dat je aan de zijkant van de cliënt plaatst in zijligging na het draaien, tijdens het rusten of tijdens het uitvoeren van hygiëne of wondverzorging, waardoor de verzorger zijn handen vrij heeft. Een wisselligging kan daardoor eenvoudig uitgevoerd worden. De positioneringswig kan worden gecombineerd met een 4WayGlide systeem, SatinSheet systeem of MultiGlide.



Positioneringswig
EIM53/80NS



BedString
EIM429

Immedia BedString

Immedia BedString helpt de actieve cliënt zichzelf in zittende positie te brengen. Zodat er bijvoorbeeld eenvoudig een kussen of een tilband aangebracht kan worden zodat de cliënt zich kan aankleden of positioneren in bed.

Immedia Sling

De Immedia Sling is een veelzijdig transfer-hulpmiddel dat de verzorger een ergonomische houding biedt. De Sling biedt extra hulp bij uiteenlopende transfers zoals verplaatsen in bed, transfer tussen zittende posities, ondersteuning van de benen bij het instappen in bed en het uitstappen.



Sling Long
EIM428



OneManSling
EIM460PU

Immedia OneManSling

De Immedia OneManSling maakt het mogelijk om met één verzorger de cliënt hoger in bed te verplaatsen. Bevestig de OneManSling aan de bovenzijde van het bed door middel van de lus en plaats met behulp van minimale inspanning, de cliënt hoger in het bed. Om zo weinig mogelijk wrijving te krijgen, is het raadzaam om een glijlaken onder de drukpunten te plaatsen.

Immedia SupportBelt

De SupportBelt is een krachtig hulpmiddel bij een transfer. De Supportbelt is op twee manieren te gebruiken: de verzorger draagt de supportbelt zodat de cliënt meer grip heeft bij de transfer of de cliënt draagt de supportbelt voor houvast met lopen of een transfer.



SupportBelt, maat M
EIM8013013



Rescuesheet
standaard/extra breed
EIM108088/EIM108089

Immedia Rescuesheet

De Immedia Rescuesheet blijft liggen onder het matras. In geval van nood kan een cliënt die gebonden is aan bed door middel van de Immedia RescueSheet samen met het matras snel geëvacueerd worden uit de kamer en van de trap af. Het materiaal is waterafstotend.

Oplossingen voor passieve transfers

Binnen Etac Transfer draait het om kwaliteit van leven voor uw cliënt met maximaal comfort, veiligheid en discretie!

Molift Smart 150

De Molift Smart 150 is een volwaardige, opvouwbare passieve lift. Geschikt voor cliënten die onvoldoende sta-functie en/of rompstabiliteit hebben maar wel flexibel willen zijn.



Compact en slim

De Molift Smart 150 is ontworpen om makkelijk te kunnen verrijden en transporteren naar de locatie waar hij nodig is. De lift is ontworpen voor gebruik in een verzorgingshuis en of op reis en voor eenvoudige opslag. De Molift Smart is in zijn geheel inklapbaar zonder gebruik van gereedschap en is gemakkelijk op te slaan.

Lichtgewicht en unieke constructie

Dankzij zijn lage gewicht, de compacte maten en de unieke constructie is de Molift Smart 150 makkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.

Comfortabele en veilige transfer

Het standaard 4-punts tiljuk zorgt voor een comfortabele en ruime tilpositie voor de cliënt.

Kenmerken



4-punts tiljuk

Het 4-punts tiljuk zorgt voor een comfortabele biomechanische kanteling en een ruimere tilpositie voor de cliënt.



Inklapbaar zonder gereedschap

Ontworpen voor verzorging thuis en op reis.

Accessoires



Transporttas

Voor bescherming en eenvoudig vervoeren van de tillift. Optioneel als accessoire te bestellen.



Transportkoffer

Voor bescherming en eenvoudig vervoeren van de tillift in bijvoorbeeld een vliegtuig (TSA approved). Optioneel als accessoire te bestellen.

Makkelijk tillen vanaf de grond

De Molift Smart 150 is zeer geschikt voor het gebruik bij valincidenten in bijvoorbeeld de thuiszorg of instellingen met verschillende locaties. Wanneer het hulpmiddel de cliënt alleen tot zitpositie brengt en daarna zelf moet opstaan/lopen, kan dat valincidenten veroorzaken. De Molift Smart 150 is dan een ideale oplossing om de cliënt weer terug in bed te tillen.

Het tilbereik van 27–168 cm biedt een uitstekende maximale tilhoogte maar maakt ook tillen vanaf de grond mogelijk.



Ideaal voor transfer met kinderen

Als aanvulling op de Smart 150 zijn er originele Molift tilbanden in vele varianten. De maten beginnen bij XXS (12-17 kg), daarom ook zeer geschikt voor het tillen van

Eenvoudig mee te nemen

De Molift Smart 150 is naast een volwaardige lift voor thuis ook een ideale lift om mee te nemen op reis als u een weekendje weggaat of op familiebezoek gaat.

De Molift Smart 150 is in zijn geheel opklapbaar, gemakkelijk verrijdbaar en door zijn lage gewicht eenvoudig mee te nemen in de auto. Eventueel is de lift ook in twee delen te splitsen voor een nog lager gewicht. De lift heeft een compact formaat.



Omschrijving	Artikelnr.	Totaal gewicht	Tilhoogte	270–1665 mm
Molift Smart 150	N10200	26 kg	Tilbereik	1410 mm
Softshell Transporttas	N3049177		Tilnelheid:	60 mm/sec
Transportkoffer	N0990200		Nominale prestatie:	40 transfers bij 75 kg en 500 mm
Accu NiMH 14,4 V - 2,2 Ah	N0541000		Acculaadtijd:	Ca. 3 uur
Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.			Reinigingsinstructie	
Servicesoftware			Reinigingsmiddelen moeten pH-neutraal zijn. Gebruik isopropylalcohol als desinfectie vereist is. Gebruik voor het reinigen geen schurende of bijtende middelen.	
Inbegrepen				
Materiaal				
Aluminium, staal				
Specificaties				
Lengte			1200 mm	
Beenhoogte			110 mm	
Breedte chassis/poten buiten			660 mm	
Breedte open boten binnen			925 mm	
Afmetingen ingeklapt			1160 x 475 x 360 mm	

Molift Mover 180

Allround verrijdbare passieve tillift. Geschikt voor cliënten tot 180 kg met onvoldoende sta-functie en/of rompstabiliteit

Compact en lichtgewichtste tillift

De Molift Mover 180 tillift is een lichtgewicht en compacte tillift die zowel geschikt is voor zorg in de thuissituatie als voor veeleisende zorginstellingen. Met het grote tilbereik van 27 - 163 cm kan vanaf de vloer tot op grote hoogte getild worden. De Mover is tevens verkrijgbaar als Mover 205 en 300, voor zwaardere cliënten.

Ergonomisch verantwoord in gebruik

Met Molifts duwbeugel kan de Molift Mover 180 tillift op verschillende plaatsen worden vastgehouden en geduwd, waardoor de belasting op de verzorgers zal verminderen. De tillift is uitgevoerd met een automatisch service-notificatie systeem, dat aangeeft wanneer de lift periodieke service onderhoud behoeft.

Kenmerken



Unieke duwbeugel

De unieke duwbeugel biedt de beste natuurlijke greep, waardoor goede ergonomie gewaarborgd is.



Eenvoudig te manoeuvreren

Met een totaal gewicht van slechts 32 kg en een uitgekiend ontwerp is de Molift 180 eenvoudig te manoeuvreren.



Verschillende opties

De lift kan eenvoudig gebruikt worden met een 2-punts of 4-punts tiljuk, eenvoudig uitwisselbaar zonder gereedschap.



Omschrijving	Artikelnr.	Materiaal	Nominale prestatie
Molift Mover 180 excl. tiljuk	N18000	Aluminium, staal	40 transfers bij 75 kg en 50 cm
Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.			
Servicesoftware		Tilhoogte	Tilsnelheid
Inbegrepen		4-puntstiljuk 265-1630 mm 355-1805 mm 375-1775 mm	40 mm/s 40 mm/s 27 mm/s



Molift Partner 255

Stevige en stabiele verrijdbare tillift met verticale tilkolom voor complexe situaties. Geschikt voor cliënten tot 255 kg met onvoldoende sta-functie en rompstabiliteit.

Verticaal tilpatroon en een uitstekend bereik

De Molift Partner 255 is een ideale oplossing voor tillen in zeer complexe situaties op afdelingen voor acute en kritische zorg in zowel ziekenhuizen als zorginstellingen. Met een uitstekend tilbereik van 37–179 cm maakt de Molift Partner 255 eenvoudig tillen mogelijk, zowel vanaf de grond als vanaf hoge oppervlakken. De combinatie van de rechte verticale kolom en het vaste tiljuk biedt uitstekende stabiliteit en zorgt ervoor dat de cliënt op de juiste afstand van de kolom blijft.

Laag gewicht en unieke constructie

Met een totaalgewicht van 42,5 kg is de Molift Partner 255 een van de lichtste in zijn klasse, terwijl hij dankzij het uitstekende ontwerp van de constructie en de wieloplossing makkelijk te manoeuvreren is. En dat met een maximaal gebruikersgewicht van 255 kg. Uitgerust met een milieuvriendelijke NiMH-accu.

Ook de Molift Partner 255 beschikt over het unieke 4-punts biomechanisch kanteljuk van Molift, wat tillen met maximaal comfort en privacy van uw cliënt mogelijk maakt.

Kenmerken



Optionele tiljukken

Het nieuwe Molift aluminium tiljuk is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande tilliften. Het lichtgewicht tiljuk sluit aan bij het lage totaalgewicht van de tillift en is bovendien eenvoudiger te verwisselen en te dragen door de verzorger.



Hoog maximaal gebruikersgewicht

De Molift Partner 255 heeft een maximaal gebruikersgewicht van 255 kg.



Omschrijving

Molift Partner 255 excl. tiljuk

Artikelnr.

NM13000

Totaal gewicht

42,5 kg

Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Servicesoftware

Inbegrepen

Accu

NiMH 26,4 V - 2,2 aH

Materiaal

Aluminium, staal

Specificaties

Lengte 1285 mm
 Beenhoogte 115 mm
 Breedte chassis/poten buiten 690 mm
 Breedte open boten binnen 1065 mm

Tilhoogte 390 – 1680 mm
 Tilbereik 1290 mm
 Tilsnelheid: 30 mm/sec
 Nominale prestatie: 50 transfers bij 75 kg en 500 mm
 Acculaadtijd: Ca. 3 uur

Reinigingsinstructie

Reinigingsmiddelen moeten pH-neutraal zijn. Gebruik isopropylalcohol als desinfectie vereist is. Gebruik voor het reinigen geen schurende of bijtende middelen.



Molift RgoSling Tilbanden

Ergonomisch ontworpen tilbanden voor comfortabel tillen voor zowel gebruiker als verzorger

Molift produceert tilbanden van hoge kwaliteit. RgoSling tilbanden zijn geschikt voor gebruik met een 4-punts tiljuk en voldoen aan de dagelijkse behoefte in de gezondheidszorg.

Glijdende lussen

De glijdende lussen zorgen voor een soepele, comfortabele en veilige overdracht van liggende naar zittende positie.

Kleurcodering

Kleurcodering van de lussen om de juiste pasvorm te kiezen

Comfortable polstering

De polstering in de rug- en been ondersteuning verdelen het gewicht waardoor de tilband comfortabeler zit voor de cliënt.

Gebruiksaanwijzing

Duidelijk en zichtbare informatie staat vermeldt op het label. Onderhoudsinformatie staat op de achterzijde van het label.

Geleidingsriem

Geleidingsriem helpt bij het positioneren tijdens het tillen.

Zakken

In de rug en ter hoogte van het bovenbeen zijn zakken aanwezig.



Ruim assortiment - RgoSlings

Het Molift RgoSling assortiment biedt oplossingen voor de meeste tilsituaties. De tilbanden zijn verkrijgbaar in diverse varianten en maten:

- RgoSling MediumBack: allround tilband
- RgoSling HighBack: met een hoge rug voor meer comfort en ondersteuning van het hoofd
- RgoSling Toilet: biedt optimale functies voor toiletbezoek
- RgoSling Amputee: extra veiligheid met geïntegreerde tailleband
- RgoSling Shadow: Verblijfsband met ondersteuning van het hoofd



RgoSling MediumBack
Padded



RgoSling HighBack
Net



RgoSling HighBack
Padded



RgoSling Toilet
LowBack

Molift kleurcodes maatvoeringen

XXS

12–17 kg

XS

17–25 kg

S

25–50 kg

M

45–95 kg

L

90–160 kg

XL

160–240 kg

XXL

230–300 kg



RgoSling Amputee
MediumBack



RgoSling
Shadow HighBack

Omschrijving

Artikelnr.

Molift RgoSling MediumBack Padded

Maat S	N1720120
Maat M	N1720130
Maat L	N1720140

Molift RgoSling HighBack Padded

Maat S	N1720220
Maat M	N1720230
Maat L	N1720240

Molift RgoSling HighBack Net

Maat S	N1720320
Maat M	N1720330
Maat L	N1720340

Omschrijving

Artikelnr.

Molift RgoSling Toilet LowBack

Maat S	N1720520
Maat M	N1720530
Maat L	N1720540

Molift RgoSling Amputee MediumBack

Maat S	N1721120
Maat M	N1721130
Maat L	N1721140

Molift RgoSling Shadow HighBack

Maat S	N1722920
Maat M	N1722930
Maat L	N1722940

Kijk voor meer opties en andere maten op Etac.nl

Plafondliftsystemen

Molift plafondliften vormen in combinatie met het Molift Railsysteem de perfecte oplossing om verzorgers te ondersteunen. Molift plafondliften zijn eenvoudig en veilig te gebruiken en bieden een oplossing voor alle transferbehoeften.

Molift Air

Sterke en comfortabele passieve plafondlift. Geschikt voor cliënten tot 300 kg die een oplossing nodig hebben voor verschillende transfers en/of weinig ruimte hebben voor een verrijdbare tillift.

Functioneel en goed ontworpen

De Molift Air is een innovatief, functioneel en goed ontworpen tilhulpmiddel voor gebruikers met een fysieke beperking. In combinatie met het Molift Railsysteem (MRS) is de Molift Air de oplossing voor alle tilsituaties binnen de gezondheidszorg. De Molift Air is uiteraard ook uitstekend inpasbaar in de thuissituatie.

Licht en flexibel

De Molift Air is geschikt voor zittende en horizontale transfers en bij sta- en looptrainingssituaties. Te monteren op een vaste plafondrail of op een draagbaar vrijstaand systeem. De Molift Air is eenvoudig te hanteren tijdens installatie en service, dankzij een zeer laag gewicht en de slimme snelkoppelfuncties. De Molift Air biedt flexibele oplossingen zoals afstandsbediening en mogelijkheden voor ruimte-naar-ruimte-transfers. Verder zijn er nog de veiligheidsfuncties, het grote tilbereik en de ruime keuze aan twee- en vierpunts tilkukken.



Kenmerken



Eenvoudig te installeren

Service en onderhoud zijn eenvoudig dankzij de innovatieve snelkoppelfunctie.



Molift Service Tool

Het automatische servicemeldingssysteem stelt vast wanneer de tillift service en onderhoud nodig heeft.

Accessoires



Acculader

Mogelijkheid voor wandlader of In-Rail-Charging (IRC - laden in de rail)



Diverse tilbanden

Kijk op pagina 20-21 voor het diverse assortiment tilbanden, Molift slings.

Omschrijving

Molift Air 200 - SLA batterij	N26200
Molift Air 200 - Lithium batterij	N26201
Molift Air 350 SLA batterij	N26350
Molift Air 350 Lithium batterij	N26351
Molift Air 350 Propulsion SLA	N26352
Molift Air 350 IRC and Propulsion SLA	N26353
Molift Air 350 IRC SLA batterij	N26354
Molift Air 500 SLA batterij	N26500

Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Artikelnr.

Maximaal gebruikersgewicht

Molift Air 200:	200 kg
Molift Air 350:	350 kg
Molift Air 500:	500 kg

Serviceware

Inbegrepen

Materiaal

Aluminium, staal

Acculader

100-240 V AC, 40-60 Hz

Tilbereik

3000 mm

Nooddaling

Mechanisch en elektrisch

Noodstop

Vanaf de grond te bereiken via koord



Meer Etac hulpmiddelen:



Toilethulpmiddelen



Badkamerhulpmiddelen



Rolstoelen en anti-decubitus zitkussens



Zit- en wandelvoorzieningen



Douchehulpmiddelen



Sta-hulpmiddelen



Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

Kijk ook op www.etac.nl

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: +31 (0)513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl


Creating Possibilities