



# Molift EvoSling lyftselar

Komfort, funktion  
och säkerhet

 **etac**<sup>®</sup>





# Molift EvoSling lyftselar

Molift som har tillverkat högkvalitativa lyftar och lyftselar i generationer är i dag en del av Etac. Kvalité, komfort och säkerhet är ledorden när produkterna utvecklas och vi erbjuder ett brett sortiment av olika lyftseldmodeller och storlekar.

## Vilka behov har brukaren?

För den som behöver hjälp med att förflytta sig är det viktigt att lyftselen är både bekväm och säker. Lyftselen ska underlätta förflyttningar och möta brukarens behov. Lyftselen skall vara skön och trygg, ha bra funktioner och vara säker.

## Komfort, funktion och säkerhet

Våra lyftselar är utvecklade i samarbete med vårdgivare och brukare för att möta kraven som ställs på funktion, komfort och säkerhet. Lyftseldarna ska underlätta förflyttningar, vilket innebär att de ska vara både sköna och trygga samtidigt som de ska vara enkla att arbeta med.

Våra basmodeller klarar de vanligaste typerna av förflyttning och passar de flesta brukare. De finns i tre olika rygghöjder; HighBack, MediumBack och LowBack. Vi vet att användarna kan ha många olika behov och har därför tagit fram ytterligare modeller med specifika egenskaper. EvoSling Hygiene och EvoSling Ampu är anpassade för särskilda behov.

Våra lyftselar är konstruerade så att de fördelar vikten och trycket jämnt för maximal säkerhet och komfort.

## Individuell utprovning

Vi rekommenderar individuell utprovning och erbjuder ett brett sortiment av olika modeller och storlekar. Som stöd vid utprovningen erbjuder vi ett utprovningsprotokoll.

# Detaljer

## Flexibilitet

Avståndet till lyftbygeln samt brukarens sittvinkel kan justeras tack vare att det finns flera lyftöglor på både huvud och benstöd.

## Färgmärkning

Färgmärkning på lyftöglorna underlättar att hitta rätt inställningar.

## Polstring

Polstring i rygg- och benstöd fördelar tyngden över en större yta och skapar därmed bättre komfort för brukaren.

## Tre olika rygghöjder

HighBack, MediumBack och LowBack.

## Bälte

EvoSling Hygiene har ett bälte för extra hög säkerhet som dessutom har antihalkskydd på insidan.

## Etikett

Tydlig och praktisk information på den synliga etiketten. Tvättråd och teknisk information ligger skyddad bakom.

## Styrband

Styrband underlättar positionering under lyft.

## Appliceringsficka

Fickan i ryggslut samt på benstöden underlättar applicering.



EvoSling  
MediumBack  
Padded.



## Molift EvoSling



EvoSling Comfort MediumBack



M

## Detaljinformation om EvoSling lyftselar

### Rekommenderad brukarvikt

XS	17 - 25 kg
S	25 - 50 kg
M	45 - 95 kg
L	90 - 160 kg
XL	160 - 240 kg
XXL	230 - 300 kg

### Material

Polyester  
PE-skum (polstrade modeller)

### Tvättinstruktioner



Tvätt temperatur 60-85 °C / 140-185 °F

Vid tvätt i högsta temperatur sker en snabbare förslitning av materialet.

### Färgkod



max 300 kg  
max 660 lbs






## Informativ och tydlig märkning

På den stora etiketten har vi placerat den information som är viktig för dagligt behov. Tvättråd, serienummer och annan teknisk information finns bakom etiketten i en ficka som skyddar mot mekanisk nötning i samband med tvätt.

## Periodisk inspektion


Lyftselen har en etikett där man kan markera när periodisk inspektion har utförts, den finns placerad i etikettfickan. Genom att markera tidpunkt för första användning på etiketten kan man planera för när den första inspektionen skall utföras.

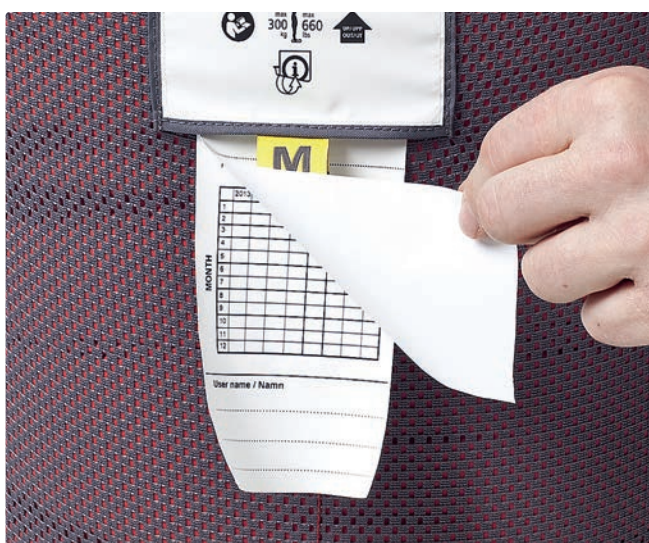


## Material

Lyftseldarna av polyester är slitstarka och tåliga. Materialet är följsamt och lättskött med en smutsavvisande yta.

Lyftseldarna i polyesternät är slitstarka, tåliga och följsamma. Materialet ger en god ventilation.

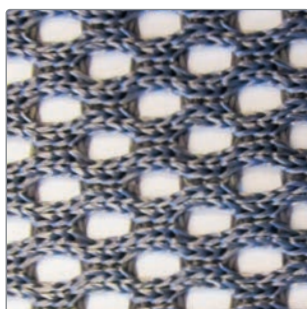

Polyester net

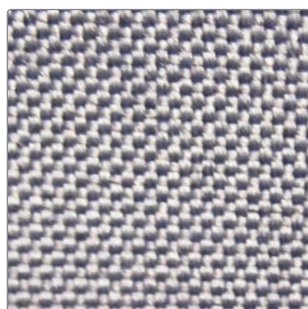

Polyester

## Innehåll

Molift EvoSling HighBack.....	7
Molift EvoSling MediumBack .....	8
Molift EvoSling LowBack.....	9
Molift EvoSling Hygiene .....	10
Molift EvoSling Ampu MediumBack.....	11
Molift EvoSling Comfort MediumBack.....	12
Molift EvoSling Shadow HighBack .....	13
Molift EvoSling tillbehör.....	14



# Molift EvoSling HighBack

En basmodell för brukare som behöver mycket stöd

## Bekvämt stöd

EvoSling HighBack ger stöd för hela ryggen och har ett bekvämt huvudstöd. Lyftselen passar de flesta brukare, även brukare med låg bål- och huvudstabilitet.

EvoSling HighBack passar vid lyft till och från liggande position och vid lyft från golv. Lyftselen ger en bekväm tillbakalutad sittställning.

Fickan i rygglutet och på benstöden underlättar applicering av lyftselen.

## Två varianter

Molift EvoSling HighBack finns i två varianter. Polyester med polstring i rygg och benstöd ① samt i en mjuk polyesternät med polstrade benstöd och polstrat huvudstöd ②.




EvoSling HighBack Net Padded




### Underlättar placering

Lyftselen i polyesternät har en röd söm mitt bak för att underlätta att placera lyftselen symmetriskt.


### Padded ①

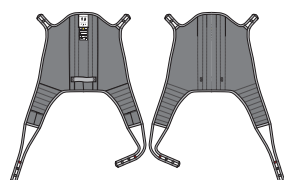

### Net Padded ②

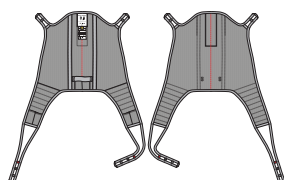

### Mått

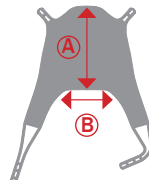

Storlek	① Padded *	② Net Padded **
XS	1722810	1722710
S	1722820	1722720
M	1722830	1722730
L	1722840	1722740
XL	1722850	1722750
XXL	1722860	1722760

\*Polstrad \*\*Polstrad polyesternät

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	70 cm	30 cm
S	80 cm	35 cm
M	93 cm	40 cm
L	100 cm	47 cm
XL	105 cm	54 cm
XXL	110 cm	60 cm



# Molift EvoSling MediumBack

En basmodell för brukare som har huvudkontroll men som behöver stöd för hela ryggen

## Stöd för hela ryggen

EvoSling MediumBack är en bra basmodell som passar i de vanligaste lyftsituationerna. Lyftselen ger en bekväm upprätt sittställning med stöd för hela ryggen.

Brukaren placerar armarna på insidan av lyftselen.


En ficka i ryggslut och på benstöden underlättar appliceringen av lyftselen. Lyftselen i polyesternät har en röd söm mitt bak för att underlätta placeringen av lyftselen symmetriskt.

## Två varianter


Molift EvoSling MediumBack finns i två varianter. Polyester med polstring i rygg och benstöd ① samt en i mjuk polyesternät med polstrade benstöd ②.




**Padded ①**

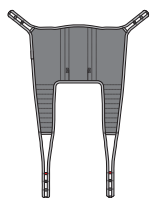

**Net Padded ②**

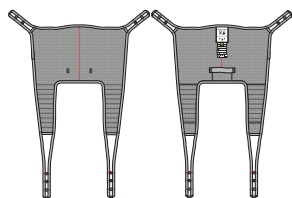

**Mått**

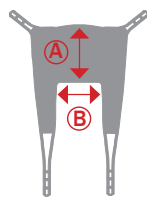

Storlek	① Padded*	② Net Padded**
XS	1723010	1723110
S	1723020	1723120
M	1723030	1723130
L	1723040	1723140
XL	1723050	1723150
XXL	1723060	1723160

\*Polstrad \*\*Polstrad polyesternät

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	54 cm	30 cm
S	56 cm	37 cm
M	60 cm	49 cm
L	67 cm	57 cm
XL	70 cm	72 cm
XXL	73 cm	81 cm



# Molift EvoSling LowBack

En basmodell för aktiva brukare med god bålstabilitet


## Stöd upp till skuldran

EvoSling LowBack är en bra basmodell som ger stöd upp till skuldran. Lyftselen ger en bekväm sittställning och brukaren kan placera armarna på insidan eller utsidan.

Lyftselen är enkel att placera tack vare en ficka i rygglutet och fickor på benstöden. Lyftselen i polyesternät har en röd söm mitt bak för att underlätta placeringen av lyftselen symmetriskt.


## Två varianter

Molift EvoSling LowBack finns i två varianter. Polyester med polstring i rygg och benstöd ① samt en i mjuk polyesternät med polstrade benstöd. ②

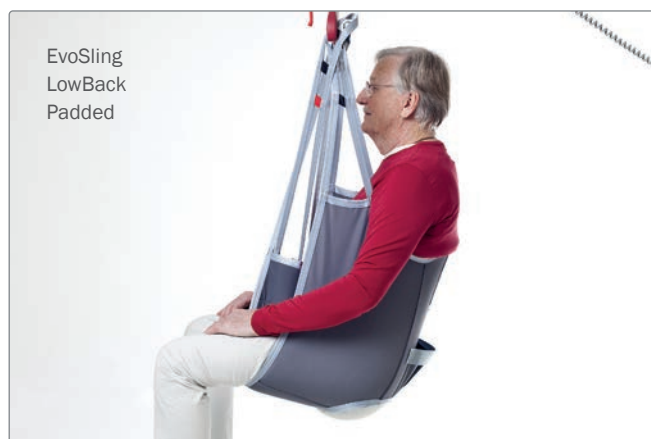


**Padded ①**

**Net Padded ②**

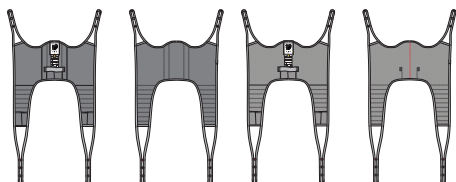

**Mått**

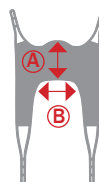

Storlek	① Padded*	② Net Padded**
XS	1722310	1722510
S	1722320	1722520
M	1722330	1722530
L	1722340	1722540
XL	1722350	1722550
XXL	1722360	1722560

\*Polstrad \*\*Polstrad polyesternät

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	41 cm	40 cm
S	43 cm	43 cm
M	44 cm	48 cm
L	47 cm	55 cm
XL	51 cm	62 cm
XXL	55 cm	70 cm

# Molift EvoSling Hygiene

För brukare med god bålstabilitet och muskeltonus

## Enkel att placera

EvoSling Hygiene har låg rygg och en stor benstödsöppning för att underlätta av- och påklädning i samband med toalettbesök.

## Appliceringsfickor

Molift EvoSling Hygiene är tillverkad i polyester och har polstring i rygg och benstöd. Appliceringsfickorna på benstöden underlättar placering av benstöden.

## Extra trygghet


EvoSling Hygiene har ett bälte för ökad trygghet i samband med lyftet.



EvoSling Hygiene



### Padded

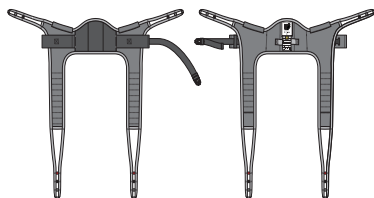


#### Storlek

Storlek	Padded*
XS	1722210
S	1722220
M	1722230
L	1722240
XL	1722250
XXL	1722260

\*Polstrad

### Mått

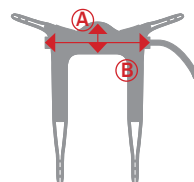

#### Storlek

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	29 cm	35 cm
S	33 cm	46 cm
M	33 cm	52 cm
L	33 cm	70 cm
XL	34 cm	73 cm
XXL	35 cm	76 cm



# Molift EvoSling Ampu MediumBack

För brukare med benamputation eller som har låg muskeltonus

## Trygg och bekväm

EvoSling Ampu MediumBack har en smal benstöds-öppning och en axelhög rygg. Lyftselens benstöd kopplas omlott under benen. Benstödsbanden träs igenom bandstyrningsöglan för att hålla ihop benstöden. En liten benstödsöppning minimerar risken för att brukaren glider igenom lyftselen.


En ficka i rygglut och på benstöden underlättar appliceringen av lyftselen. Lyftselen har en röd söm mitt bak för att underlätta placeringen av lyftselen symmetriskt.

## Antihalk för ökad trygghet


EvoSling Ampu är tillverkad av polyesternät och har ett antihalktyg på insidan vid stussen för att ge ökad trygghet i samband med lyftet. Brukaren får en bekväm tillbakalutad sittställning. Benstöden är polstrade för bästa komfort.



EvoSling Ampu  
MediumBack

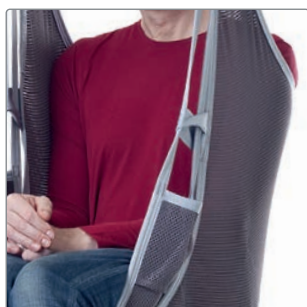

### Net Padded

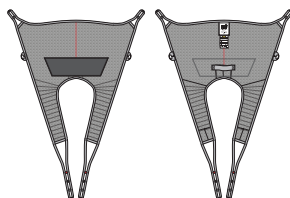


### Storlek

Storlek	Net Padded*
XS	1723210
S	1723220
M	1723230
L	1723240
XL	1723250
XXL	1723260

\*Polstrad polyesternät

### Mått

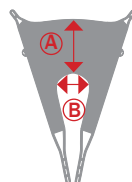

### Storlek

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	47 cm	21 cm
S	52 cm	26 cm
M	63 cm	32 cm
L	77 cm	42 cm
XL	90 cm	48 cm
XXL	100 cm	54 cm

# Molift EvoSling Comfort MediumBack

En helsele för brukare med särskilt behov av stöd

## Stöd under hela sittytan

EvoSling Comfort MediumBack Net är en helsele utan delade benstöd med axelhög rygg. Lyftselen ger brukaren stöd under hela sittytan och är lämplig om brukaren har ledbesvär eller är smärtekänslig.

Lyftselen placeras under brukaren i liggande position. Den är tillverkad av polyesternät som ger god ventilation och kan lämnas kvar i rullstolen under brukaren.

## Justerbar sittvinkel

Sittvinkeln kan justeras tack vare att det finns flera lyftögglor på både huvud och benstöd.

Lyftselen har en röd söm mitt bak för att lättare kunna placera lyftselen symmetriskt.




EvoSling Comfort  
Medium Back



### Styrband

Styrbanden är integrerade i kantbanden för att lyftselen ska vara bekväm.


### Net

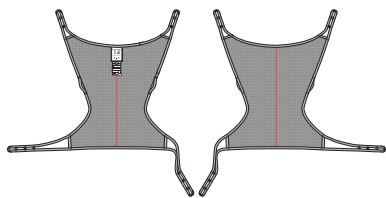

Storlek	Net*
XS	1722610
S	1722620
M	1722630
L	1722640
XL	1722650
XXL	1722660

\*Polyesternät

### Mått

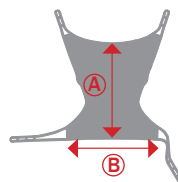

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XS	77 cm	85 cm
S	90 cm	86 cm
M	102 cm	94 cm
L	115 cm	113 cm
XL	118 cm	120 cm
XXL	120 cm	126 cm



# Molift EvoSling Shadow HighBack

En smidig lyftsele som formar sig efter kroppen

## Kan lämnas kvar i rullstol och sittskal

EvoSling Shadow HighBack är en hög lyftsele med delade benstöd som är bekväm och följsam. Modellen passar brukare med extra behov av stöd eftersom den anpassar sig efter kroppen.

EvoSling Shadow passar många lyftsituationer men är speciellt lämplig vid förflyttning till rullstol/ rullstol med formgjuten sits då lyftselen behöver lämnas kvar under brukaren.

EvoSling Shadow har sex upphängningsband med flera upphängningsöglor vilket gör lyftselen flexibel. Sittvinkel och huvudstöd kan justeras för den individuella brukaren och armarna kan placeras innanför eller utanför lyftselen.

## Formar sig efter kroppen


EvoSling Shadow HighBack är tillverkad i polyesternät som är följsamt och släpper igenom fukt och värme. Modellen har inga placeringsfickor eller polstring. Kantbandet är extra tunt. EvoSling Shadow kan lämnas kvar i rullstol eller sittskal efter förflyttningen.

Huvudstödet är justerbart i tre olika lägen. De större storlekarna, M-XL har ett skålat huvudstöd.



EvoSling Shadow HighBack

### Net

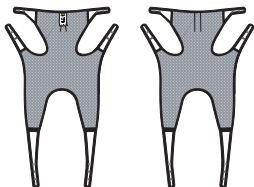


### Storlek

Storlek	Net*
XXS	1723900
XS	1723910
S	1723920
M	1723930
L	1723940
XL	1723950


\*Polyesternät

### Mått

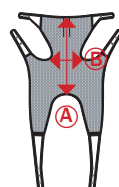

### Storlek

Storlek	(A) Rygghöjd	(B) Bredd
XXS	65 cm	28 cm
XS	71 cm	30 cm
S	78 cm	31 cm
M	90 cm	33 cm
L	98 cm	40 cm
XL	102 cm	51 cm

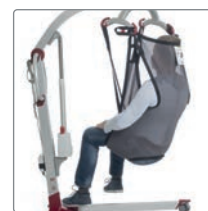

# Molift EvoSling tillbehör



## Molift EvoSling Support

Tillbehör till lyftselar utan huvudstöd

Huvudstödet fästs i lyftselen och längden kan justeras steglöst tack vare plastspännet. Den ger brukaren ett behagligt stöd för huvudet och kan vara ett bra komplement när brukaren får ett ökat behov av stöd.

Produkt	Art.nr
Molift EvoSling Support	1723400



## Molift EvoSling Soft Padding

För tryckkänsliga brukare

EvoSling Soft Padding är tryckavlastande polstringshylsor som träs på bendelarna på lyftselar med delade benstöd.

Produkt (säljs i par)	Storlek	Art.nr
Molift EvoSling Soft Padding delade benstöd, 2 st	XS-M	1723710
Molift EvoSling Soft Padding delade benstöd, 2 st	L-XXL	1723740
Molift EvoSling Soft Padding Hygien delade benstöd 2 st	XS-XXL	1723810




## Molift EvoSling Extension Loop

Band för enklare anpassning

Används för att förlänga lyftbanden eller för att hålla ihop benstöden på lyftselar med delade benstöd.

Produkt	Storlek	Art.nr
Molift EvoSling Extension loop	16 (+9) cm	1723510
Molift EvoSling Extension loop	25 (+18) cm	1723520

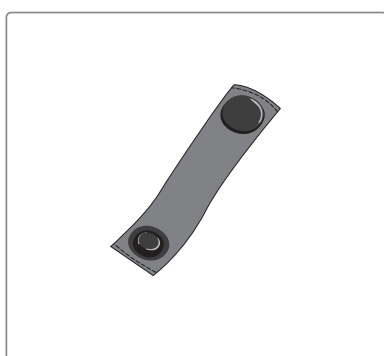

## Molift Strap Marker

Markering av vald lyftögla för lyftbanden till huvudstöd respektive benstöd. Märk ut de lyftöglo som valts vid den individuella utprovningen av lyftselen.

Produkt (säljs i par)	Art.nr
Etac Molift Strap Marker	1723600



# Molift EvoSling tillbehör



## Molift EvoSling FlexiStrap

### Undvik tunga lyft

Molift EvoSling FlexiStrap används för att enkelt och bekvämt lyfta ett ben eller en arm vid omvårdnad eller behandling. Lyftbandet tillverkas i polstrad polyester och finns i två bredder. Det finns en ficka på den ena sidan av bandet som underlättar placeringen.

Produkt	Storlek	Art.nr
Molift EvoSling FlexiStrap, standard	15 x 95 cm	1723310
Molift EvoSling FlexiStrap, wide	25 x 95 cm	1723330



## Immedia SlingOn

### När brukaren inte kan vändas på sidan

Om man kombinerar en "Immedia SlingOn" med en lyftsele, kan man placera lyftselen direkt under brukaren, dvs utan att först vända brukaren över på sidan.

Produkt	Storlek	Art.nr
Immedia SlingOn - Small	80 x 100 cm	IM437/S
Immedia SlingOn - Medium	80 x 170 cm	IM438
Immedia SlingOn - Large	120 x 150 cm	IM437





”Alla ska kunna leva ett fritt och oberoende liv och fullfölja sina drömmar  
oavsett fysiska omständigheter.”

Du hittar också nyheter och mer information på [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.se](mailto:info@etac.se) [www.etac.se](http://www.etac.se)

  
Creating Possibilities