



***molift***<sup>®</sup>

# Molift UnoSling

Säkra och bekväma lyftselar för engångsbruk

# Molift UnoSling

Molift UnoSling är sortiment av lyftselar för engångsbruk (SPU\*), utvecklade för att möta det växande behovet inom vården där förebyggande av infektionsrisk är av yttersta vikt.

## Fördelar med SPU-produkter

SPU-produkter är viktiga för att förhindra smittspridning. De kan också möjliggöra kostnadsbesparingar och en mer effektiv drift för anläggningen genom att undvika logistik- och tvättkostnader. Det leder också till enklare förvaring av produkter som alltid är redo att användas.

## Höga krav på smittskydd

Eftersom Molift UnoSling kan följa patienten under hela vistelsen på sjukhuset, och kasseras om den är smutsig, skadad eller när patienten inte längre är i behov av den, är de en effektiv lösning för att förhindra smittspridning.

## Starkt och säkert material

Molift UnoSling är tillverkad av ett starkt nonwoven-material som inte är tvättbart.

## Modeller med specifika egenskaper

Även om Molift UnoSling är engångsprodukter är de fortfarande designade med hög kvalitet, patientkomfort och säkerhet i åtanke. Flera modeller finns tillgängliga för att möta patientens olika krav, UnoSling HighBack, UnoSling Toilet, UnoSling Repositioning Sheet, UnoSling Ambulating Vest och UnoSling LimbLift.

\* SPU = Single Patient Use





**Inte tvättbar**

Symbolen kommer att ändra utseende om produkten av misstag tvättas.



**2-punkts eller 4-punkts**


Används med antingen 2-punkts eller 4-punkts lyftbygel.

**Engångs och enpatientsanvändning**

För att förhindra smittspridning, kasseras lyftselen när den är nedsmutsad eller när patienten inte längre behöver den.

**Etikett med patientens namn**

Alla produkter har en stor tydlig etikett med praktisk information. Storleken visas tydligt och det är enkelt att lägga till patientens namn och datum för första användning, vilket ger säkrare användning.

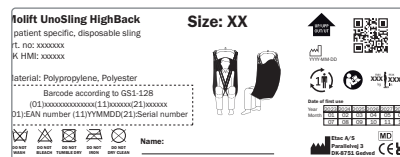


**Material**



**Non-woven**

Polypropen non-woven. Gäller alla Molift UnoSling förutom Molift UnoSling Repositioning Sheet som är tillverkad av polyester.

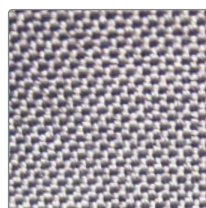

**Polyester**

Standardtyget i polyester är hållbart och slitstarkt. Materialet är lättskött och har en smutsavvisande yta.

# Molift UnoSling HighBack

Lämplig för de flesta patienter i vanliga lyftsituationer.

Molift UnoSling HighBack passar de flesta patienter i vanliga lyftsituationer, som mellan säng och rullstol. Lyftselen kan följa patienten under hela vistelsen på sjukhuset.

Molift UnoSling HighBack är lämplig för användning med antingen 2-punkts eller 4-punkts lyftbygel.

- Passar de flesta patienter i vanliga lyftsituationer
- Förflyttning till/från liggande eller sittande ställning
- Stöd för hela ryggen och huvudet
- Lämplig tillsammans med 2- eller 4-punkts lyftbygel




Lämplig tillsammans med 2- eller 4-punkts lyftbygelbygel

## Molift UnoSling HighBack



## Mått

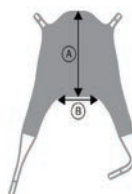

| Storlek | Styck / förpackning | Artikelnummer |
|---------|---------------------|---------------|
| S       | 20                  | 3060020       |
| M       | 20                  | 3060030       |
| L       | 20                  | 3060040       |
| XL      | 20                  | 3060050       |
| XXL     | 10                  | 3060060       |

Max användarvikt 350 kg

| Storlek | (A) Rygghöjd | (B) Bredd |
|---------|--------------|-----------|
| S       | 80 cm        | 35 cm     |
| M       | 93 cm        | 40 cm     |
| L       | 100 cm       | 47 cm     |
| XL      | 105 cm       | 54 cm     |
| XXL     | 110 cm       | 60 cm     |

# Molift UnoSling Toilet

För patienter med bra bålstabilitet och muskeltonus.

Molift UnoSling Toilet är en lyftsele med låg rygg och bred benöppning för att underlätta på- och avklädning vid toalettbesök. Lyftselen är lätt att applicera och ta bort och har ett bälte för ökad säkerhet vid lyft. Insidan av lyftselen har ett halkfritt foder för att hålla lyftselen på plats.

Lyftselen har en grön söm i ryggen, som en guide för att lyftselen placeras i centrerad position.

- För patienter med bra bålstabilitet och muskeltonus
- Underlättar på- och avklädning
- Lätt att applicera och ta bort
- Säkerhetsbälte för extra säkerhet vid förflyttning
- Lämplig tillsammans med 2- eller 4-punkts lyftbygel



Säkerhetsbälte för extra säkerhet vid lyft

| Molift UnoSling Toilet |                     |               |         | Mått         |                             |  |
|------------------------|---------------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|--|
|                        |                     |               |         |              |                             |  |
| Storlek                | Styck / förpackning | Artikelnummer | Storlek | (A) Rygghöjd | (C) Rekommenderat midjemått |  |
| S                      | 5                   | 3090020       | S       | 33 cm        | 76-100 cm                   |  |
| M                      | 5                   | 3090030       | M       | 33 cm        | 85-110 cm                   |  |
| L                      | 5                   | 3090040       | L       | 33 cm        | 94-120 cm                   |  |
| XL                     | 5                   | 3090050       | XL      | 34 cm        | 115-140 cm                  |  |

Max användarvikt 350 kg



# Molift UnoSling Ambulating Vest

Lyftväst för säker rehabilitering, såsom gångträning, promenader och balansträning.

Molift UnoSling Ambulating Vest är designad för patienter i behov av trygg och säker rehabilitering såsom gångträning, stående samt balansträning. Den levereras med dubbla spännen och ett halkfritt material inuti bältet. Den innehåller även valfria ljumskband för att förhindra att västen glider upp och ur position.


Lyftvästen har en grön söm i ryggen, som en guide för att västen placeras i centrerad position.

- För en säker rehabilitering och tidig mobilisering
- Dubbla spännen och halkfritt foder för extra säkerhet
- Ljumskband för att förhindra att västen glider upp
- Lämplig tillsammans med en 2-punkts lyftbygel




Ljumskband för extra säkerhet

## Molift UnoSling Ambulating Vest

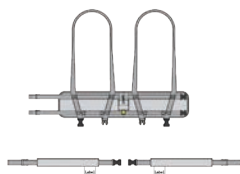

## Mått

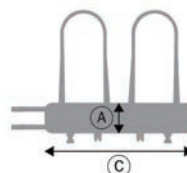

| Storlek | Styck / förpackning | Artikelnummer | Storlek | (A) Rygghöjd | (C) Rekommenderat midjemått |
|---------|---------------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|
| S       | 5                   | 3070020       | S       | 20 cm        | 72-92 cm                    |
| M       | 5                   | 3070030       | M       | 20 cm        | 90-110 cm                   |
| L       | 5                   | 3070040       | L       | 21 cm        | 105-125 cm                  |
| XL      | 5                   | 3070050       | XL      | 21 cm        | 123-145 cm                  |

Max användarvikt 350 kg





# Molift UnoSling StandUp

Engångslyftsele som lämpar sig för aktiva uppresningar, sitt-till-stå

Molift UnoSling StandUp är lämplig för patienter som behöver stöd av ett uppresningshjälpmedel för att förflytta sig från en sittande position till en annan, som till/från säng, rullstol eller toalett. Lyftselen fördelar vikten över ryggen och ger bekvämt stöd för patienten genom hela uppresningen. Ett uppresningshjälpmedel är också en användbar produkt i tidig rehabilitering. Insidan av lyftselen har ett halkfritt foder för att hålla lyftselen på plats.

Molift UnoSling StandUp är designad för användning med ett uppresningshjälpmedel tillsammans med en 2-punkts lyftbygel.

- Användbar för aktiva uppresningar
- Bältet och det halkfria fodret ger extra säkerhet
- Fördelar vikten över ryggen, för ett bekvämt stöd



Lämplig tillsammans med en 2-punkts lyftbygel


## Molift UnoSling StandUp



| Storlek | Styck / förpackning | Artikelnummer |
|---------|---------------------|---------------|
| S       | 5                   | 3080020       |
| M       | 5                   | 3080030       |
| L       | 5                   | 3080040       |
| XL      | 5                   | 3080050       |

Max användarvikt 350 kg

## Mått

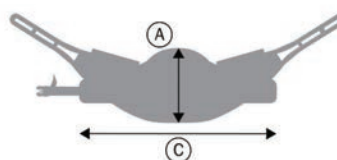

| Storlek | (A) Rygghöjd | (C) Rekommenderat midjemått |
|---------|--------------|-----------------------------|
| S       | 34.5 cm      | 70-95 cm                    |
| M       | 35 cm        | 90-110 cm                   |
| L       | 35 cm        | 100-120 cm                  |
| XL      | 35 cm        | 110-140 cm                  |

# Molift UnoSling LimbLift

Lyftband för engångsbruk för att lyfta och stödja armar och ben

Molift UnoSling LimbLift är ett lyftband designat för olika användningsområden som att lyfta och hålla i en arm eller ett ben. Det kan användas i vårdssituationer som fotvård eller undersökning och behandling av trycksår. Den finns i två bredder.

Lyftbandet kan följa patienten under hela vistelsen på sjukhuset.

- Används vid behandling, tvätt eller undersökning
- För ett ben, en arm eller andra delar av kroppen
- Minskar belastningen för vårdaren
- Ficka på ena sidan för att underlätta applicering



## Molift UnoSling LimbLift



## Mått



| Storlek  | Styck / förpackning | Artikelnummer |
|----------|---------------------|---------------|
| Standard | 10                  | 3100020       |
| Wide     | 10                  | 3100030       |

Max användarvikt 200 kg

| Storlek  | (A) Längd | (B) Bredd |
|----------|-----------|-----------|
| Standard | 95 cm     | 15 cm     |
| Wide     | 95 cm     | 25 cm     |

# Molift UnoSling Repositioneringslakan

Lämplig för ompositionering i sängen och förflyttning mellan liggande ytor

Molift UnoSling Repositioneringslakan är lämplig för en mängd olika vårdsituationer för att göra förflyttningar och ompositionering snabbare, enklare och säkrare för både vårdare och patient. Till exempel att vända sängbundna patienter, lyfta patienter högre upp i sängen och för bariatrisk vård.


Repositioneringslakanet kan följa patienten under hela vistelsen på sjukhuset.

- Kan användas för en mängd olika vårdsituationer för sängliggande patienter
- För att vända och flytta högre i säng
- Kan ligga kvar i sängen under patienten
- Lämplig för bariatrisk vård




Tydlig märkning för upp/ner och topp/botten

## Molift UnoSling Repositioning Sheet

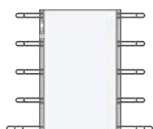

## Mått

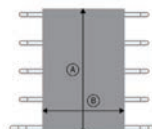

| Storlek  | Styck / förpackning | Artikelnummer |
|----------|---------------------|---------------|
| One size | 10                  | 3200020       |

Max användarvikt 500 kg

| Storlek  | (A) Längd | (B) Bredd |
|----------|-----------|-----------|
| One size | 215 cm    | 135 cm    |



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

**Etac Sverige AB**

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities