

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

Etac Fotplattesystem



Som ett led i vårt arbete att göra rullstolssortimentet och tillbehören ännu mer modulära lanserar vi nu ett nytt sortiment. Det består av fotplattor, hel fotplatta, fotlåda samt knästödd.

Förlängda fotplattor

Kommer i tre storlekar och monteras på standard fotplattor.

- Small - 250 x 225 mm. OBS! Hel platta.
- Medium - 150 x 225 mm, vänster och höger.
- Large - 200 x 225 mm, vänster och höger.

Inkluderar: Förlängd fotplatta, skruvar och bultar, 30 cm anti-halk tape.

Generellt:

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision!

Alla fotplattor kräver borring.

Bormall inkluderas.

Art. nr.	Small	Medium	Large
28774	Prio 40-45 cm		
	Cross 35-50 cm		
28775-1/2		Prio 40-45 cm	
		Cross 40-47,5 cm	
28776-1/2			Prio 50-55 cm
			Cross 50-52,5 cm



Förlängd fotplatta

Medium förlängd fotplatta monterad.



Fotplatta delad

Fotplattan i storlekarna Medium och Large (vänster och höger) kan användas separat eller i par. De kan länkas ihop som en plattform, se ovan.

2021-10-01 ID: P35142

1/6

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Hel fotplatta barn

Art. nr.	Small
28774	Cross SB 35-50 cm

Ersätter hel fotplatta barn:

- 26306 Fotplatta hel barn 35 cm
- 26307 Fotplatta hel barn 37,5 cm

Fotplatta liten, inkl styrning

Fungerar även med snäva benstöd och breddat länkhjulsfäste.

SB: 35-37,5 = 5" länkhjul

SB: 40-50 = 6,5" länkhjul

Ersätter fotplatta barn.



Add-on sideskydd
Art. nr. 28772

Sidoskydd för fotplatta


Sidoskyddet förhindrar att foten kommer i kontakt med länkhjulet.

Add-on plattform

För att åstadkomma hel plattform behövs följande:

- 1 vänster och 1 höger förlängd fotplatta.
- 1 styrning inkl skruvar.

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen. Den hela plattformen kan kombineras med valfritt benstöd (även vinkelställbara).

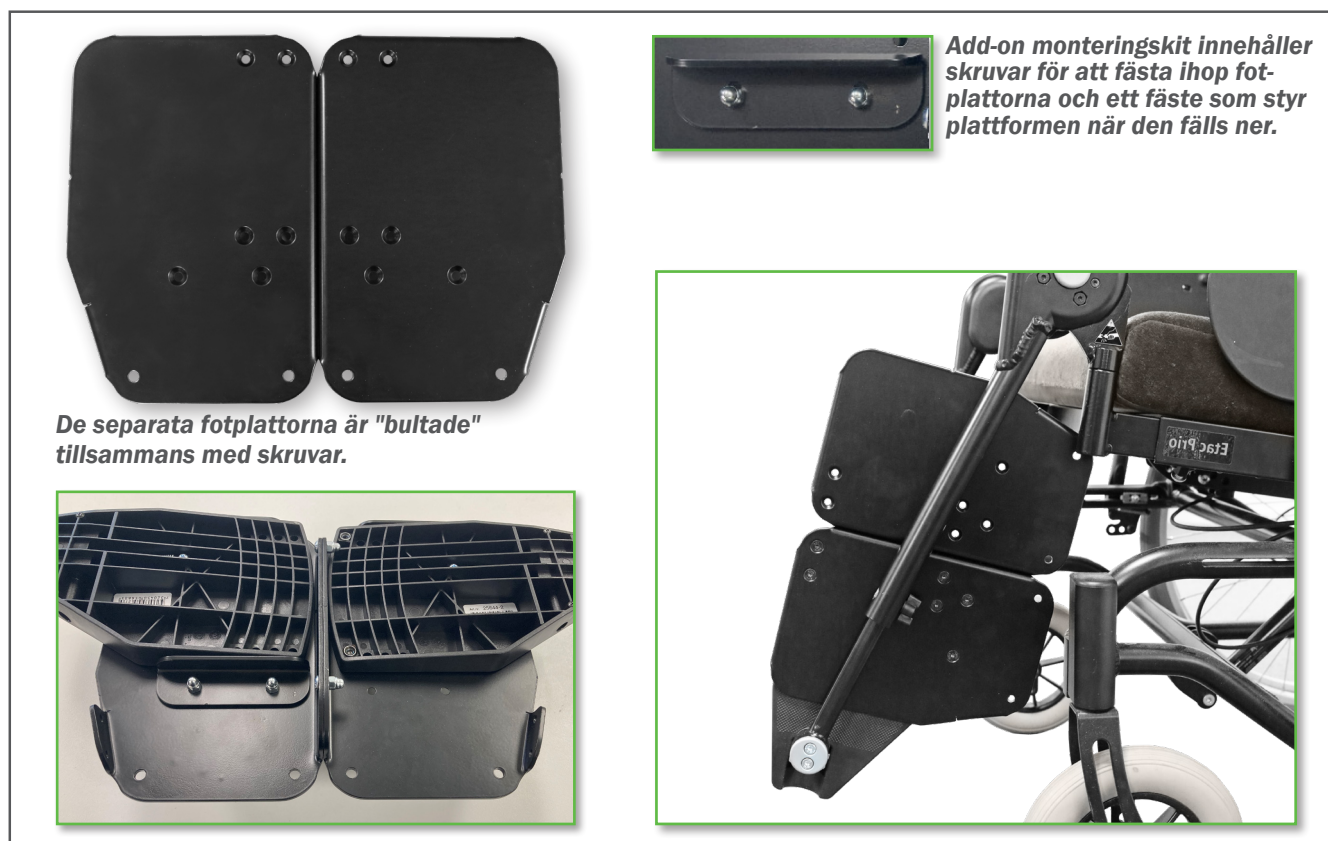

De separata fotplattorna är "bultade" tillsammans med skruvar.

Add-on monteringskit innehåller skruvar för att fästa ihop fotplattorna och ett fäste som styr plattformen när den fälls ner.

Ihopmonterade förlängda fotplattor

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen.

Modulär fotplatta hel ersätter Prio hel fotplatta



*Utgår:
Prio hel fotplatta.*

Prio hel fotplatta utgår

För att beställa en hel plattform till Prio, där alla fotplattor ingår, använd artikelnummer nedan: 28662-28665 (inkluderar standard fotplattor, add-on fotplattor och monteringskit). Se även sista sidan med alla artikelnummer.

Nedan artikelnummer utgår:

- 28342 Fotplatta hel komplett B40
- 28343 Fotplatta hel komplett B45
- 28344 Fotplatta hel komplett B50
- 28345 Fotplatta hel komplett B55

Fotlåda

Fotlådan finns i två storlekar - Medium och Large. Passar på standard fotplattor och valfria benstöd.

1 komplett fotlåda består av:

- Höger och vänster förlängd fotplatta ihopmonterad.
- Sidoplåtar höger och vänster.
- Polstring.

Fotlådan beställs som tillbehör och kräver borrhning.



Fotlådan

Bilden visar hur fotlådan är monterad vid leverans. Fotlåda Large kan även användas från SB 45. För att undvika kontakt med länkhjul rekommenderas då breddat länkhjulsfäste.


Art. nr.	Medium	Large
28642	Prio SB 40-45 cm	
	Cross SB 40-47,5 cm	
28643		Prio SB 50-55 cm
		Cross SB 50-52,5 cm

Knästöd - distalt och lateralt

För att skapa stöd för knä/lår behövs följande:

- 1 st knästöd yttre.
- 1 st benstöd vid eller snäv vinkel.

Vid införandet av yttre knästöd kommer Prios fasta benstöd att utgå.

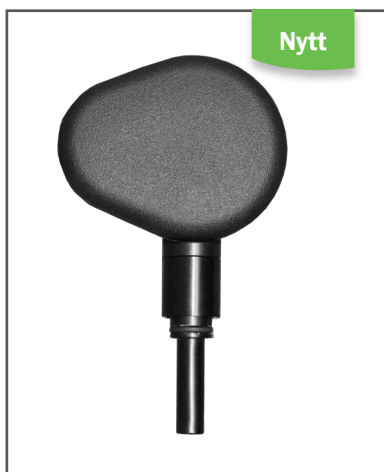

Montering på Prio utan distans.



Montering på Cross med distans.



Prio fasta benstöd

Ersätter Prio fasta benstöd:

27729-1 Benstöd fast komplett höger.

27729-2 Benstöd fast komplett vänster.

2021-10-01 ID: P35142

5/6

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Förlängning fotplatta S kpl	Hel fotplatta	28774
Förlängning fotplatta M kpl	hö	28775-1
Förlängning fotplatta M kpl	vä	28775-2
Förlängning fotplatta L kpl	hö	28776-1
Förlängning fotplatta L kpl	vä	28776-2
Styrning fotplatta hel kpl		28773
Sidoskydd fotplatta kpl	H35 mm	28772
Fotlåda 40-45 cm	Prio	28642
Fotlåda 50-55 cm	Prio	28643
Polstring fotlåda kpl M		28778
Polstring fotlåda kpl L		28779
Fotplatta hel kompl B40	inkl fotplattor Prio	28662
Fotplatta hel kompl B45	inkl fotplattor Prio	28663
Fotplatta hel kompl B50	inkl fotplattor Prio	28664
Fotplatta hel kompl B55	inkl fotplattor Prio	28665
Knästöd yttre kpl hö	fasta benstöd u lås	28777-1
Knästöd yttre kpl vä	fasta benstöd u lås	28777-2
Leverans		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel kompl B40	Prio	28342
Fotplatta hel kompl B45	Prio	28343
Fotplatta hel kompl B50	Prio	28344
Fotplatta hel kompl B55	Prio	28345
Fotplatta hel barn 35 cm	kompl	26306
Fotplatta hel barn 37.5 cm	kompl	26307
Benstöd fast komplett höger		27729-1
Benstöd fast komplett vänster		27729-2
Utfasning successivt från		Oktober 2021