



Produktinformation
från Etac 2019

 **etac**®

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Drivhjul 20" luft - Nytt utförande.....	3-4
Skydd hjulaxel grå - Utgår.....	5-6
Etac Prio - Hållare sidoskydd armstöd.....	7
ECS - sitt- och ryggsystem utgår - ny info....	8-10
Däck 24" färgändring.....	11
Etac Cross XL - Breddad fotplatta	12
Etac Cross/Next - Klädsel sits utgår	13-14
Överdrag huvudstöd som reservdel.....	15
Etac Prio - Ny skruv	16
Nya mått fäste huvudstöd/tvärstag.....	17
Huvudstöd traditionellt inkl. fäste utgår.....	18
Etac M100 - Ny broms	19-20
Skydd hjulaxel grå utgår	21-22
Luftpumpade drivhjul 20".....	23-24
Nytt tippskydd modell 2.....	25-26
Nytt tippskydd modell Multi.....	27-28
Huvudstöd med turtlestag.....	29-30
Etac Cross - Klädsel sits framdel utgår	31
Etac Cross - Tramprör i nytt utförande.....	32
Etac Prio - Adapter Vårdarbroms	33
Etac Prio - Positioneringsbälte i ny längd	34
Vattenpass för lodning länkhjul - Nyhet.....	35

Bad & Toalett

Etac Swift Mobil - Huvudstöd	36
Etac Swift Mobil Eltilt - Ny mjukvara.....	37
Etac Swift - Nya snäppen.....	38-39

Etac Swift Mobil-2 - NYHET	40-45
Etac Flex stödhantag - Utgår	46
Etac Swift - Nya snäppen	47-48
Etac Swift Mobil - Huvudstöd	49

Junior

Lille Viking - R82 Combi Frame:x/Multi Frame .	50
R82 Kudu - Förlängd körbygel till.....	51
R82 Meerkat - Bord i ny storlek	52
R82 Meerkat - Bröst- och höftstöd	53
Polstringsplatta bord nytt tillbehör.....	54
R82 Swan/Flamingo - Potta	55
R82 Kudu - Ny justerbar rygg	56
R82 Rabbit Up - Nytt ståndstöd.....	57
Plant huvudstöd nytt tillbehör	58
R82 Wombat - Fotlåda nytt tillbehör.....	59
R82 Stingray - Kil sits nytt tillbehör	60
R82 Swan - Underarmstöd nytt tillbehör.....	61

Lyftar & Selar

Molift 2-punkts lyftbyglar - produktförbättring..	62
Molift 2- och 4 punkts lyftbyglar - ny design	63

Manuell förflyttning

Immedia - Materialbyte velour.....	64
Immedia - Utgående produkter	65
Glidmatta HandyTrans 30x40 cm	66
Förflyttningsbår MiniBoard small	67
Gliddyna OneWayGlide.....	68
Förflyttningssystem WiseMove.....	69
SatinSheet 2D Corner midi - Nyhet.....	70
Handtag Immedia HandyGrip - Utgår	71
Höftvändare Immedia HipTurner - Utgår	72
Armstöd Immedia Scanner ArmSupport - Utgår	73

Tryckavlastning

STAR sittdynor - Ändring av förpackning.....	74
--	----

Hjälpmotor

Etac Lille Viking - Fasta lägen	75
---------------------------------------	----

Kontakt	76-77
---------------	-------




Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Next

Luftpumpade drivhjul 20" i nytt utförande

Drivhjul 20" med lågtrycksdäck kommer att utgå och ersätts av drivhjul 20" med högtrycksdäck. Tidsplanen för införandet av högtrycksdäck är preliminär. Beräknas ske under sommaren 2019.

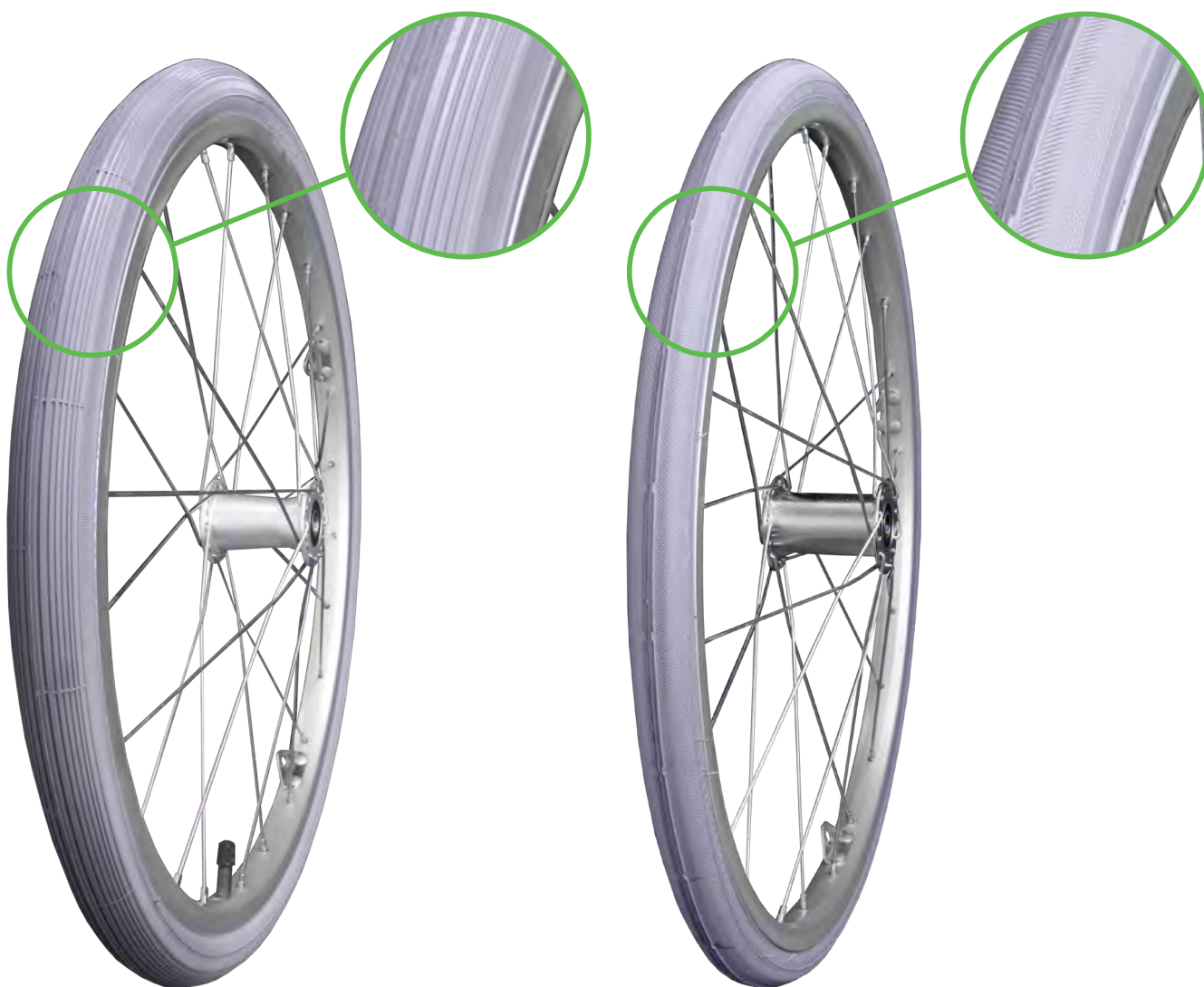

Utgående drivhjul

Lågtrycksdäck 20" utgår.

Ersättande drivhjul

Högtrycksdäck 20" ersätter lågtrycksdäcken.

2019-04-01 ID: 5517-2A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 20 C5 lågtr/alu	exkl axel	27537
Drivhjul 20 C5 lågtr/cellgummi	exkl axel	27538
Drivhjul 20 C5 lågtr/plastad	exkl axel	27539
Drivhjul 20 C5 lågtr/rfr	exkl axel	27540
Drivhjul 20 C5 lågtryck utan	drivring exkl axel	27536
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	plastad exkl axel	28074
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	rfr exkl axel	28075
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr	utan drivring exkl axel	28073
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/	rfr	28098
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr	utan drivring exkl axel	28099

Utgår fr.o.m.

Sommar 2019

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul BS 20 lågtryck	utan drivring	83089
Drivhjul BS 20 lågtryck/alu	Next	81276
Drivhjul BS 20 lågtryck/rfr	Next	81277

Slutförbrukas fr.o.m.

Sommar 2019

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 20 C5 högtr/alu	exkl axel	28474
Drivhjul 20 C5 högtr/cellgummi	exkl axel	28475
Drivhjul 20 C5 högtr/plastad	exkl axel	28476
Drivhjul 20 C5 högtr/rfr	exkl axel	28477
Drivhjul 20 C5 högtryck	exkl drivring o axel	28420
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/	plastad exkl axel	28479
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28480
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28478
Drivhjul 20 VB matt nav högtr/	rfr	28482
Drivhjul 20 VB matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28481

Leverans fr.o.m.

Sommar 2019



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Transit | Etac Prio | Etac Twin | Etac Next

Skydd hjulaxel grå utgår

Det grå skyddet för hjulaxeln som monteras på Cross, Transit, Twin och Next utgår och ersätts av svart skydd, som sen tidigare finns på Etac Prio. Detta kommer att ske successivt med start från vecka 12.

OBS! Lagerstolar som monteras fram till vecka 12, för leverans under sommarmånaderna kommer att ha grått skydd för hjulaxeln.

Se lista på sid 2 för utgående/ersättande länkhjulssatser.



Utgående skydd för hjulaxel

Det grå skyddet för hjulaxel utgår.



Ersättande skydd för hjulaxel

Svart skydd för hjulaxel ersätter det grå.

2019-04-01 ID: 31884B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Länkhjul 6.5 165x30 mass hård	Prio	28396
Länkhjul 6 150x30 massiv mjuk	Prio	28216
Länkhjul 8 200x35 massiv mjuk	Prio	28217
Länkhjul 8 200x50 massiv mjuk	Prio	28218
Skrusats länkhjul	grå	27952
		Slutförbrukad

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Länkhjul 6.5 165x30 mass hård	svart	27866
Länkhjul 6 150x30 massiv mjuk	svart	27863
Länkhjul 8 200x35 massiv mjuk	svart	27864
Länkhjul 8 200x50 massiv mjuk	svart	27868
Leverans		Finns i lager

Benämning ändrade artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel PA 6 50 st	svart	27954
Leverans		Finns i lager



Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Hållare sidoskydd Armstöd Prio

För att möta de kundsynpunkter som vi har fått på sidoskyddsskivan på armstöd Prio har vi tagit fram en hållare för att motverka att sidoskyddsskivan buktar ut. Hållaren monteras i sidoplåten vid bakre sitsdjupsjusteringen för att hålla sidoskyddsskivan på plats. Fungerar även i kombination med breddningssats (27892).

Hållaren för sidoskydd införs som standard på Prio från och med vecka 7.



Hållare sidoskydd

Hållaren motverkar att sidoskyddsskivan buktar ut.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Hållare sidoskydd Prio	2 st	28460
Levereras		Vecka: 7

2019-02-18 ID: 55717A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Comfort System (ECS)

ECS – Sitt- och ryggsystem utgår – Uppdaterad Info

Etac Comfort System = ECS är under utfasning. Utfasningen gäller både huvudprodukt, tillbehör och reservdelar.

Utfasningen sker i två etapper. Första etappen genomfördes under september 2018. Etapp 2 genomförs fram till mars 2019 (observera uppdaterad info – tidigare september). Hård sits till Cross berörs ej av utfasningen.



Utfasning i två etapper

Etapp 1 är genomförd. Etapp 2 genomförs till och med mars 2019. Se artikelnummer nedan..

Etapp 2

Benämning artikel Etapp 2	Beskrivning	Art. nr.
Monteringssats rygg ECS		26630
Sittdyna ECS formad PE	35-37.5 kort mörkgrå	26600-60
Sittdyna ECS formad PE	35-37.5 kort Dartex	26600-63
Sittdyna ECS formad PE	40-42.5 kort mörkgrå	26601-60
Sittdyna ECS formad PE	40-42.5 kort Dartex	26601-63
Sittdyna ECS formad PE	45-47.5 kort mörkgrå	26602-60
Sittdyna ECS formad PE	50-52.5 kort mörkgrå	26603-60
Sittdyna ECS formad PE	55-57.5 kort Dartex	26604-63
Sittdyna ECS formad PE	35-37.5 lång Dartex	26605-63
Fasas ut t.o.m.		Mars 2019

2019-02-14

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning artikel Etapp 2	Beskrivning	Art. nr.
Sittdyna ECS formad PE	40-42.5 lång mörkgrå	26606-60
Sittdyna ECS formad PE	40-42.5 lång Dartex	26606-63
Sittdyna ECS formad PE	45-47.5 lång Dartex	26607-63
Sittdyna ECS formad PE	50-52.5 lång mörkgrå	26608-60
Sittdyna ECS formad PE	50-52.5 lång Dartex	26608-63
Sittdyna ECS formad memory	foam 40-42.5 kort mörkgrå	26611-60
Sittdyna ECS formad memory	foam 40-42.5 kort Dartex	26611-63
Sittdyna ECS formad memory	foam 45-47.5 kort mörkgrå	26612-60
Sittdyna ECS formad memory	foam 50-52.5 kort Dartex	26613-63
Sittdyna ECS formad memory	foam 35-37.5 lång Dartex	26615-63
Sittdyna ECS formad memory	foam 45-47.5 lång mörkgrå	26617-60
Sittdyna ECS formad memory	foam 45-47.5 lång Dartex	26617-63
Ryggdyna ECS H59 B35-37.5	kompl mörkgrå	26625-60
Ryggdyna ECS H59 B40-42.5	kompl mörkgrå	26626-60
Ryggdyna ECS H59 B40-42.5	kompl Dartex	26626-63
Ryggdyna ECS H59 B45-47.5	kompl mörkgrå	26627-60
Ryggdyna ECS H59 B45-47.5	kompl Dartex	26627-63
Ryggdyna ECS H59 B50-52.5	kompl mörkgrå	26628-60
Ryggbygel ECS 35-37.5 cm	kompl	26634-01
Ryggbygel ECS 40-42.5 cm	kompl	26635-01
Ryggbygel ECS 45-47.5 cm	kompl	26636-01
Ryggbygel ECS 50-52.5 cm	kompl	26637-01
Sittdyna ECS plan PE	35-37.5 kort mörkgrå	26640-60
Sittdyna ECS plan PE	40-42.5 kort mörkgrå	26641-60
Sittdyna ECS plan PE	40-42.5 kort Dartex	26641-63
Sittdyna ECS plan PE	45-47.5 kort mörkgrå	26642-60
Sittdyna ECS plan PE	45-47.5 kort Dartex	26642-63
Sittdyna ECS plan PE	50-52.5 kort mörkgrå	26643-60
Sittdyna ECS plan PE	50-52.5 kort Dartex	26643-63
Sittdyna ECS plan PE	40-42.5 lång mörkgrå	26646-60
Sittdyna ECS plan PE	45-47.5 lång mörkgrå	26647-60
Sittdyna ECS plan PE	50-52.5 lång mörkgrå	26648-60
Sittdyna ECS plan PE	50-52.5 lång Dartex	26648-63
Sittdyna ECS plan memory	foam 45-47.5 kort Dartex	26652-63
Sittdyna ECS plan memory	foam 50-52.5 kort Dartex	26653-63
Sittdyna ECS plan memory	foam 45-47.5 lång mörkgrå	26657-60
Sittdyna ECS plan memory	foam 50-52.5 lång mörkgrå	26658-60
Fäste styrtapp ECS hö		26807-01-1
Fäste styrtapp ECS vä		26807-01-2
Överdrag sittdyna ECS	plan 35-37.5 kort mörkgrå	62770-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 35-37.5 kort Dartex	62770-63
Överdrag sittdyna ECS	plan 40-42.5 kort mörkgrå	62771-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 40-42.5 kort Dartex	62771-63
Överdrag sittdyna ECS	plan 45-47.5 kort mörkgrå	62772-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 45-47.5 kort Dartex	62772-63

Fasas ut t.o.m.

Mars 2019

2019-02-14

2/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Benämning artikel Etapp 2	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag sittdyna ECS	plan 50-52.5 kort mörkgrå	62773-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 50-52.5 kort Dartex	62773-63
Överdrag sittdyna ECS	plan 40-42.5 lång mörkgrå	62776-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 45-47.5 lång mörkgrå	62777-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 50-52.5 lång mörkgrå	62778-60
Överdrag sittdyna ECS	plan 50-52.5 lång Dartex	62778-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 35-37.5 kort mörkgrå	62780-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 35-37.5 kort Dartex	62780-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 40-42.5 kort mörkgrå	62781-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 40-42.5 kort Dartex	62781-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 45-47.5 kort mörkgrå	62782-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 50-52.5 kort mörkgrå	62783-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 50-52.5 kort Dartex	62783-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 55-57.5 kort Dartex	62784-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 35-37.7 lång mörkgrå	62785-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 35-37.5 lång Dartex	62785-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 40-42.5 lång mörkgrå	62786-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 40-42.5 lång Dartex	62786-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 45-47.5 lång mörkgrå	62787-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 45-47.5 lång Dartex	62787-63
Överdrag sittdyna ECS	formad 50-52.5 lång mörkgrå	62788-60
Överdrag sittdyna ECS	formad 50-52.5 lång Dartex	62788-63

Fasas ut t.o.m.

Mars 2019



Produktinformation

Gällande: Etac Cross | Etac Prio

Däck 24" – färgändring

Under våren 2019 kommer däck till 24" drivhjul bli en nyans mörkare grå än dagens däck, se bild.
Gäller endast drivhjul 24" högtrycksdäck och drivhjul 24" däck med massiv innerslang.



Före och efter

Föregående ljus nyans (t.v.) och ny mörkare nyans (t.h.).

2019-01-25 ID: 5517

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Cross XL

Breddad fotplatta

Vi har förbättrat den breddade fotplattan till Cross XL. Gäller storlek 52,5–60 cm. Ny artikel ersätter föregående.



Art.nr: 28443 Breddad fotplatta ny version



Art.nr: 50885 Breddad fotplatta utgående version

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta breddad Cross XL	52,5-60 cm	50885
Slutförbrukas fr.o.m.		Vecka: 2 (2019)

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta breddad Cross XL	52,5-60 cm kompl sats	28443
Införs successivt fr.o.m.		Vecka: 2 (2019)

2019-01-09 ID: 5518A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Next

Cross/Next klädsel sits utgår

Klädsel sits Cross/Next utgår och ersätts av Klädsel sits Basic.

Klädsel sits Cross/Next används idag i kombination med Cross 2 överdrag som har hane-kardborreband för att fästa mot sitsklädsel. Vid montering av rygg där överdraget har hane kardborreband, kan Adapter sitsklädsel hona/hona användas (artikel nummer 28484) för att fästa mot Klädsel sits Basic.

Slutförbrukas från 1 oktober 2019.



Klädsel sits Cross/Next

Kardborreband med hona.
Utgår efter slutförbrukning.



Klädsel sits Basic

Kardborreband med hane.
Befintlig klädsel sits som ersätter den utgående.

2019-06-24 ID: 35105A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Cr/Ne kort 35 rb	svart	62235-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 37.5	svart	62236-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 40 cm	svart	62237-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 42.5	svart	62238-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 45 cm	svart	62239-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 47.5	svart	62372-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 50 cm	svart	62302-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 52.5	svart	62400-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 55 cm	svart	62401-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 57.5	svart	62402-60
Klädsel sits Cr/Ne kort 60	svart	62403-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 35 cm	svart	62240-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 37.5	svart	62241-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 40 cm	svart	62242-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 42.5	svart	62243-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 45 cm	svart	62244-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 47.5	svart	62373-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 50 cm	svart	62303-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 52.5	svart	62404-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 55 cm	svart	62405-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 57.5	svart	62406-60
Klädsel sits Cr/Ne lång 60	svart	62407-60
Utgår och slutförbrukas fr.o.m.		Vecka: 40

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic kort 35 cm	Basic/Cross 3A svart	62718-60
Klädsel sits Basic kort 37,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62719-60
Klädsel sits Basic kort 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62720-60
Klädsel sits Basic kort 42,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62721-60
Klädsel sits Basic kort 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62722-60
Klädsel sits Basic kort 47,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62978-60
Klädsel sits Basic kort 50 cm	Basic/Cross 3A svart	62979-60
Klädsel sits Basic kort 52,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62980-60
Klädsel sits Basic kort 55 cm	Basic/Cross 3A svart	62981-60
Klädsel sits Basic kort 57,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62982-60
Klädsel sits Basic kort 60 cm	Basic/Cross 3A svart	62983-60
Klädsel sits Basic lång 35 cm	Basic/Cross 3A svart	62728-60
Klädsel sits Basic lång 37,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62729-60
Klädsel sits Basic lång 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62730-60
Klädsel sits Basic lång 42,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62731-60
Klädsel sits Basic lång 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62732-60
Klädsel sits Basic lång 47,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62984-60
Klädsel sits Basic lång 50 cm	Basic/Cross 3A svart	62985-60
Klädsel sits Basic lång 52,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62986-60
Klädsel sits Basic lång 55 cm	Basic/Cross 3A svart	62987-60
Klädsel sits Basic lång 57,5 cm	Basic/Cross 3A svart	62988-60
Klädsel sits Basic lång 60 cm	Basic/Cross 3A svart	62989-60
Leverans		Finns i lager



Produktinformation

Gäller: Etac Prio | Etac Cross

Överdrag huvudstöd som reservdel

Nu finns överdrag till huvudstöd traditionellt att beställa som reservdel.



Överdrag till huvudstöd.

Överdrag huvudstöd i plysch samt hygienutförande.

Benämning artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag huvudstöd trad	plysch Cross/Prio	63177-60
Överdrag huvudstöd trad	hygien Cross/Prio	63177-65
Leverans		Vecka: 27

2019-06-24 ID: 35112-2A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation




Gäller: Etac Prio

Prio ny skruv

En ny skruv är införd på Prio från och med serienummer 38C2446. Artikel 11704 med gänglåsning ersätter artikel 11529 utan gänglåsning. Skruv 11529 finns kvar i sortiment till andra produkter.



Ny skruv
med gänglåsning

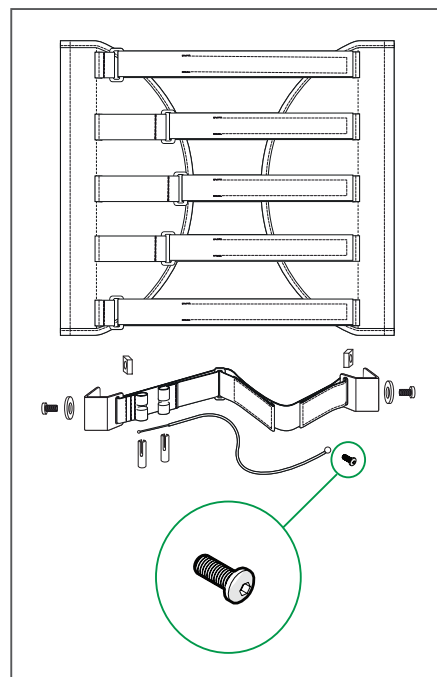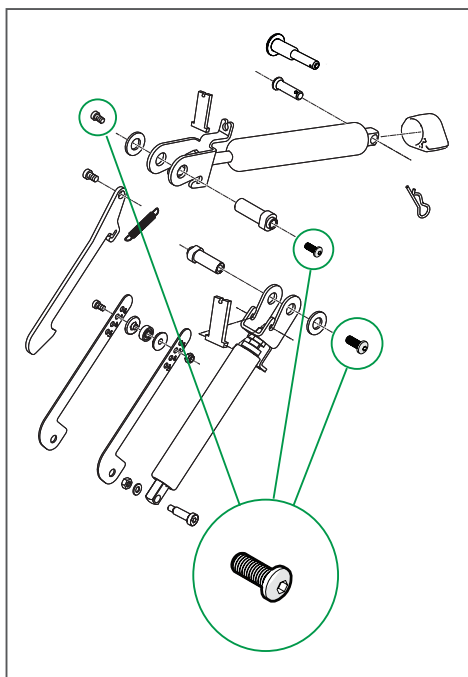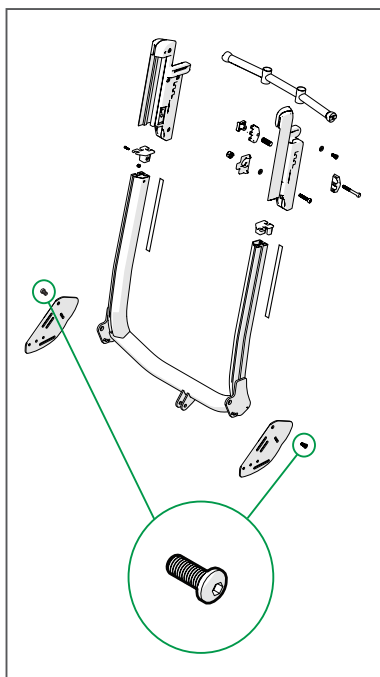

Placering av skruven

På illustrationerna ovan visas placeringen av skruven på Prio; Ryggchassi och gaskolvar samt infästning av vajer dynamiskt bäckenstöd.

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Skruv M 8x20 K6S 10.9 fzb	esloc DIN267-28	11704
Leverans		Finns i lager

2019-06-24 ID: P31900A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter




Produktinformation

Gäller: Etac Cross

Nya mått på huvudstödsfäste och tvärstag Cross

Vi har förbättrat huvudstödsfästet och tvärstaget. Djupet på tvärstaget blir 10 mm och huvudstödsröret blir 20 mm längre. Detta innebär att snäpplåset lättare lägger sig i rätt position. Ändringen kommer att införas successivt på respektive storlek.

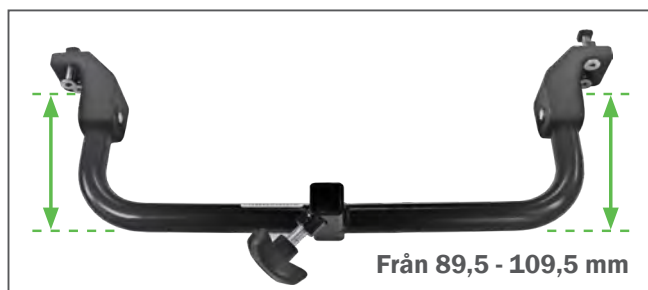

Benämning artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstödsfäste 3A 35 cm		28125
Huvudstödsfäste 3A 37.5 cm		28126
Huvudstödsfäste 3A 40 cm		28127
Huvudstödsfäste 3A 42.5 cm		28128
Huvudstödsfäste 3A 45 cm		28129
Huvudstödsfäste 3A 47.5 cm		28130
Huvudstödsfäste 3A 50 cm		28131
Huvudstödsfäste 3A 52.5 cm		28132
Huvudstödsfäste 3A 55 cm		28133
Huvudstödsfäste 3A 57.5 cm		28134
Huvudstödsfäste 3A 60 cm		28135
Tvärstag 3A 35 cm kompl		28114
Tvärstag 3A 37.5 cm kompl		28115
Tvärstag 3A 40 cm kompl		28116
Tvärstag 3A 42.5 cm kompl		28117
Tvärstag 3A 45 cm kompl		28118
Tvärstag 3A 47.5 cm kompl		28119
Tvärstag 3A 50 cm kompl		28120
Tvärstag 3A 52.5 cm kompl		28121
Tvärstag 3A 55 cm kompl		28122
Tvärstag 3A 57.5 cm kompl		28123
Tvärstag 3A 60 cm kompl		28124
Leverans fr.o.m.		Vecka: 24

2019-06-24 ID: 31897A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Huvudstöd traditionellt komplett inklusive fäste utgår

Artikelnummer för huvudstöd traditionellt komplett inkl fäste utgår och ersätts av två befintliga artikelnummer (se nedan).



Huvudstöd komplett utgår

Prio huvudstöd inklusive fäste utgår som enskilt artikelnummer.

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd trad jb mörkgrå	plysch inkl fäste kompl Prio	28193-60
Huvudstöd trad jb hygien grå	hygien inkl fäste kompl Prio	28193-65
		Slutförbrukad

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd trad jb mörkgrå	plysch Prio	28023-60
Huvudstöd trad jb grå	hygien Prio	28023-65
Huvudstödsfäste trad 45 gr	kompl Prio	28024
Leverans		Finns i lager

2019-05-07 ID: 35112B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Rullstol Etac M100

Ny broms till Etac M100

Den nya bromsen är samma broms som till rullstol Etac Crissy. Införs efter slutförbrukning från och med vecka 20.



Broms M100 utgård

Den utgående varianten av broms till M100.



Ny Broms M100/Crissy

Ersättande broms, samma som används på Crissy.

2019-04-04 ID: 31810A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Broms M100 hö		27232-1
Broms M100 vä		27232-2
Broms M100 förl handtag hö		27233-1
Broms M100 förl handtag vä		27233-2
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka: 20

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Broms M100/Crissy	vinkl röd hö	28446-1
Broms M100/Crissy	vinkl röd vä	28446-2
Broms M100/Crissy	vinkl svart hö	28444-1
Broms M100/Crissy	vinkl svart vä	28444-2
Broms M100/Crissy	förl handtag fällbart hö	28455-1
Broms M100/Crissy	förl handtag fällbart vä	28455-2
Leverans		Vecka: 20



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Transit | Etac Prio | Etac Twin | Etac Next

Skydd hjulaxel grå utgår

Det grå skyddet för hjulaxeln som monteras på Cross, Transit, Twin och Next utgår och ersätts av svart skydd, som sen tidigare finns på Etac Prio. Detta kommer att ske successivt med start från vecka 12.

OBS! Lagerstolar som monteras fram till vecka 12, för leverans under sommarmånaderna kommer att ha grått skydd för hjulaxeln.

Se lista på sid 2 för utgående/ersättande länkhjulssatser.



Utgående skydd för hjulaxel

Det grå skyddet för hjulaxel utgår.



Ersättande skydd för hjulaxel

Svart skydd för hjulaxel ersätter det grå.

2019-04-01 ID: 31884B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Länkhjul 6.5 165x30 mass hård	Prio	28396
Länkhjul 6 150x30 massiv mjuk	Prio	28216
Länkhjul 8 200x35 massiv mjuk	Prio	28217
Länkhjul 8 200x50 massiv mjuk	Prio	28218
Skrusats länkhjul	grå	27952
		Slutförbrukad

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Länkhjul 6.5 165x30 mass hård	svart	27866
Länkhjul 6 150x30 massiv mjuk	svart	27863
Länkhjul 8 200x35 massiv mjuk	svart	27864
Länkhjul 8 200x50 massiv mjuk	svart	27868
Leverans		Finns i lager

Benämning ändrade artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Skydd hjulaxel PA 6 50 st	svart	27954
Leverans		Finns i lager




Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Next

Luftpumpade drivhjul 20" i nytt utförande

Drivhjul 20" med lågtrycksdäck kommer att utgå och ersätts av drivhjul 20" med högtrycksdäck. Tidsplanen för införandet av högtrycksdäck är preliminär. Beräknas ske under sommaren 2019.

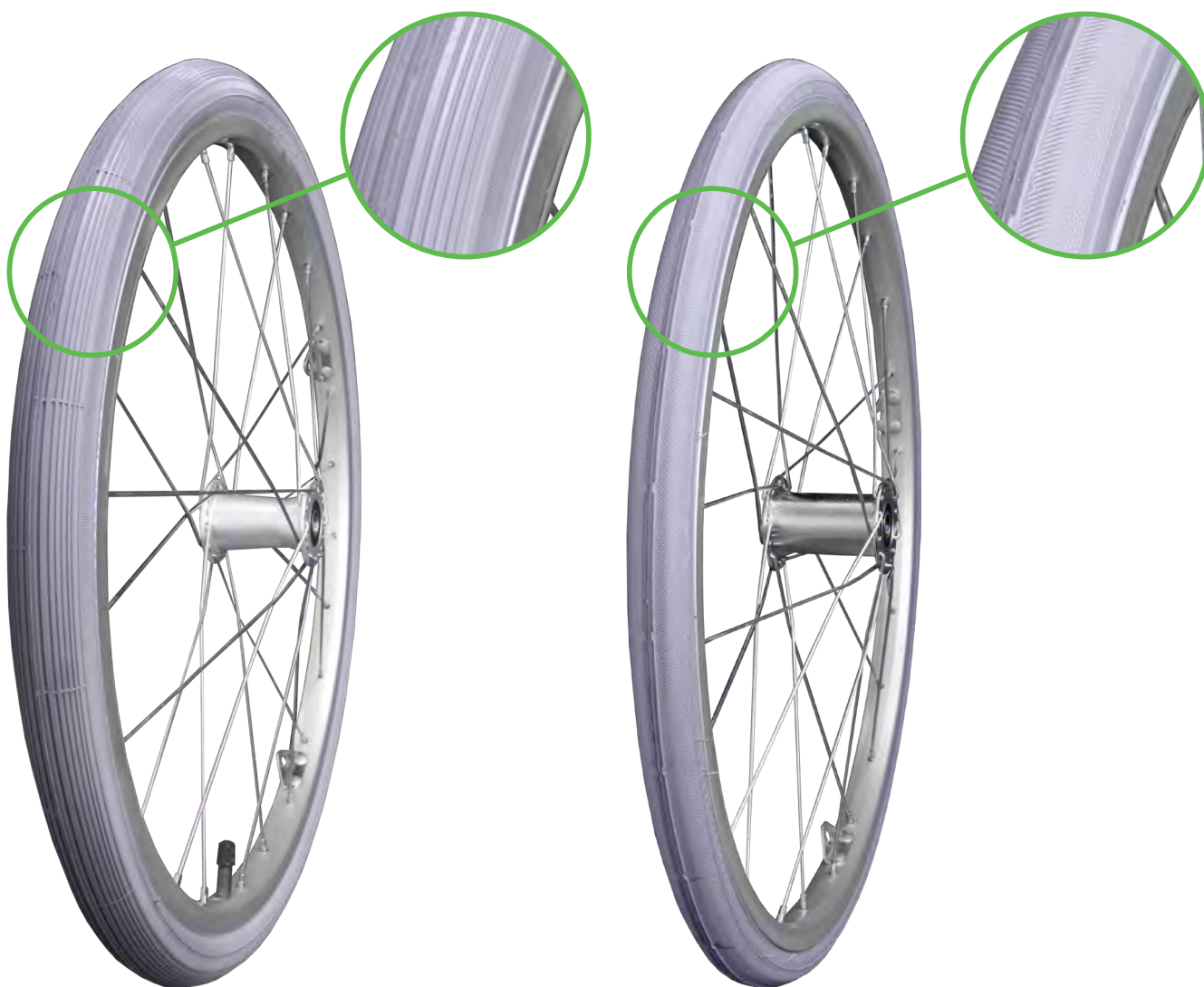

Utgående drivhjul

Lågtrycksdäck 20" utgår.

Ersättande drivhjul

Högtrycksdäck 20" ersätter lågtrycksdäcken.

2019-04-01 ID: 5517-2A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 20 C5 lågtr/alu	exkl axel	27537
Drivhjul 20 C5 lågtr/cellgummi	exkl axel	27538
Drivhjul 20 C5 lågtr/plastad	exkl axel	27539
Drivhjul 20 C5 lågtr/rfr	exkl axel	27540
Drivhjul 20 C5 lågtryck utan	drivring exkl axel	27536
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	plastad exkl axel	28074
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	rfr exkl axel	28075
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr	utan drivring exkl axel	28073
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/	rfr	28098
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr	utan drivring exkl axel	28099

Utgår fr.o.m.

Sommar 2019

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul BS 20 lågtryck	utan drivring	83089
Drivhjul BS 20 lågtryck/alu	Next	81276
Drivhjul BS 20 lågtryck/rfr	Next	81277

Slutförbrukas fr.o.m.

Sommar 2019

Benämning ersättande artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 20 C5 högtr/alu	exkl axel	28474
Drivhjul 20 C5 högtr/cellgummi	exkl axel	28475
Drivhjul 20 C5 högtr/plastad	exkl axel	28476
Drivhjul 20 C5 högtr/rfr	exkl axel	28477
Drivhjul 20 C5 högtryck	exkl drivring o axel	28420
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/	plastad exkl axel	28479
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28480
Drivhjul 20 C5 matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28478
Drivhjul 20 VB matt nav högtr/	rfr	28482
Drivhjul 20 VB matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28481

Leverans fr.o.m.

Sommar 2019



Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 Active | Etac Cross 2

Nytt tippskydd modell 2


Från och med november 2019 inför vi ett förbättrat tippskydd till Cross 5 Active och Cross 2. Tippskyddet finns i två utförande:

1. Std sh 37-55
2. Låg sh 34-37

Det bockade infästningsröret tillsammans med fler alternativ att justera höjden, gör att tippskyddet med sina två varianter täcker alla sitthöjder på Rullstol Cross 5 Active och Cross 2.

Ersätter tidigare versioner av tippskydd.

Se tabell sidan 2 för nya och utgående tippskydd.

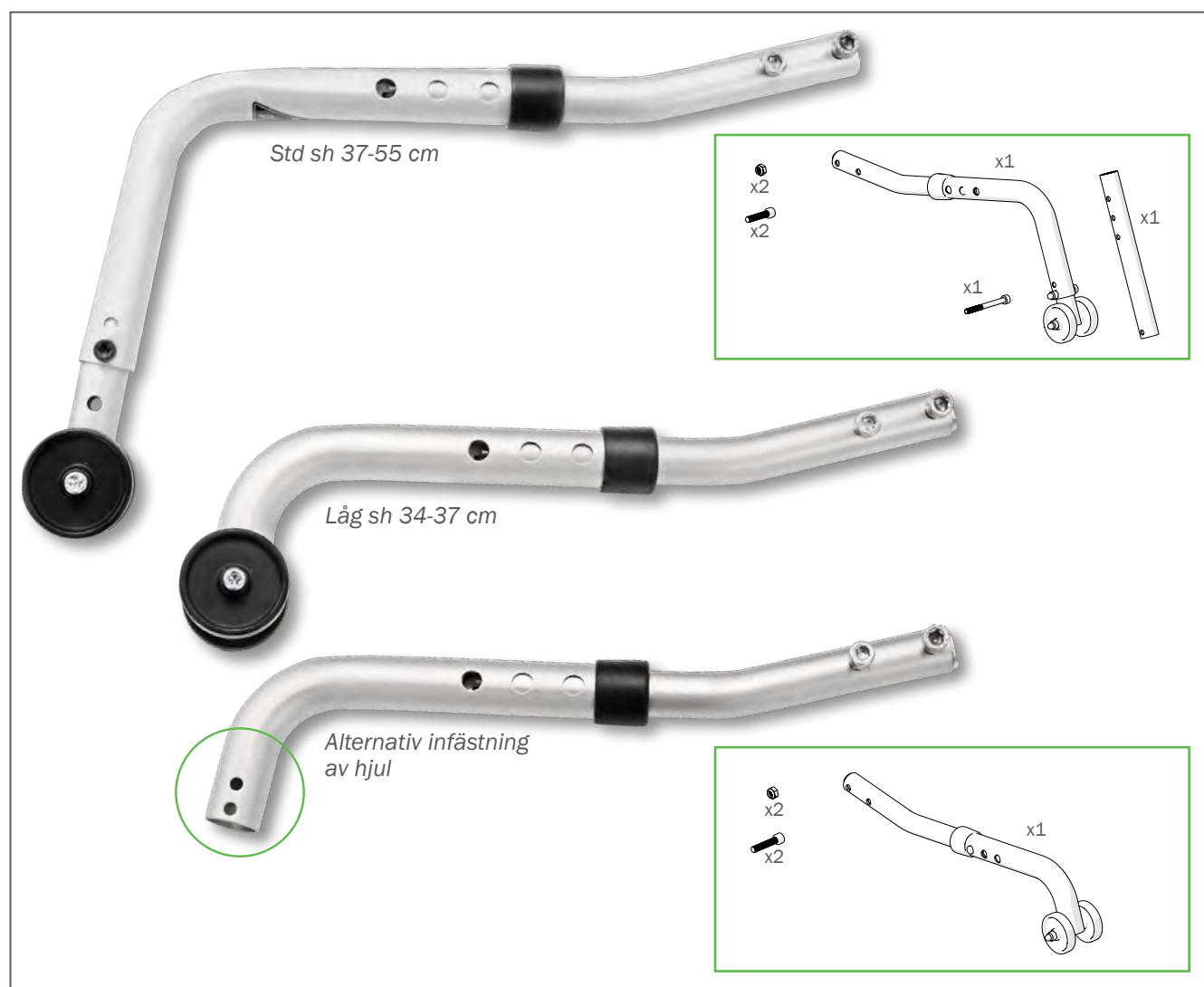

2019-09-04 ID: 5506-2A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

**Benämning ny artikel (ersätter utgående)****Beskrivning****Art. nr.**

Tippskydd mod 2 std

Cross sh 37-55 cm

28470

Tippskydd mod 2 låg

Cross sh 34-37 cm

28471

Leverans

November 2019

Benämning utgående artikel**Beskrivning****Art. nr.**

Tippskydd Cross hjul 22-24

kompl

25177

Tippskydd Cross hjul 20

kompl

25302

Tippskydd Cross/Twin

kompl (Y)

25633-01

Tippskydd Cross mont A-rad

kompl (Y)

25761-01

Leverans

Slutförbrukas



Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 | Etac Prio | Etac Transit III | Etac Cross 2 | Etac Next

Nytt tippskydd modell Multi

Från och med januari 2020 införs ett förbättrat tippskydd till Cross 5/Prio och Transit III/Cross 2/Next.

Tippskyddet finns i två utförande:

1. Cross 5/Prio
2. Transit III/Cross 2/Next

Rullstol Cross 5 och Prio har stora möjligheter till justering av sitthöjd. Med detta nya tippskydd är det enkelt att ändra inställning. Tippskyddet med sin multijusterbarhet täcker sitthöjd från 34 cm till 53 cm. Med den assymetriska teleskopdelen kan man enkelt ändra höjd och längd på tippskyddet. Monteras på stol som tidigare.

Ersätter tidigare versioner av tippskydd. Se tabell sidan 2 för nya och utgående tippskydd.

28457



Utförande 1:

28457 Tippskydd multi cc59 kpl Cross 5 och Prio.

Färg: svart

Fungerar i alla sitthöjder till både Cross 5 och Prio.

28458



81247/81248



Utförande 2:

28458 Tippskydd multi cc66 kpl Transit III, Cross 2 och Next.

Färg: aluminium

Ersätter gamla varianter av tippskydd till Transit III, Cross 2 och Next.

Tippskyddsfäste Cross/Twin hö/vä 81247/81248 kommer finnas kvar som reservdel.

2019-09-04 ID: 5506A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Utförande 1:

Benämning ny artikel (ersätter utgående)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd multi cc59	Cross 5 Prio	28457
Leverans		Januari 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd teleskop Cross 5	Komplett	27526
Leverans		Slutförbrukas

Utförande 2:

Benämning ny artikel (ersätter utgående)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd multi cc66 kpl	Transit III Cross 2 Next	28458
Leverans		Januari 2020

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd teleskop Cross 5	komplett	25969
Tippskydd Next 20 kompl	Cross 20 exkl fäste	26132
Tippskydd teleskop Next	Transit 16 kompl	26895
Tippskyddsrör Cross/Twin	20/22	26270
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett hö	26162-1
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett vä	26162-2
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl hö	26270-1
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl vä	26270-2
Tippskydd teleskop Cross hö	komplett	26869-1
Tippskydd teleskop Cross vä	komplett	26869-2
Leverans		Slutförbrukas

Benämning befintlig artikel (finns kvar som reservdel)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskyddsfäste Cross/Twin	hö	81247
Tippskyddsfäste Cross/Twin	vä	81248
Leverans		Pågående, finns kvar i sortimentet



Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 | Etac Cross 5XL | Etac Prio | Etac M100 | Etac Transit

Huvudstöd med turtlestag – nytt utförande

Vi inför ett förbättrat stag med fler justeringsmöjligheter till våra huvudstöd i februari 2020. Ett turtlestag!

Turtlestaget består av flera justerbara leder för anpassning till användaren i höjd, djup och vinkel.

Staget finns i två längder 150 mm och 350 mm. Stag 150 mm används i första hand till Prio i kombination med huvudstödsfäste traditionellt (art. nr. 28024).

Materialet är rostfritt, vilket gör att det inte är känsligt för repor och korrosion.

Stag	350 mm	150 mm*
Höjdjustering	6-47 cm**	6-29 cm
Djupjustering	0-20 cm	0-20 cm

Vid behov kan man vända lederna och staget för att uppnå rätt position på huvudstödet.

Ersätter nuvarande huvudstöd med traditionellt stag, se nedan bilder.

Reservdelar till befintligt stag utgår efter slutförbrukning.

*Vid kombination stag 150 mm och huvudstödsfäste (art. nr. 28024) Prio, adderas ytterligare höjd och djup.

**Högsta höjd är inkl leder.



Utgående stag
Huvudstöd med traditionellt stag.



Nytt turtlestag
Huvudstöd med stag i nytt utförande med justerbara leder.

2019-12-17 ID: 35108A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd trad jb mörkgrå	26x14cm inkl turtlestag 350 mm	28534-60
Huvudstöd trad jb mörkgrå	26x14cm inkl turtlestag 150mm	28535-60
Huvudstöd trad jb hygien grå	26x14cm inkl turtlestag 350mm	28534-65
Huvudstöd trad jb hygien grå	26x14cm inkl turtlestag 150mm	28535-65
Huvudstöd m sidostöd hygien	grå inkl turtlestag 350mm	28536-65
Huvudstöd m sidostöd hygien	grå inkl turtlestag 150mm	28537-65

Införs

Vecka 7, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Huvudstöd mod 4 mörkgrå	sidojusterbart 26x14cm inkl stag exkl fäste	28223-60	28534-60
Huvudstöd mod 4 hygien grå	sidojusterbart 26x14cm inkl stag exkl fäste	28223-65	28534-65
Huvudstöd trad jb mörkgrå	plysch Prio	28023-60	28535-60
Huvudstöd trad jb hygien grå	Prio	28023-65	28535-65
Huvudstöd med sidostöd	Cross	28325-65	28536-65
Huvudstöd med sidostöd	Prio	28326-65	28537-65

Utgår

Vecka 7, 2020




Produktinformation

Gäller: Etac Cross

Klädsel sits framdel - utgå

Reservdel klädsel sits framdel utgå 2019-12-31.

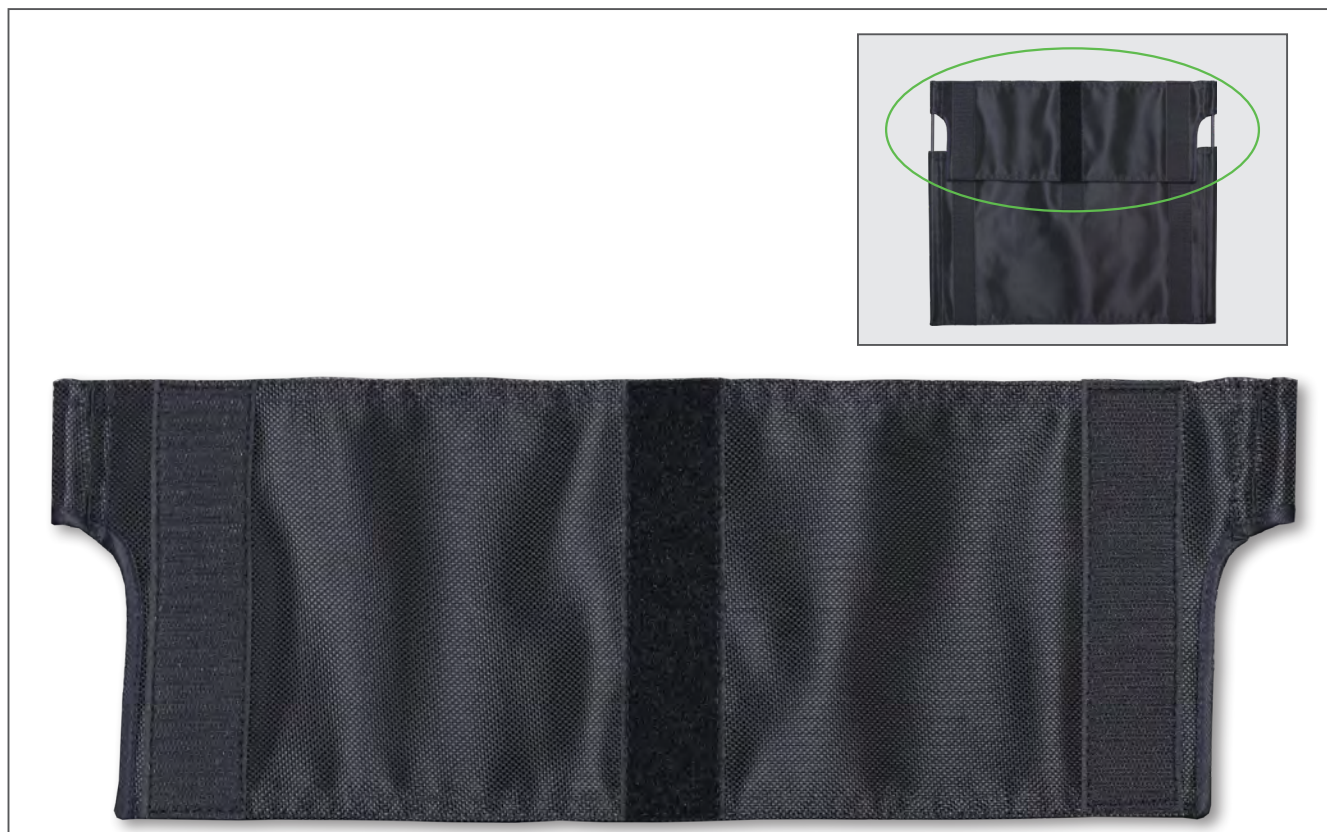

Framdel på sits

Framdelen på Cross sits utgår vid årsskiftet.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Cr/Ne framdel 55 cm		62409
Klädsel sits Cr/Ne framdel 52.5 cm		62408
Klädsel sits Cr/Ne framdel 47.5 cm		62385
Klädsel sits Cr/Ne framdel 50 cm		62341
Klädsel sits Cr/Ne framdel 45 cm		62340
Klädsel sits Cr/Ne framdel 42.5 cm		62339
Klädsel sits Cr/Ne framdel 40 cm		62338
Klädsel sits Cr/Ne framdel 37.5 cm		62337
Klädsel sits Cr/Ne framdel 35 cm		62336
Utgår		Vecka 1, 2020

2019-12-09 ID: 31929A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Cross 5

Nytt utförande på tramprör

Tramprör till Cross 5 och Cross får nytt utförande. Infästningen blir samma som till nytt tippskydd modell 2. Ändringen införs succesivt.



Tramprör i äldre samt nytt utförande

Till vänster utgående tramprör (art.nr. 25766) och till höger nytt tramprör (art.nr. 28531).

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tramprör Twin kompl		25766
Leverans		Slutförbrukas

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tramprör svart komplett	Cross5/Cross/Twin	28531
Leverans		Införs successivt

2019-10-21 ID: 31880A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Adapter Vårdarbroms Prio

Från och med nu ingår adapter broms 5 mm (artikel 51019) och en längre skruv (artikel 11236) vid montering av vårdarbroms till Prio för utflyttning av brukarbromsen. Adaptern ingår även i monteringsats vårdarbroms Prio 20-24".



Adapter vårdarbroms

En 5 mm bromsadapter ingår nu vid montering av vårdarbroms till Etac Prio.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Monteringssats vårdarbroms	Prio 20/22/24	28423
Leverans		Pågående

Benämning, reservdel	Beskrivning	Art. nr.
Adapter broms 5 mm		51019
Skruv M 6x 65 MC6S 12.9 fzb		11236
Leverans		Pågående

2019-11-11 ID: 31924B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Positioneringsbälte Prio

Nu finns positioneringsbälten i två längder till Prio. Vi lägger till en längre variant.

- Positioneringsbälte 2-punkt Prio L 100 cm, art.nr 27904
- Positioneringsbälte 2-punkt Prio L 128 cm, art.nr 28544



Prio positioneringsbälte

Vi har lagt till en längre variant av Prios positioneringsbälte.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Positioneringsbälte 2-punkt	Prio L 128 cm	28544
Leverans	Finns i lager	

2019-10-10 ID: 31921A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter




Produktinformation

Gäller: Etac Cross

Lodning länkhjul vattenpass

Vi har tagit fram ett hjälpmedel som kan användas vid lodning av länkhjul.
Artikelnummer 28524.

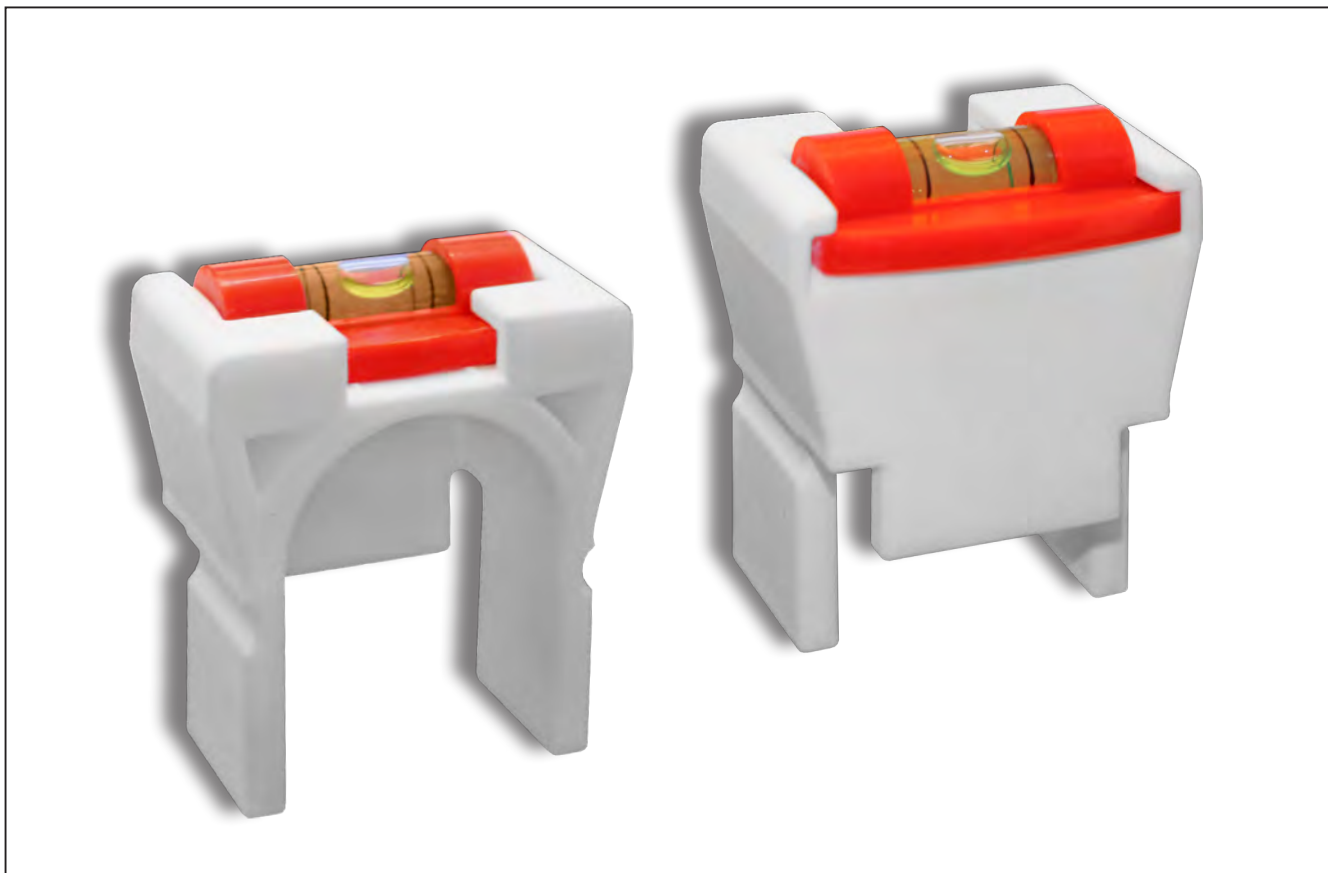

Nytt hjälpmedel

Vattenpass för lodning av länkhjul.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lodningsverktyg rullstol		28524
Leverans		Finns i lager

2019-10-21 ID: 31918A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**®
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil | Etac Mobila dusch- och toalettstolar

Etac Swift Mobil Huvudstöd

Huvudstödet till Swift Mobil får ett nytt artikelnummer. Detta på grund av att staget kortats ned för att Swift Mobil ska vara mer tillgänglig och att passbarheten över toalett ska bli bättre.

Det äldre huvudstödet är fortfarande kompatibelt med nya Swift Mobil-2 och äldre Swift Mobil är kompatibelt med det nya huvudstödet. Inga andra gränssnitt har blivit ändrade.



Huvudstöd

Staget på Swift Mobils huvudstöd har kortast ned med 10 cm.

Utgående artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Nackstöd Swift Mobil mod 2		80209447
Nackstöd Swift Mobil mod 2	exkl fäste	84005084
Utfasas		

Nya artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd Swift Mobil		80209521
Huvudstöd Swift Mobil	exkl fäste	84006188
Leverans		Finns i lager

2019-10-07 ID: 36031A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil Tilt med motor | Etac mobila duschstolar

Swift Mobil Eltilt med motor byter mjukvara.

Leverantören för motor- och styrenhet till Swift Mobil Eltilt uppdaterar sin mjukvara från C3 till C4.

Detta innebär att om anting styrboxen eller handkontrollen har ett behov av att ersättas så måste samtliga delar uppdateras till det senaste. De detaljer som levereras är den nya uppdateringen som är märkt med C4.

OBS! Swift Mobil Eltilt med motor är utfasad så detta berör endast reservdelar till befintliga!



Utgående artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Styrbox Swift Mobil tilt motor	C3CON2W	84005088
Handkontroll Swift Mobil tilt	C3REMOW	84005089
Utgått		

Nya artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Styrbox Swift Mobil tilt motor	C4	84006192
Handkontroll Swift Mobil tilt	C4	84006193
Kitt styrbox + Handkontroll	Styrbox C4 och handkontroll C4	84006194
Leverans		Finns i lager

2019-09-24 ID: 12789B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Duschpall/Duschstol | Etac Swift Fristående | Etac Swift Kommod

Etac Swift nya snäppen

Vi uppdaterar snäppen på armstöd och ryggstöd till Swift Duschpall /duschstol, Swift fristående och Swift Kommod. För att underlätta vid demontering av armstöd och ryggstöd har en designförändring gjorts på snäppena. Huvudprodukterna kommer ändras löpande och behåller sina nuvarande artikelnummer. Tillbehör och reservdelar får dock nya artikelnummer.

Det nya utförandet på armstöd och ryggstöd passar existerande produkter, förutom Swift Kommod med serie nr t.o.m 109 999 då artikel nummer 84005069 skall användas. Nytt utförande kommer finnas från och med 1:a november.



Äldre version av arm- och ryggstödssnäppen
Kortare snäppen på arm- och ryggstöd som utgår.



Ny version av arm- och ryggstödssnäppen
Längre snäppen i utförande som förenklar demontering.



Nytt utseende på snäppena

Designen på snäppena har förändrats för att underlätta när armstöd och ryggstöd ska tas bort. Snäppena har blivit längre vilket gör dem lättare att klämma samman och underlättar vid demontering.

2019-09-24 ID: P12775A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning Tillbehör/Reservdel	Nytt art. nr.	Gammalt art. nr.
Ryggstöd Swift Grå	84006181	84005069
Ryggstöd Swift Kommod Grå (fr.o.m. serie nr. 110000)	84006181	84005069
Ryggstöd Swift Kommod Grå (t.o.m. serie nr. 109 999)	N/A	84005069
Ryggstöd Swift Grön	84006182	81701120
Ryggstöd Swift Isblå	84006183	84005071
Armstöd Swift grå par	84006184	84005074
Armstöd Swift grön par	84006185	81701110
Armstöd swift isblå par	84006186	84005075
Leverans fr.o.m.	Vecka: 45	Slutförbrukas

Existerande lager slutförbrukas innan de nya börjar levereras.
Artikelnumren till huvudprodukten är oförändrade.



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2, Etac Swift Mobil Tilt-2, Etac Swift Mobil24"-2

Etac introducerar Swift Mobil-2

Etac Swift Mobil har sedan start uppskattats för sin utmärkta komfort och goda åtkomlighet. Vi på Etac strävar alltid efter att våra produkter ska bli bättre, och därför presenterar vi nu en vidareutveckling av Swift Mobil som både förenklar och förbättrar. Vi kallar den Swift Mobil-2.

Åtkomlighet måste vara enkelt

Vi får ofta höra att bland de svåraste och jobbigaste momenten för vårdaren är att komma åt när man ska hjälpa till, eller att enkel åtkomlighet är helt avgörande för att brukaren ska få tillräcklig hjälp med sin personliga hygien. Dessutom får vi höra att förenklad åtkomlighet är bland det viktigaste för att underlätta vårdarbetet för den som hjälper till. Swift Mobil-2 har därför fått en sits som är helt öppen baktill och 2 nya mjuksitsar, även de öppna baktill. Vi har dessutom ändrat formen på ryggklädseln för att underlätta när man behöver ta av huvudstödet för att komma åt bättre.

Ökad flexibilitet för att passa fler

Max brukarvikten har ökats till 160 kg som standard och varianter med max brukarvikt på 135 kg kommer att försvinna. Armstöden är höjdjusterbara/breddningsbara på alla stolar. Det innebär att vi kommer att ha färre artikelnummer i våra produkt- och prislistor.



Swift Mobil

Befintlig version av Swift Mobil.



Swift Mobil-2

Ny version av Swift Mobil, med helt öppen sits bak.



Armstödens justerbarhet

Stolarna kommer i grundutförande att ha samma armstödshöjd som idag. Armstöden kan sedan ändras till högre höjd (+6 cm) eller breddas för att passa bredare brukare (+6 cm). Det finns även möjlighet att placera armstöden i ett smalt läge. Allt för att öka flexibiliteten och täcka fler behov.

Armstödens nya funktionalitet innebär också att:

- Körhandtagsbygeln blir framflyttad 1,5 cm vilket gör att Swift Mobil-2 kommer att passa ännu bättre över väggmonterade toaletter.
- Armstödsröret kommer att vara bockat istället för rakt och armstödsbrickans längd förkortas för att passa den nya formen.
- Breddningssatsen som tillhör kommer att försvinna eftersom breddningsmöjligheten finns med i grundutförandet på Etac Swift Mobil-2.
- I armstödet's smalaste läge är uppfällbarheten något begränsad eftersom armstödet fälls mot ryggröret.

De fyra olika monteringslägena för armstödet:



Standardutförande

Armstödshöjd från sits 22,5 cm (som idag).
Bredd mellan armstöd 48,5 cm (som idag).



Förhöjt läge

Armstödshöjd från sits 28,5 cm.
Bredd mellan armstöd 48,5 cm.



Breddat läge

Armstödshöjd från sits 25,5 cm.
Bredd mellan armstöd 54,5 cm.



Smalt läge

Armstödshöjd från sits 25,5 cm.
Bredd mellan armstöd: 42 cm.



Den nya sitsen på Swift Mobil-2


Vi har gett sitsen en ny form med öppning baktill för mer komfort och åtkomlighet. En öppning baktill som förenklar för både brukaren och vårdaren.

Sitsens nya sköna form är framtagen och utvärderad av ett stort antal personer av olika storlek. Sitsens öppning är som bredast långt bak och har stora runda övergångar. Våra utvärderingar har visat att där sittbensknölna möter sitsen behöver öppningen vara som störst och med den form vi valt erbjuds just det. Störst chans till god komfort vid både upprätt sittande och vid sittande med bakåt-tippat bäcken. Sitsen har dessutom plan översida och undersida utan stänk-skydd. Allt för att underlätta åtkomligheten för vårdare och brukare.



Den nya sitsen på Swift Mobil-2

Den nya sitsen, öppen baktill, kommer att passa äldre modeller av Swift Mobil, men den tidigare sitsen, sluten baktill, kommer INTE att passa på nya Swift Mobil-2.

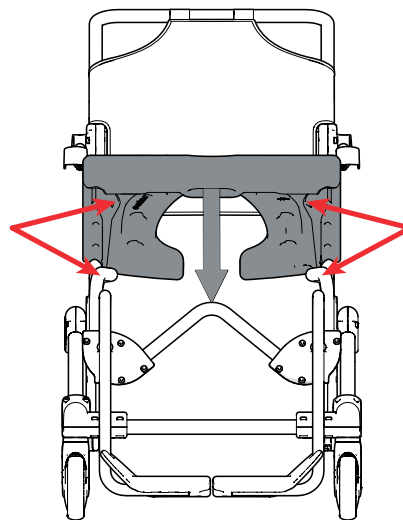

Konstruktionsändring av chassit

Stolens chassi får en ny passning mot sitsen för att bättre säkra sitsens montering.

Nya mjuka komfortsitsar

Tillsammans med Swift Mobil-2 introduceras nya komfortsitsar som är öppna baktill. De finns i två olika höjder; en som är 2 cm och en som är 4 cm.

OBS! Man kan fortsättningsvis använda komfort- och mjuksitsar som är slutna baktill på nya Etac Swift Mobil-2, men de nya mjuka komfortsitsarna, öppna baktill, kommer inte att passa äldre Swift Mobil modeller med sitsar som är slutna baktill.



Nya mjuka komfortsitsar

Skönt formade sitsar för bästa komfort, öppna baktill, 2 resp 4 cm höga.

Befintliga komfortsitsar

Befintliga komfortsitsar finns kvar i sortimentet; slutna baktill, 2 resp. 4 cm höga.



Ny form på ryggklädseln

Ryggklädseln har fått ny form för att lättare hanteras tillsammans med huvudstödet. Det blir nu enkelt att ta bort huvudstödet utan att ändra ryggklädseln.

OBS! Den nya ryggklädseln kommer inte att passa gamla chassin och vice versa eftersom chassits ryggrör har fått ny kurvatur med fästen för armstöd högre placerade.



Befintlig ryggklädsel

Swift Mobils befintliga ryggklädsel, som passar till det äldre chassit.



Den nya ryggklädseln till Swift Mobil-2

Klädseln är snabbtorkande och har 2 fästen runt körhandtaget för enklare reglering av huvudstödet.

Nytt tillbehör - XL rygg

Vi introducerar en ny XL rygg som ger mer plats för större brukare. Ryggpartiet är breddat vilket gör att utrymmet mellan armstöden ökar med 6 cm. Utöver det är XL-ryggen försedd med de breddningsbara/höjdställbara armstöden som kan monteras så att man får ytterligare 6 cm utrymme mellan armstöden. XL-ryggen kommer att erbjudas både som tillbehör och som en färdigkonfigurerad version av Swift Mobil-2.

OBS! XL-ryggen kommer enbart att finnas tillgänglig för Swift Mobil-2 och inte för Swift Mobil Tilt-2.



XL-rygg

Swift Mobil-2 med den breda XL-ryggen.



Nytt tillbehör: Höft- och bröstbälte i mjukt snabbtorkande material

Nytt 2-delat, mjukt följsamt positioneringsbälte med mittspänne som kan användas både som höftbälte och bröstbälte. Bältet är justerbart på 3 ställen, vilket ger stor passbarhet, varför det passar bra både till mindre och större brukare (ställbart från 65 till 130 cm). Det är gjort i ett skönt snabbtorkande material som ger mjukhet, och en konstruktion som erbjuder stabilitet där det behövs. Bältet fästes enkelt under sitsen som höftbälte/positioneringsbälte eller tillsammans med rygglädseln som bröstbälte. Alla fästen ingår.

Säljstart november 2019.



Höft- och bröstbälte

Nytt positioneringsbälte som är justerbart på tre ställen samt gjort i skönt och mjukt material. Säljstart november 2019.

Nytt tillbehör: Kortare benstöd

Efter önskemål från många kunder har vi tagit fram ett kortare benstöd. Formen och vinklarna är desamma som tidigare, men benstöds längd är 10 cm kortare.





Swift Mobil-2 får nya artikelnr

I och med ovanstående uppdateringar får Etac Swift Mobil-2 nya artikelnummer.

De kommer att börja på 8022 istället för 8020. Swift Mobil 80209400 blir Swift Mobil-2 80229400.

Då samtliga Swift Mobil-2 varianter kommer att ha en max brukarvikt om 160 kg kommer det totala antalet artikelnummer att reduceras. Swift Mobil med max brukarvikt om 135 kg kommer inte längre att finnas i sortimentet.

Nedan finns en lista med samtliga befintliga artikelnummer och vilka artikelnummer som ersätter.

Nya artikelnummer börjar gälla från och med 2019-09-02. Gamla artikelnummer utgår 2019-08-30.

Alla Swift mobil-2 artiklar kommer att ha max brukarvikt 160kg.

Befintligt art. nr.	Benämning	Nytt art. nr.
80209400	Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad	80229400
80209401	Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad	80229401
80209402	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2	80229402
80209404	Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med hinkgejder	80229404
80209405	Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder	80229405
80209406	Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad med bäckengejder	80229406
80209407	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med hinkgender	80229407
80209408	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder	80229408
80209409	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder och bäcken	80229409
80209410	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad	80229410
80209411	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med hinkgejder	80229411
80209412	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder	80229412
80209415	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder och bäcken	80229415
80209416	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 monterad med bäckengejder, bäcken och komfortsits	80229416
80209417	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 med bäckengejder, bäcken och tipskydd	80229417
80209418	Dusch/toastol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder, bäcken och komfortsits	80229418
80209419	Dusch/toastol Swift Mobil-2 monterad med bäckenhållare och vrb fotplattor	80229419
80209420	Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd	80229400
80209421	Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd och hinkgejder	80229404
80209422	Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddande armstöd och bäckengejder	80229405
80209423	Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med breddade armstöd/bäckengejder/bäcken/komfortsits	80229418
80209460	Dusch/toastol Swift Mobil 160 delmonterad med bäckengejder och raka armstöd	80229405
80209463	Dusch/toalettstol Swift Mobil-2 delmonterad med bäckengejder och upf vrb fotplattor	80229463
80209464	Dusch/toastol Swift Mobil 24"-2 m bäckengejder och upf vrb fotplattor	80229464
80209465	Dusch/toastol Swift Mobile 24"-2 160 m bäckengejder och upf vrb fotplattor	80229464
	Dusch/toalettstol Swift Mobil-2 XL delmonterad med bred rygg	80229467
80209470	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 160 bäckengejder raka armstöd	80229412
80209471	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 m bäckengejder, upf vrb fotplattor och trampor	80229471
80209473	Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 m bäckengejder, vrb fotplattor	80229473
80209476	Dusch/toastol Swift Mobil tilt monterad m bäckengejder ufb vrb fotplattor	80229473
80209480	Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 breddade armstöd	80229410
80209481	Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 breddade armstöd och hinkgejder	80229411
80209482	Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 bäckengejder och breddade armstöd	80229412
80209486	Dusch/toastol Swift Mobil tilt 160 bäckengejder vrb fotplattor	80229473

Totalt antal artiklar Swift Mobil; 33

Totalt antal artiklar Swift Mobil-2; 22

2019-08-13

6/6

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Flex

Etac Flex stödhandtag 90 cm

Vi fasar ut Flex stödhandtag 90 cm, både skruv- och limvariant.

Alla andra varianter förblir oförändrade så möjligheten att köpa en 90 cm variant, eller vilken annan längd man föredrar är fortfarande möjligt. Köp Flex 60 cm och komplettera sedan med önskade antal påbyggnadsdelar.

Etac Flex är flexibel och kan byggas samman i obegränsat antal 30 cm delar till vilken längd och vinkel man föredrar.



Stödhandtag Flex 90 cm, vit och grå

Fasas ut

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Stödhandtag Flex 90 cm vit	3x30 cm skruvfäste	81707130
Stödhandtag Flex 90 cm vit	3x30 cm limfäste	81707230
Stödhandtag Flex 90 cm grå	3x30 cm skruvfäste	81707330
Stödhandtag Flex 90 cm grå	3x30 cm limfäste	81707430
Fasas ut fr.o.m.		Vecka: 34

2019-07-04 ID: P36027A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Duschpall/Duschstol | Etac Swift Fristående | Etac Swift Kommod

Etac Swift nya snäppen

Vi uppdaterar snäppen på armstöd och ryggstöd till Swift Duschpall /duschstol, Swift fristående och Swift Kommod. För att underlätta vid demontering av armstöd och ryggstöd har en designförändring gjorts på snäppena. Huvudprodukterna kommer ändras löpande och behåller sina nuvarande artikelnummer. Tillbehör och reservdelar får dock nya artikelnummer.

Det nya utförandet på armstöd och ryggstöd passar existerande produkter, förutom Swift Kommod med serie nr t.o.m 109 999 då artikel nummer 84005069 skall användas. Nytt utförande kommer finnas från och med 1:a november.



Äldre version av arm- och ryggstödssnäppen
Kortare snäppen på arm- och ryggstöd som utgår.



Ny version av arm- och ryggstödssnäppen
Längre snäppen i utförande som förenklar demontering.



Nytt utseende på snäppena

Designen på snäppena har förändrats för att underlätta när armstöd och ryggstöd ska tas bort. Snäppena har blivit längre vilket gör dem lättare att klämma samman och underlättar vid demontering.

2019-09-24 ID: P12775A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Benämning Tillbehör/Reservdel	Nytt art. nr.	Gammalt art. nr.
Ryggstöd Swift Grå	84006181	84005069
Ryggstöd Swift Kommod Grå (fr.o.m. serie nr. 110000)	84006181	84005069
Ryggstöd Swift Kommod Grå (t.o.m. serie nr. 109 999)	N/A	84005069
Ryggstöd Swift Grön	84006182	81701120
Ryggstöd Swift Isblå	84006183	84005071
Armstöd Swift grå par	84006184	84005074
Armstöd Swift grön par	84006185	81701110
Armstöd swift isblå par	84006186	84005075
Leverans fr.o.m.	Vecka: 45	Slutförbrukas

Existerande lager slutförbrukas innan de nya börjar levereras.
Artikelnumren till huvudprodukten är oförändrade.



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil | Etac Mobila dusch- och toalettstolar

Etac Swift Mobil Huvudstöd

Huvudstödet till Swift Mobil får ett nytt artikelnummer. Detta på grund av att staget kortats ned för att Swift Mobil ska vara mer tillgänglig och att passbarheten över toalett ska bli bättre.

Det äldre huvudstödet är fortfarande kompatibelt med nya Swift Mobil-2 och äldre Swift Mobil är kompatibelt med det nya huvudstödet. Inga andra gränssnitt har blivit ändrade.



Huvudstöd

Staget på Swift Mobils huvudstöd har kortast ned med 10 cm.

Utgående artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Nackstöd Swift Mobil mod 2		80209447
Nackstöd Swift Mobil mod 2	exkl fäste	84005084
Utfasas		

Nya artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd Swift Mobil		80209521
Huvudstöd Swift Mobil	exkl fäste	84006188
Leverans		Finns i lager

2019-10-07 ID: 36031A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Combi Frame:x / R82 Multi Frame

Hjälpmotor Etac Lille Viking 2015 på R82 Combi Frame:x och Multi Frame

Tunga ekipage? Nu kan Etac Lille Viking monteras på våra juniorunderreden R82 Combi Frame:x stl 3-4 och R82 Multi Frame stl 3. För artikelnummer på hjälpmotor och monteringsats, se artikelnummer nedan. För artikelnummer på underredena Combi Frame:x och Multi Frame, se vår hemsida etac.se.



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame



Etac Lille Viking 2015

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Lille Viking 2015 Flat bow		27943
Monteringssats CombiFrame:x MultiFrame/	Cougar Lille Viking bygel	UB200624T
Leverans		Finns i lager

2019-03-21

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter






Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Förlängd körbygel till Kudu

Nu finns ett nytt tillbehörskit till Kudu för att förlänga körbygel.

Kitet innehåller det du behöver för att kunna få en höjdbar körbygel.

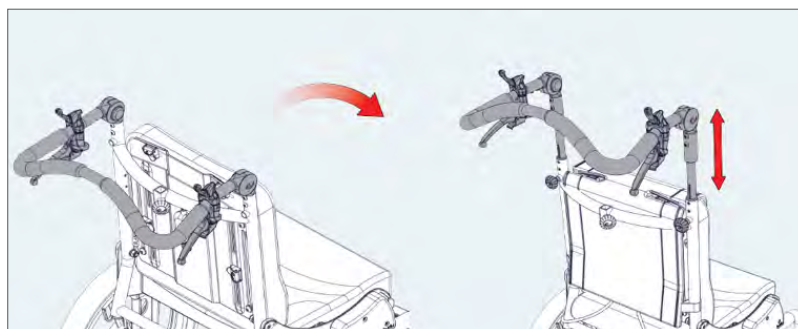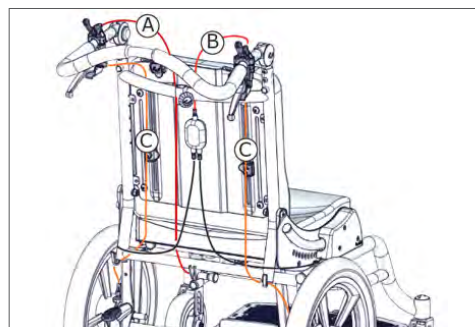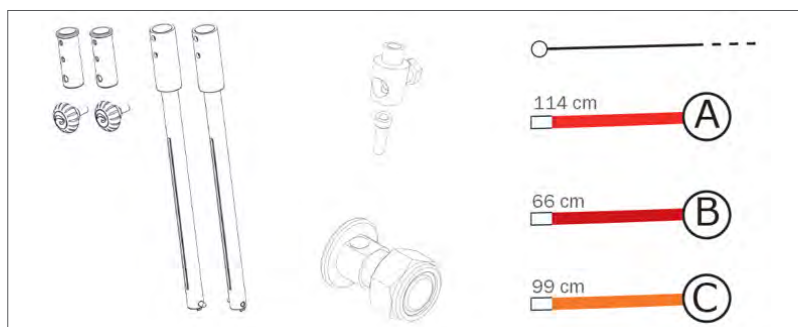

Vid ommontering används befintlig körbygel.

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Förhöjningsdel körbygel Kudu	stl 1-4 inkl kablar	3195630-10
Leverans		Finns i lager

2019-03-21

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter




Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat


Ny storlek på bord till R82 Meerkat

Nu kan vi erbjuda ytterligare en storlek på bord till R82 Meerkat. Det som skiljer det nya bordet från befintligt bord är ett måttet på utskärningen. Stl 1, 280 mm och stl 2, 357 mm.

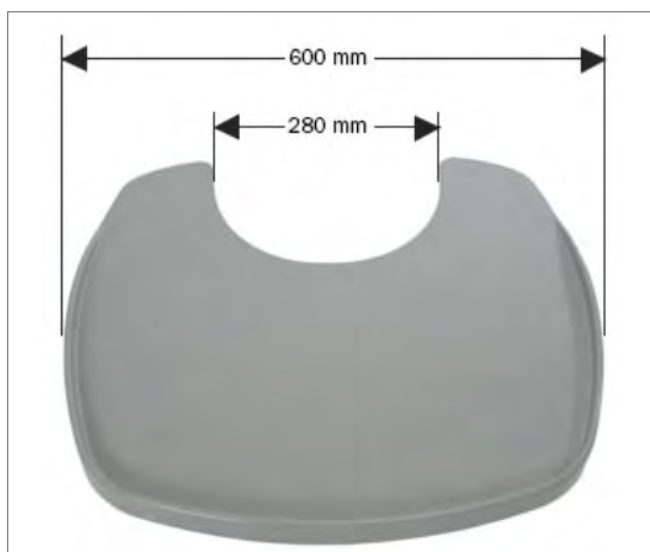

Bord stl 1

Befintligt tillbehör

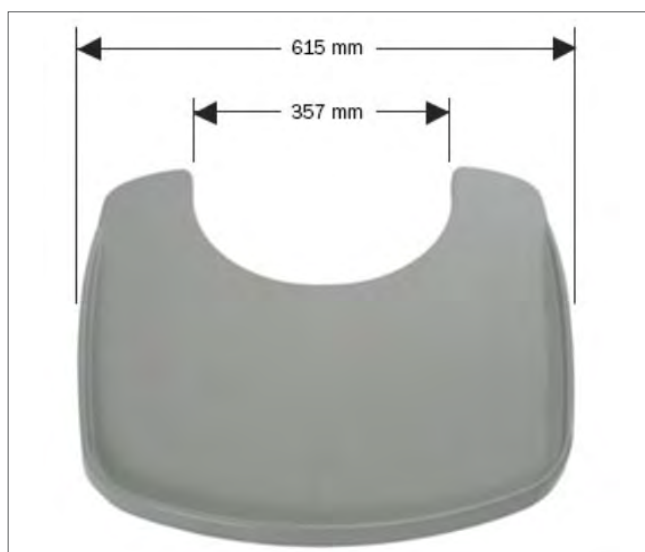

Bord stl 2

Nytt tillbehör

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Bord Meerkat magstående stl 1	Plast urskärning 280 mm	31869485
Bord Meerkat magstående stl 2	Plast urskärning 357 mm	31869486
Leverans		Finns i lager

2019-03-07

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

Bröst- och höftstöd – kompletterande storlek

Nu kan vi erbjuda bröst- och höftstöd till Meerkat i storlek XL.



Brööststöd



Höftstöd



Ståstöd R82 Meerkat

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Brööststöd Meerkat XL	900–1100 mm	31869483
Höftstöd Meerkat XL	900–1100 mm	31869243
Leverans		Finns i lager

2019-01-11

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Ståstöd R82 Caribou | Toucan | Gazelle

Nytt tillbehör – Polstringsplatta bord

Nu kan vi erbjuda en polstringsplatta bord som tillbehör. Den nya plattan passar bord till ståstöd R82 Caribou, Toucan och Gazelle. Se artikelnummer nedan.

Plattan finns i tre varianter med olika utskärning:

31862135-0: Fyrkantig utskärning, 400 mm som följer bordets kanter

31862135-1: Smalare utskärning, 280 mm

31862135-2: Större utskärning, 350 mm



Polstringsplatta bord

Nytt tillbehör

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Polstringsplatta bord 400 mm	utskärning inkl överdrag	31862135-0
Polstringsplatta bord 280 mm	utskärning inkl överdrag	31862135-1
Polstringsplatta bord 350 mm	utskärning inkl överdrag	31862135-2
Passar till bord:		
Bord plast med leklåda och bricka	Toucan stl 1	31861121
Bord plast med leklåda och bricka	Toucan stl 2	31861122
Bord plast med leklåda och bricka	Toucan stl 3	31861123
Bord plast med leklåda och bricka	Toucan stl 4	31861124
Bord plast med leklåda och bricka	Toucan stl 5	31861125
Bord plast med leklåda och lock	Caribou stl 1-2	31862130-2
Bord plast med leklåda och lock	Caribou stl 3-4	31862130-3
Bord plast med leklåda och bricka	Gazelle stl 1-2	3188108-0
Bord plast med leklåda och bricka	Gazelle stl 3-4	3188108-1
Leverans		Finns i lager

2019-06-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Swan | Flamingo

Potta Swan/Flamingo – Nytt artikelnummer

Potta Swan storlek 1-4 (Flamingo stl 1-2) byter artikelnummer. Se nedan.



Potta Swan / Flamingo

Benämning utgår	Beskrivning	Nytt art nr.
Potta Swan stl 1-4	Flamingo stl 1-2, exkl hållare	31880128
Ersätts av:		
Potta Flamingo High-low stl 1-2	Swan stl 1-4, exkl hållare	31112401
Leverans		Finns i lager

2019-06-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Uppdatering av komfortrullstol R82 Kudu – Ny justerbar rygg

Rygghöjden på Kudu ställs in genom justering av de två överlappande ryggplattorna och bålstöden som är monterade i skåror. Hålen och de korta skåror på dessa plattor har nu ersatts av längre överlappande skåror, vilket möjliggör en mycket enklare och mer flexibel justering av bålstöden. På den nya ryggen monteras ryggplattorna på ryggprofilerna med muttrar och bultar istället för den ursprungliga popnitningen.

Denna ändring är redan implementerad på storlek 2 och 3 och kommer inom kort införas på storlek 1 och 4.

I samband med denna uppdatering har vi lagt till två hål på vardera sidan av den övre ryggplåten för en alternativ montering av fästet för suffletten. Vi har även fasat av fjäderlåset för ryggfällningen något för att göra det lättare att montera tillbaka ryggen i upprätt läge.



R82 Kudu

Ny justerbar rygg

Benämning

Komfortrullstol R82 Kudu

stl 2 och 3

Leverans

Finns i lager

Komfortrullstol R82 Kudu

stl 1 och 4

Införs successivt fr.o.m vecka 22

Benämning reservdelar

Art.nr

Ryggplatta främre Kudu stl 1

31137462

Ryggplatta främre Kudu stl 2

31137463

Ryggplatta främre Kudu stl 3

31137464

Ryggplatta främre Kudu stl 4

31137465

Ryggplatta bakre Kudu stl 1

31137466

Ryggplatta bakre Kudu stl 2

31137468

Ryggplatta bakre Kudu stl 3

31137470

Ryggplatta bakre Kudu stl 4

31137471

Fjäderbricka M5 rfr

311100485

Låsmutter 4 mm

311606275

Skruv M 5x 6 rf tuflok svart

310631952

Leverans

Finns i lager

2019-05-28

1/1

Vid frågor, kontakta:

Etac Sverige AB

Box 203

334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.se

www.etac.se

etac[®]

Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Ståstöd R82 Rabbit Up

Nya ståstöd Rabbit Up

Rabbit Up är ett säkert, pålitligt och justerbart ståstöd som ger ett bra magstående. Rabbit Up är anpassningsbart och kan användas både som ståstöd utan drivhjul och mobilt ståstöd med drivhjul. Rabbit Up kan anpassas till barn och unga och levereras i 4 storlekar. Alla befintliga tillbehör passar till Rabbit Up. Se etac.se för artikelnummer.

Vad är nytt?

- Finns som ståstöd och mobilt ståstöd
- Storlek 2 och 4 är smalare
- Svarta drivhjul
- Stängda drivringar
- Valbar cambervinkel
- Fasta lägen för vinkeljustering
- Nya färger



Drivhjul

Svarta drivhjul med stängda drivringar.



Cambervinkel

Standard cambervinkel:

Stl 1: 8°, stl 2: 6°, stl 3: 6°, stl 4: 4°

Valbar cambervinkel:

-3°, -6°, +3°, +6°

För att uppnå ideal position för framdrivning och att passa barnets "bredd" kan cambervinkeln justeras.

Linjalerna på chassit hjälper till att montera rätt cambervinkel för vald drivhjulstorlek.



Nya färger



Stl 1 – Gul



Stl 2 – Blå



Stl 3 – Grå



Stl 4 – Silver

För mer information om Rabbit Up, besök vår hemsida etac.se.

2019-05-14

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Huvudstöd

Nytt tillbehör – Plant huvudstöd

Nu kan vi erbjuda ett plant huvudstöd till våra junior sitthjälpmedel. Huvudstödet finns i tre storlekar och kan kombineras med kort eller långt turtlestag.



Plant huvudstöd inkl turtlestag

Nytt tillbehör

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Huvudstöd plant stl 1	turtlestag flat 13 cm dyna 23x10 cm	319981090-60
Huvudstöd plant stl 2	turtlestag flat 13 cm dyna 28x10 cm	319982090-60
Huvudstöd plant stl 3	turtlestag flat 13 cm dyna 33x10 cm	319983090-60
Huvudstöd plant stl 1	turtlestag flat 25 cm dyna 23x10 cm	319981091-60
Huvudstöd plant stl 2	turtlestag flat 25 cm dyna 28x10 cm	319982091-60
Huvudstöd plant stl 3	turtlestag flat 25 cm dyna 33x10 cm	319983091-60
Extra överdrag		
Överdrag ryggförlängare x:panda stl 1	svart 23x10 cm	318910652-160
Överdrag ryggförlängare x:panda stl 2	svart 28x10 cm	318910652-260
Överdrag ryggförlängare x:panda stl 3	svart 33x10 cm	318910652-360
Leverans		Finns i lager

2019-05-15

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Wombat | R82 Kudu | R82 High-low/High low:x | R82 Multi Frame | R82 Combi Frame:x

Fotlåda – Nytt tillbehör till fotplatta Wombat

Nu kan vi erbjuda en fotlåda som nytt tillbehör till fotplatta Wombat stl 1–3. Fotlådan monteras enkelt på den befintliga Wombat fotplattan. Tillbehör till fotlådan kommer att komma inom kort.



Fotlåda monterad på fotplatta Wombat

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Fotlåda inkl polstring stl 1	till fotplatta Wombat stl 1	3195145-1BOX
Fotlåda inkl polstring stl 2	till fotplatta Wombat stl 2	3195145-2BOX
Fotlåda inkl polstring stl 3	till fotplatta Wombat stl 3	3195145-3BOX
Leverans		Finns i lager

2019-11-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

Kil sits – Nytt tillbehör till sulky R82 Stingray

För att kunna skapa sittgrop finns nu en ny kil till sitsen för Stingray, storlek 1–2.

Kilen levereras i en storlek och anpassas genom att skära ut kilen rätt storlek. Kilen fästs i främre kant av sitsen med hjälp av kardborreband som medföljer.



Kil sits

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Kil sits Stingray stl 1-2	36x16x2,5 cm	318720405
Leverans		Finns i lager

2019-10-01

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: R82 Swan

Underarmstöd – Nytt tillbehör till hygienstol R82 Swan

Nu kan vi erbjuda underarmstöd som nytt tillbehör till hygienstolen Swan.

Underarmstödet är samma som till flamingo, men med ett annat fäste.



Underarmstöd R82 Swan

Benämning	Passar till:	Art nr.
Underarmstöd Swan stl 2	Swan stl 2	31870132-SW2
Underarmstöd Swan stl 3-4	Swan stl 3-4	31870132-SW4
Underarmstöd Swan stl 5	Swan stl 5	31870132-SW5
Underarmstöd Swan stl 6	Swan stl 6	31870132-SW6
Leverans		Finns i lager

2019-10-01

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation



Gäller: Molift 2-punkts lyftbyglar | Molift Air, Mover 180, Mover 205, Mover 300

Produktförbättring

Nu kommer en ny design på våra 2-punkts lyftbyglar.

De röda kompositkrokarna byter material till krokar i metallegering.

Gamla utseendet på kroken

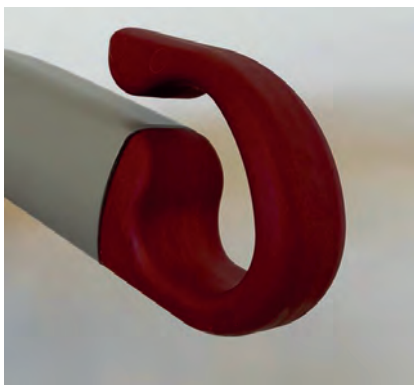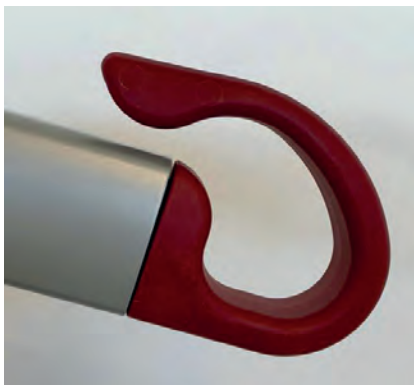

Ny design på kroken



Utgående produkt och benämning	Art. nr	Ny produkt och benämning	Art. nr.
2-punkt, S	1830003	2-punkt lyftbygel alu 350, S, till Mover Air/180	1830043
2-punkt, M	1830002	2-punkt lyftbygel alu 450, M, till Mover Air/180	1830042
2-punkt, L	1830001	2-punkt lyftbygel alu 550, L, till Mover Air/180	1830041
2-punkt, S	1430015	2-punkt lyftbygel alu 350, S, till Mover 205/300	1430117
2-punkt, M	1430016	2-punkt lyftbygel alu 450, M, till Mover 205/300	1430116
2-punkt, L	1430017	2-punkt lyftbygel alu 550, L, till Mover 205/300	1430115

Ändringen är införd

2019-03-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation



Gäller: Molift 2- och 4-punkts lyftbyglar |

Produktförbättring

Nu kommer en ny design på alla våra yftbyglar.

De röda kompositkrokarna byter material till krokar i metallegering. Införs succesivt

Gamla utseendet på kroken

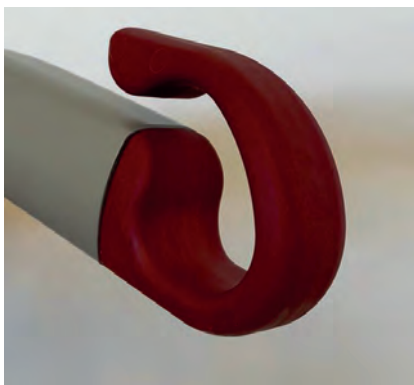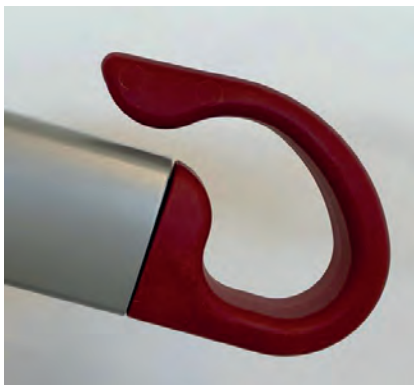

Ny design på kroken



Utgående produkt och benämning	Art. nr	Ny produkt och benämning	Art. nr.
Lyftbygel 4-p Air/ Mover 180 M alu 440x280x235 mm	1830011	Lyftbygel 4-p Air/ Mover 180 M alu 450 mm	1830111
Lyftbygel 4-p Air/Mover 180 L alu 550x340x260 mm	1830010	Lyftbygel 4-p Air/Mover 180 L alu 550 mm	1830112
Lyftbygel 4-p Mover 300 M alu 440x280x235 mm	1530001	Lyftbygel 4-p Mover 300 M alu 450 mm	1530101
Lyftbygel 4-p Mover 300 L alu 550x410x260 mm	1530002	Lyftbygel 4-p Mover 300 L alu 550 mm	1530102
Lyftbygel 4-p Partner 255 M alu 440x280x235	1330060	Lyftbygel 4-p Partner 255 M alu 450 mm	1330160
Lyftbygel 4-p Partner 255 L alu 550x410x260	1330061	Lyftbygel 4-p Partner 255 L alu 550 mm	1330161

Ändringarna införs succesivt

2019-09-03

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia | OneWayGlide Velour, EasyTurn, AutoTurn

Materialbyte

Alla våra produkter med velour som material på utsidan; OneWayGlide Velour, EasyTurn, AutoTurn kommer ändras.

Det betyder att om du kombinerar en Etac rullstol med en OneWayGlide, kommer de nu att ha samma material.

Velouret får en mycket bättre och snyggare yta och den enda skillnaden är i färg, den nya velouren är mörkare än den existerande.

Gäller från enligt nedan:

Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.	På lager 2019.
OneWayGlide Long w/straps Velour	400 x 1300 mm. öppen	IM33/8	December
OneWayGlide Long Velour	400 x 1300 mm. öppen	IM34/8	Maj
OneWayGlide Long Velour	550 x 1300 mm. öppen	IM35/8	December
OneWayGlide Velour	430 x 370 mm. Pad	IM44/8	December
OneWayGlide Velour	430 x 370 mm. Tub	IM45/8	Augusti
OneWayGlide Velour	420 x 500 mm. Tub	IM50/8	Oktober
OneWayGlide Long Velour	450 x 1300 mm. öppen	IM51/8	Juni
EasyTurn	Ø450 mm. Ovansida: Velour. Undersida: Non-Slip	IM990454	Mars
EasyTurn	Ø400 mm. Ovansida: Velour. Undersida: Non-Slip	IM999405	Mars
EasyTurn	Ø500 mm. Ovansida: Velour. Undersida: Non-Slip	IM999505	Juni
AutoTurn med/band	Ø450 mm. Ovansida: Velour. Undersida: Non-Slip	IM99999	Oktober

Införs successivt

se ovan

2019-02-28

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia GlideCushion | Immedia TurningMattress

Utgående produkter

På grund av låg efterfrågan utgår glidmatta Immedia GlideCushion storlek XS och S samt vändmadrass Immedia TurningMattress.



Glidmatta Immedia GlideCushion



Vändmadrass Immedia TurningMattress

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidmatta GlideCushion 60x25 cm	tubformad nylon polstrad	IM60/25N
Glidmatta GlideCushion 60x50 cm	tubformad bomull / polyester polstrad	IM60/50
Överdrag nylon 62x100 cm för IM60/90	vattentät grön	IM6010N
Vändmadrass TurningMattress 120x195 cm	tunnelsydd bomull / polyester polstrad	IM120/195
Utgår		Slutförbrukas

2019-02-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia HandyTrans

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår glidmatta Immedia HandyTrans 30x40 cm.



Glidmatta Immedia HandyTrans

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidmatta HandyTrans	30x40 cm	IM102045
Utgår		Slutförbrukas

2019-02-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia MiniBoard

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår förflyttningsbår MiniBoard storlek small.



Förflyttningsbår Immedia MiniBoard

Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.
Förflyttningsbår MiniBoard Small	44x100 cm	IM8010044
Utgår		Slutförbrukas

2019-02-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia OneWayGlide

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår gliddyna OneWayGlide.



Gliddyna OneWayGlide

Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.
Gliddyna OneWayGlide Long Velour	300 x 1300 mm	IM30/8
OneWayGlide Cover	470 x 470 mm	IM381
OneWayGlide Cover	450 x 390 mm	IM391
Utgår		Slutförbrukas

2019-02-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia WiseMover

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår förflyttningssystem Immedia WiseMover.



Förflyttningssystem Immedia WiseMover

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Förflyttningssystem Wisemover 85x200 cm	med handtag	IM441
Utgår		Slutförbrukas

2019-02-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation


Gäller: Immedia | Ny produkt | SatinSheet System

2019-05-22

Nytt glidlakan – SatinSheet 2Direction Corner – midi

Det nya glidlakanet är försedd med ett resårband i varje hörn för att lättare kunna fixera lakanet. Glidytan är 1400 mm lång och 650 mm bred.

Lakanet är enkelt att fästa för en ensam vårdare och fungerar bra på tjockare madrasser eller när en tryckavlastande madrass används.

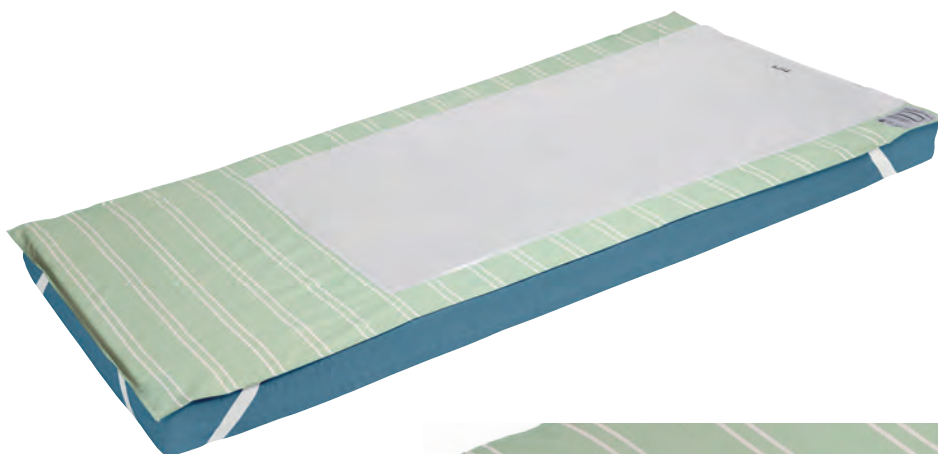

Art.nr..	Beskrivning	Storlek Bredd x Längd
IM4157S	SatinSheet 2Direction Corner - midi	850 x 2000 mm (satin 650 x 1400 mm).
Leverans		Juni 2019

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia HandyGrip |

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår handtag HandyGrip 5x160 cm för vändning i säng. Slutförbrukas



Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.
Handtag HandyGrip	för vändning i säng 5x160 cm	IM461
Utgår		Slutförbrukas

2019-09-03

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia HipTurner |

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår höftvändare HipTurner. Slutförbrukas.



Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.
Höftvändare HipTurner	40x20x4,5 cm, glidtyg 25x80 cm	IM462
Utgår		Slutförbrukas

2019-09-03

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Immedia Scanner ArmSupport |

Utgående produkt

På grund av låg efterfrågan utgår armstöd Scanner ArmSupport. Slutförbrukas.



Benämning	Beskrivning BxL	Art. nr.
Armstöd Scanner Armsupport	29x51x20 för CT och MR röntgen	IM502
Utgår		Slutförbrukas

2019-03-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: STAR Sittdynor | StarLock, StabilAir, Galaxy, Standard Air

STAR Sittdynor – Ändring av förpackning

Överdragen till STAR sittdynor kommer framöver att levereras i en vakuumpförpackad påse tillsammans med dynan i kartongen.

Ändringen införs successivt fr.o.m 1 juni.



Föregående förpackning



Ny förpackning

2019-04-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Hjälpmotor Lille Viking

Fasta lägen Lille Viking


Vi inför successivt fasta lägen på vinkelstycke, dragstång och tvärstag vid montering av Lille Viking. Delarna ingår som standard vid beställning av Lille Viking.

Preliminärt datum för införande:

Lille Viking Flat Bow Vecka 01 2020

Lille Viking Low Bow Vecka 14 2020

Delarna kan även beställas som reservdel, se nedan tabell. Nya och gamla delar kan inte kombineras.

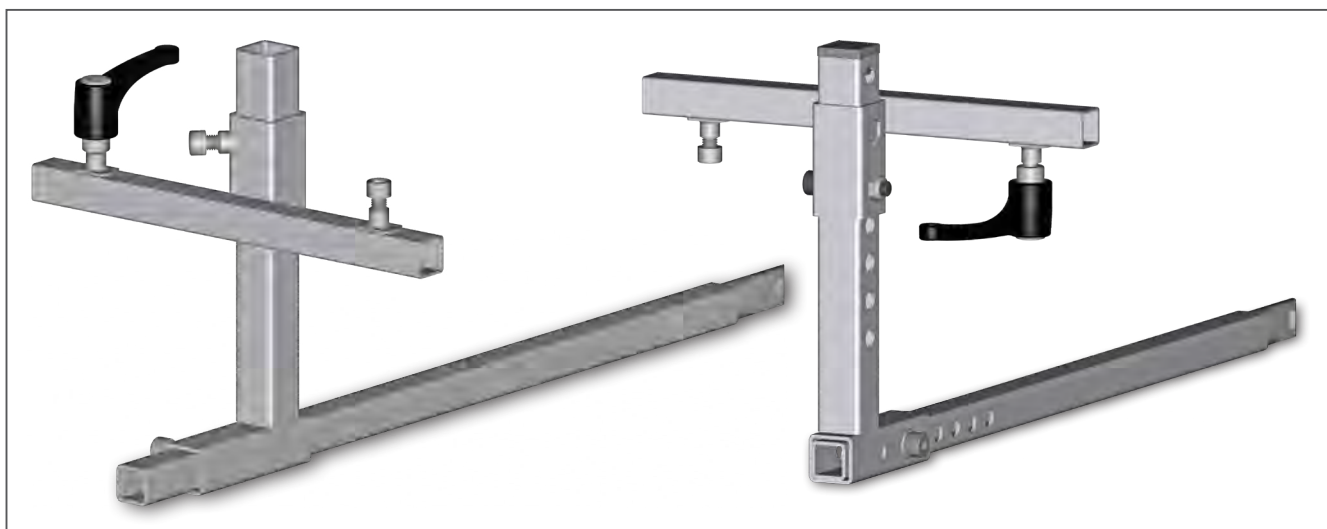

Äldre och ny modell

Till vänster den äldre modellen och till höger den nya modellen med fasta lägen.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dragstång 550 mm Lille Viking		UB200020
Tvärstag inkl vred/skruv		UB200070A
Vinkelstycke inkl skruv		UB200019B

Slutförbrukas successivt, fr.o.m.

Vecka 47

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dragstång LV fasta läge		83182
Tvärstag LV fasta läge		83183
Vinkelstycke LV fasta läge		83184

Införs succesivt, fr.o.m.

Vecka 47

2019-11-27 ID: 35108A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com

Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com

Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com

Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com

Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se