



Produktinformation
från Etac 2021

 **etac**[®]

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Etac Prio – Brukarmanövrerad självtilt.....	3
Etac Prio – Bromsadapter 16"	4
Etac Lille Viking – Nytt batteri	5
Etac Cross 5 XL – Djupare tvärstag	6
Etac Cross 3A – Ryggklädsel nytt utförande	7
Etac Transit – Färgbyte	8–9
Etac Fotplattesystem	10–15
Etac Cross 5/6 – Hög rygg Cross 3A	16–17
Etac Cross/Crissy – Sitsdjupsförlängare ny	18
Etac Drivring rostfri – nytt utförande	19
Etac Textilier – Utgåar	20–22
Etac Textilier – Ny design.....	23–26
Etac Prio 3A – Nyhet	27–31

Bad & Toalett

Etac Swift Mobil-2 – Breddningssats	32–33
Etac Rufus bad- och duschstolar – Utfasning...	34
Etac Swift Mobil-2 – med upprätt rygg.....	35–36
Protect dyna – Utgåar	37
Etac Swift – Ökad brukarvikt / Utfasning...	38–39
Bäckenhållare och stänkskydd	40–41

Junior

R82 Heron – Nytt bålstöd.....	42
R82 x:panda – Fasta bålstöd i ny storlek.....	43
R82 x:panda – Nytt inkontinensöverdrag.....	44
R82 Wombat – Ny hållare handkontroll	45
Tumble Forms – Höftsele stl 3 utgår	46
R82 Meerkat – Polstring snabbspänne nytt	47
R82 Caribou – Justeringsplatta bålstöd nytt.....	48

Manuell förflyttning

Molift Raiser Pro – Nya tillbehör	49
---	----

Tryckavlastning

Heelift® hålavlastare – Utgåar	50
--------------------------------------	----

Småhjälpmedel

Etac Relive osthyvel – Utgåar	51
Etac Socky lång – Kopplingsanordning utgår ...	52

Kontakt

Kontakta oss	53–54
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Etac Prio brukarmanövrerad självtilt / fast ryggvinkel

Brukarmanövrerad självtilt

Vi kan nu erbjuda en ny funktion på Prio - brukarmanövrerad manuell självtilt.

Denna funktion gör det möjligt för användare att själv justera sitsvinklingen för vila och aktivitet.

För begränsning av vinkling bakåt kan clipsen (28163) användas på gaskolven.

Fästet för självtilt kombineras med Prios smala armstöd (28511-1/-2) och monteras under armstödsdynan på profilen. Passar både på höger eller vänster sida. Kan enkelt eftermonteras på befintligt stol.

Fast ryggvinkel utan gaskolv

I kombination med brukarmanövrerad självtilt finns även möjlighet att i konfigurationen välja med fast ryggvinkel, utan gaskolv. Ryggen kan då ställas in i 3 fasta lägen +5°, +10° och +15°, i de fasta hålen på ryggens sidoplåt. (Fällning av rygg är då endast möjligt genom att lossa skruvarna.)



Ny funktion på Prio

Med brukarmanövrerad manuell självtilt är det möjligt för användare att själva justera sitsvinklingen för vila och aktivitet.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste sitsvinkling	Brukarmanövrerad Prio kpl	28770
Leverans		Vecka 6, 2021

2021-02-11 ID: P35133A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Bromsadapter Prio 16" – Uppdaterat tillbehör

etac®

Vi har tagit fram en ny bromsadapter, för att göra det möjligt att montera brukarbroms även på Prio med 16" hjul, i balansposition a2, A2 och B2.

Den nya bromsadaptorn passar både 16" och 20" hjul.




Ny profil

Ny profil till 16" och 20" hjul.



Utgående profil

Utgående profil passar endast 20" hjul.

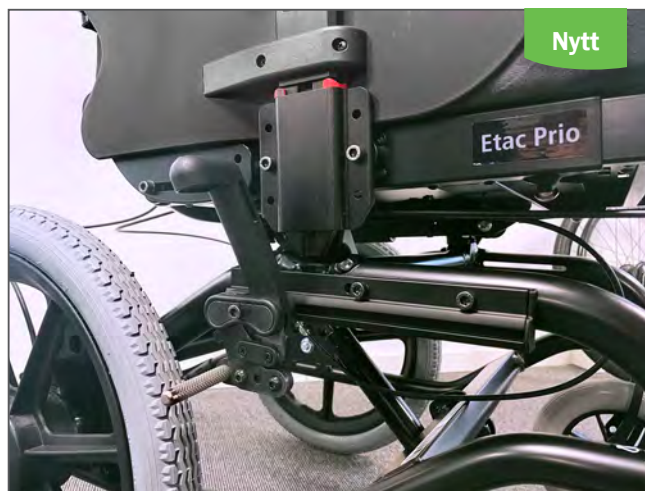

Uppdaterad bromsadapter

Brukarbroms monterad på Prio med 16" hjul.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Adapter broms Prio 16-20 kompl		28654
Leverans		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Adapter broms Prio 20		28404
Utgår		Utgått

2021-06-09 ID: P31955A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Lille Viking

Nytt batteri – Etac Lille Viking

etac®

Vi kommer successivt att införa ett nytt batteri till Lille Viking då den nuvarande tillverkaren har slutat tillverka den modell som är till Lille Viking.



Nytt batteri till Lille Viking

Batteri BP12-12 ersätter Batteri 12V/12A.



Utgående batteri till Lille Viking

Batteriet utgår eftersom modellen har slutat tillverkas.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Batteri BP12-12	Lille Viking	83443
Preliminär leverans		Vecka 19, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Batteri 12V/12A	Lille Viking 2000/2000+	UB2031D
Utgår		Vecka 19, 2021

2021-04-08 ID: P31960A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation


Gäller: Etac Cross 5 XL

Djupare tvärstag Cross 5 XL

etac®

Nu kommer tvärstagen till Cross 5 XL i ett nytt djupare mått. Det gäller breddstorlekarna från 47,5 cm till 60 cm. Förändringen görs för att kombinationen tvärstag och huvudstödsfäste ska vara möjlig utan att de krockar med varandra.

Tvärstagen blir 15 mm djupare mot nuvarande tvärstag.
Ändringen införs successivt.

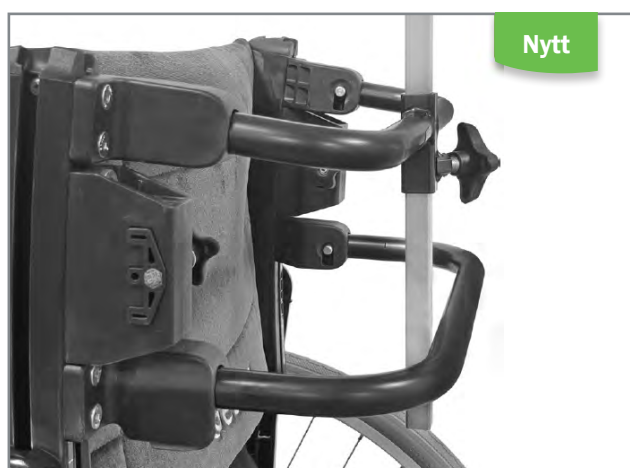

Djupare tvärstag
Det nya djupare tvärstaget som inte krockar med huvudstödsfästet.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tvärstag 3A 47.5 cm kompl mod 4		28695
Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4		28696
Tvärstag 3A 52.5 cm kompl mod 4		28697
Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4		28698
Tvärstag 3A 57.5 cm kompl mod 4		28699
Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4		28700

Successivt från Vecka 35, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tvärstag 3A 47.5 cm kompl mod 4		28119
Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4		28120
Tvärstag 3A 52.5 cm kompl mod 4		28121
Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4		28122
Tvärstag 3A 57.5 cm kompl mod 4		28123
Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4		28124

Slutförbrukas successivt, fr.o.m. Vecka 35, 2021

2021-07-07 ID: P35150A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross

Ryggklädsel Cross 3A - nytt utförande

etac®

Översta ryggbandet på ryggklädsel Cross 3A byts från 50 mm till 40 mm band.

Bytet sker successivt från och med september 2021. Övriga band på ryggklädslarna är samma som förut, 30 mm.

Ryggklädslarna har genomgått och klarat alla tester som med 50 mm band.



Nytt utförande

Ryggklädsel i nytt utförande där översta ryggbandet är 40 mm brett.



Gammalt utförande

Ryggklädsel i äldre utförande där översta ryggbandet är 50 mm brett.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg 3A rb	35-40 cm	62953-60
Klädsel rygg 3A rb	42.5-50 cm	62954-60
Klädsel rygg 3A rb	52.5-60 cm	62955-60
Införs successivt från		September, 2021

2021-07-06 ID: P5550-3A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Transit III

Färgbyte Transit III

etac®

Nu byter vi färg på Transit III från grå bläster (-53), till samma grå som är på Cross 6 (-78). Införandet beräknas ske under september 2021.



Ny färg
Transit III byter till
samma grå färg
som på Cross 6.



Utgående färg
Grå bläster -53 utgår
på Transit III.

2021-07-06 ID: P31980A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Transit III B35		13140301
Transit III B35 kund		13145301
Transit III B40		13140305
Transit III B40 kund		13145305
Transit III B45		13140309
Transit III B45 kund		13145309
Transit III B50		13140311
Transit III B50 kund		13145311
Transit III B55 kund		13145317
Leverans fr.o.m.		Vecka 36, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Transit III B35		13140301-53
Transit III B35 kund		13145301-53
Transit III B40		13140305-53
Transit III B40 kund		13145305-53
Transit III B45		13140309-53
Transit III B45 kund		13145309-53
Transit III B50		13140311-53
Transit III B50 kund		13145311-53
Transit III B55 kund		13145317-53
Transit avancerad B37.5		13140303-53
Utgår fr.o.m.		Vecka 36, 2021

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

Etac Fotplattesystem



Som ett led i vårt arbete att göra rullstolssortimentet och tillbehören ännu mer modulära lanserar vi nu ett nytt sortiment. Det består av fotplattor, hel fotplatta, fotlåda samt knästödd.

Förlängda fotplattor

Kommer i tre storlekar och monteras på standard fotplattor.

- Small - 250 x 225 mm. OBS! Hel platta.
- Medium - 150 x 225 mm, vänster och höger.
- Large - 200 x 225 mm, vänster och höger.

Inkluderar: Förlängd fotplatta, skruvar och bultar, 30 cm anti-halk tape.

Generellt:

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision!

Alla fotplattor kräver borring.

Bormall inkluderas.

Art. nr.	Small	Medium	Large
28774	Prio 40-45 cm		
	Cross 35-50 cm		
28775-1/2		Prio 40-45 cm	
		Cross 40-47,5 cm	
28776-1/2			Prio 50-55 cm
			Cross 50-52,5 cm



Förlängd fotplatta

Medium förlängd fotplatta monterad.



Fotplatta delad

Fotplattan i storlekarna Medium och Large (vänster och höger) kan användas separat eller i par. De kan länkas ihop som en plattform, se ovan.

2021-10-01 ID: P35142

1/6

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Art. nr.	Small
28774	Cross SB 35-50 cm

Fotplatta liten, inkl styrning

Fungerar även med snäva benstöd och breddat länkhjulsfäste.

SB: 35-37,5 = 5" länkhjul

SB: 40-50 = 6,5" länkhjul

Ersätter fotplatta barn.



Ersätter hel fotplatta barn:

26306 Fotplatta hel barn 35 cm

26307 Fotplatta hel barn 37,5 cm



Sidoskydd för fotplatta

Sidoskyddet förhindrar att foten kommer i kontakt med länkhjulet.

Add-on plattform


För att åstadkomma hel plattform behövs följande:

- 1 vänster och 1 höger förlängd fotplatta.
- 1 styrning inkl skruvar.

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen. Den hela plattformen kan kombineras med valfritt benstöd (även vinkelställbara).



De separata fotplattorna är "bultade" tillsammans med skruvar.

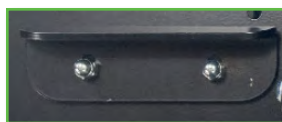

Add-on monteringskit innehåller skruvar för att fästa ihop fotplattorna och ett fäste som styr plattformen när den fälls ner.



Ihopmonterade förlängda fotplattor

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen.

Modulär fotplatta hel ersätter Prio hel fotplatta



*Utgår:
Prio hel fotplatta.*

Prio hel fotplatta utgår

För att beställa en hel plattform till Prio, där alla fotplattor ingår, använd artikelnummer nedan: 28662-28665 (inkluderar standard fotplattor, add-on fotplattor och monteringskit). Se även sista sidan med alla artikelnummer.

Nedan artikelnummer utgår:

- | | |
|-------|----------------------------|
| 28342 | Fotplatta hel komplett B40 |
| 28343 | Fotplatta hel komplett B45 |
| 28344 | Fotplatta hel komplett B50 |
| 28345 | Fotplatta hel komplett B55 |

Fotlåda

Fotlådan finns i två storlekar - Medium och Large. Passar på standard fotplattor och valfria benstöd.

1 komplett fotlåda består av:

- Höger och vänster förlängd fotplatta ihopmonterad.
- Sidoplåtar höger och vänster.
- Polstring.

Fotlådan beställs som tillbehör och kräver borrning.



Fotlådan

Bilden visar hur fotlådan är monterad vid leverans. Fotlåda Large kan även användas från SB 45. För att undvika kontakt med länkhjul rekommenderas då breddat länkhjulsfäste.



Art. nr.	Medium	Large
28642	Prio SB 40-45 cm	
	Cross SB 40-47,5 cm	
28643		Prio SB 50-55 cm
		Cross SB 50-52,5 cm

Knästöd - distalt och lateralt

För att skapa stöd för knä/lår behövs följande:

- 1 st knästöd yttre.
- 1 st benstöd vid eller snäv vinkel.

Vid införandet av yttre knästöd kommer Prios fasta benstöd att utgå.

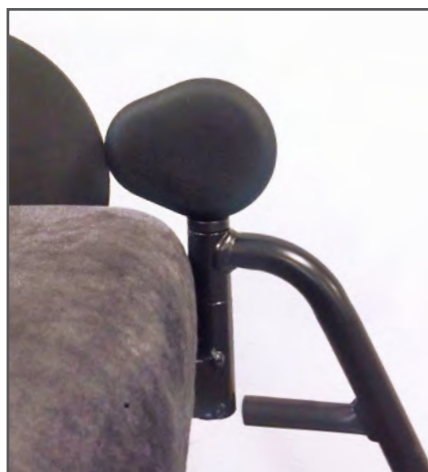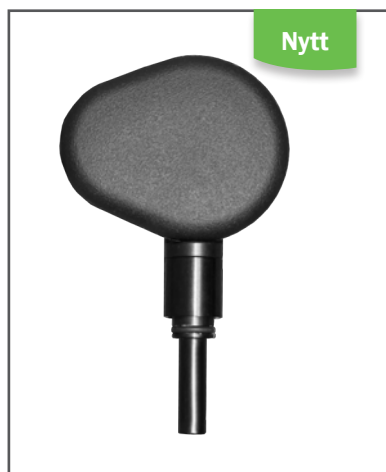

Montering på Prio utan distans.



Montering på Cross med distans.



Prio fasta benstöd

Ersätter Prio fasta benstöd:

- 27729-1 Benstöd fast komplett höger.
27729-2 Benstöd fast komplett vänster.

2021-10-01 ID: P35142

5/6

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Förlängning fotplatta S kpl	Hel fotplatta	28774
Förlängning fotplatta M kpl	hö	28775-1
Förlängning fotplatta M kpl	vä	28775-2
Förlängning fotplatta L kpl	hö	28776-1
Förlängning fotplatta L kpl	vä	28776-2
Styrning fotplatta hel kpl		28773
Sidoskydd fotplatta kpl	H35 mm	28772
Fotlåda 40-45 cm	Prio	28642
Fotlåda 50-55 cm	Prio	28643
Polstring fotlåda kpl M		28778
Polstring fotlåda kpl L		28779
Fotplatta hel kompl B40	inkl fotplattor Prio	28662
Fotplatta hel kompl B45	inkl fotplattor Prio	28663
Fotplatta hel kompl B50	inkl fotplattor Prio	28664
Fotplatta hel kompl B55	inkl fotplattor Prio	28665
Knästöd yttre kpl hö	fasta benstöd u lås	28777-1
Knästöd yttre kpl vä	fasta benstöd u lås	28777-2
Leverans		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel kompl B40	Prio	28342
Fotplatta hel kompl B45	Prio	28343
Fotplatta hel kompl B50	Prio	28344
Fotplatta hel kompl B55	Prio	28345
Fotplatta hel barn 35 cm	kompl	26306
Fotplatta hel barn 37.5 cm	kompl	26307
Benstöd fast komplett höger		27729-1
Benstöd fast komplett vänster		27729-2
Utfasning successivt från		Oktober 2021


Produktinformation

Gäller: Etac Cross 6 | Etac Cross 5 | Etac Cross 5XL


Hög rygg Cross 3A

etac®

För att öka flexibiliteten på Crossens standard ryggprofil ersätter vi den höga ryggprofilen och ryggklädseln med en ryggstödsförhöjare. Denna i kombination med standard ryggprofil och standard ryggklädsel utgör den höga ryggen, vilket gör det enkelt att ändra från standard rygghöjd till hög rygghöjd och tvärtom. Ryggklädselar hög kommer att finnas kvar som reservdel. Hög överdrag kvarstår.

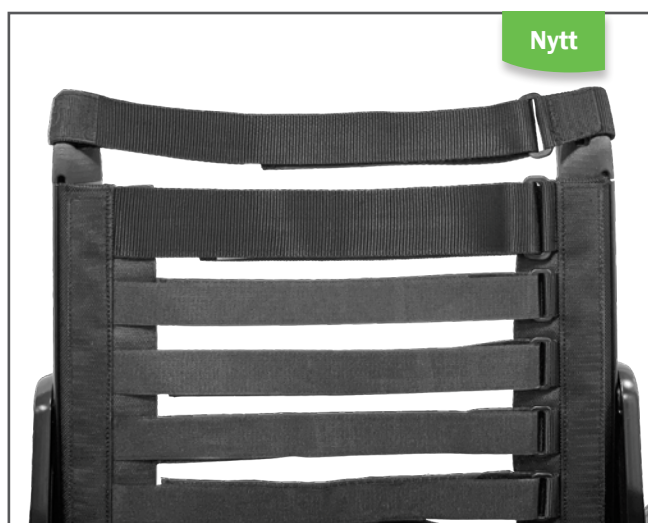

Ryggstödsförhöjare till Cross 3A
Ryggstödsförhöjare inklusive ryggband (höjd 6 cm) ersätter hög rygg.

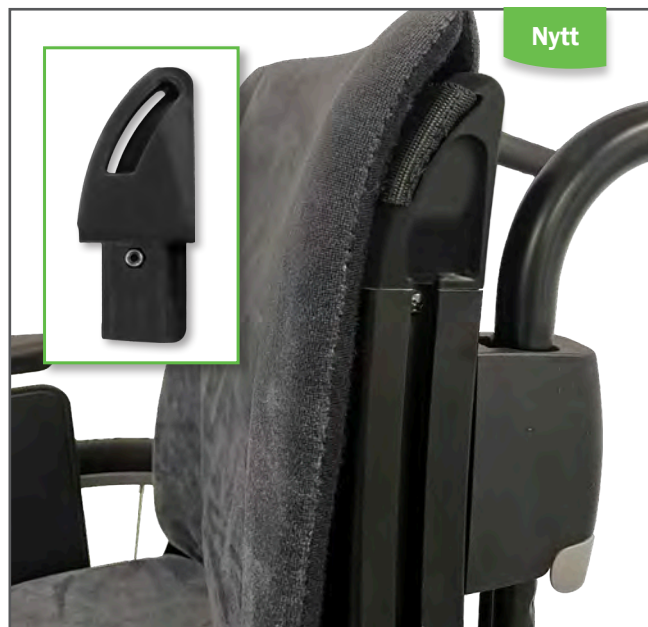

Standard ryggprof I med ny ryggstödsförhöjare



Hög ryggprofil - utgå

2021-10-04 ID: P5602A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförlängare 3A 35-40 kpl	6 cm	28658
Ryggförlängare 3A 42,5-50 kpl	6 cm	28659
Ryggförlängare 3A 52,5-60 kpl	6 cm	28660

Preliminär leverans	Vecka 44, 2021
----------------------------	----------------

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggprofil hög höger		83014-1
Ryggprofil hög vänster		83014-2
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri hög mod 4	27953
Ryggpaket Cross 5 42,5-50 cm	3A tri hög mod 4	27990
Ryggpaket Cross 5 52,5-60 cm	3A tri hög mod 4	27991

Utgår	Vecka 44, 2021
--------------	----------------

Produktinformation

Gäller: Etac Cross 6 | Etac Cross 5 | Etac Cross 5 XL | Etac Crissy

Sitsdjupsförlängare – Nytt utförande



Nu uppdaterar vi sitsdjupsförlängaren till Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL och Crissy.

Den nya sitsdjupsförlängaren kommer i 3 bredder och består av en rem för enklare montering.


- 35-40 cm
- 42,5-50 cm
- 52,5-60 cm

Erställer befintlig sitsförlängare som består av en tvådelad rem i 2 olika bredder.



Sitsdjupsförlängare nytt utförande

Sitsdjupsförlängaren får ett nytt utförande för enklare montering.

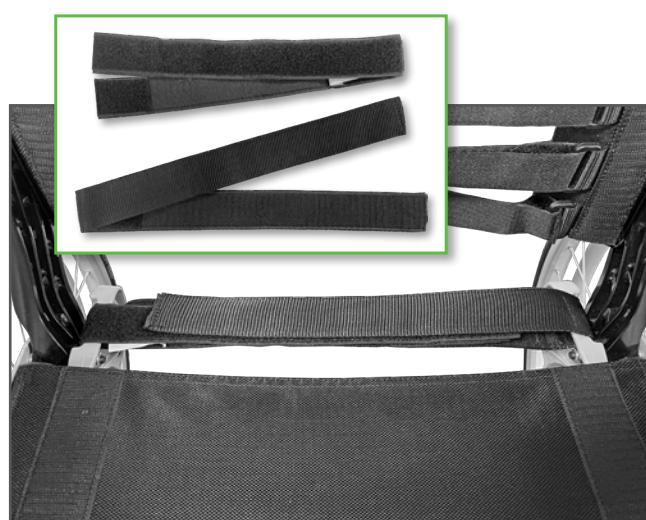

Utgående sitsdjupsförlängare

Sitsdjupsförlängaren med en tvådelad rem utgår.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sitsdjupsförlängare 35-40 cm	band B40 mm	63291
Sitsdjupsförlängare 42.5-50 cm	band B40 mm	63292
Sitsdjupsförlängare 52.5-60 cm	band B40 mm	63293
Preliminär leverans		Vecka 44, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sitsförlängare 35-42,5		62976
Sitsförlängare 45-60		62977
Utgår		Vecka 44, 2021

2021-10-04 ID: P5602A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities


Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio


Etac Drivring rostfri – Nytt utförande

etac®

Den rostfria drivringen får ett nytt utförande med en blankare yta. Funktionen är oförändrad och de nya drivringarna kan kombineras med befintliga drivringar. Artikelnummerna förblir därför oförändrade.

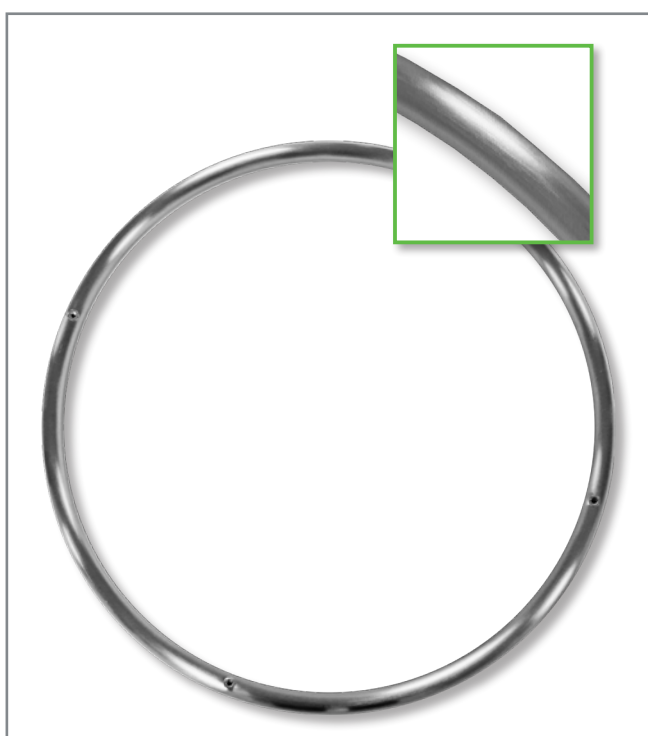

Rostfri drivring i befintligt utförande

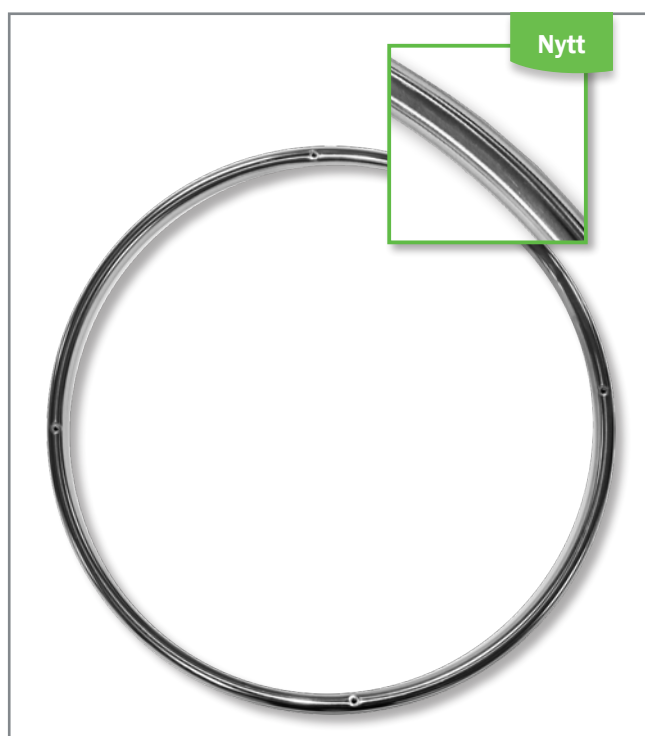

Rostfri drivring i nytt utförande

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivring D465 hjul 20 rfr	vuxen	21034
Drivring D500 hjul 22 rfr		24395
Drivring D540 hjul 24 rfr		24023
Drivring D585 hjul 26 rfr		81510
Byte sker succesivt, fr.o.m.		Vecka 48, 2021

2021-10-22 ID: P31987A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac M100 | Etac Transit

Etac Textilier – Utgår




För att öka modiläriteten i vårt sortiment, fortsätter vi att rensa bland våra textilier.

Nu utgår klädselar sits M100, sits M100 Twin Transit och rygg M100. Dessa kommer att slutförbrukas successivt fr.o.m. vecka 44, 2021.


1. Klädsel sits M100

Klädsel sits M100 ersätts av klädsel sits Basic lång.

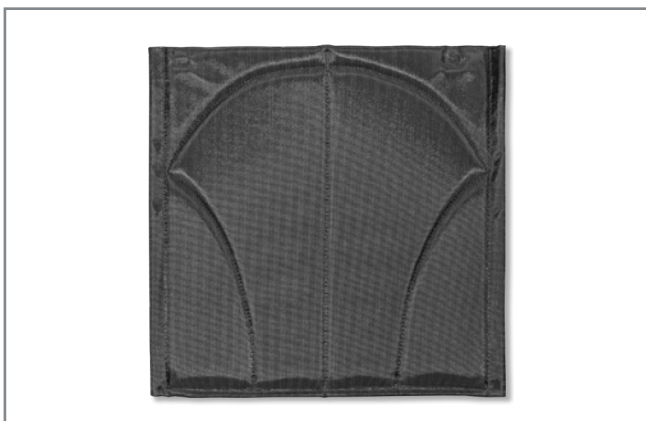

Utgående klädsel sits

Den gamla sitsklädseln M100 lång.

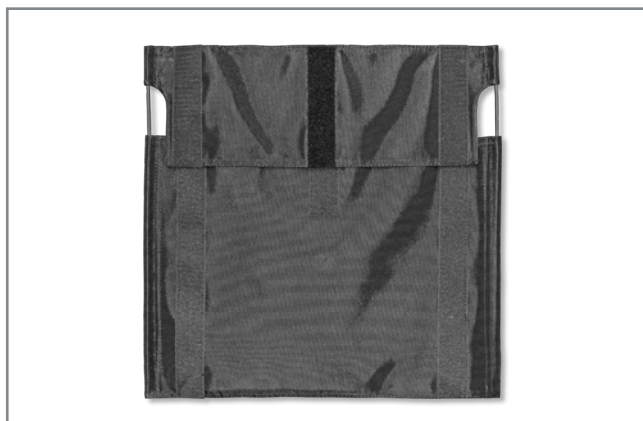

Ersättande klädsel sits

Den ersättande sitsklädseln Basic lång.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits M100 lång 37,5		62512-70
Klädsel sits M100 lång 40 cm		62513-70
Klädsel sits M100 lång 42,5		62514-70
Klädsel sits M100 lång 45 cm		62515-70
Klädsel sits M100 lång 47,5		62516-70
Klädsel sits M100 lång 50 cm		62517-70
Slutförbrukas successivt fr.o.m.		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic lång 37,5	Basic/Cross 3A svart	62729-60
Klädsel sits Basic lång 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62730-60
Klädsel sits Basic lång 42,5	Basic/Cross 3A svart	62731-60
Klädsel sits Basic lång 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62732-60
Klädsel sits Basic lång 47,5	Basic/Cross 3A svart	62984-60
Klädsel sits Basic lång 50	Basic/Cross 3A svart	62985-60

2021-11-05 ID: P31962-2A

1/3


Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

2. Klädsel sits M100/Twin/Transit

Klädsel sits M100/Twin/Transit ersätts av klädsel sits Basic kort

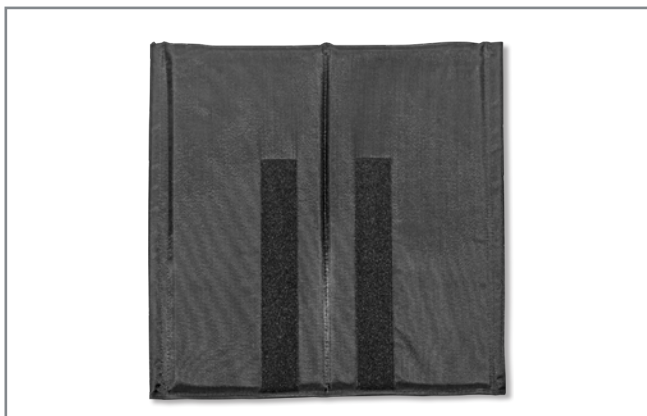

Utgående klädsel sits

Den gamla sitsklädseln M100/Twin kort.



Ersättande klädsel sits

Den ersättande sitsklädseln Basic kort.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits M100 kort 37,5	37,5 cm med kardborreband	62490-70
Klädsel sits Twin kort	35 cm med kardborreband	62360-70
Klädsel sits M100/Twin kort	40 cm med kardborreband	62361-70
Klädsel sits M100 kort 42,5	42,5 cm med kardborreband	62380-70
Klädsel sits M100/Twin kort	45 cm med kardborreband	62362-70
Klädsel sits M100 kort 47,5	47,5 cm med kardborreband	62491-70
Klädsel sits M100/Twin kort	50 cm med kardborreband	62363-70
Slutförbrukas successivt fr.o.m.		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic kort 37,5	Basic/Cross 3A svart	62719-60
Klädsel sits Basic kort 35 cm	Basic/Cross 3A svart	62718-60
Klädsel sits Basic kort 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62720-60
Klädsel sits Basic kort 42,5	Basic/Cross 3A svart	62721-60
Klädsel sits Basic kort 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62722-60
Klädsel sits Basic kort 47,5	Basic/Cross 3A svart	62978-60
Klädsel sits Basic kort 50 cm	Basic/Cross 3A svart	62979-60

3. Klädsel rygg M100

Klädsel rygg M100 fast ersätts av Klädsel rygg M100 fast hrb körhandtag.



Utgående klädsel rygg

Den gamla ryggklädseln M100 fast.



Ersättande klädsel rygg

Den ersättande ryggklädseln M100 fast hrb körhandtag.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100 fast 37,5 cm		62523-70
Klädsel rygg M100 fast 40 cm		62524-70
Klädsel rygg M100 fast 42,5 cm		62525-70
Klädsel rygg M100 fast 45 cm		62526-70
Klädsel rygg M100 fast 47,5 cm		62527-70
Klädsel rygg M100 fast 50 cm		62528-70
Slutförbrukas successivt fr.o.m.		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 37,5 cm	62534-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 40 cm	62535-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 42,5 cm	62536-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 45 cm	62537-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 47,5 cm	62538-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 50 cm	62539-70

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac M100 | Etac Transit

Etac Textilier – nytt utförande



För att öka modüläriteten i vårt sortiment, fortsätter vi att rensa bland våra textilier.

På vissa ryggklädselar har vi idag hana-kardborreband som passar i kombination med överdrag med hane-kardborreband. För att få ett mer modülärt sortiment där alla överdrag, ryggklädselar och satsklädselar i vårt sortiment kan kombineras, så väljer vi nu att ändra kardborrebandet på följande ryggklädselar och överdrag.

1. Reglerbar klädsel – Transit

Från hana-kardborreband till hane-kardborreband.



Utgående ryggklädsel

Den gamla klädseln med hana-kardborreband.



Ny ryggklädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 35/37,5 cm	62395-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 40/42,5 cm	62396-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 45/47,5 cm	62397-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 50/52,5 cm	62398-60
Slutförbrukas senast		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	35-37,5 cm hane kardborre	63323-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	40-42,5 cm hane kardborre	63324-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	45 cm hane kardborre	63325-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	47,5-50 cm hane kardborre	63326-60
Leveranstid		Vecka 48, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

1/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

2. Klädsel STD rygghöjd 2C rygg, Crissy och Cross

Från hona-kardborreband till hane-kardborreband.



Utgående rygglädsel

Den gamla klädseln med hona-kardborreband.



Ny rygglädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 35/37,5 cm Crossrygg 2	62342-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 40/42,5 cm Crossrygg 2	62343-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 45 cm Crossrygg 2	62344-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 47,5/50 cm Crossrygg 2	62345-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 52,5/55 cm Crossrygg 2	62430-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 57,5/60 cm Crossrygg 2	62431-60
Slutförbrukas senast		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg 2C rb	35-37,5 cm hane kardborre	63317-60
Klädsel rygg 2C rb	40-42,5 cm hane kardborre	63318-60
Klädsel rygg 2C rb	45 cm hane kardborre	63319-60
Klädsel rygg 2C rb	47,5-50 cm hane kardborre	63320-60
Klädsel rygg 2C rb	52,5-55 cm hane kardborre	63321-60
Klädsel rygg 2C rb	57,5-60 cm hane kardborre	63322-60
Leveranstid		Vecka 40, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

2/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

3. Klädsel HÖG 2C rygg, Transit, Crissy och Cross

Ny variant med hane-kardborreband upp till sittbredd 50 cm.



Utgående ryggklädsel

Den gamla klädseln med hona-kardborreband.



Ny ryggklädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel

Beskrivning

Art. nr.

Klädsel rygg Cross/Next hög	35/37,5 cm	62758-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	40/42,5 cm	62466-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	45 cm	62467-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	47,5/50 cm	62468-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	52,5/55 cm	62759-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	57,5/60 cm	62760-60

Slutförbrukas senast

31 december, 2021

Benämning ny artikel

Beskrivning

Art. nr.

Klädsel rygg 2C rb hög	35-37,5 cm hane kardborre	63327-60
Klädsel rygg 2C rb hög	40-42,5 cm hane kardborre	63328-60
Klädsel rygg 2C rb hög	45 cm hane kardborre	63329-60
Klädsel rygg 2C rb hög	47,5-50 cm hane kardborre	63330-60

Leverans

Vecka 48, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

3/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

4. Ändring överdrag nylon M100/Twin-Go/Transit III/2C rygg

Överdrag rygg Basic 35-50 cm kommer att finnas kvar tills befintliga avtal löpt ut. Sittbredd 52,5-60 cm utgår helt. Nytt överdrag kommer att finnas där vi har vänt kardborrebandet från hane till hona.



Utgående nylonöverdag

De gamla överdragen med hane-kardborreband.

Överdrag rygg Basic svart

Benämning befintlig artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 35 cm	svart	62745-70
Överdrag rygg Basic 37,5 cm	svart	62746-70
Överdrag rygg Basic 40 cm	svart	62747-70
Överdrag rygg Basic 42,5 cm	svart	62748-70
Överdrag rygg Basic 45 cm	svart	62749-70
Överdrag rygg Basic 47,5 cm	svart	62750-70
Överdrag rygg Basic 50 cm	svart	62751-70

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 52,5 cm	svart	62752-70
Överdrag rygg Basic 55 cm	svart	62753-70
Överdrag rygg Basic 57,5 cm	svart	62754-70
Överdrag rygg Basic 60 cm	svart	62755-70
Slutförbrukas senast		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 35 cm	svart hona kardborre	63310-70
Överdrag rygg Basic 37,5 cm	svart hona kardborre	63311-70
Överdrag rygg Basic 40 cm	svart hona kardborre	63312-70
Överdrag rygg Basic 42,5 cm	svart hona kardborre	63313-70
Överdrag rygg Basic 45 cm	svart hona kardborre	63314-70
Överdrag rygg Basic 47,5 cm	svart hona kardborre	63315-70
Överdrag rygg Basic 50 cm	svart hona kardborre	63316-70
Leverans		Vecka 48, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

4/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Nya Prio 3A

etac®

Vi är glada att kunna meddela att vi framöver kommer att introducera vårt ryggstödssystem 3A även för Etac Prio. Detta betyder att användarna av komfortullstolar också kommer att gynnas av de unika justeringarna av 3A-ryggstödet.

Befintliga fördelar för komfort med Prio behålls, några tillbehör kommer att ändras för att passa både Prio och Prio 3A. Modulariteten mellan Cross, Prio och Prio 3A utökas för att ytterligare förbättra hanteringen för våra många kunder.

Vi återkommer med mer info om Prio 3A som huvudprodukt och en närmare presentation av den.



2021-11-04 ID: P5550A

1/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Infasning av delar till Prio 3A

Vi påbörjar nu arbetet med att fasa in delar som är modulära både med befintlig Prio och kommande Prio 3A. Gäller följande tillbehör: 1. Ryggdyna 3D, 2. Överdrag rygg plysch, 3. Armstöd, 4. Sitsplatta undre.

1. Ryggdyna Prio 3D - nytt utförande

För anpassa 3D-dynan till kommande Prio 3A ökar vi höjden på den med 25 mm för att täcka fler rygghöjder. Vi lägger även till en extra hälla högst upp på baksidan av mittdynan och den nedersta hällan blir större för att utöka alternativen av fastsättning.



Ryggdyna Prio 3D utgående

Den befintliga ryggdynan utgår och ersätts av den nya.



Ryggdyna Prio 3D nytt utförande

Den nya högre ryggdynan med extra hällor.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40		63267-60
Ryggdyna 3D Prio B45		63268-60
Ryggdyna 3D Prio B50		63269-60
Ryggdyna 3D Prio B55		63270-60
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40	Prio 3A	63343-60
Ryggdyna 3D Prio B45	Prio 3A	63344-60
Ryggdyna 3D Prio B50	Prio 3A	63345-60
Ryggdyna 3D Prio B55	Prio 3A	63346-60
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

2021-11-04 ID: P5550A

2/5

För frågor och beställningar kontakta:
Anna Johansson, anna.johansson@etac.com
Box 203
341 04 Årstad
Tel kundservice 0371-58 73 00
Fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se
Anna Johansson, anna.johansson@etac.com

etac[®]
Creating Possibilities

2. Överdrag rygg plysch - nytt utförande

För att anpassa överdraget till kommande Prio 3A breddar och förlänger vi den bakre delen på överdraget så att det täcker regleringsbanden på rygglädseln.



Överdrag rygg plysch utgående

Utgående överdrag med kortare bakre del.



Överdrag rygg plysch utförande

Överdrag i nytt utförande med förlängd bakre del.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch Prio		63200-60
Överdrag rygg B45 cm plysch Prio		63201-60
Överdrag rygg B50 cm plysch Prio		63202-60
Överdrag rygg B55 cm plysch Prio		63203-60
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch	Prio 3A	63339-60
Överdrag rygg B45 cm plysch	Prio 3A	63340-60
Överdrag rygg B50 cm plysch	Prio 3A	63341-60
Överdrag rygg B55 cm plysch	Prio 3A	63342-60
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

2021-11-04 ID: P5550A

3/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

3. Armstöd Prio


För anpassa armstöden till kommande Prio 3A rygg ökar vi den bakre bredden mellan armstöden, vilket innebär att armstödsplattan vinklas 2 grader utåt.

Befintligt armstöd är ej kompatibelt med nya Prio 3A.



Utgående armstöd

Befintligt armstöd utgår.

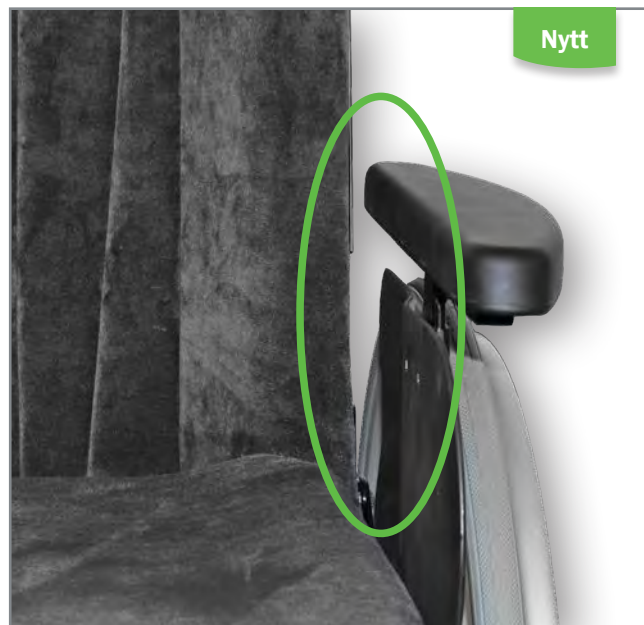

Nytt vinklat armstöd

Nytt armstöd vinklat 2 grader utåt.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö	smal Prio	28511-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä	smal Prio	28511-2
Armstöd teleskop L 49 cm hö	std Prio	28512-1
Armstöd teleskop L 49 cm vä	std Prio	28512-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd	fingerskruv std Prio	28639-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd	fingerskruv std Prio	28639-2
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö 2gr	hö std Prio 3A	28713-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä 2gr	vä std Prio 3A	28713-2
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	hö std Prio 3A	28687-1
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	vä std Prio 3A	28687-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-2
Armstöd teleskop universal Prio hö		28513-1
Armstöd teleskop universal Prio vä		28513-2
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

2021-11-04 ID: P5550A

4/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

4. Reservel - Sits undre

Sitsplatta undre får en ny utformning för att passa kommande Prio 3A.



Utgående undre sitsplatta
Befintlig sitsplatta utgår.



Ny undre sitsplatta
Sitsplatta med ny utformning för att passa Prio 3A.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		82777
Sits plywood undre 45 cm Prio		82778
Sits plywood undre 50 cm Prio		82779
Sits plywood undre 55 cm Prio		82780
Sits plastskena undre Prio 40		51121
Sits plastskena undre Prio 45		51122
Sits plastskena undre Prio 50		51123
Sits plastskena undre Prio 55		51124
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		83448
Sits plywood undre 45 cm Prio		83449
Sits plywood undre 50 cm Prio		83450
Sits plywood undre 55 cm Prio		83451
Sits plastskena undre 40 cm Prio		51233
Sits plastskena undre 45 cm Prio		51234
Sits plastskena undre 50 cm Prio		51235
Sits plastskena undre 55 cm Prio		51236
Införs succesivt från		Vecka 45, 2021

2021-11-04 ID: P5550A

5/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil breddningssats för ökat utrymme mellan benstöd

etac®

Nu lanserar vi en breddningssats till benstöden som kan monteras på samtliga modeller i Swift Mobil-serien.

Breddningssatsen ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden och därmed större benutrymme samt bättre åtkomst för personlig hygien.

Den kommer ingå i standard utförandet på alla våra XL stolar men kan även köpas som tillbehör till övriga Swift Mobil modeller.

Ingen förändring kommer ske i artikelnumren på befintliga produkter.



Breddningssats för benstöd

Ökar utrymmet mellan benstöden med 12 cm.

2021-02-15 ID: 5545-A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Befintliga artikelnummer där breddningssats ingår.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Swift Mobil-2 XL	Delmonterad inkl. bred rygg	80229467
Dusch/toastol Swift Mobil-2 XL	Delmonterad inkl. bäckengejder och bäcken	80229483
Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 XL	Monterad	80229480
Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 XL	Monterad inkl. bäckengejder	80229481

Nytt artikelnummer, tillbehör

Benämning artikel	Art. nr.
Breddningssats benstöd hö/vä Swift Mobil	80209525
Leverans/Säljstart	Vecka 9, 2021


Produktinformation

Gäller: Etac Rufus Duschstol | Etac Rufus Badstol

Utfasning av Rufus duschstolar och badstol

etac®

Utfasning av Rufus Duschstol hopfällbar, Rufus Duschstol Plus och Rufus badstol 70 cm respektive 74 cm.

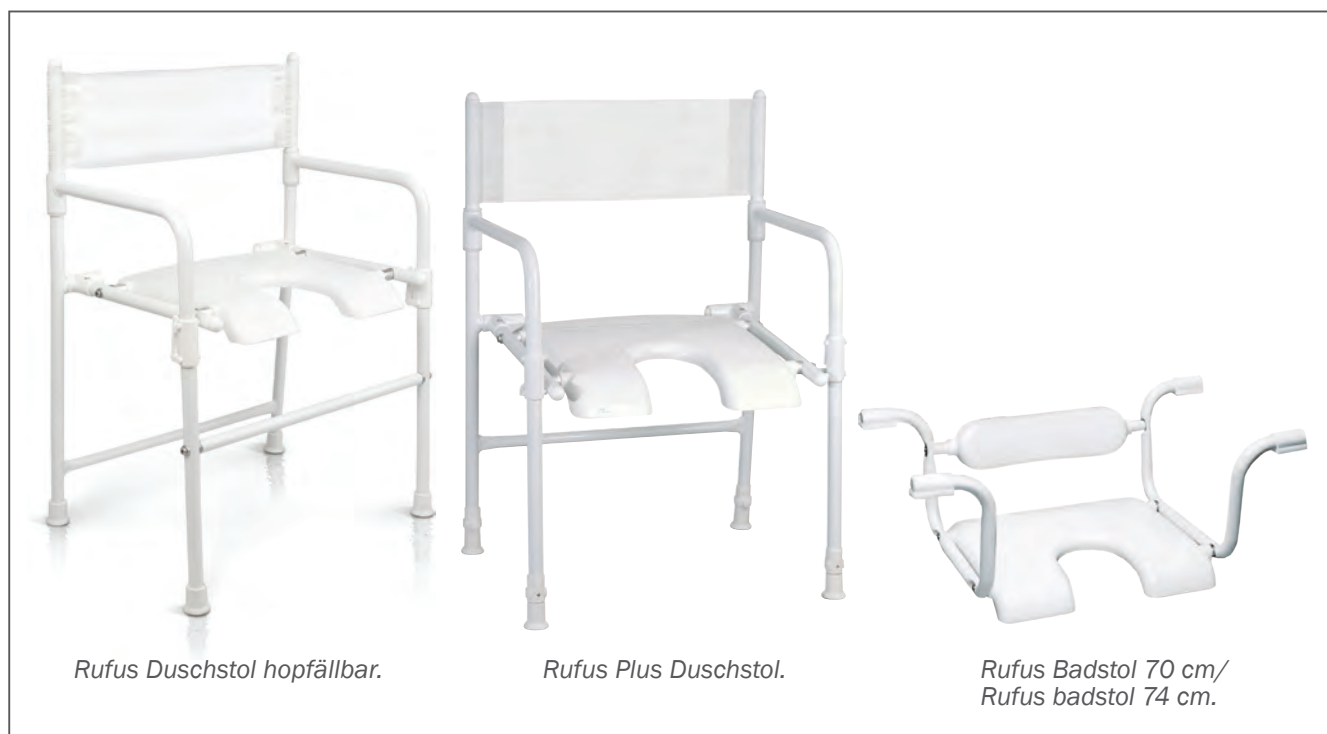

Rufus Duschstol och Badstol

Nu fasar vi ut de återstående modellerna av Rufus duschstol och badstol.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Duschstol Rufus hopfällbar	med ryggband	81208013
Duschstol Rufus plus	med ryggband	81208015
Badstol Rufus 70 cm		81506011
Badstol Rufus 74 cm		81506012
Preliminärt sista försäljningsdatum:		Vecka: 7-9, 2021 (beroende på modell)

2021-02-10 ID: P36013A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-variant med upprätt rygg

etac®

Nu lanserar vi en ny Swift Mobil-modell med en rygg som är utformad för bästa passbarhet över vägghängda toalettmodeller.

Etac Swift Mobil passar bra över standardtoaletter, men över vissa typer av vägghängda toaletter hamnar duschstolen för långt fram i förhållande till toalettstolens öppning beroende på att ryggen/körhandtaget tar emot väggen. Med den nya modellens upprätta rygg kommer Swift Mobil 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen.

Utöver en komplett Swift Mobil-2-variant, lanseras den upprätta ryggen även som tillbehör.

Ryggen kommer att passa alla Swift Mobil standardmodeller, men inte tilt-varianter. Ryggen passar rent tekniskt även Swift Mobil 24"-modeller, men ger där ingen funktionell fördel då 24"-hjulen tar i väggen före ryggen/körhandtaget.



Swift Mobil med upprätt rygg

Placering mot vägg med upprätt rygg över vägghängd toalett.

2021-08-30 ID: P36068A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Swift Mobil med upprätt rygg

Passning över vägghängd toalett med ny upprätt rygg.

Benämning artikel ny huvudprodukt	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Swift Mobil-2	Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder, uppfällbara vridbara fotplattor	80229489
Dusch/toastol Swift Mobil-2	Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder	80229490
Säljstart		Vecka 35, 2021

Benämning artikel nytt tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Rygg Swift Mobil-2 upprätt		80209529
Säljstart		Vecka 35, 2021

2021-08-30 ID: P36068A

2/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Clean | Clean HRB | Clean 24" | Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

Utfasning av Protect dyna, tryckavlastande

etac®

P.g.a. ett beslut från leverantören kommer Protect-dynan att fasas ut.
Preliminärt sista försäljningsdatum: September 2021



Protect dyna

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Protect dyna, tryckavlastande		80209245
Utfasas, preliminärt		September, 2021

2021-08-19 ID: P36078A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Fristående | Etac Swift Kommod

Ökad brukarvikt på Swift Fristående och Kommod samt utfasning av Swift Kommod låg

För att tillmötesgå efterfrågan från marknaden ökar vi den maximala brukarvikten på några av våra badrumsprodukter. För Etac Swift Fristående toalettstol samt Swift Kommod blir den nya brukarvikten 160 kg, att jämföra med tidigare 130 kg.

Ingen förändring av artikelnummer kommer att ske, utan uppdateringen styrs genom serienummer.

Nya brukarvikter

Swift Fristående	Swift Kommod basic	Swift Kommod
Ny max brukarvikt: 160 kg	Ny max brukarvikt: 160 kg	Ny max brukarvikt: 160 kg
Tidigare max brukarvikt: 130 kg	Tidigare max brukarvikt: 130 kg	Tidigare max brukarvikt: 130 kg



Swift Fristående Toalettstol



Swift Kommod basic



Swift Kommod

Utfasning av Swift Kommod Låg

I samband med uppdateringen av brukarvikten väljer vi att fasa ut Swift Kommod Låg.

2021-08-13 ID: P5443A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Befintliga artikelnummer med ökad max brukarvikt fr.o.m. serienummer:

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.	Serienummer ny vikt	Beräknad leverans
Swift Fristående Toalettstol		81702020	122469	Vecka 44, 2021
Swift Kommod basic	utan dynor	81702060	113652	Vecka 44, 2021
Swift Kommod	inkl dynor	81702030	128491	Vecka 35, 2021

Artikelnummer som utfasas/slutförbrukas:

Benämning utfasad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Swift Kommod låg		81702050
Befintligt lager utfasas, t.o.m.		Q3, 2021

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil Tilt-2 XL rygg | Clean | Clean HRB | Clean 24 |
Swift Kommod | Swift Fristående

Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter



Enligt önskemål har vi undersökt om vissa befintliga tillbehör kan användas till ytterligare huvudprodukter.

Efter tester och provmonteringar anser vi att följande tillbehör är kompatibla med fler produkter.

Monteringsanvisningar samt hemsida är uppdaterade med den nya informationen.

Bäckenhållare, art. nr. 80209049

Nu även kompatibel med Swift Mobil Tilt-2 /Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.
Sedan tidigare rekommenderar vi bäckenhållaren till Tripp Tilt.



Bäckenhållare

Bäckenhållaren håller bäckenet på plats när stolen tillas.



Swift Mobil Tilt-2

Bäckenhållaren på Swift Mobil Tilt-2.



Swift Mobil Tilt-2

Bäckenhållaren på tiltad Swift Mobil Tilt-2.

Benämning tillbehör	Art. nr.	Tidigare tillbehör till	Nu även tillbehör till
Bäckenhållare	80209049	Tripp Tilt	Swift Mobil Tilt-2 Swift Mobil Tilt-2 XL rygg
Leverans			Finns i lager

2021-08-13 ID: P36070A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Stänkskydd, art. nr. 80209430

Nu även kompatibel med Clean, Clean HRB, Clean 24, Swift Kommod och Swift Fristående.
Sedan tidigare rekommenderar vi stänkskyddet till Swift Mobil-2.

Stänkskyddet är tillverkat i materialet PUR och ger ett mjukt skydd mot urinstänk framåt.

Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort, alternativt hållas på plats vid användande med hjälp av det greppvänliga handtaget.



Stänkskydd

Stänkskyddet på Clean.



Stänkskydd

Stänkskyddet på Swift Kommod.

Benämning tillbehör	Art. nr.	Tidigare tillbehör till	Nu även tillbehör till
Stänkskydd	80209430	Swift Mobil-2	Clean
			Clean HRB
			Clean 24
			Swift Kommod
			Swift Fristående
Leverans			Finns i lager

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

Nytt bålstöd till dusch- och toalettstol R82 Heron

Nu kan vi erbjuda ett nytt sidosvängbart bålstöd till Heron. Det nya bålstödet har ett böjt stag och finns i 3 storlekar. Bålstödet kan kombineras med adapter rygg sitsdjupreducering (artikel 31880508-06).



Sidosvängbart bålstöd med böjt stag – Heron

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr stor böjd dyna grå par	3183018-162
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr mellan böjd dyna grå par	3183018-262
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr liten böjd dyna grå par	3183018-362
Stag bålstöd ssb böjt Heron	25 mm L 16 cm	31150238
Leverans		Finns i lager

2021-02-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 x:panda

Fasta bålstöd i ny storlek till sittsystem R82 x:panda

Nu finns fasta bålstöd typ 0 till x:panda. Bålstöden har samma utformning som bålstöd typ 0 till R82 Kudu.

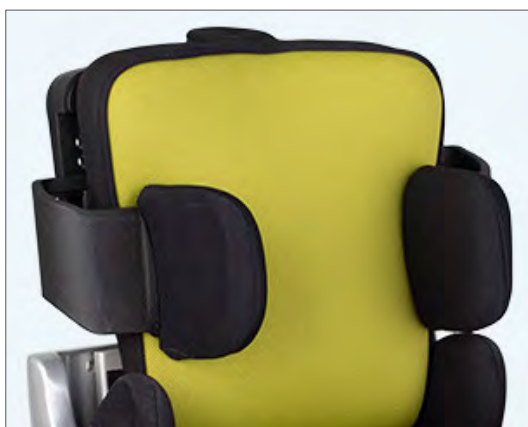

Fasta bålstöd typ 0 monterade på x:panda

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd fasta x:panda typ 0	inkl överdrag	318910301-0
Leverans		Finns i lager

2021-02-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 x:panda

Nytt inkontinensöverdrag till sittsystem x:panda

Nu kan vi erbjuda inkontinensöverdrag till x:panda sitt- och ryggdynor som nytt tillbehör. Överdragen finns i storlek small, medium och large.

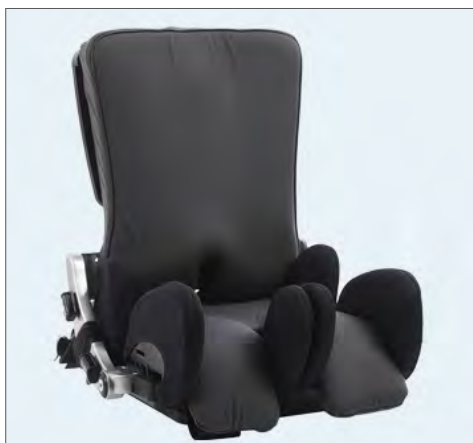

Inkontinensöverdrag x:panda sitt- och ryggdyna

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda small	318912411-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda medium	318912412-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda large	318912413-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda small	318912421-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda medium	318912422-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda large	318912423-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda small	318912431-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda medium	318912432-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda large	318912433-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda small	318912441-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda medium	318912442-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda large	318912443-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 1 svart x:panda small	318911411-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 1 svart x:panda medium+ stl 2 small	318911412-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 1 svart x:panda large	318911413-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 2 svart x:panda medium	318911422-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 2 svart x:panda large	318911423-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 3 svart x:panda small	318911431-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 3 svart x:panda medium	318911432-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 3 svart x:panda large	318911433-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 4 svart x:panda small	318911441-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 4 svart x:panda medium	318911442-82
Överdrag inkontinens sittdyna	stl 4 svart x:panda large	318911443-82
Leverans		Finns i lager

2021-03-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

Nytt tillbehör – Hållare till handkontroll Wombat Living

Nu finns en hållare till handkontroll som nytt tillbehör till arbetsstolen Wombat Living med el. Hållaren monteras fram på sitsen och handkontrollen fästs på plats i hållaren med en magnetbricka. Placeringen gör den lättillgänglig både för användaren och för hjälparen.



Hållare till handkontroll

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hållare handkontroll	Wombat Living	3195540
Leverans		Finns i lager

2021-03-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Höftsele Tumble Forms

Höftsele Tumble Forms storlek 3 – Utgår

Höftsele storlek 3 till Tumble Forms Feeder Seat® och Universal Corner Chair® utgår ur sortimentet.



Höftsele Tumble Forms

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Höftsele golvsits/hörnsits	Tumble Forms stl 3	HC9110
Leverans		Slut i lager

2021-03-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

Nytt tillbehör – Polstring till snabbspänne Meerkat

Nu finns det en polstring för att täcka snabbspännen på Meerkat.
Polstringen kan monteras på både bröst- och höftstöd.



Polstring snabbspänne Meerkat

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstring snabbspänne Meerkat	par	31117818-PADS
Leverans		Finns i lager

2021-10-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Caribou

Nytt tillbehör – Justeringsplatta fasta bålstöd

Nu kan man kombinera fasta bålstöd med bred toppdyna. Använd den nya justeringsplattan för att fästa bålstödet i sidprofilen.



Justeringsplatta fasta bålstöd Caribou

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Justeringsplatta fasta bålstöd	Caribou par	31861102-PL
Leverans		Finns i lager

2021-10-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Molift Raiser Pro

Nya tillbehör

molift®

Ståplatta Molift Raiser Pro

Raiser Pro ståplatta är ett tillbehör som kan användas när brukaren behöver ett högre fotläge vid användning av Raiser Pro. Det ökar höjden med 9 cm och behöver ingen form av fixering, den passar in direkt på bottenplattan.

Hälband Molift Raiser Pro

Hälbandet är ett tillbehör som används när brukaren behöver stöd för att hålla fötterna i rätt läge. Produkten monteras på Molift Raiser Pros vred och kan justeras i 3 olika längder. HeelStrap ska ge stöd för brukarens hälar vid stående på bottenplattan.



Ståplatta Molift Raiser Pro



Hälband Molift Raiser Pro

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Ståplatta Molift Raiser Pro	9 cm	28612
Hälband Molift Raiser Pro	en storlek	83211
Leverans	Finns att beställa	

2021-05-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Hälavlastare Heelift®

Hälavlastare Heelift® utgår och ersätts av Body Armor

etac®

Hälavlastare Heelift® utgår ur sortimentet och ersätts av Hälavlastare Body Armor



Utgående produkt - Heelift® hälavlastare



Ny produkt - Hälavlastare Body Armor

Benämning artikel	Art. nr	Ersätts av Art nr
Armbågsskydd Elbowlift ®	DADM-EL	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Original	DADM-HL	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Mjuk	DADM-HLS	Ingen ersättning
Heelift ® Bariatric	DADM-HLSB	Ingen ersättning
Heelift ® Petit	DADM-HLSP	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Sträck	DADM-HLTB	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift Glide ® Original	DADM-HLG	DABAHR-N
Hälskydd Heelift Glide ® Mjuk	DADM-HLSG	DABAHR-F
		Införs successivt

2021-06-30

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Relieve osthyvel

Etac Relieve osthyvel utgår



Relieve Osthyvel fasas ut och slutförbrukas. Befintlig lager beräknas räcka till och med februari 2022.



Etac Relieve osthyvel

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Etac Relieve osthyvel		80502001
Preliminärt sista försäljningsdatum:		Februari 2022

2021-10-19 ID: P36086A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities


Produktinformation

Gäller: Etac Socky Lång

Kopplingsanordning har utgått

etac®

Kopplingsanordningen till strumppådragaren Socky Lång har utgått ur sortimentet.

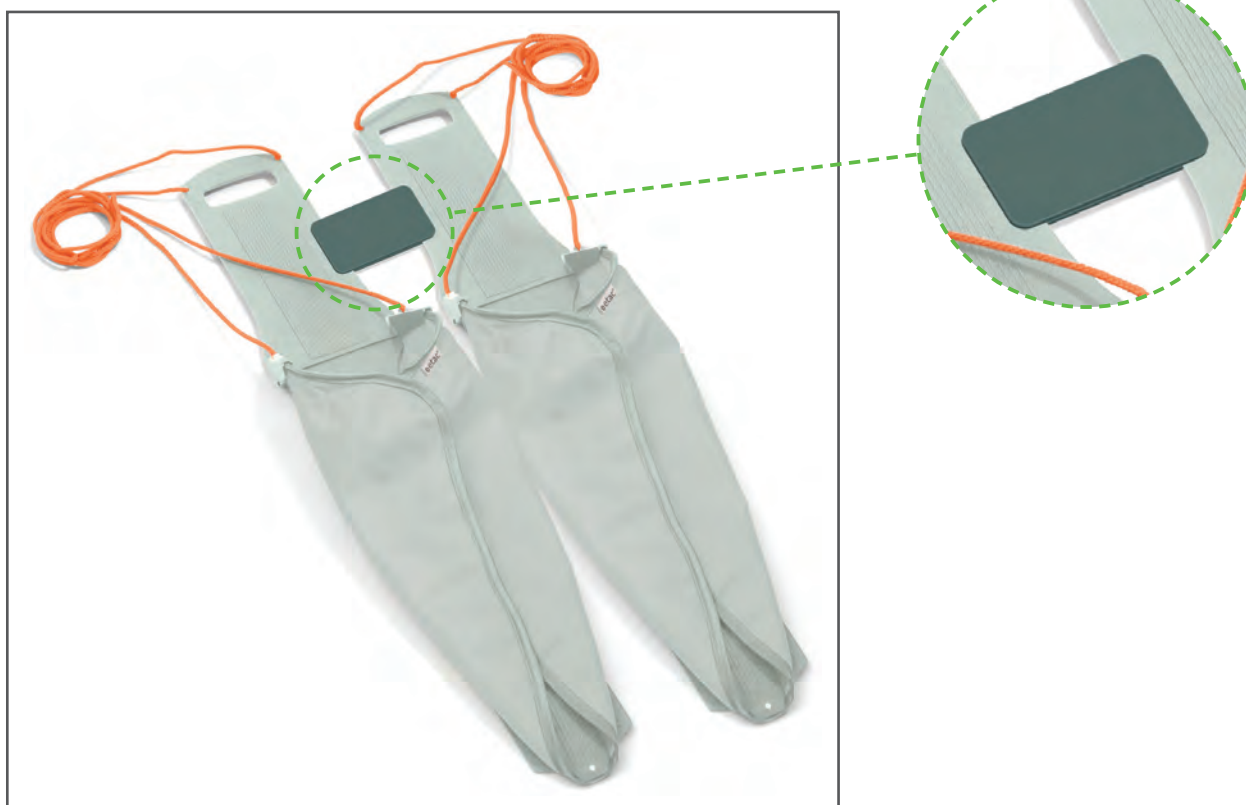

Kopplingsanordning

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kopplingsanordning Socky lång		80601021
Slut på lager		2021

2021-11-03 ID: P36091A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com
Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com

Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities