



etac®

Etac Produktinformation

April – Juni 2023

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 Combi Frame:x nytt armstöd	3
R82 High-low:xo tippskydd	4
R82 Wombat Living nytt underrede.....	5-7
R82 Panda/Panther bord utgår	8
R82 High-low delade vadvstöd utgår.....	9
R82 Caribou bord i nya utföranden	10

Hjälpmotor

Etac Lille Viking nytt hastighetsvred	11
---	----

Hygien

Etac Swift Mobil-2 vinklade benstöd nytt tbh ...	12
Etac Clean utfasning ben- och vadvstöd	13

Kontakt

Kontakta oss	14-15
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Combi Frame:x

Nytt tillbehör till underrede Combi Frame:x

R82®

Vi lanserar nu ett nytt alternativ av armstöd som kan användas när exempelvis formgjuten sits är monterad direkt på underredet. Armstödet monteras i sidoprofilen på underredet och har extra långt stag (400 mm) som möjliggör en optimal placering av armstödet höjd i förhållande till den formgjutna sitsen.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Combiframe x för formgjuten sits		318910619-CF
Leverans		Finns i lager

2023-06-21

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 High-low:xo

Tippskydd till underrede High-low:xo

R82®

Underrede High-low:xo finns i flera olika utföranden. För att veta vilket tipskydd som ska användas till resepektive utförande, kommer här en översikt.



Tippskydd inneunderrede High-low:xo



Tippskydd uteunderrede High-low:xo

Utförande	Art.nr	Benämning	Beskrivning
Inneunderrede med 75 mm eller 100 mm hjul	31890007	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 75mm/100mm hjul
Inneunderrede med 125 mm hjul	31890007-1	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 125mm hjul
Uteunderrede	31890008	Tippskydd High-Low:xo	uteunderrede
Hydraulik underrede	31890009	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede hydraulik 100mm hjul

2023-05-04

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

NYHET! Arbetsstol R82 Wombat Living med nytt underrede

Nu lanserar vi arbetsstolen Wombat Living med ett nytt underrede. Det nya underredet har samma utförande som underrede High-low:xo, vilket ökar modulariteten, tack vare gemensamma tillbehör. Wombat Living med nytt underrede ersätter successivt befintlig arbetsstol Wombat Living som utgår och slutförbrukas.



Nyheter



Sitshöjd

Ny lägre sitshöjd



Tydliga markeringar



Fotmanövrerad centralbroms

Tillval/tillbehör



Trampkloss (tillbehör)

För tröskel assistans.

Standardutförande

Underrede

Pulverlackat stål, höjd- och vinkeljusterbart. Svart färg.

Broms

Handmanövrerad centralbroms.

Hjul

100 mm hjul, låsbara.

Rygg

Standard eller hög. Höjdinställbar och vinkeljusterbart. Exkl ryggdyna.

Sits

ABS plast, vinkeljusterbart. Exkl sittdyna.

Körbygel

Sitsmonterad inkl reglage sitstilt

Fotplatta

Avtagbar, höjd- och vinkeljusterbart, uppfällbar.

2023-04-26

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Nytt Art.nr
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950103121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950503121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950203121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo gaskolv CB svartkörbygel u dynor hög rygg	31950603121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950303121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950703121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo el CB svart körbygel u dynor	31950103421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950503421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo el CB svart körbygel u dynor	31950203421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950603421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo el CB svart körbygel u dynor	31950303421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950703421-00

Leverans

Införs successivt från 3 maj 2023

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Utgående Art. nr.	Ersätts av nytt Art.nr
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31951232-00	31950103121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955232-00	31950503121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31952232-00	31950203121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956232-00	31950603121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31953232-00	31950303121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957232-00	31950703121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor	31951236-00	31950103421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955236-00	31950503421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor	31952236-00	31950203421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956236-00	31950603421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor	31953236-00	31950303421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957236-00	31950703421-00

Utgår

Slutförbrukas



2023-04-26

2/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Nya tillbehör/tillval

För en ökad modularitet passar vissa High-low:xo tillbehör även Wombat Living.
För samtliga tillbehör, se vår hemsida etac.se.



125 mm hjul



**Tippskydd
inneunderrede**



Hållare handkontroll



**Fotmanövrerad
centralbroms**

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr
Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 75mm/100mm hjul	31890007
Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 125mm hjul	31890007-1
Centralbroms handmanövrerad	H-L xo stl 1, WL 1, 2,3 gas el	31890011-3
Centralbroms fotmanövrerad	H-L xo stl 1, WL 1, 2,3 gas el	31890012-1
Hållare handkontroll	Wombat Living	3195541
Trampkloss High-Low xo	gas/el	31890025
Fixlockset sits Wombat Living	stl 1-2 2 st fixlock	3195710
Tiltreglage monteringssats	till körbygel Wombat Living 1-2	3195149
Hjul 75 mm 4 st*	High-Low:xo, Wombat Living	31890016
Hjul 125 mm 4 st*	High-Low:xo, Wombat Living	31890018
* Ej med centralbroms		
Leverans		3 maj 2023

Produktinformation

Gäller: R82 Panda | Panther

Bord Panda/Panther – Utgå

R82®

Bord till Panda och Panther utgår ur sortimentet och slutförbrukas.

Nedan anges möjliga alternativ till utgående artiklar. För fler alternativ, se vår hemsida.



Bord Panda/Panther plast – Utgå



Bord Panda/Panther trä – Utgå

Benämning artikel

Art. nr.

Bord Panda/Panther stl 1-4 transparent plast med kant 49x38 cm

3189230-01

Bord Panda/Panther stl 1-2 trä

3189200-2

Utgår

Slutförbrukas

Alternativa ersättningsartiklar

Bord Pn/Pt/Wo stl 1-4 grå plast med kant 49x38 cm

3189220-01

Bord Panda/Panther stl 1-2 transparent plast med kant

3189230-2

Bord plast grå 44 x 34 cm

318976350

2023-04-20

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 High-low

Delade vadstöd – Utgår

R82®

Delade vadstöd till High-low underreden utgår ur sortimentet.



Delade vadstöd

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vadstöd Panda Futura stl 1-4	delade justerbara par	3189162
Utgår		Juni 2023

2023-04-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Caribou

Bord Caribou – Nya utföranden



Borden till tippbräda Caribou har fått nya utföranden.

Bord för mag- och ryggstående

Vredet på fästet för montering av bord har bytts ut till skruvar, för att möjliggöra en kraftigare åtdragning.

Bord lågmonterat

Det lågmonterade bordet har nu 10 cm längre horisontella stag för att öka justeringen i djupled.

I samband med detta uppdateras även vilket bord som är kompatibelt med de olika storlekarna av Caribou.

Bord stl 1 passar Caribou stl 1-2 (tidigare stl 1). Bord stl 2 passar Caribou stl 3 (tidigare stl 2-3).



Bord för mag- och ryggstående



Bord lågmonterat

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 1-2	31862130-2
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 3-4	31862130-3
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 1-2	31862131-1
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 3	31862131-2
Leverans		Finns i lager

2023-04-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation


Gäller: Etac Lille Viking

Etac Lille Viking – Nytt hastighetsvred manöverdosa

Hastighetsvredet på manöverdosan kommer från och med preliminärt vecka 23 att se lite annorlunda ut.

Samma funktion som tidigare, det är bara designen som skiljer.

Manöverdosan behåller samma art.nr som tidigare, 82641.

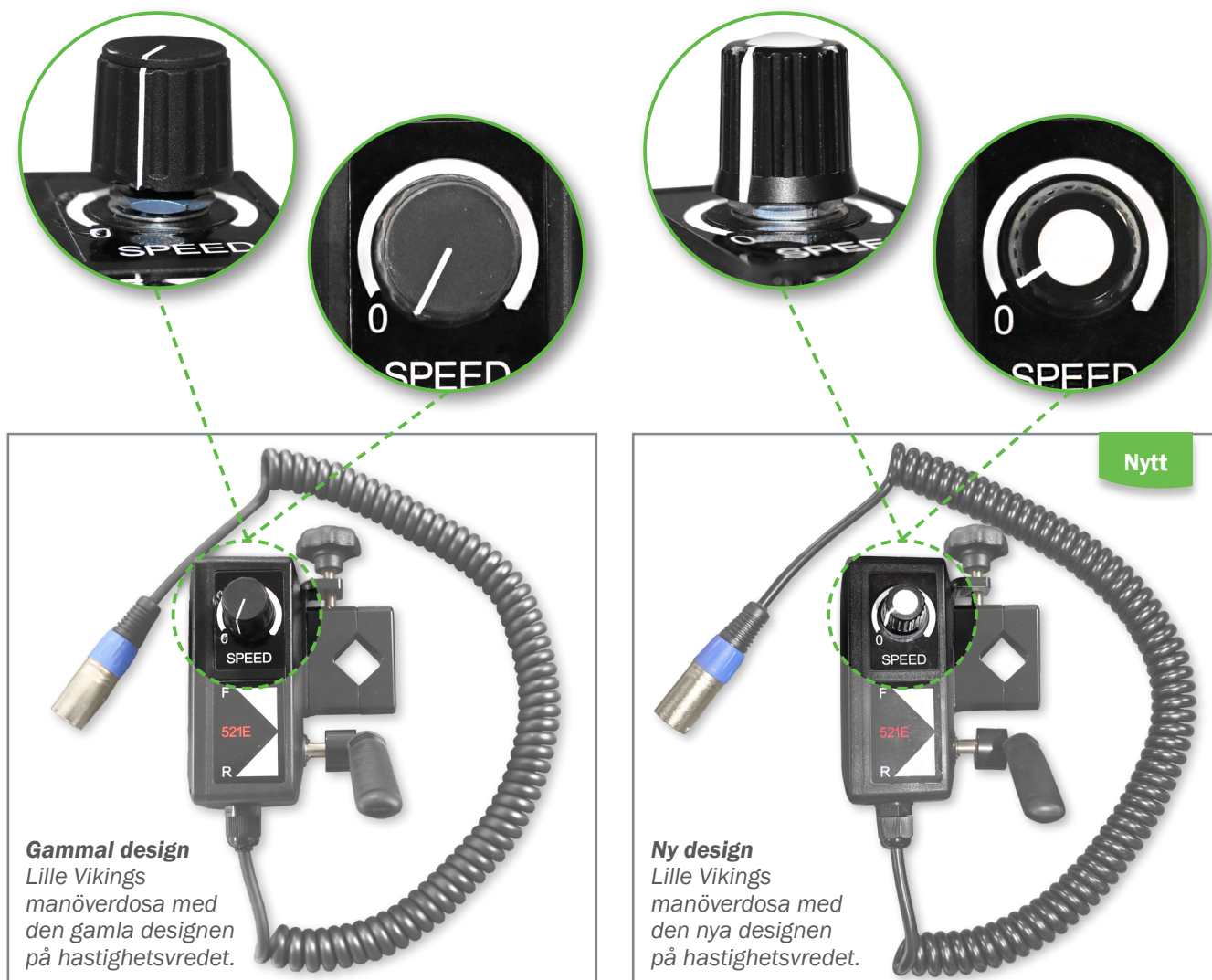

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Manöverdosa modell 521E	Lille Viking 2000+	82641
Preliminär leverans för nytt utförande		Vecka 23, 2023

2023-04-20 ID: P32045A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

Nya tillbehör – Vinklade benstöd till Swift Mobil-2, Swift Mobil Tilt-2 och Swift Mobil 24"-2

etac®

Nu lanserar vi två nya tillbehör till Swift Mobil-familjen.

Det är två varianter av benstöd, snäva och vida, som båda har den välvda fotplattan och kan svängas åt sidan.

De snäva benstöden kommer ungefär 4 cm närmare sitsen och de vida ungefär 5 cm längre från sitsen i förhållande till standard-benstöden. De kan höjjusteras totalt 12,5 cm.

De kommer att säljas i par.

De snäva benstöden är inte kompatibla tillsammans med breddningssatsen, 80209525.



**De snäva benstöden, som kommer ca 4 cm närmare
sitsen**



**De vida benstöden, som kommer ca 5 cm längre bort
från sitsen**

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.	Säljstart
Benstöd Vid Swift Mobil h/v	komplett benstöd par	80209531	v. 26, 2023
Benstöd Snäv Swift Mobil h/v	komplett benstöd par	80209532	v. 26, 2023

2023-06-19 ID: P36110A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Clean Höjdreglerbar duschstol/toalettstol

Utfasning av tillbehöret ben- och vadstöd till Clean Höjdreglerbar duschstol/toalettstol

etac®

Tillbehöret vinkelreglerbart benstöd till Clean HRB kommer att fasas ut pga låga försäljningsvolymmer.

Produkten fasas ut i samband med att befintligt lager tar slut.

Berörda reservdelar kommer att vara tillgängliga för försäljning ytterligare 5 år efter sista försäljningsdatum.



Tillbehöret ben- och vadstöd till Clean fasas ut

Benämning utgående artikel	Art. nr.	
Ben och vadstöd Clean hrb hö	80209252	Slutförbrukas
Ben och vadstöd Clean hrb vä	80209253	Slutförbrukas

2023-05-19 ID: P36121A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Bettina Silver

Säljare/utbildare

bettina.silver@etac.com
Mobil 076-146 57 17

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge. Kalmar, Kronoberg och
Malmö



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar
- HoverMatt

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro




Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

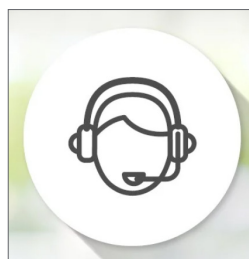

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation
– besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities