


24458

Hälband
Heel-loop
Fersenband

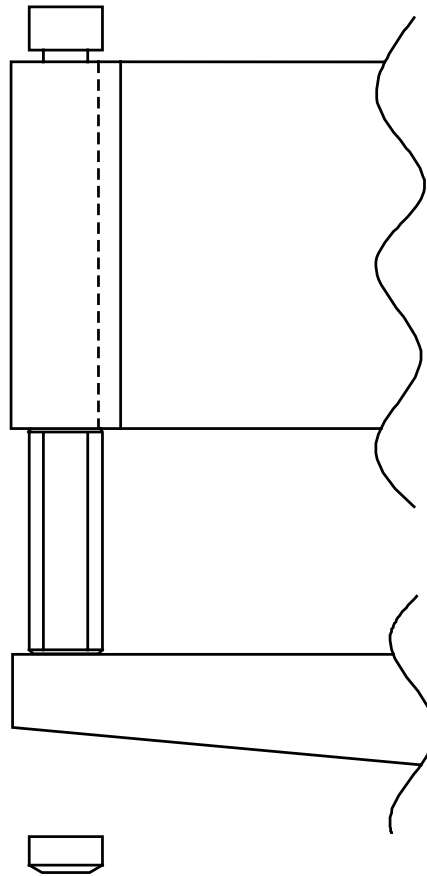

Hälband

Monteras på uppfällbar fotplatta. Hålanvisning för skruvens montering finns på undersidan av fotplattan: Främre alt bakre "hörnet" kan användas. Gör hålet genom att borra (6 mm).

Heel-loop

Mounted on a foldable footrest. Instructions for placement of the screw are found on the bottom of the footrest: the front or back corner can be used. Make the hole by drilling (6 mm).

Fersenband

Das Fersenband wird auf eine hochklappbare Fußplatte montiert. Ein vorgestanztes Loch für die Montage der Schraube befindet sich auf der Unterseite der Fußplatte: Die vordere bzw. hintere "Ecke" kann verwendet werden. Bohren Sie ein Loch in die Fußplatte (6 mm).

74005D

10-05-04

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.se