
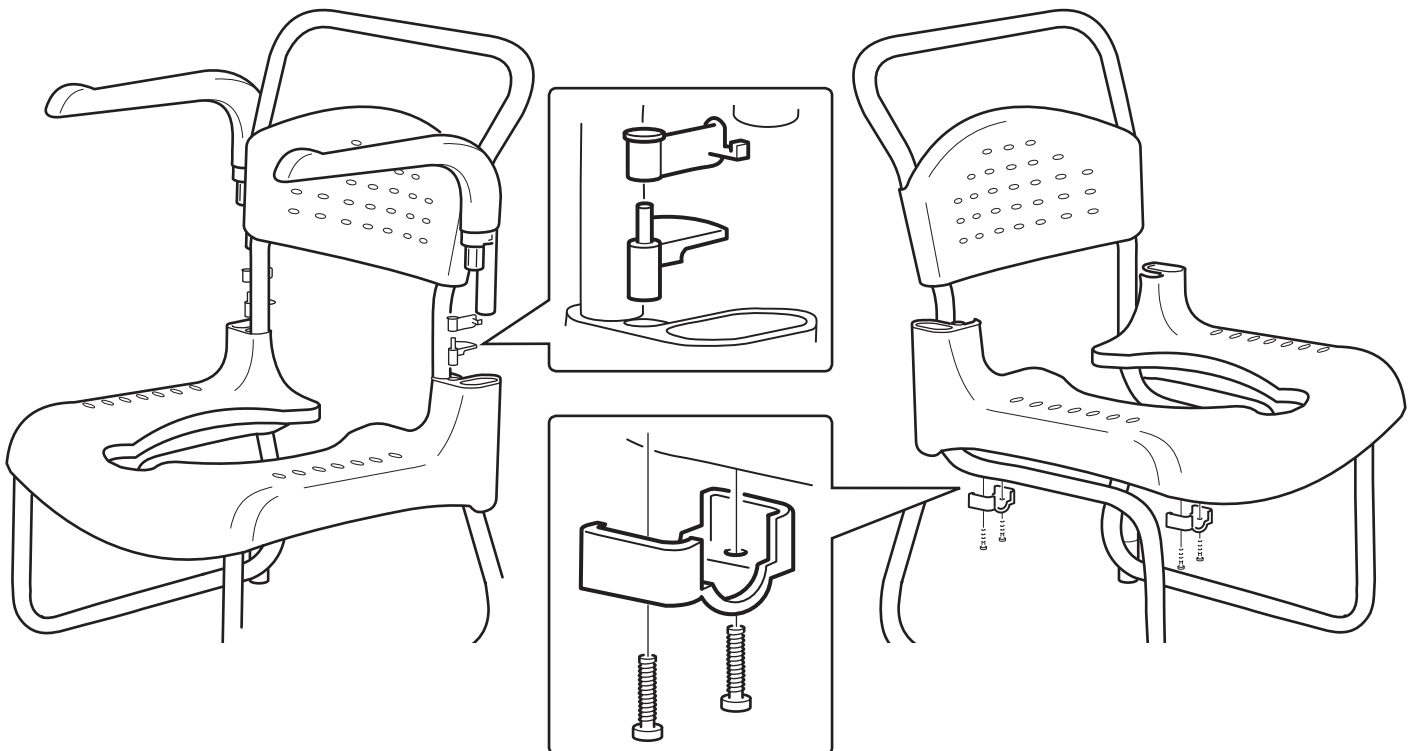


84006144 / 84006145

Byte av sits
Changing the seat
Austausch des Sitzes

78652A 2016-04-07

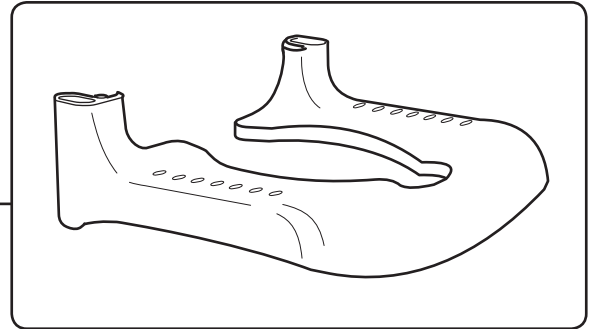

sv

- Vrid armstödslås (orange) utåt.
- Lyft armstödet.
- Ta av armstödslåset från låsbygel (grå).
Bänd med t.ex. en skruvmejsel.
- Knacka loss låsbygeln med hammare underifrån.
- Lossa TORX-skrivar och ta av klammer.
- Lossa sitsen genom att knacka med handen underifrån.
- Montera den nya sitsen i omvänd ordning.

en

- Wrench loose the armrest lock (orange).
- Lift up the armrest.
- Take off the armrest lock. Prize loose with a screwdriver.
- Loosen the mounting (grey) by tapping from underneath.
- Loosen the TORX-screws and take off the bracket.
- Take off the seat by tapping with the hand from underneath.
- Mount the new seat in opposite order.

de

- Die Armlehnenarretierung (orange) nach außen biegen.
- Armlehnen abheben.
- Die Armlehnenarretierung von Halterung (grau) abnehmen. Einen Schraubenzieher als Hebel benutzen.
- Die Halterung abnehmen. Dabei von unten mit einem Hammer klopfen.
- Die TORX-Schrauben abschrauben und die Halteklammer abnehmen.
- Den Sitz von unten mit der Hand anschlagen und abnehmen.
- Den neuen Sitz in umgekehrter Reihenfolge einbauen.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 24 Anderstorp
www.etac.com

