


B.

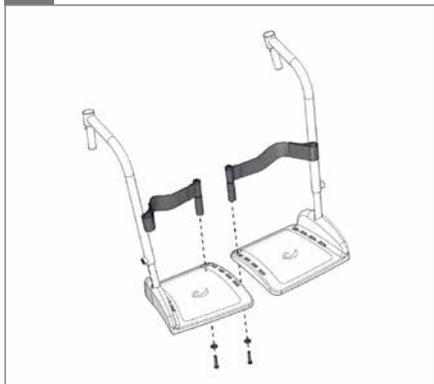


2.

○ 5 mm



3.

○ 5 mm

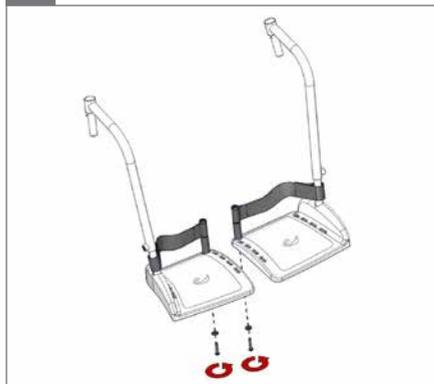

4.

○ 5 mm, 2,5 Nm



5.



Wadenband und Fersenstop (Set)

Für den Heron sind ein Wadenband und Fersenstop als Zubehör erhältlich. Diese können einzeln oder zusammen an den Fußstützen (optionales Zubehör) montiert werden.

A) Wadenband

An den Fußstützen des Herons kann ein Wadenband montiert werden

Bild 3)

Entfernen sie die beiden Fussplatten aus der oberen Beinstützenhalterung. Lösen Sie hierfür die beiden Inbusschrauben mit dem 5mm Inbusschlüssel und ziehen die Fussplatten nach unten heraus.

Bild 4)

Schieben Sie das Wadenband über die nun offenen Enden der Beinstützenrohre.

Bild 5)

Setzen Sie anschließend die Kunststoffhülse mit einem Klick über dem Rohr und dem Wadenband auf. Diese fixieren das Wadenband auf der gewünschten Höhe und verhindern ein verrutschen des Wadenbands auf dem Beinstützenrohr.

Bild 6)

Schieben sie nun die Fußplatten wieder zurück in die Beinstützenrohre und fixieren sie diese auf der gewünschten Höhe mit den beiden Schrauben und einem 5mm Inbusschlüssel mit 2,5Nm.

Reinigen Sie das Wadenband regelmäßig mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Desinfizieren Sie das Wadenband bei Bedarf mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie das Wadenband danach an der Luft trocknen.

B) Fersenstop (Set)

An den beiden Fussplatten des Herons kann ein Fersenstop montiert werden.

Bild 2-4

Schrauben sie den Fersenstop jeweils an der Innenseite der Fußplatte mit einem 5mm Inbusschlüssel und 2,5Nm fest.

Das Andere Ende des Fersenstops wird um das Beinstützenrohr gelegt und mit dem aufgehnähten Klett befestigt.

Bild 5

Reinigen Sie den Fersenstop regelmäßig mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Desinfizieren Sie den Fersenstop bei Bedarf mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie den Fersenstop danach an der Luft trocknen.