





Beinstützen

Bild 1-3

Für den Heron sind drei Beinstützen-Varianten als Zubehör erhältlich.

Bild 4

Im Grundrahmen des Herons sind Aufnahmen zur Montage der Beinstützen integriert.

Im Auslieferungszustand sind diese Aufnahmen mit Abdeckkappen verschlossen.

Um die Beinstützen am Heron zu befestigen, entfernen Sie zunächst diese Abdeckkappen, sie können einfach mit den Fingern oder einem flachen Schraubendreher herausgenommen werden.

Bild 5

Setzen Sie die Beinstütze mit dem Einsteckrohr in die Aufnahme an der Sitzplatte. Achten Sie darauf, dass die Fussplatten nach innen zeigen und beginnen sie mit dem Einstecken in der maximal nach außen gedrehten Position – Nur in dieser Stellung kann das Beinstützenrohr in die Aufnahme ohne Gewalt gesteckt werden.

Bild 6

Anschließend drehen Sie die Beinstütze mit einer leichten Schwenkbewegung vor den Sitz. Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger einklemmen.

Bild 7

Die Beinstütze rastet in der vorderen Position selbständig ein. Kontrollieren Sie ggf. den korrekten Sitz, in dem Sie die Beinstütze leicht Richtung Boden drücken. In dieser Position kann die Beinstütze nicht mehr nach Außen geschwenkt werden.

Wenn Sie die Beinstütze erneut wegschwenken möchten, ziehen Sie diese ca. 1cm senkrecht in der Halterung nach oben und drehen sie dann nach außen.

Bild 8 und 9

Um die Fußplatte in der Länge anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube mit dem 5mm Inbusschlüssel und ziehen das innere Rohr passend heraus bzw. schieben es weiter hinein. Anschließend ziehen Sie die Inbusschraube mit 2,5 Nm fest.

Achten Sie auf die Markierung auf dem Rohr, die die maximal ausziehbare Länge kennzeichnet.

Bild 10 und 11

Achten Sie insbesondere bei Nutzung auf unebenen Flächen immer auf die Höheneinstellung des Grundrahmens sowie die Längeneinstellung der Beinstützen. Andernfalls könnten die Fußplatten die Vorderräder blockieren oder am Fußboden aufsetzen. Beides kann schwerwiegende Schäden an dem Produkt, zur Gefährdung der Umwelt oder Dritter bzw. zu Verletzungen des Nutzers führen!

Bild 12

Achtung: Nutzen Sie die Beinstützen nicht, um den Nutzer stehend zu bewegen!