





Schulterauflagen und Polster

A) Schulterauflagen

Bild 1 und 2

Für den Heron sind Schulterauflagen und passende Polster als Zubehör erhältlich. Diese können an der Rückenlehne montiert werden.

Bild 3-5

Montieren Sie die Schulterauflagen mit Hilfe eines 5mm Inbusschlüssel und je zwei Inbusschrauben an der Rückenplatte des Grundmodells. Vergewissern Sie sich, dass Sie die linke und rechte Seite nicht vertauschen und ziehen Sie die Schrauben mit 2,5Nm fest.

Bild 6

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben sich gelockert haben könnten und ziehen Sie diese ggf. mit 2,5Nm nach.

B) Polster für Schulterauflagen

Bild 1+2

Die Schulterführungen (optionales Zubehör) können mit einem weichen PUR-Polster ausgestattet werden.

Bild 3+4

An der Rückseite der Polster befinden sich drei kugelförmige Ausbuchtungen. Diese werden in die Löcher der Schulterführungen gedrückt und so befestigt.

Bild 5

Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der kugelförmigen Ausbuchtungen in den Löchern und drücken Sie diese ggf. nach. Tauschen Sie das Polster aus, wenn die Kugeln defekt sind.