



Tisch

Bild1

Für den Heron ist ein Tisch bzw. Armauflage als Zubehör erhältlich. Dieser kann an den Armlehnen (optionales Zubehör) ohne Werkzeug montiert werden.

Bild2

Die Heron-Armlehnen werden standardmäßig mit Handrändelschrauben geliefert, die beidseits in die Armlehnenrohre eingeschraubt sind. Um den Tisch zu montieren, müssen Sie diese zuvor einige Gewindegänge herausdrehen, bis die Rohre frei zugänglich sind.

Bild3

Die Heron-Armlehnen werden standardmäßig mit Abdeckkappen in den Armstützenrohren geliefert. Wenn Sie den Tisch montieren möchten, müssen Sie die Abdeckkappen entfernen.

Bild4

Schieben sie die Tischrohre beidseits parallel in die Armlehnenrohre ein. Achten Sie auf die maximal zu montierende Position, die auf dem Rohr gekennzeichnet ist.

Bild5

Ziehen Sie beide Handrändelschrauben mit handfest an, um den Tisch in der gewünschten Position zu fixieren.

Bild6

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben fest angezogen sind um ein Herausfallen des Tisches zu vermeiden.