

Checklista för installationsbesiktning av Molift MRS Skensystem

Protokoll

Kund:

Installationsår:

Rums nr/plats:



Skensystemet ska endast bestå av Molift MRS originaldelar. I annat fall gäller inte CE-märkning och Etac fråntar sig allt ansvar och garanti för systemet.

Checklista

- | Godkänd | Ej godkänd | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skensystemets alla komponenter ska vara monterade enligt installationshandbokens anvisningar. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera att det inte finns något spån från borrning eller kapning inuti skenan. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rengör efter montering. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera att åkvagnar löper mjukt och utan missljud i hela skenan. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera att alla skenslut har ändstopp och täcklock, samt att dessa är korrekt monterade. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Att alla ändstopp är åtdragna och säkrade till 40 Nm. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Utför minst sex lyft med max brukarvikt = SWL (lyfthöjd min 15 cm) på slumpvis utvalda punkter i skenan. Kontrollera att åkvagnen löper mjukt i hela skensystemet belastad med max brukarvikt. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera kombilåsets funktion. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera växelns funktion. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontrollera att lyftsystemets alla tillbehör och delar har samma eller lägre max brukarvikt = SWL. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Skensystemet ska vara märkt med etikett max brukarvikt = SWL och med datum och signatur på auktoriserad installatör. |

Ej godkänd, noteringar:



Alla delar och komponenter som före, under eller efter installation är skadade, deformerade eller är defekta måste vara ersatta eller reparerade innan systemet kan tas i bruk

Besiktning utförd av:

Installationen måste vara godkänd av en person certifierad och utbildad av Etac.

Datum/plats:

Signatur:

Etac/Molift Service ID (6 siffror):

Kommentarer: