



# Etac Hi-Loo med fast montering

Smidiga toalettsitsförhöjare med  
stabilt stöd utan klämrisiker

 **etac**<sup>®</sup>

# Toalettsitsförhöjare med stor variation och många möjligheter

Hi-Loo passar de flesta toaletter och sitter ordentligt på plats. Hi-Loo finns både med och utan armstöd.

## Armstöd för säkert och tryggt sittande

Armstöden ger ett säkert och tryggt sittande och underlättar vid förflyttning till och från toaletten. Dessutom är armstöden både uppfällbara och avtagbara men kan även fixeras i nedfällt läge. Om det är ont om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt använda Hi-Loo med bara ett armstöd. Armstöden kan aldrig avmonteras i nedfällt läge vilket ytterligare ökar säkerheten för brukaren.

## Två olika höjder

Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm eller 10 cm. Förhöjarna har stora friktionselement som ger bra stöd mot porسلinet. Den ergonomiskt designade sitsen har urtag för intymhygien både fram- och baktill. Sitsen är också uppfällbar och avtagbar vilket underlättar rengöring.



### Hi-Loo

Hi-Loo med fast montering är en stabil, säker och diskret toalettförhöjning som uppskattas för sin enkelhet.



### Hi-Loo med vinklade armstöd

Hi-Loo II har vinklade armstöd. Dessa används med fördel på väggmonterade toaletter då de tar mindre plats mot väggen i uppfällt läge. Hi-Loo II packas i en mindre förpackning vilket ger logiska och miljömässiga fördelar.

#### Produktnamn

Produktnamn	Art. nr
Hi-Loo fast 6 cm	80301106
Hi-Loo fast 10 cm	80301107
Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm	80301316-2
Hi-Loo delmont med armstöd fast 10 cm	80301317-2
Hi-Loo delmont med armstöd snedställd	80301318-2

#### Mått

Höjd på armstöd ovanför sits: 23 cm  
 Bredd mellan armstöd: 49 cm  
 Yttermått armstöd: 60 cm  
 Längd framkant till bakkant: 46 cm  
 Sittringens yttermått: Bredd 36,5 cm  
 Sittringens inermått: Bredd/Djup: 19,5/27 cm

#### Mått porslin

Fästhål till inre framkant: minst 35,5 cm  
 CC-mått mellan infästningshålen 128-202 mm

#### Max brukarvikt

150 kg

#### Vikt

Hi-Loo fast 6 cm: 2,6 kg  
 Hi-Loo fast 10 cm: 3,4 kg  
 Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm: 4,9 kg  
 Hi-Loo delmont med armstöd fast 10 cm: 5,8 kg  
 Hi-Loo delmont med armstöd snedställd: 5,0 kg

#### Material

Armstödsrör: Pulverlackerade stålrör  
 Armstödsbricka: Polypropen  
 Lock och sittring: Polypropen  
 Fästansordning: Aluminium & Polypropen

#### Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.




## Hi-Loo snedställd

Personer som har nedsatt rörlighet i knä och höft har ofta svårt att sätta sig och resa sig. Därför finns även Hi-Loo med vinklad sits. Den vinklade sitsen är 10 cm hög baktill och 6 cm hög framtill.



## Detaljer

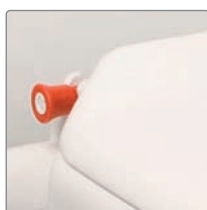

### Snäplås

Med snäplåsfunktionen fäster man smidigt sitsen på plats och det är enkelt att lyfta bort sitsen för rengöring.




### Armstöd

Armstödsplattorna har en rundad form för att alltid ge ett stadigt grepp vid uppresning.



### Stor anläggningsyta mot porslinet

Fästets skoning har stor anläggningsyta och sitter säkert på plats vid montering.

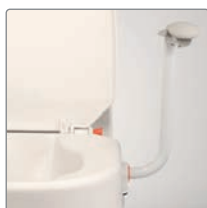

### Rymligt och säkert sittande

Armstödet form och infästning ger bra stöd samtidigt som det ger gott om utrymme utan klämrisker.



### Bekväm och funktionell

Den ergonomiskt designade sitsen har urtag för intimhygien både fram- och baktill.



### Rena och släta ytor med säkerheten i fokus

Hi-Loo har rena ytor. Infästningen har säkerhetsdetaljer som gjorts orangea för att synas bättre.

## Tillbehör



### Fästsats

Underlättar vid montering på porslin där det är trångt undertill vid infästningen.  
Art.nr 8030 1052




### Fäste för hållare till signalanordning

Art.nr 8030 3038



### Fäste för signalanordning

Art.nr 8030 3027

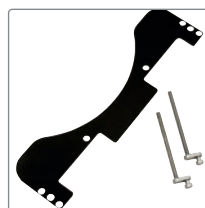

### Anpassningssats

Ger utökat utrymme mellan infästning och vattentank. Art.nr: 80304002  
Passar produkter med serienummer från och med 80742 (Supporter II) och 73223 (Supporter ställbar)



### Toalettpappershållare

Komplett. Fästes på armstöd.  
Art.nr 8303 0001



### Kantstoppsats Hi-Loo II

Komplett  
Art.nr 8030 1030



### Tvärslå 605 mm

Art.nr 8030 3034



Hi-Loo 10 cm.

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com) [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities