



Glidbrädor

Ett brett sortiment av lösningar
för sittande förflyttningar

 **etac**[®]

Immedia glidbrädor

Ett brett sortiment av lösningar för sittande förflyttningar

En glidbräda överbryggar kortare avstånd vid sittande förflyttning. Den låga friktionen på brädans ovansida gör det möjligt för patienten att förflytta sig självständigt eller med assistans. Glidbrädor är lämpliga att använda vid överflyttning mellan säng och rullstol, mellan rullstol/toalett/mobil toalettstol eller vid förflyttning i och ur bil. Alla brädor utom E-board Oval är försedda med antihalkytor på undersidan. När en glidbräda kombineras med en Immedia GlideCushion eller Immedia MultiGlide blir friktionen ännu lägre, vilket rekommenderas vid förflyttning med bar hud, exempelvis vid förflyttning till/från en duschstol eller toalett.

Immedia E-Board

Immedia E-Board är en tunn glidbräda som är böjbar vilket underlättar placering och borttagning.



Användningsområden

- Säng till rullstol/duschstol
- Ut ur/in i bil
- Mellan rullstol, stol, toalett, duschstol etc.



E-Board med vikbar kant

Immedia E-Board har en kant på ena sidan som kan vikas uppåt och nedåt, vilket gör brädan mer robust och stabil. När kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul. Finns i två längder, 60 och 75 cm.




E-Board Compact

En mindre och lättare glidbräda som enkelt kan tas med, passar mer aktiva och självständiga patienter. Immedia E-Board Compact finns i två längder, 45 och 60 cm.

Immedia Butterfly

Immedia Butterfly är en lång, bred och stabil glidbräda. Den har urtag för rullstolshjulet och en halkfri yta på undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats.

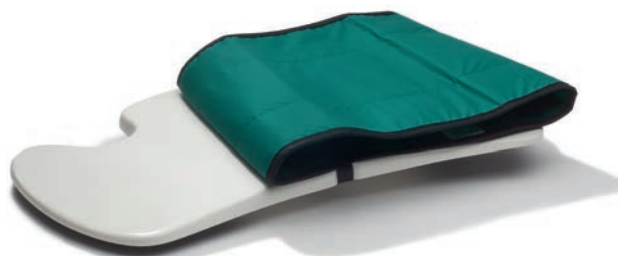

Immedia Butterfly glidvinge

Immedia Butterfly kan användas med en specialutformad "glidvinge" – en glidmatta som monteras på glidbrädan. Glidvingen minskar friktionen ytterligare och glider med på brädan under hela förflyttningen.

Rekommenderad användning

Placera Immedia Butterfly-brädan nära patienten och skjut in glidvingen under patientens ena sittben. Ta eventuellt bort ena sidans armstöd och fotplattor på rullstolen.

Om möjligt håller patienten i armstödet på den motsatta sidan för att hjälpa till att glida över till rullstolen. Använd Immedia PediTurn för att underlätta vridningen.

När förflyttningen är slutförd tas glidbrädan bort och rullstolens arm och fotstöd återställs.

Tips: Vid förflyttning med glidbräda ska man om möjligt se till att ytan man flyttar över till är placerad något lägre så att man på så vis kan ta hjälp av gravitationen.

Immedia 3B-Board

Immedia 3B-Board är en stabil glidbräda med svängd form. Brädan kan placeras med den svängda delen vänd antingen framåt eller bakåt beroende på förflyttningssituationen och på vilka hinder som finns runt omkring, exempelvis rullstolens hjul. Har en halkfri yta på undersidan.

Immedia 3B-Board möjliggör med sin längd förflyttningar över längre avstånd. Lämplig vid förflyttning in i eller ut ur bil.



Immedia Dolphin

Immedia Dolphin är en stabil glidbräda som är specialutformad för förflyttning till en toalettstol. Glidbrädan har urtag för toalettstolen och rullstolshjulet samt antihalkmaterial på undersidan vilket underlättar positioneringen och gör att den ligger stadigt på plats.



Immedia E-Board Oval glidskiva

En glidskiva överbryggar kortare avstånd vid liggande överflyttningar. Den låga friktionen på skivans ovansida gör det möjligt att förflytta en patient mellan två liggplatser som t ex mellan två olika sängar eller mellan bår och säng.

Placera gärna glidskivorna under ett draglakan och för att minska friktionen ytterligare använd t ex Immedia MultiGlide glidtyg mellan draglakanet och glidskivorna.

Den mindre modellen av glidskivorna kan användas till olika förflyttningar som t ex längre bak i stol eller som stöd för applicering av lyftselens benstöd.



Immedia E-Board Oval L

E-Board Oval L är lämplig vid överflyttning mellan två liggplatser och som hjälp vid applicering av lyftsele.



Immedia E-Board Oval S

E-Board Oval S är en liten glidskiva som kan användas till att flyttas bakåt i en stol eller vid applicering av bestöden på lyftsele.

Immedia E-Board Oval

E-Board Oval har en låg friktion på båda sidor som underlättar vid placering och borttagning.


Glidskiva E-Board Oval är lämplig vid överflyttning mellan två liggplatser och vid applicering av lyftsele.

Placera lyftselen mellan skivorna för att minska friktionen.


Övriga användningsområden

- Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
- Stöd vid förflyttning av ben i och ur säng

Beskrivning		B x L	Art.nr	Specifikationer	
Immedia E-Board		(cm)		Immedia E-board och 3B-board	3B-Board/E-Board & Dolphin
Small	Compact, utan kanter, ej vikbar	20 x 45	IM410	Material: polyetylen	Max. brukarvikt: 150 kg
Medium	Compact, utan kanter, ej vikbar	25 x 60	IM408		
Large	vikbar, en kant	33 x 60	IM404		
Lång	vikbar, en kant	33 x 75	IM405	Immedia Butterfly och Dolphin	Immedia Butterfly
Large	E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm	39 x 85	IM411	Material: glasfiber	Max. brukarvikt: 250 kg
Small	E-Board oval, 2 st, svart, tjocklek 3 mm	20 x 45	IM412		
Immedia Butterfly		(cm)		Immedia Butterfly glidvinge	
Glidbräda		32 x 66	IM401	Material, utsida och insida: nylon	
Glidvinge L till glidbräda		35 x 40	IM4001	Polstring: polyester	
Glidvinge XL till glidbräda		35 x 47,5	IM4002		
Immedia 3B - Board		(cm)			
Glidbräda med svängd form		23 x 77	IM403		
Immedia Dolphin		(cm)			
Glidbräda för toalett		L69	IM409		



Avtorkning. Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70 % desinfektionssprit.





“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se