



Etac M100

En rullstol skapad med känsla
och omtanke – in i minsta detalj.

 **etac**[®]

Etac M100

Etac M100 är rullstolen med oslagbar komfort och trygghet; den polstrade klädseln ger ett angenämt och skönt sittande och fyrkantskrysset ger extra stabilitet vid användandet. Smarta variationsmöjligheter med få inställningar gör rullstolen lätt att anpassa efter varje individ.

Lätt att använda, köra och hantera

Förutom justerbar rygg och justerbara arm- och fotstöd har M100 flera genomtänkta funktioner; enkel att lyfta i de låsbara benstöden, körhandtag som kan justeras oberoende av sitthöjden och fällbara bromshandtag som underlättar vid sidoöverflyttning.

M100 är helt enkelt en modern rullstol som är lätt att använda, köra och hantera.



Detaljer



Höjdjusterbar

Sitsen är justerbar i höjd mellan 38 cm och 52.5 cm och kan ställas in i horisontellt eller lätt vinklat läge.



Trygg transport i bil

M100 kan spännas fast direkt i ramen. Det behövs inga extra tillbehör.



Enkel sidoförflyttning

För att underlätta sidoförflyttning är bromsspakarna vikbara.



Stort utbud av tillbehör

För att säkerställa en perfekt passform finns en mängd olika alternativ av tillbehör.



Standardutförande

Chassi

Aluminium och stålrör. Hopfällbart.

Broms

Knäledsbroms.

Körhandtag

Höjddreglerbara i fem fasta lägen.

Ryggstöd

37.5 cm – 47.5 cm (2.5 cm intervall), ryggrör med lumbalvinkel

Ryggvinkel

Fast.

Sits

Justerbar 0° – +3°

Sitsklädsel

Fast, polstrad.

Ryggklädsel

Fast, polstrad

Drivhjul

24" quick release massiva/aluminiumdrivring

Länkhjul

8" halvmassigt, 200 x 35 mm

Benstöd

Låsbara, avtagbara och svängbara.

Fotplattor

Vinkeljusterbara och höjddjusterbara med 1.5 cm intervall

Armstöd


Korta, längd 25 cm

Tramprör

Försedd med räfflad gummisko



Etac M100 – Smarta funktioner

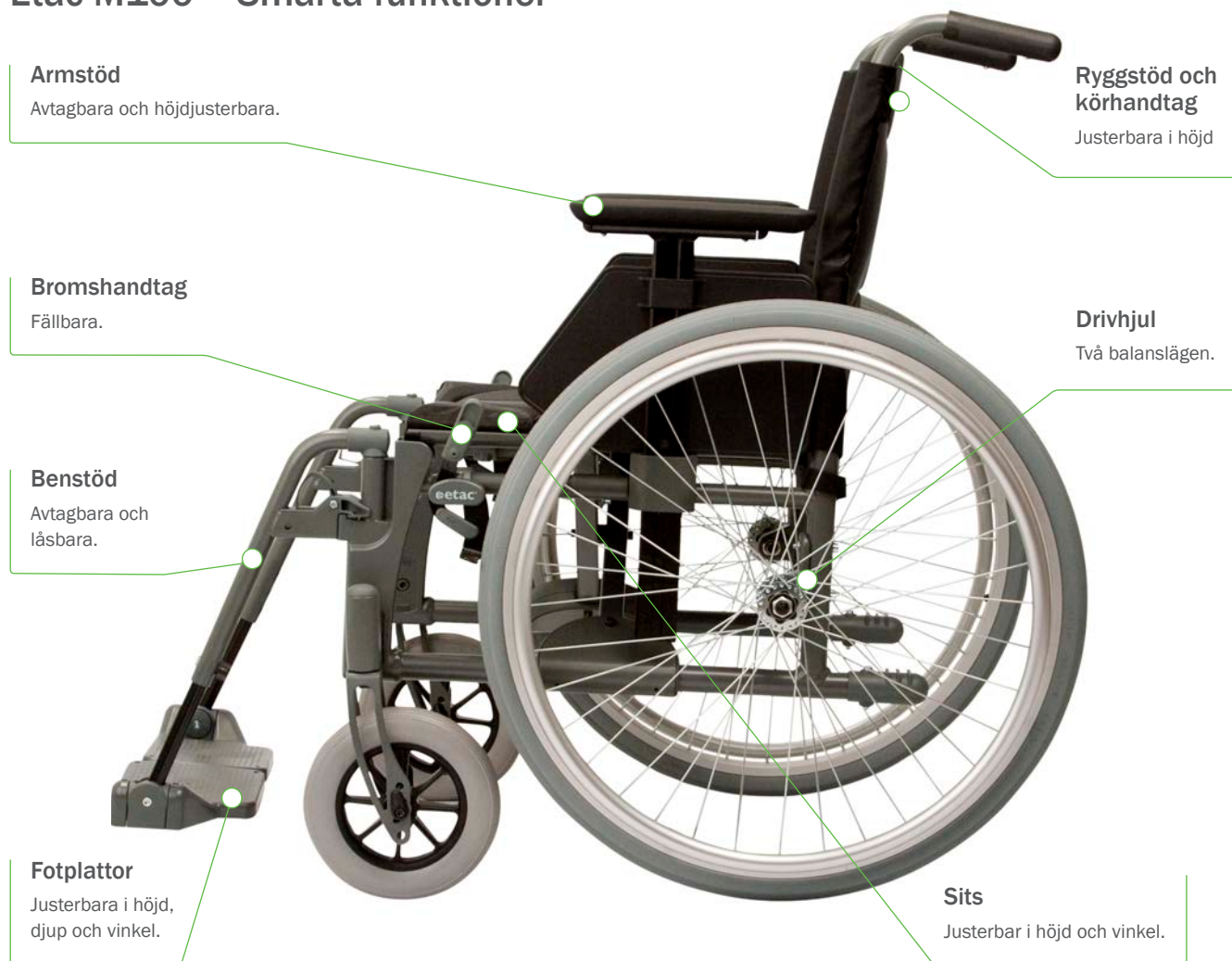

Mått och vikt

Sitsbredd	Art.nr	Sitsdjup	Sitshöjd fram	Ryggstödshöjd	Total width	Transportbredd	Weight
37.5 cm	13400103	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 56.5 cm	24 cm	15.7 kg
37.5 cm	13400104	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 56.5 cm	24 cm	15.9 cm
40.0 cm	13400105	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 59.0 cm	24 cm	15.8 kg
40.0 cm	13400106	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 59.0 cm	24 cm	16.0 kg
42.5 cm	13400107	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 61.5 cm	24 cm	15.9 kg
42.5 cm	13400108	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 61.5 cm	24 cm	16.1 kg
45.0 cm	13400109	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 64.0 cm	24 cm	16.0 kg
45.0 cm	13400110	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 64.0 cm	24 cm	16.2 kg
47.5 cm	13400111	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 66.5 cm	24 cm	16.1 kg
47.5 cm	13400112	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 66.5 cm	24 cm	16.3 kg
50.0 cm	13400113	kort 40 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	kort 69.0 cm	24 cm	16.2 kg
50.0 cm	13400114	lång 46 cm	38–52.5 cm	37.5–47.5 cm	lång 69.0 cm	24 cm	16.4 kg

Mått och vikt gäller stol med 24" drivhjul massiva däck/aluminiumdriving, benstöd och trampor. Sitshöjd fram är mått från sitsrörets översida med 3° bakåttippad sits, ryggshöjd är mått från sitsens översida och sitsdjup är mått från ryggrör. Mått och tolerans +/- 2 %.

Sitstill:
0°/3°

Max brukarvikt:
125 kg

Hjul:
Drivhjul 24", 22" eller 20", massiva däck, länkhjul 8", 6" eller 5", massiva däck.

Vid beställning av rullstol rekommenderar vi att man använder sig av Etacs utprovningsprotokoll, se dokumentation längre ner på sidan.



Standardutförande



Fasta körhandtag

Fem fasta höjdställningar.



Fotplattor

Reglerbara i höjd och justerbara i vinkel.
Uppfällbara.



Knäledsbroms

Med fällbart bromshandtag.



Armstöd, korta

Avtagbara och höjjusterbara.
Längd 25 cm. Låsbara som tillval



Benstöd


Låsbara, avtagbara och svängbara.



Tramprör


Försedd med räfflad gummisko.

Tillbehör

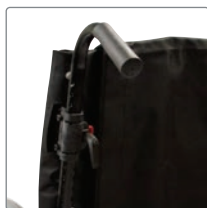

Höjddreglerbara körhandtag

Körhandtagen justeras enkelt till anpassad höjd utan verktyg.

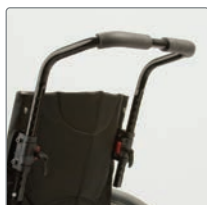

Körbygel

Alternativ till körhandtag. Körbygeln är avtagbar och höjddreglerbar.



Tvärstag

För extra stabilisering. När stolen ska fällas ihop kan tvärstaget enkelt snäppas loss på ena sidan. OBS! Kan endast användas med höjddreglerbara körhandtag.



Tvärstag fast

För extra stabilisering.




Reglerbar ryggklädsel

Med kardborreband. Inklusive överdrag. Avtorkningsbar. Material: Polyester.



Broms med bromsspaksförlängare

Fällbar.

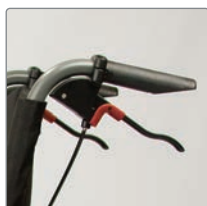

Vårdarbroms

Till 20", 22" och 24" drivhjul.



Snäva benstöd

Gör att fotstödet kommer ungefär 6 cm närmare sitsen. Finns även i en kortare version. Kan endast användas i kombination med 6" och 5" länkhjul.



Vinkelreglerbart benstöd

Med uppfällbar vadmatta som kan justeras i två höjdlägen på benstödsröret. Passar höger och vänster sida.



Hälband

Reglerbart i längd. Passar både höger och vänster sida.



Vadband

Avtagbart och reglerbart i längd.



Amputationsbenstöd

Justerbart i höjd, vinkel, djup och i sidled. Samma modell passar för både höger och vänster sida.



Armstöd, långa


Avtagbara och höjddjusterbara. Längd 35 cm. Låsbara som tillval.



Bord

Transparent. Monteras på långa armstöd.

Tillbehör, forts.

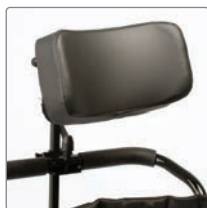

Huvudstöd

Inklusive stag, för montering på körbygel.
Reglerbart i höjd, djup och vinkel.
Huvudstödsfäste köpes separat.



Länkhjul

6" halvmassivt, 8" (200x50 mm) halvmassivt,
5" massivt.



Sittdyna

52 cm lång. Anatomisk formad sittdyna som
kapas till inställt sittdjup. Klädsel: mörkgrå
plysch.



Drivhjul

20", 22" alt. 24", massiva med aluminium
drivring



Höftbälte

Enkelt reglerbart i längd. Polyester.




Dropställning

Komplett med fäste.



Käpphållare Universal

Inklusive fästband för övre fixering av
käppen. Monteras på tramppröret alternativt
tippskyddet. Passar både höger och vänster
sida.

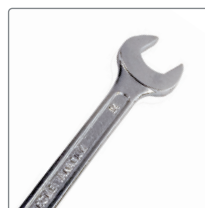

Verktygssats

Innehåller insexnyckel (3, 5 och 6 mm),
hylsnyckel (19/24 mm) och Torxnyckel T20.



Tippskydd


Enkla att svänga in under stolen. Styck.



Ekerskydd

Grå eller gul logo.

Chassifärg

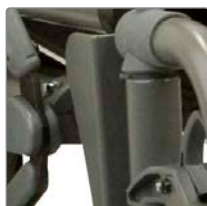

Grå



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se