

Molift Quick Raiser 2

Molift Quick Raiser 2 är den optimala lyften för förflyttningar från sittande till sittande och sittande till stående hos brukare som själva kan hjälpa till under lyftet.

Naturligt rörelsemönster

Den snedställda masten ger en naturlig rörelsekurva vilket uppskattas av både vårdare och brukare. Lyftet sker snabbt, tryggt samt bekvämt och är perfekt för toaletsituationer. Quick Raiser 2 tilldelades det norska designpriset för banbrytande design och funktionalitet. Till Quick Raiser 2 används Molift RgoSling StandUp lyftsele som är snabb och enkel att applicera.

Lättmanövrerad i trånga utrymmen

Molift Quick Raiser 2 roterar runt sin egen axel, den passar därför utmärkt i trånga utrymmen. Den är liten, kompakt och robust, har lågt chassi och elektrisk benbreddning. Det låga chassit gör att den kommer in under låga rullstolar, sängar och stolar. Hjulens placering och den snäva svänggraden gör den lättmanövrerad, även i trånga utrymmen. Molifts miljövänliga batteri svarar för en säker drift.

Automatisk servicevarning

Molift Quick Raiser 2 är utrustad med Molift service tool. Detta är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen. Molift Service tool säkerställer att lyften alltid fungerar optimalt. Det finns även möjlighet att hämta ut statistik som visar lyftens användningsmönster.



Unik hjulposition

Den lätta konstruktionen i kombination med den unika hjulpositionen bidrar till att Molift Quick Raiser är otroligt lätt att manövrera.



Batteri-indikator

Batteri-indikator på handkontrollen som indikerar när laddning behöver ske.



Vändbara underbensstöd

Underbensstöden är justerbara i höjddled och kan vändas för bättre passform och ge ett alternativt stöd för underbenen.



Säkerhet

Flera olika säkerhetsdetaljer är standard, som nödstopp, överbelastningsskydd, elektrisk och mekanisk nödsänkning.

Tillbehör



Justerbar fotplatta

Höjddjusterbar fotplatta, idealisk till barn eller korta vuxna. Max brukarvikt: 75 kg
Art.nr 0451000



Extra mjuk polstring för underbenstöd

För brukare med extra känsliga underben.
Polstring Small art.nr 0455111



Sandaler

Sandalerna används för att säkerställa att fötterna hålls på plats under lyftet.
Sandaler Small art.nr 0452100
Sandaler Medium art.nr 0452200
Sandaler Large art.nr 0452300



Molift RgoSling StandUp lyftsele

Ett sortiment av lyftselar för användning med Molift Quick Raiser med eller utan extra stöd.
Läs mer på www.etac.se/lyftselar



Miljövänliga batterier

Quick Raiser är utrustad med miljövänliga NiMH batterier.

Energispar-funktion

Elektroniken har en energispar-funktion som gör att systemet sätts i viloläge efter en period utan aktivitet.

Benämning

Quick Raiser 2 U-formad med integrerad laddare

Art.nr

M23020

Max brukarvikt

Quick Raiser 2: 160 kg

Totalvikt

Quick Raiser 2: 36 kg

Hjulunderredets höjd

100 mm

Benbredd ytterkant

1200 mm

Bred chassii

610 mm

Batteri

NiMH 14,4 V - 2,6 Ah

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyfthastighet

Quick Raiser 2: 5 cm/sek med 75 kg

Antal lyft Ca 40 lyft med 75 kg i 50 cm

Underhåll



max
160
kg



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.

”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se