

Molift RgoSling Amputasjon MediumBack og HighBack

Ekstra sikkerhet med innebygd hoftebelte



Smal åpning for økt sikkerhet

Molift RgoSling Amputasjon gir den ekstra støtte som er nødvendig for å løfte og forflytte brukere med nedsatt muskelstyrke, eller amputerte ben. RgoSling Amputasjon har anatomisk form og polstring som gir eksepsjonell støtte gjennom hele løfte- og forflytningssituasjonen. Bendelerne er delt, og har ekstra lengde for påføring under begge bena. Forlengede stropper for å hindre utglidning av sittestillingen, noe som underbygger pasientens trygghet.

Tilgjengelige i Highback og MediumBack

Molift RgoSling Amputasjon HighBack gir ekstra støtte for brukere med nedsatt kropps- og hodestabilitet. Seilet kan brukes ved løft til og fra liggende og sittende stillinger.

Egenskaper



Ekstra kroppsstøtte

Hoftebelte med doble beltespenner og anti-skli materiale på insiden, gir ekstra kroppsstøtte for pasienter med redusert muskelstyrke og stabilitet.



Mindre åpning


Åpningen rundt baken er mindre enn standardversjon seil, for å hindre brukere i å skli nedover i seilet.

Str	MediumBack	HighBack
XXS	M1721100	M1721200
XS	M1721110	M1721210
S	M1721120	M1721220
M	M1721130	M1721230
L	M1721140	M1721240
XL	M1721150	M1721250
XXL	M1721160	M1721260

Materiale
Polyester,
PE-skum


For HMS nr. se side 44.

Anbefalt brukervekt	
XXS	12–17 kg
XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg

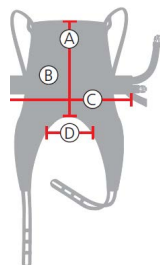

Amputasjon Mediumback

Str.	A	B	C	D
XXS	44	56	77	18
XS	51	61	86	20
S	57	66	97	27
M	62	76	105	32
L	64	90	125	40
XL	68	103	136	52
XXL	68	119	147	66

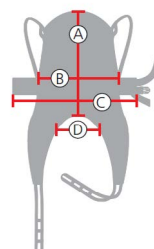

Amputasjon Highback

Str.	A	B	C	D
XXS	57	54	77	18
XS	69	59	86	20
S	79	66	97	27
M	92	77	105	32
L	98	88	128	40
XL	100	104	136	52
XXL	100	117	147	66



Løftestropper

Flere fargekodede løkker for å finne riktig tilpasning.

Anti-skli

For større sikkerhet er sklisikring påført på innsiden av RgoSling Amputasjon, RgoSling Toalett og RgoSling StandUp.

Belte

Molift RgoSling Amputasjon og RgoSling Toalett har et belte for komfort og sikkerhet.

Benstøtte

Polstret benstøtte for pasientens komfort. En lomme forenkler påføringen av benstøtten.

RgoSling MediumBack Polstret.

Merking

Klar og synlig informasjon for det daglige behov. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp

Polstring

Polstringen fordeler vekten og gir bedre komfort for pasienten.

Påføringslomme på ryggen

Lomme som forenkler påføringen, hovedsakelig i sittende stilling.




Rygglomme

Lommen på ryggen gir en enkel og komfortabel påføring.




Benstøtte

Den polstrede benstøtten, med den unike plasseringen av stroppen, fordeler presset på låret, og derved økes komforten.

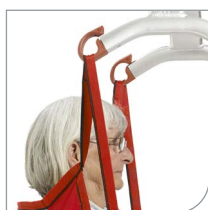

Glideløkker

Glideløkker gir en balansert vektfordeling.

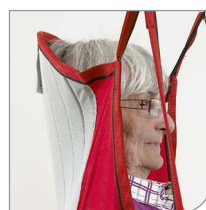


Mange alternativer

Seilene er tilgjengelige med høy rygg og medium rygg.



Vipp-opp merking

Klar og synlig informasjon for daglig bruk. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp.

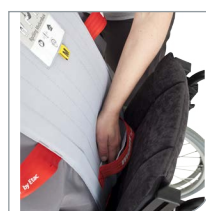


Påføringslomme på ryggen

Lomme på baksiden av ryggen letter påføringen av seilet.



Lomme på benstøtten


Lommen gir lett og behagelig påføring av benstøtten.

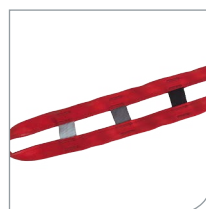

Fargekoder for enkel montering

Farge-kode-systemet på benstroppene gjør det enkelt å finne de riktige høydene, når stroppene skal festes på

Fargekoder størrelser

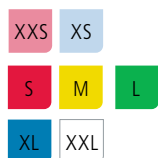

Vaskeanvisning, gjelder alle RgoSlings




Molift RgoSlings

RgoSling MediumBack Polstret




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback polstret XXS	198855	M1720100
Mediumback polstret XS	192156	M1720110
Mediumback polstret S	198157	M1720120
Mediumback polstret M	198158	M1720130
Mediumback polstret L	198159	M1720140
Mediumback polstret XL	198160	M1720150
Mediumback polstret XXL	198161	M1720160

RgoSling HighBack Polstret

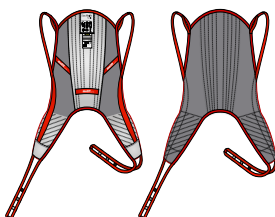


Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback polstret XXS	198856	M1720200
Highback polstret XS	198162	M1720210
Highback polstret S	198163	M1720220
Highback polstret M	198164	M1720230
Highback polstret L	198165	M1720240
Highback polstret XL	198166	M1720250
Highback polstret XXL	198167	M1720260

RgoSling MediumBack Nett

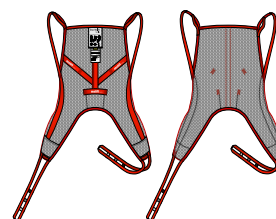

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback Net XXS	198168	M1720300
Mediumback Net XS	198169	M1720310
Mediumback Net S	198170	M1720320
Mediumback Net M	198171	M1720330
Mediumback Net L	198172	M1720340
Mediumback Net XL	198173	M1720350
Mediumback Net XXL	198174	M1720360

RgoSling HighBack Nett

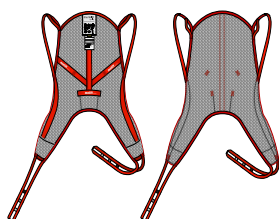


Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback Net XXS	198175	M1720400
Highback Net XS	198176	M1720410
Highback Net S	198177	M1720420
Highback Net M	198178	M1720430
Highback Net L	198179	M1720440
Highback Net XL	198180	M1720450
Highback Net XXL	198181	M1720460

RgoSling Toalett LowBack




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett lowback XXS	198182	M1720500
Toalett lowback XS	198183	M1720510
Toalett lowback S	198184	M1720520
Toalett lowback M	198185	M1720530
Toalett lowback L	198186	M1720540
Toalett lowback XL	198187	M1720550
Toalett lowback XXL	198188	M1720560

RgoSling Toalett HighBack

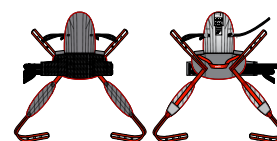


Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett highback XXS	198189	M1720600
Toalett highback XS	198190	M1720610
Toalett highback S	198191	M1720620
Toalett highback M	198192	M1720630
Toalett highback L	198193	M1720640
Toalett highback XL	198194	M1720650
Toalett highback XXL	198195	M1720660

RgoSling Ampu MediumBack

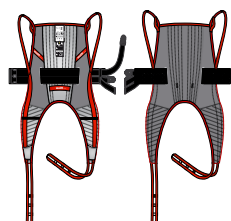

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu mediumback XXS	198196	M1721100
Ampu mediumback XS	198197	M1721110
Ampu mediumback S	198198	M1721120
Ampu mediumback M	198199	M1721130
Ampu mediumback L	198200	M1721140
Ampu mediumback XL	198201	M1721150
Ampu mediumback XXL	198202	M1721160

RgoSling Ampu HighBack

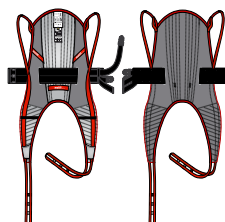

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu highback XXS	198203	M1721200
Ampu highback XS	198204	M1721210
Ampu highback S	198205	M1721220
Ampu highback M	198206	M1721230
Ampu highback L	198207	M1721240
Ampu highback XL	198208	M1721250
Ampu highback XXL	198209	M1721260

RgoSling Comfort HighBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Comfort highback S	198213	M1721420
Comfort highback M	198214	M1721430
Comfort highback L	198215	M1721440

RgoSling StandUp




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp XS	199141	M1720710
StandUp S	199142	M1720720
StandUp M	199143	M1720730
StandUp L	199144	M1720740
StandUp XL	199145	M1720750

RgoSling StandUp m/support




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp m/support XS	199146	M1720810
StandUp m/support S	199147	M1720820
StandUp m/support M	199148	M1720830
StandUp m/support L	199149	M1720840
StandUp m/support XL	199150	M1720850

RgoSling Ambulating Vest

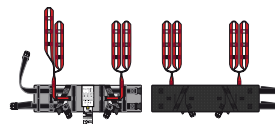

Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Ambulating Vest XXS	199151	M1721300
Ambulating Vest XS	199152	M1721310
Ambulating Vest S	198210	M1721320
Ambulating Vest M	198211	M1721330
Ambulating Vest L	198212	M1721340
Ambulating Vest XL	199153	M1721350

RgoSling FabricStretcher

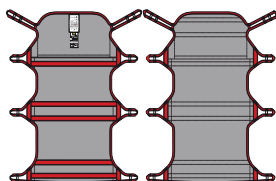


Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
FabricStretcher M	021829	M1721520
FabricStretcher) XL		M1721540

RgoSling Forlengelsesløkker



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Forlengelsesløkker	198216	M1721600

RgoSling Ambulating Vest Lyskestrapper

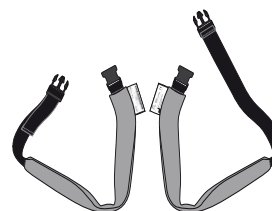

Beskrivelse	Art. nr.
Lyskestrapper XXS-XS	M1721700
Lyskestrapper S-M	M1721720
Lyskestrapper L-XL	M1721740

Alle RgoSlings er testet og godkjent for bruk opp til 300 kg.