

Immedia Sling

Förflyttningshjälpmedel med många funktioner

Immedia Sling är ett förflyttningshjälpmedel med många funktioner som kan användas i många olika situationer.

Immedia Sling har handtag och fungerar som en förlängning av armarna vilket gör det möjligt för vårdaren att erbjuda stöd och hjälp och samtidigt upprätthålla en ergonomisk arbetsställning och ett bra grepp utan att inkräkta på patientens personliga utrymme.



Immedia Sling är ett flexibelt hjälpmedel som kan användas som stöd vid många typer av förflyttningar som till exempel förflyttning högre upp i sängen, mellan två sittplatser etc. Immedia Sling har fyra handtag på varje sida. Insidan är försedd med antihalkmaterial vilket gör att patienten kan känna sig trygg under förflyttningen. Utsidan har låg friktion för att underlätta vid förflyttning och borttagning.


Användningsområden

- Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
- Säng till rullstol, stol etc.
- Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig
- Längre bak/fram i stol/rullstol

Rekommenderad användning




1.

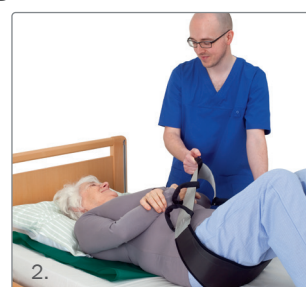

2.

1. Immedia Sling är försedd med handtag som är till stor hjälp för vårdare. När Immedia Sling används tillsammans med MultiGlide eller liknande produkter med låg friktion skapas en säker arbetsmiljö vid positionering av en patient i sängen.

2. En ensam vårdare kan själv förflytta en patient högre upp i sängen genom att använda Immedia Sling på det sätt som visas på bilden.

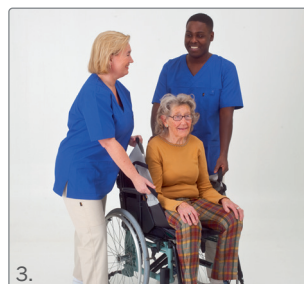

3.

3. En eller två vårdare kan flytta patienten längre bak i en stol genom att försiktigt flytta patienten från sida till sida.

Tips: När två vårdare samarbetar är det viktigt att man ger den andra vårdaren tydliga signaler om när han/hon ska trycka på eller dra.

Beskrivning

Immedia Sling

Lång, 2 x 4 handtag
Kort, 2 x 4 handtag

B x L

(cm)

16 x 190
16 x 120

Art.nr

IM428
IM428K

Specifikationer

Baksida: nylon

Polstring: polyester

Insida: nylon med polyuretan beläggning

Handtag: polyester

Max. brukarvikt: 150 kg

Tvättråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumlning låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se