


Rundis/Kaskad/Stapel

Duschpall

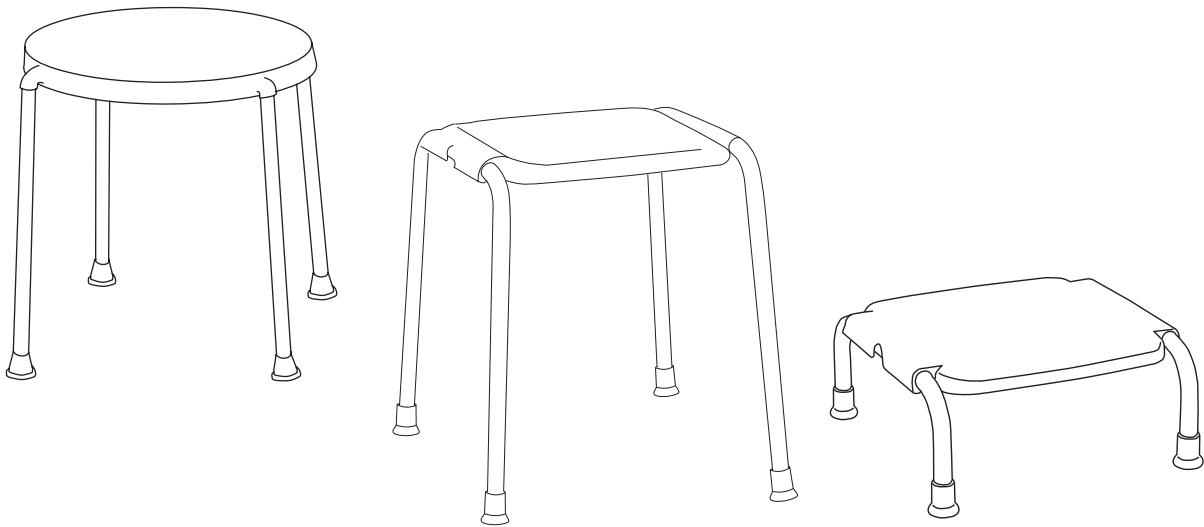

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Tvätt och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten alternativt i produktkatalogen.

Rengöringsinstruktioner:

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter.

Underhåll/kontroll:

Produkterna bör ses över regelbundet, minst 1 gång per år. Man bör kontrollera produktens delar är hela och funktionsdugliga.

Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

1. Att doppskor är i dugligt skick.

Doppskorna skall vara mjuka, hela och funktionsdugliga för att produkten ska stå stadig och säkert mot underlaget. Dessa detaljer är säkerhetsdetaljer kontrollen bör vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljer bytas.

2. Att stativet inte blivit skevt eller utsatts för åverkan.

Kontrollera att benen står symmetriskt mot golvet och inte blivit skeva.

3. Att plastdetaljer inte har sprickbildningar.

Kontrollera att alla plastdetaljer är intakta.

78237D

16-03-10

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com