


Rufus Plus

Badbräda

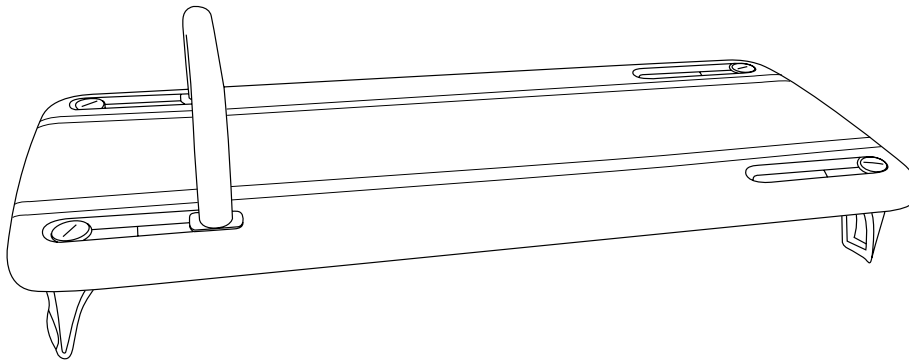

Rengöringsinstruktioner:

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter.

Underhåll/kontroll:

Produkterna bör ses över regelbundet, minst 1 gång per år. Man bör kontrollera att alla delar finns med och är intakta.

Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

1. Att kantstoppen är i dugligt skick.

Kontrollera enligt monteringsanvisning att alla delar finns och att justering av kantstoppen fungerar. D.v.s. att kantstoppet kan lossas och flyttas och därefter åtdragas med säkerhet. Kontrollen av kantstoppen bör vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljer bytas ut.

2. Att friktionsytor är i dugligt skick.

Med friktionsytor menar vi detaljer som har till uppgift att förhindra ofrivillig förflyttning av produkten. Dessa skall vara hela och fräscha. D.v.s. inte ge ett slitet intryck. Då dessa detaljer kan ses som säkerhetsdetaljer bör kontrollen vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljerna utbytas.

Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

78423B

16-02-12

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

 **etac**®