

Rekonditionering – Rengöring

molift[®]
by Etac

2023-02-07

Gäller alla Molift uppresningslyftar: Quick Raiser 1, Quick Raiser 2, Quick Raiser 205

Rengöring och desinfektion

Rengör regelbundet.



Rengör ytorna med fuktig trasa och lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel.

Använd inte lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det kan skada lyftens ytor.

För desinfektion vid behov: använd isopropylalkohol.
Undvik slipande rengöringsmedel.

- Ta bort lyftarmens överdrag för att rengöra under det, gäller Quick Raiser 205.
- Ta vid behov bort knädynan och rengör den under rinnande vatten.
- Ta bort hår och mattlugg från hjulen och kontrollera att de kan rulla fritt.

Använd vid behov isopropylalkohol för att ta bort fett och smuts på kontakten och handkontrollen. Kontrollera nödstoppfunktionen efter rengöring.
Lyften får inte sköljas i rinnande vatten.

För mer utförlig information om underhåll och rekonditionering se manualen.