

Molift SmartBag

Brukarmanual

molift[®]
a part of Etac

BM09401 Rev. A 23.03.2017



Packning

Transportväska Molift SmartBag är utvecklad för att enkelt kunna transportera Molift Smart 150, i en bil, på tåget, i ett flygplan eller bara för att stuva undan Molift Smart 150 när den inte används.

1 Fäll ihop Smart 150 enligt bruksanvisningen, och placera den i upprätt läge.



2 Öppna kardborrebandet på Molift SmartBag och veckla ut väskan.



3 Kontrollera att de båda framhjulen på Molift Smart 150 vända som visas på bilden.



4 Dra väska SmartBag över Smart 150, med den grå sidan mot körbygeln.



Packning

5 Se till att SmartBag försiktigt dras över de två översta krokarna av lyftbygeln.



6 Lägg ner SmartBag med Smart 150 på golvet.



7 Vänd och placera hjulen på Smart 150 som visas på bilden och bromsa hjulen.



8 Lyft Smart 150 i mittpelaren och dra locket på SmartBag framåt. Sänk ned Smart 150 i väskan.



Packning

9 Placera batteriet och eventuell batteriladdare i locket på väskan.



10 Stäng väskan.



11 Klart!



12 Det går även för två personer att bära väskan genom att använda handtagen i botten av SmartBag.



Packa upp

1 Lägg ner SmartBag med Smart 150 på golvet.



2 Öppna dragkedjan på locket.



3 Ta ur batteri och eventuell batteriladdare från locket.



4 Lyft i mittpelaren på Smart 150 och skjut in locket på SmartBag under väskan.




Packa upp

5 Lyft väskan med Smart 150 till upprätt läge.



6 Dra upp väskan försiktigt och ta av från Smart 150.

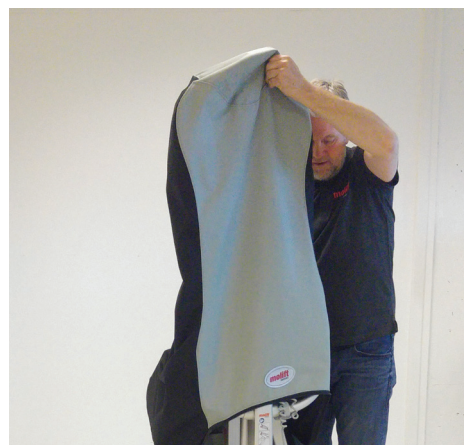

7 Rulla ihop SmartBag och fäst med kardborrebanden.



8 Klart!



Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2, 2816 Gjøvik, Norway
Tel +47 4000 1004
molift@etac.com www.etac.se

molift[®]
a part of Etac