


Vaskeinstruktion

Etac vendesystemer

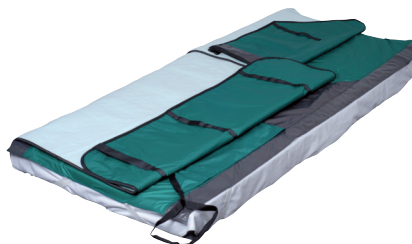


Vask:

Produktet kan vaskes ved 60° - 80°.
Centrifugering ved høj hastighed anbefales.
Anvend ikke skyllemiddel eller klor.

OBS: Ved vask skal Twinsheet 4Glide TOP være monteret på Twinsheet 4Glide DOWN, for at velcrobåndene ikke ødelægger glidematerialet.

Tørring:

Lufttørring anbefales. Ved tørring i tørretumbler skal der anvendes lav temperatur.

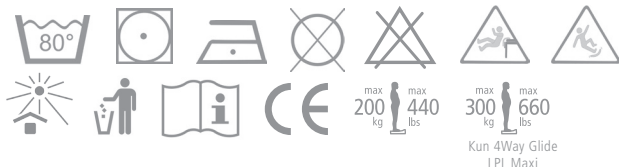

Kun 4Way Glide
LPL Maxi



Serie 28962 fra himi-basen.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
telefon 79 68 58 33
fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

etac[®]
Skaber muligheder