


# Elite/Act

Stänkskärm  
Mudguard  
Spritzschutz

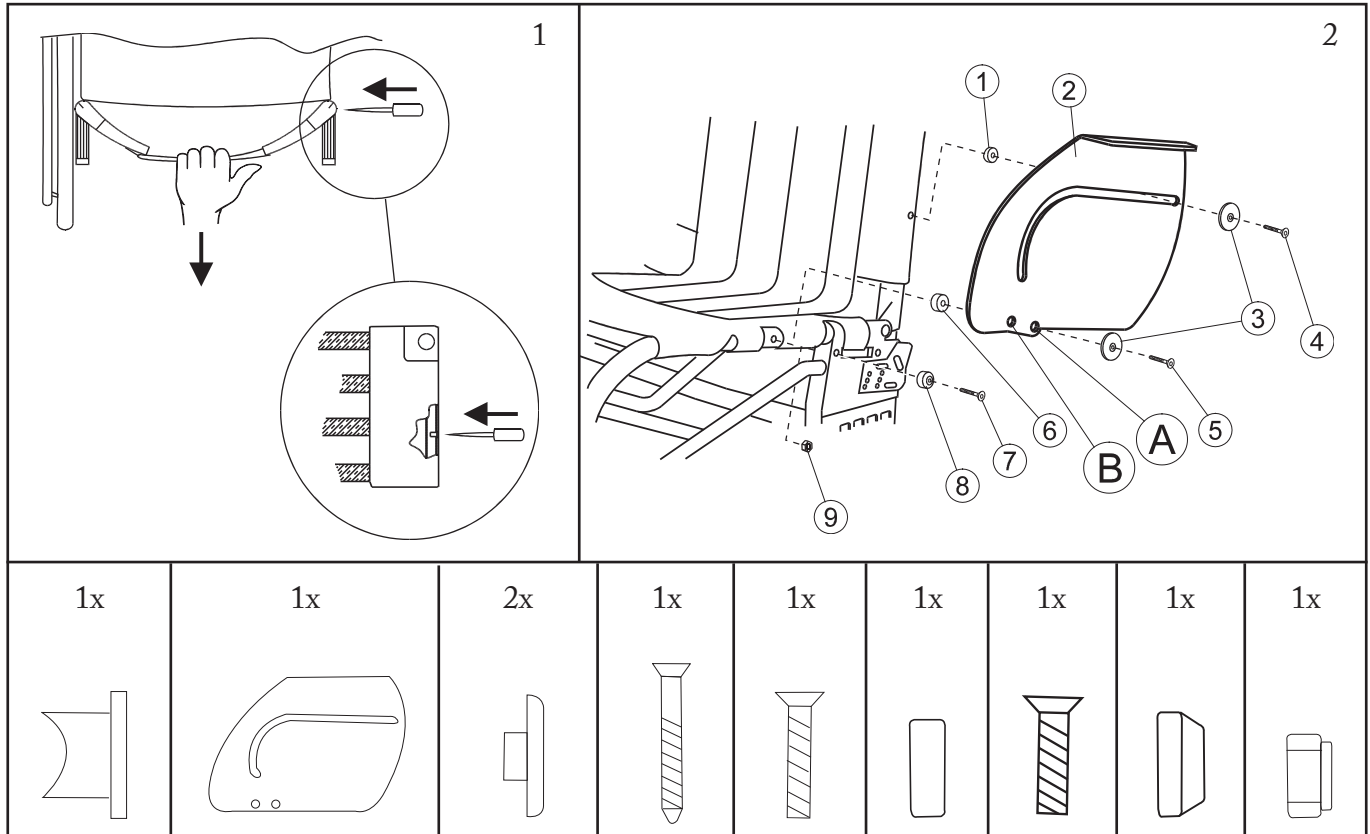

## Stänkskärm Elite/Act

Montera stänkskärmen i läge A vid ryggvinkel  $-10^\circ$  till  $-15^\circ$ , vid ryggvinkel  $+3^\circ$  till  $-8^\circ$  i läge B.  
**OBS!** Kontrollera att ryggen låser fast i läge.

## Mudguard Elite/Act

Mount Mudguard in position A if chair is fitted with backrest angle  $-10^\circ$  to  $-15^\circ$  and in position B if chair is fitted with backrest angle  $+3^\circ$  to  $-8^\circ$ . **NOTE!** Make sure the backrest locks into position.

## Spritzschutz Elite/Act

Wenn der Rückenwinkel  $-10^\circ$  bis  $-15^\circ$  ist, soll der Spritzschutz in die Lage A montiert werden. Wenn der Rückenwinkel  $+3^\circ$  bis  $-8^\circ$  ist, soll der Spritzschutz in die Lage B montiert werden. **ACHTUNG!** Kontrolliere das der Rücken beim zurückklappen einrastet.

74113C

04-03-16

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com