


25969/26132

Tippskydd Transit III / Next

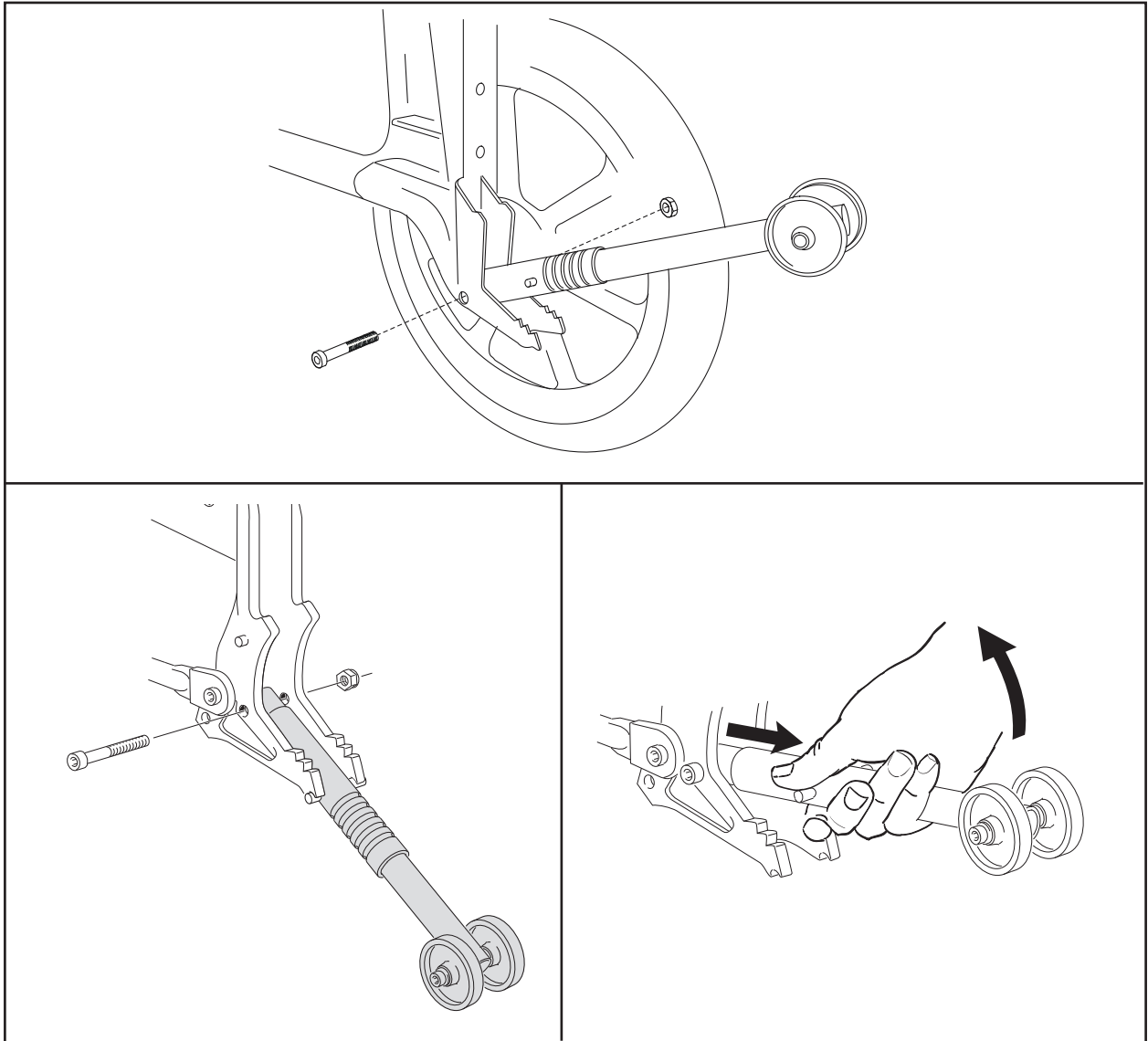

Uppfällning

För "plasthylsan" (A) nedåt. Lyft sedan tipskyddet uppåt i lodrät läge, tills ett tydligt "klick" hörs.

Nedfällning

Tryck tipskyddet nedåt så ett tydligt "klick" hörs.



Se till att tipskyddet är i låst läge.

74222B

04-08-13

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com