



UB200624L





Monteringssats – Etac Xstolar bygel och beslag B50-60

Attachment kit Etac Xchairs - 50-60 cm Lille Viking 2000 F/L bow





75019.6 2022-10-19




	UB200624L		
Cross	50 - 57,5 cm	Etac	
Cross 5	50 cm	Etac	
Cross 6	50 cm	Etac	
Cross XL / Cross 5 XL	50 - 60 cm	Etac	
Twin	50 - 55 cm	Etac	
Transit	50 cm	Etac	*Transit III 16"

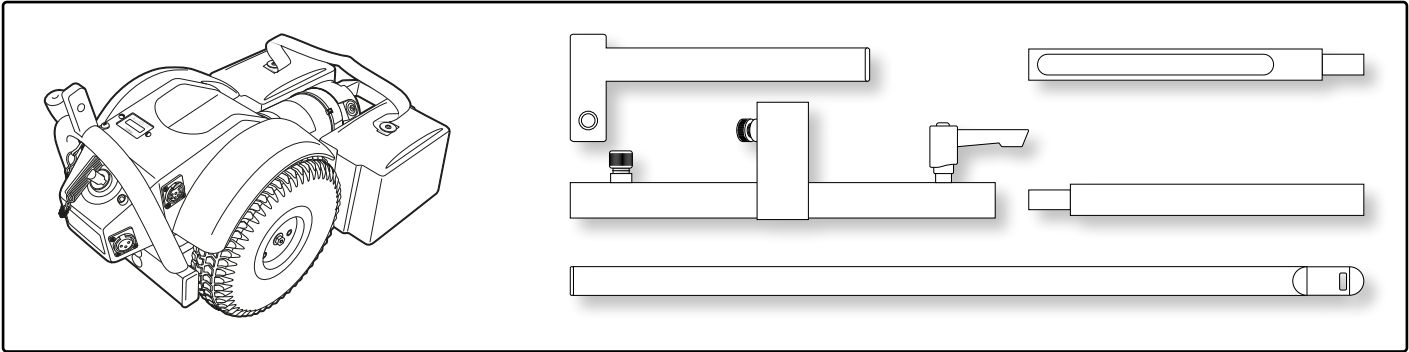
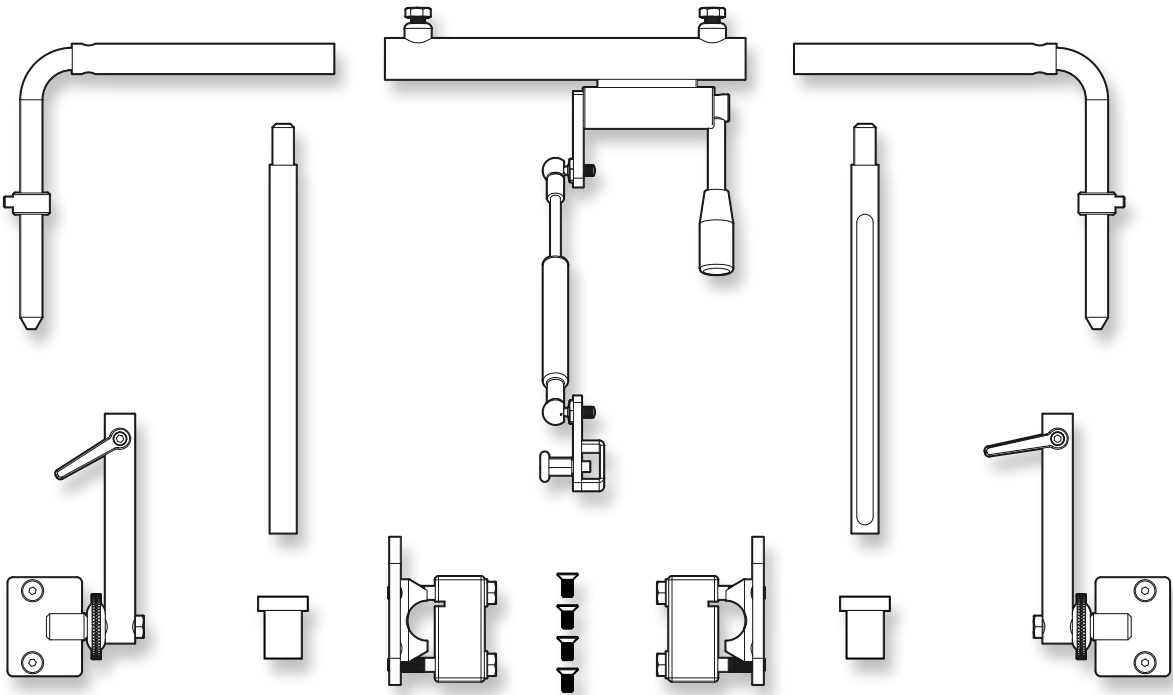


Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com





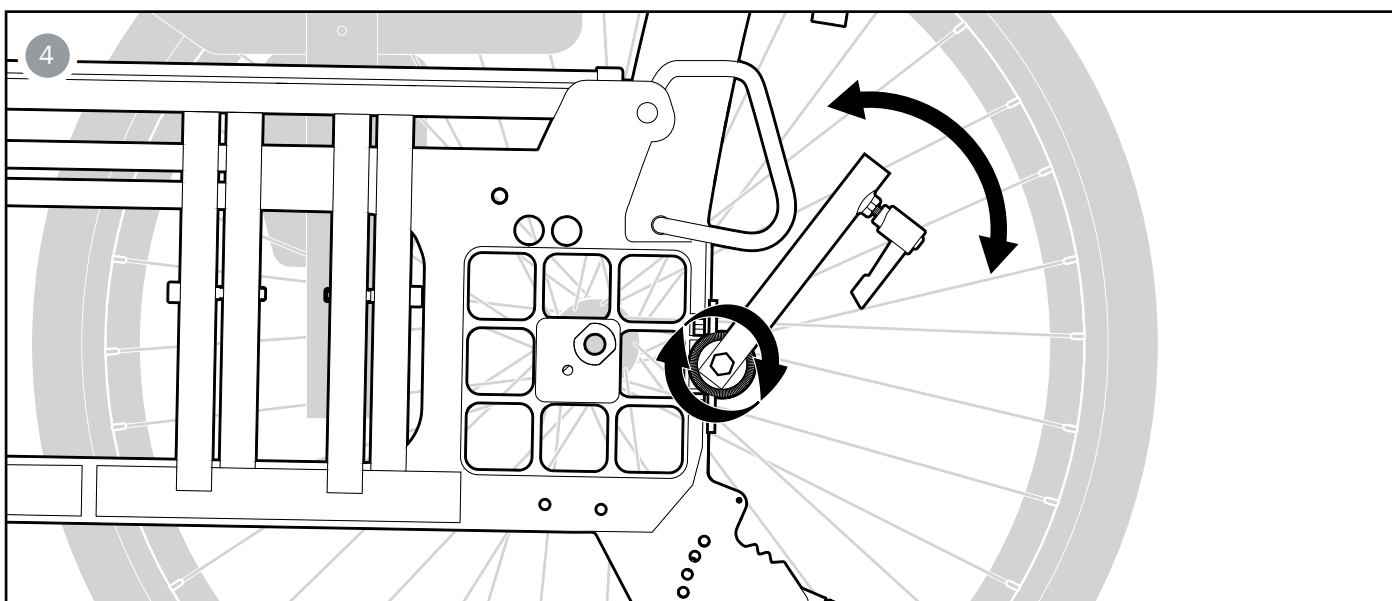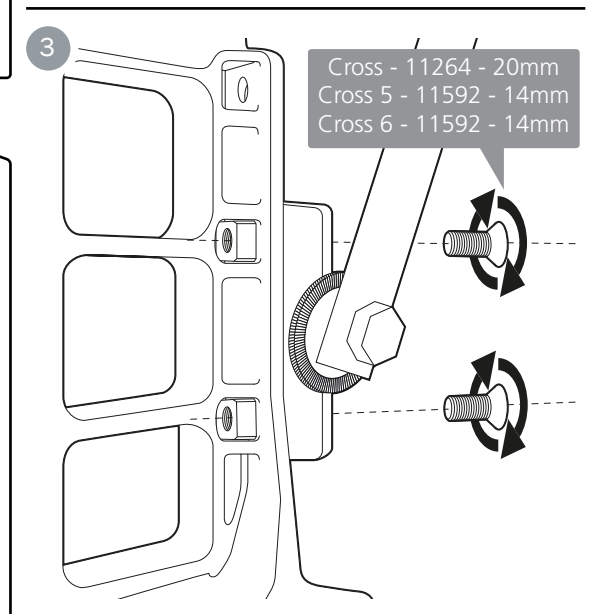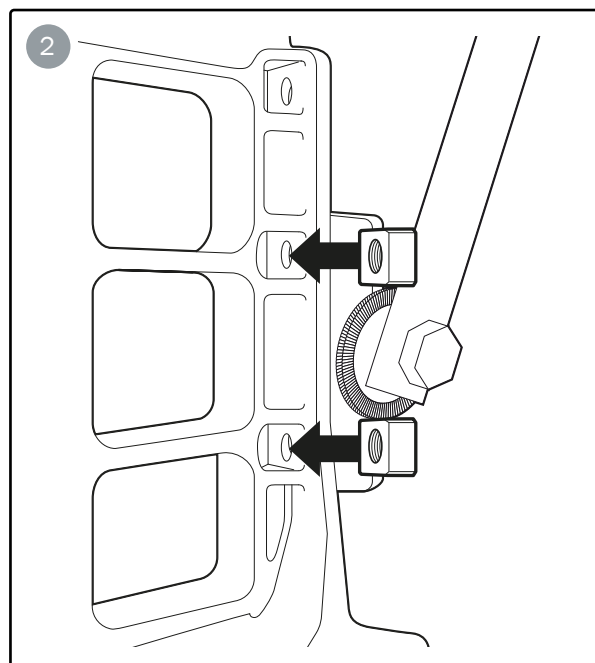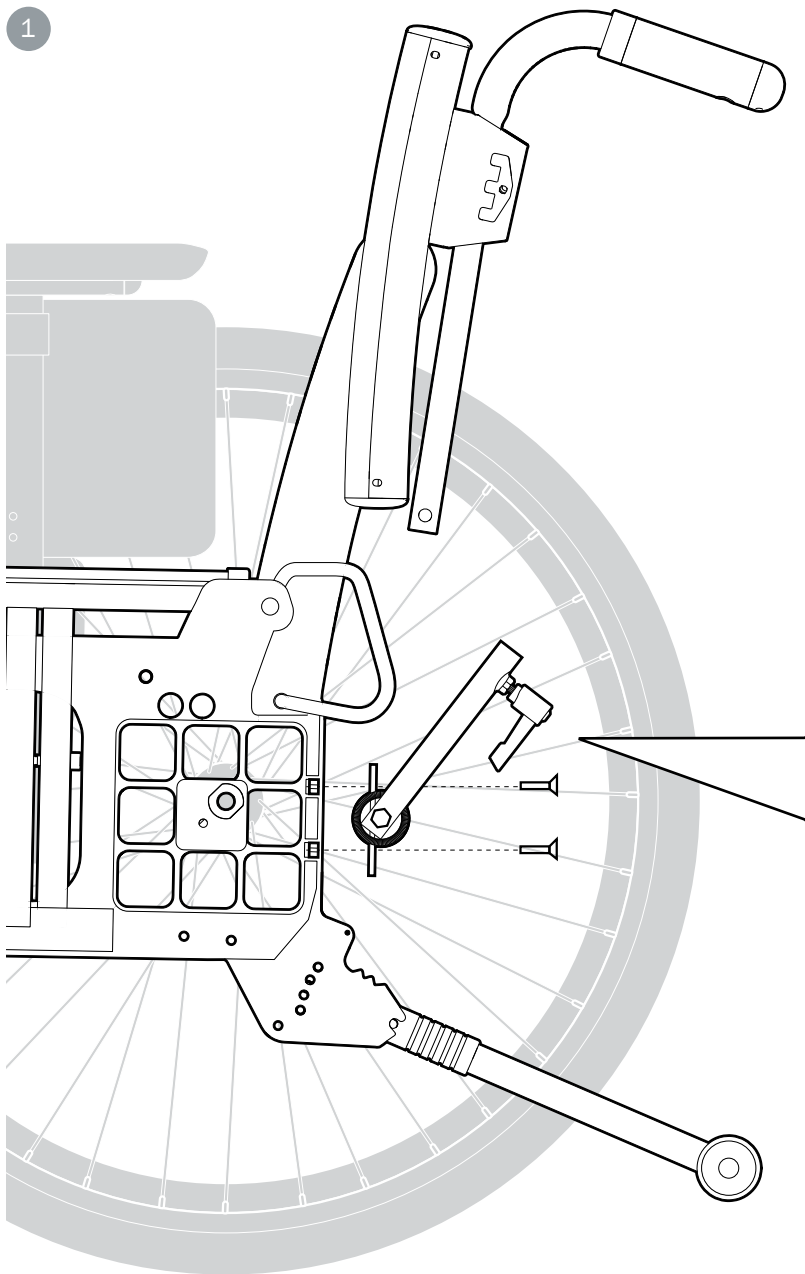

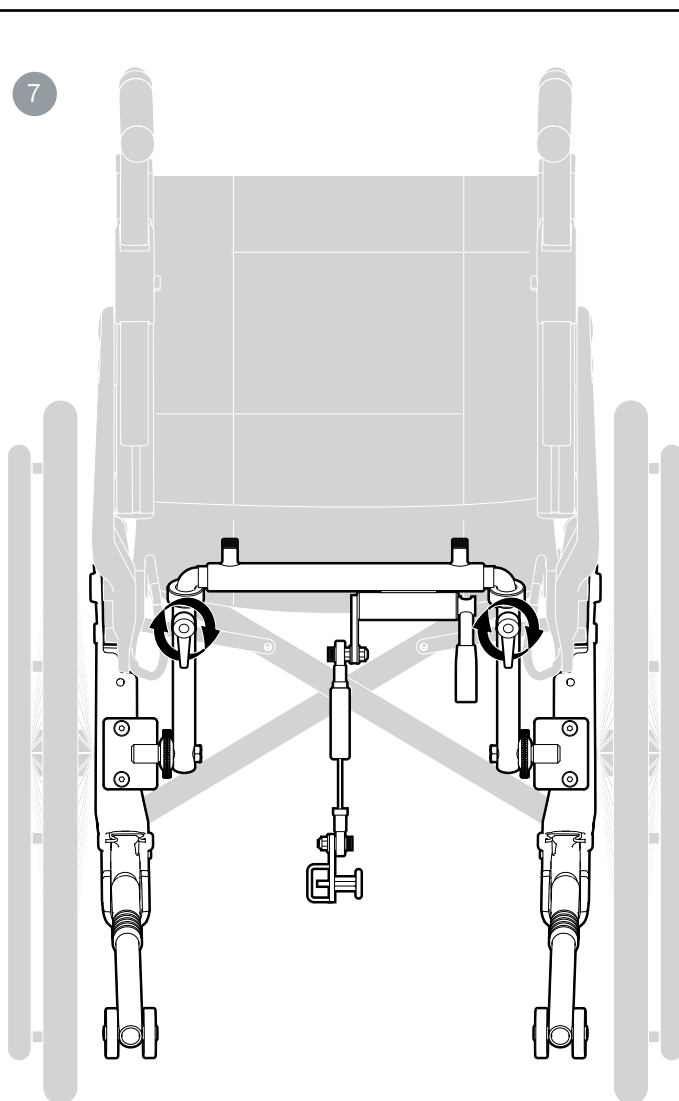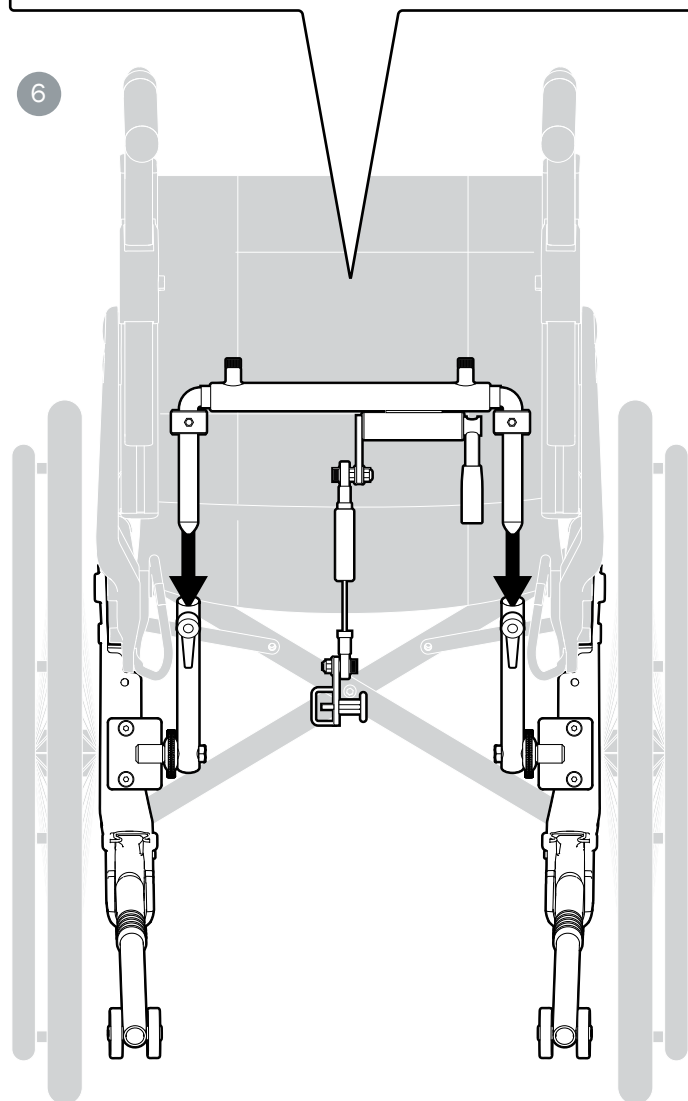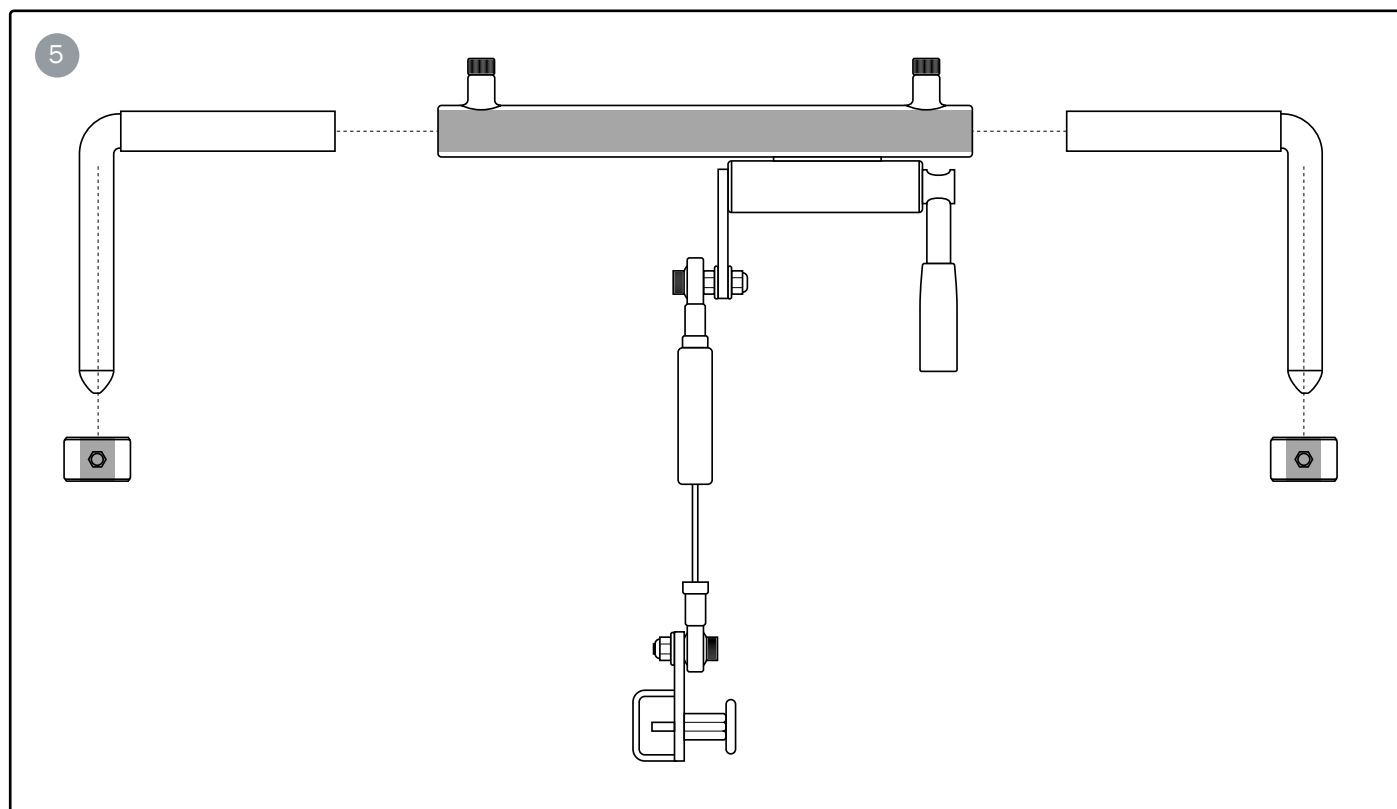


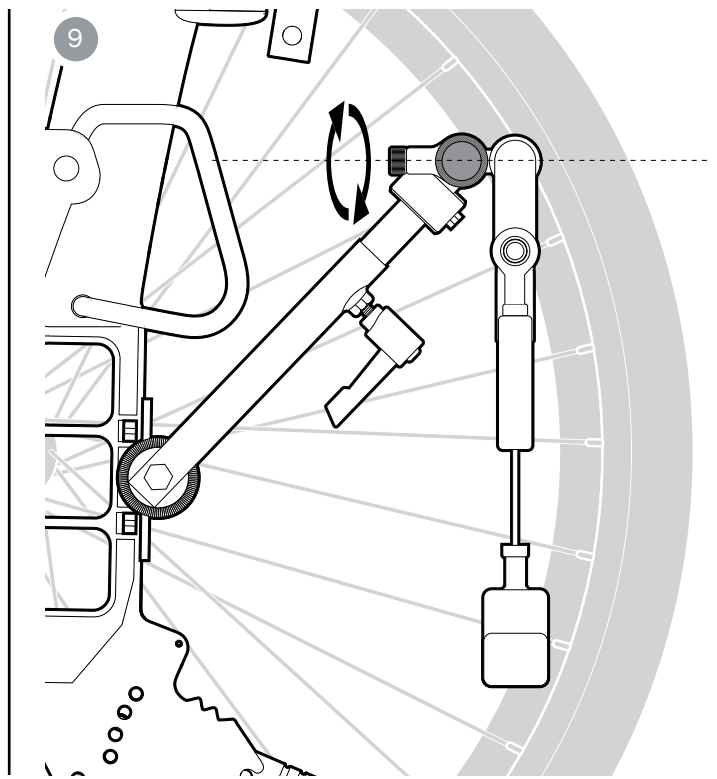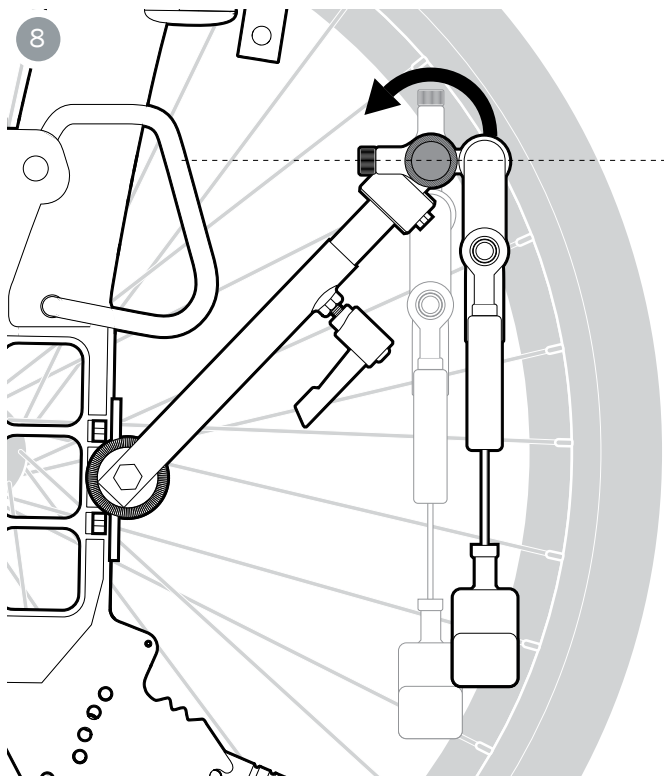


Cross 5, Cross 6

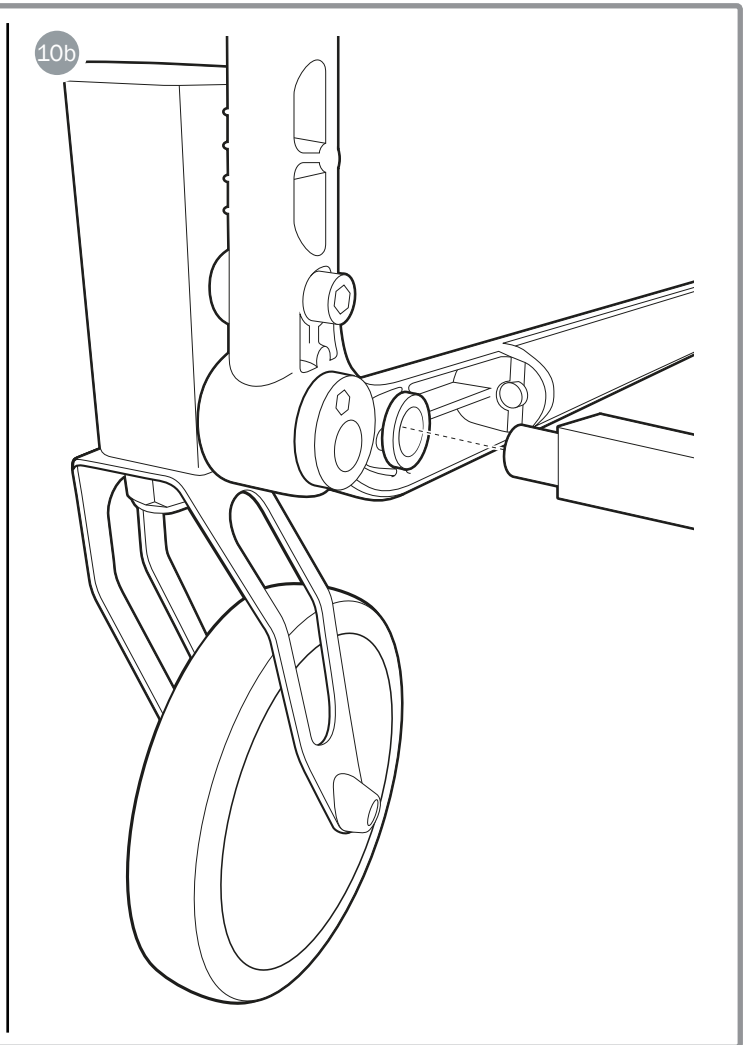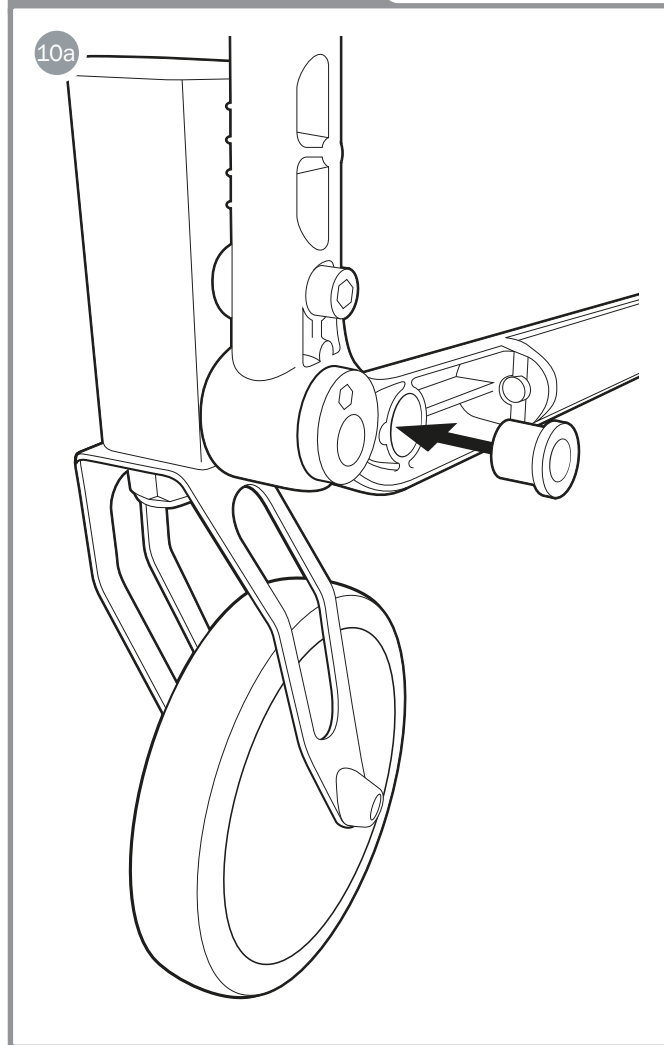


10a


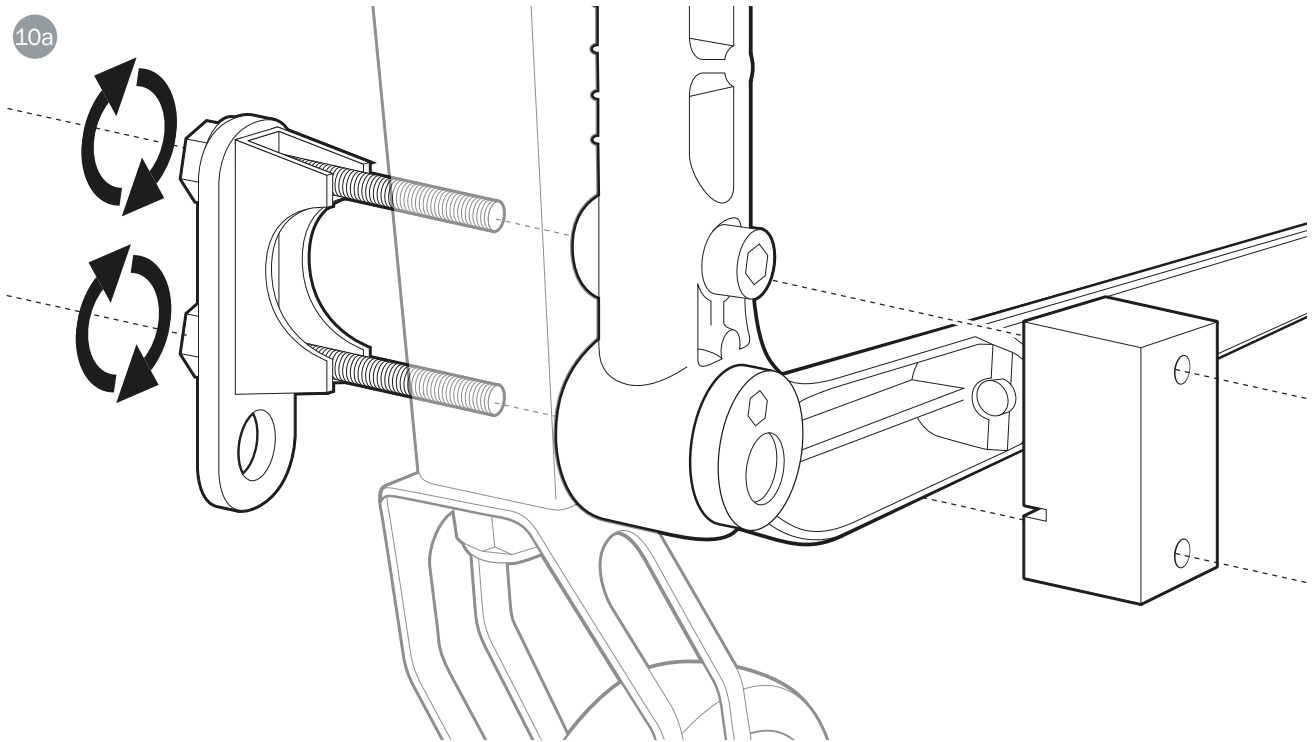




10b

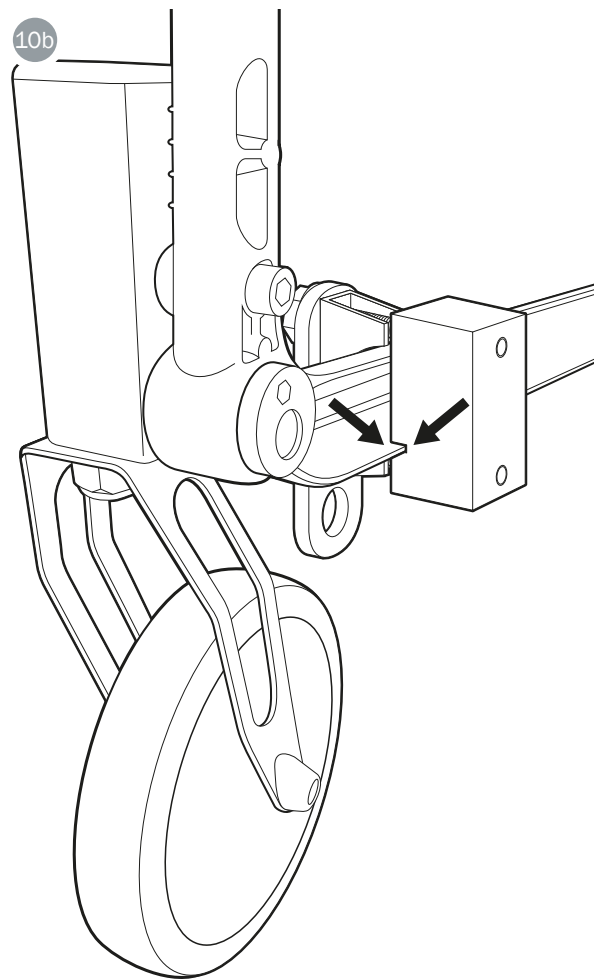


10c

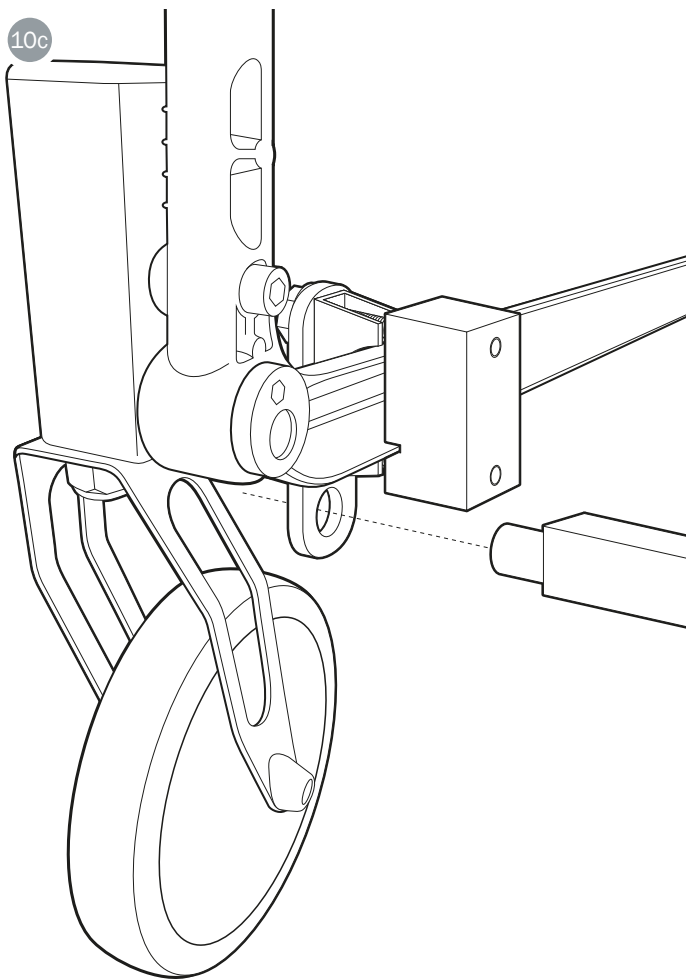

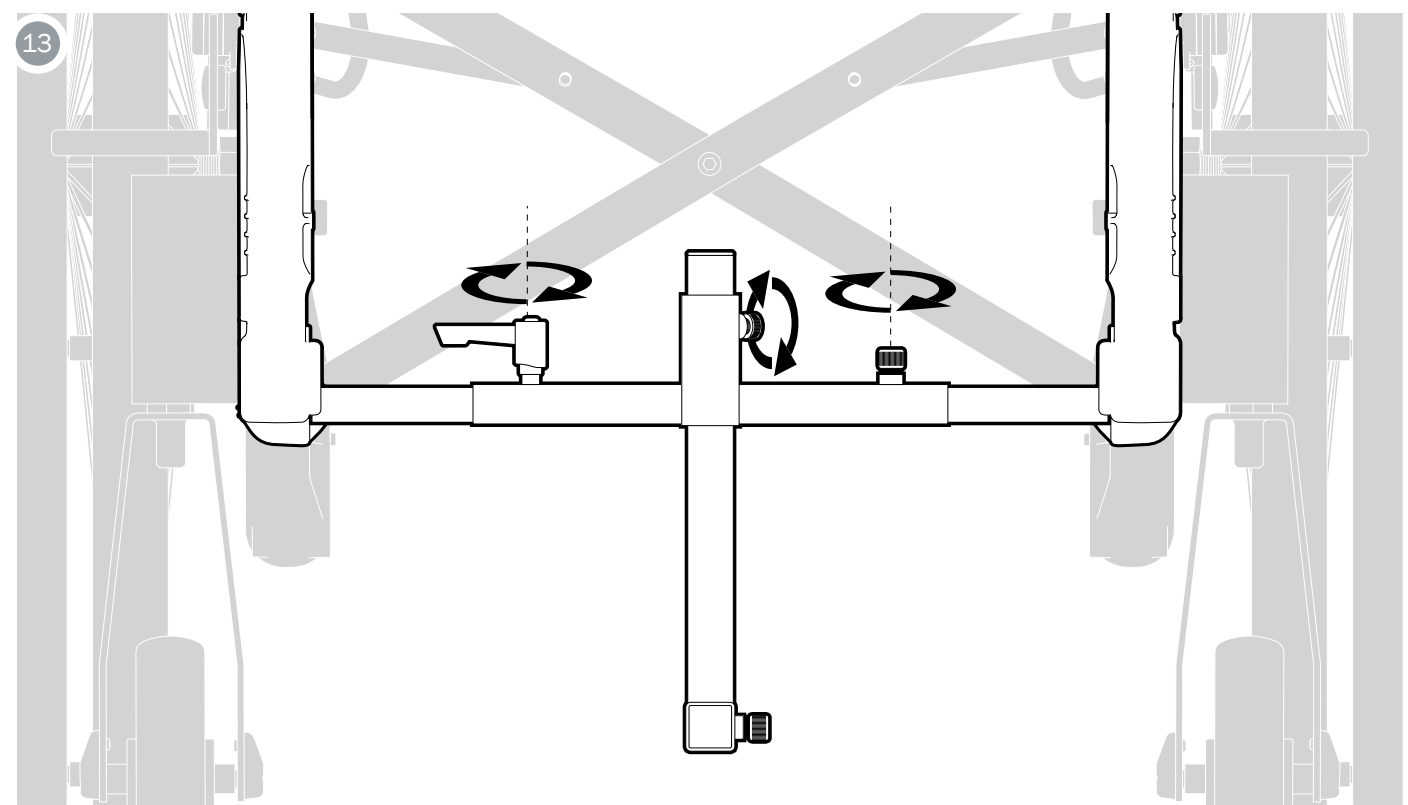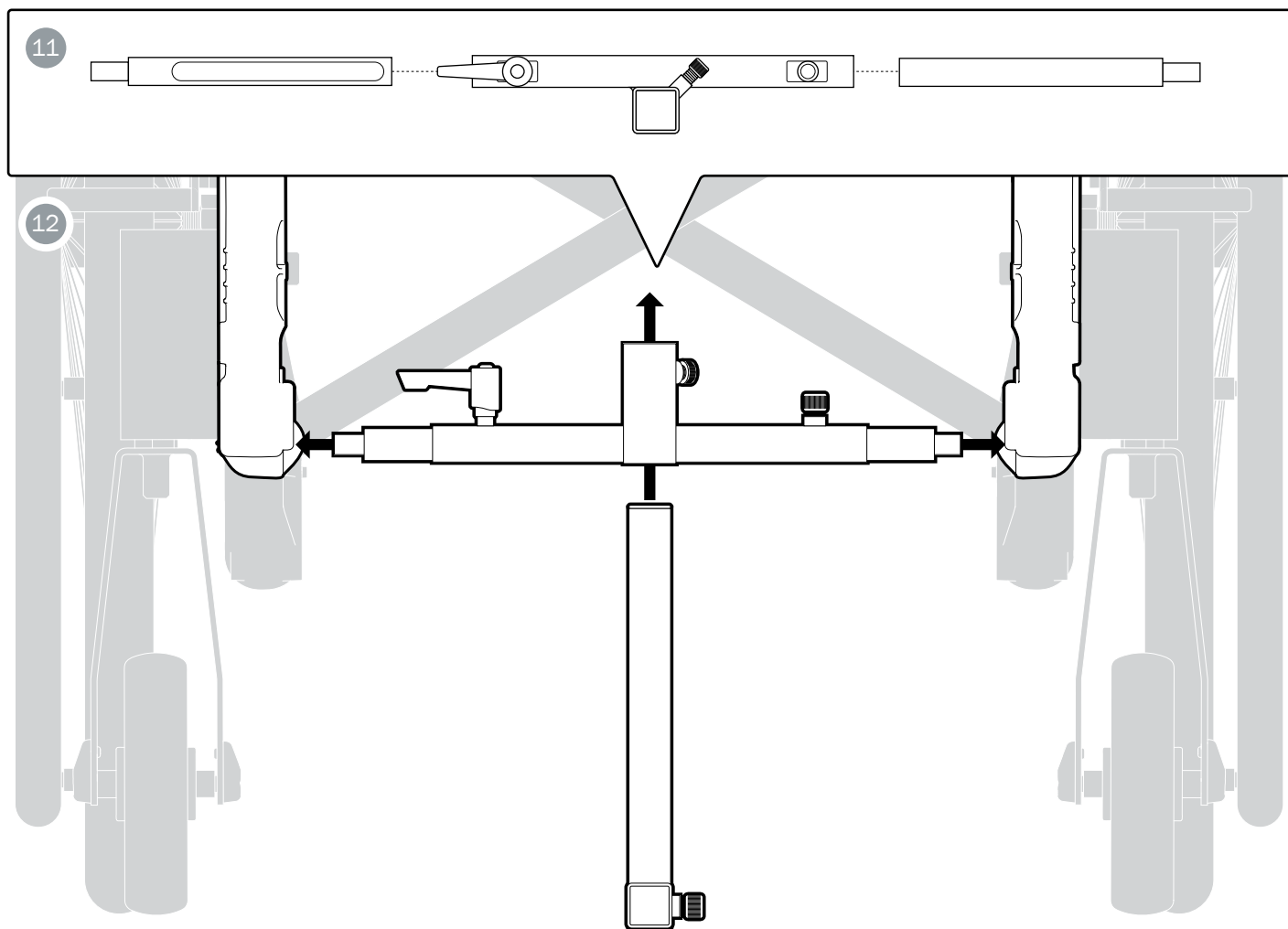

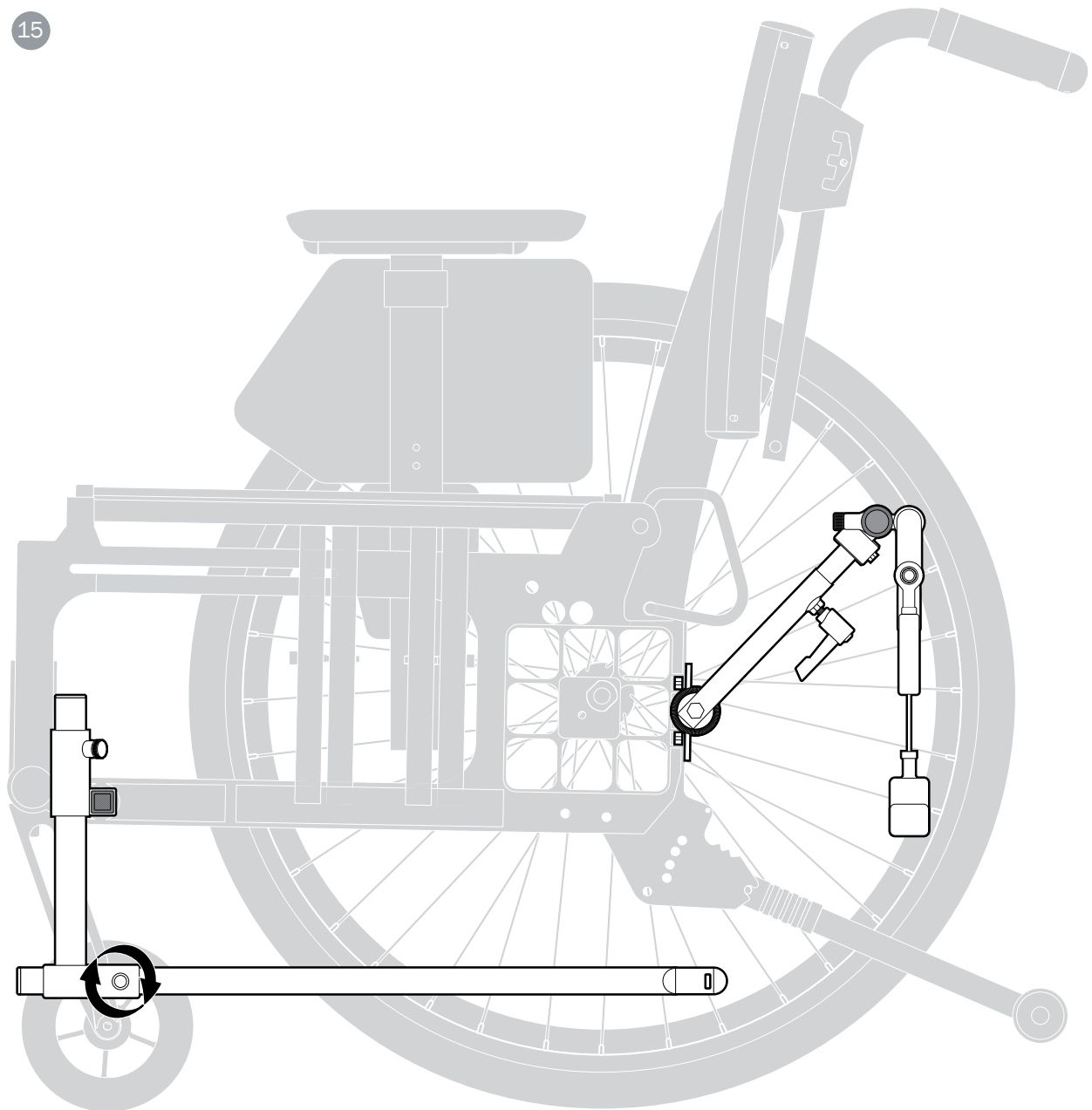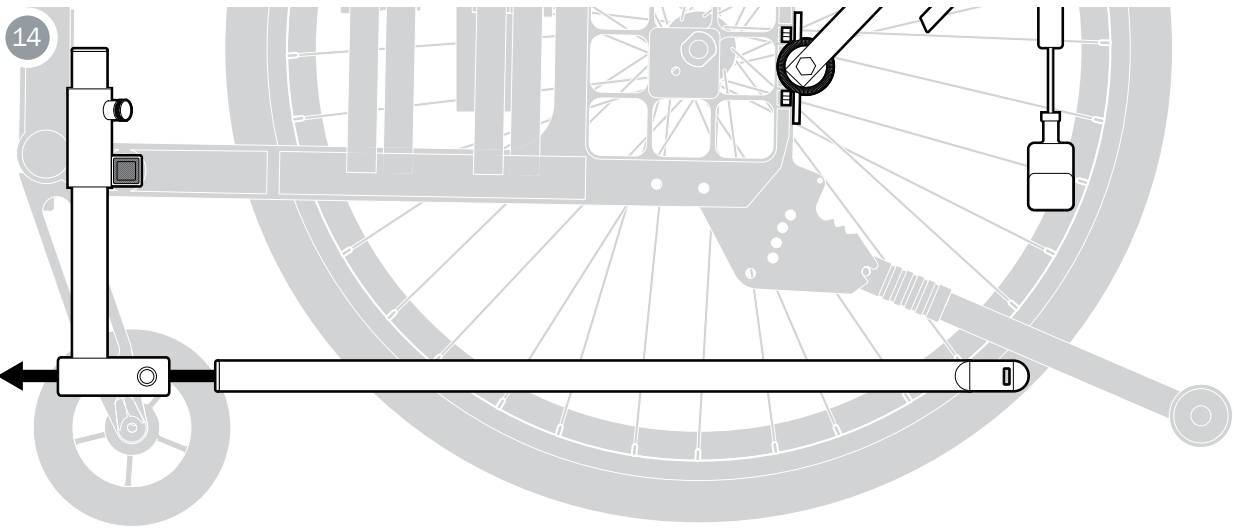

1		24 Nm
2		10 Nm
3		10 Nm
4		18 Nm
5		10 Nm
6		10 Nm
7		24 Nm

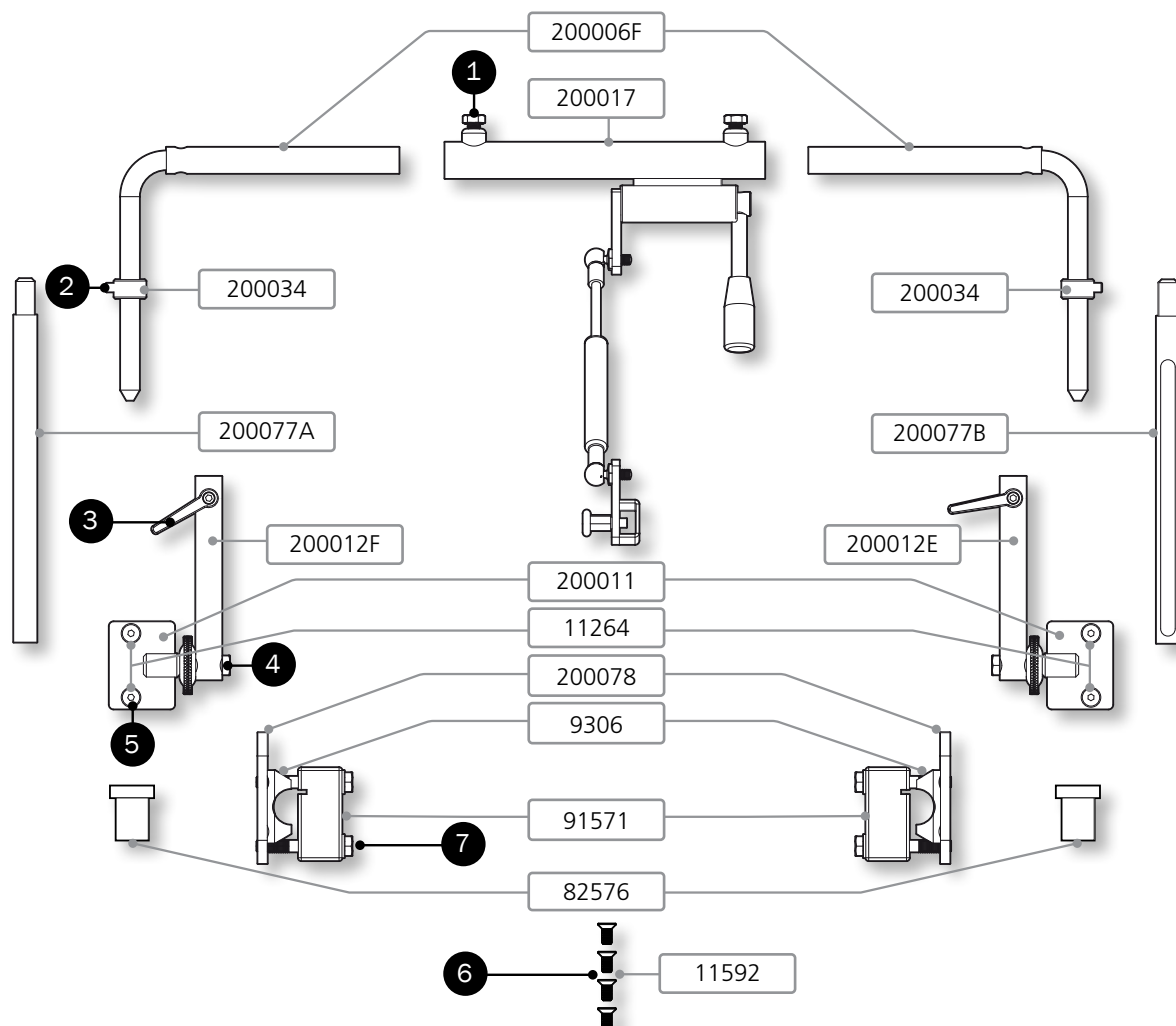

UB200624L

	SE	EN	
UB91571	Monteringsbeslag POM	Mounting bracket POM	2
UB9306	Monteringsbygel skål 35 mm	Mounting bracket basin 35 mm	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	Mounting angle long	2
UB200011	Ställbeslag bak	Steel bracket rear	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	Fittings bracket front	2
UB200012E	Fästarm 140 mm höger	Mounting arm 140 mm ri	1
UB200012F	Fästarm 140 mm vänster	Mounting arm 140 mm le	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	Pressure part compl	1
UB200034	Bygelstopp	Bolt for bow	2
UB200077A	Teleskopstång 250 mm med rund tapp	Telescopic mounting bar 250mm	1
UB200077B	Teleskopstång 250 mm med spår	Telescopic bar 250mm plain	1
11592	Skruv M6x14 MF65	Screw M 4x 12 M6S fzb	4
11264	Skruv M 6x 20 MF6S 8.8 svkr	Screw M 6x 20 MF6S 8.8	4
82576	Plasthylsa	Plastic sleeve Lille Viking	2