



27627
27339-01

27342-01
27625-01

27626-01
27890

27891




Vårdarbroms Cross 5/Cross 6


Drum Brake System Cross 5/Cross 6

Trommelbremsystem Cross 5/Cross 6


27339-01
27342-01

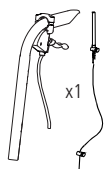

27625-01
27626-01

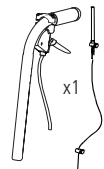




27627

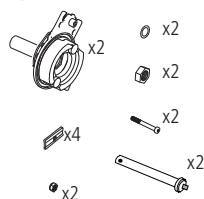

75160.7 25-04-07

Cross 5



POS G1/G2 +27628

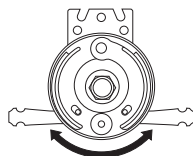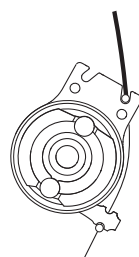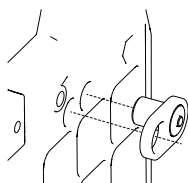

Bromsarmen är vändbar.
The brake arm is reversible.
Der Bremsarm kann gedreht werden.



20 Nm









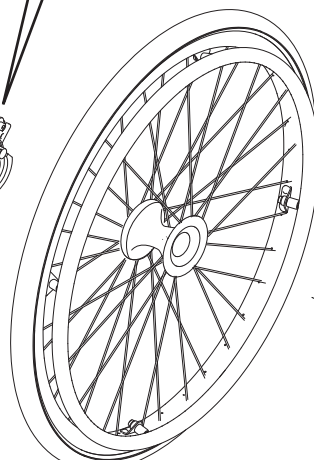
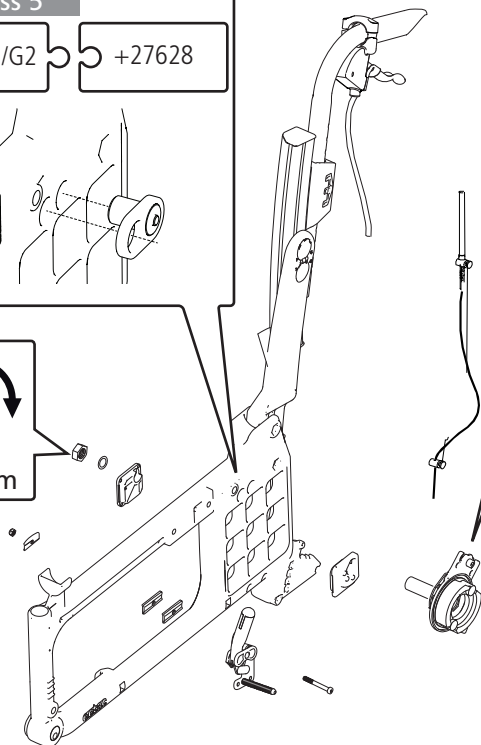


Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com














Cross 6

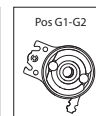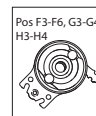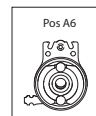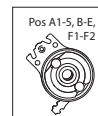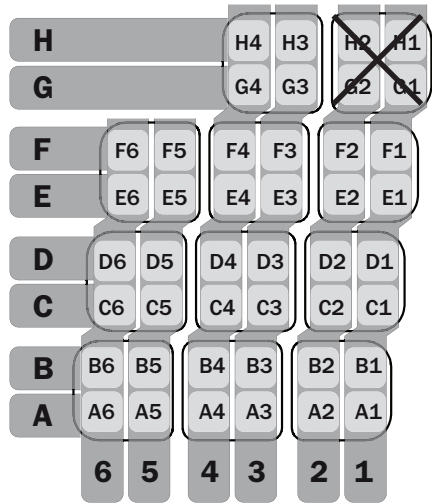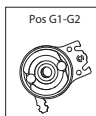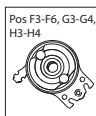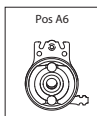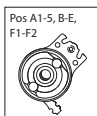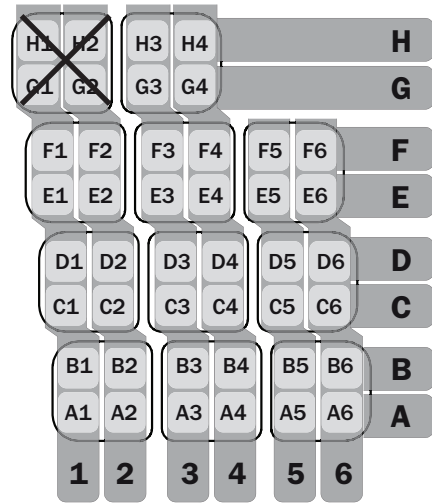


Cross 5

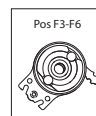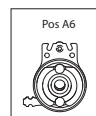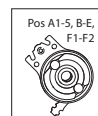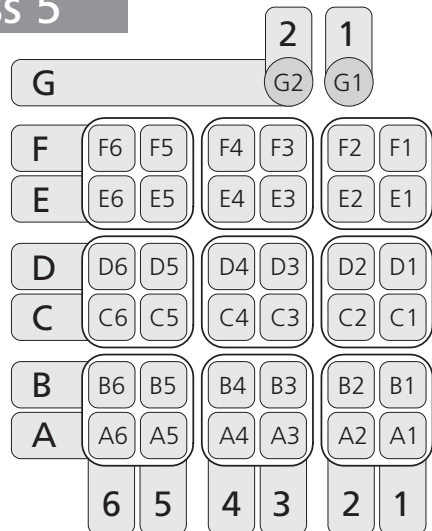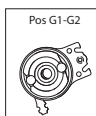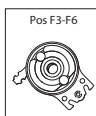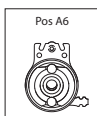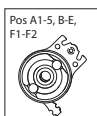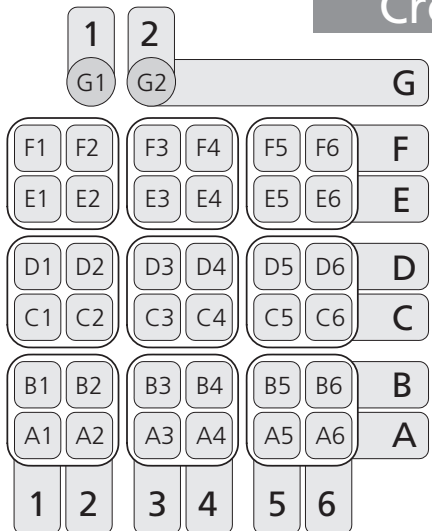


Vid justering av broms lossa muttern (A) och justera bromsen genom att skruva (B) upp/ner. När bromsen tar lagom hårt drag åt muttern (A).

To adjust the brakes, loosen nut (A). Loosen/tighten screw (B) in order to reach proper brake function. Tighten the nut (A).

Zum Einstellen der Bremsen die Mutter (A) lösen. Für die ordnungsgemäße Bremsfunktion Schraube (B) lösen/anziehen. Mutter (A) anziehen.

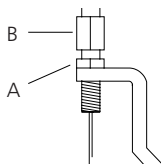

8 mm

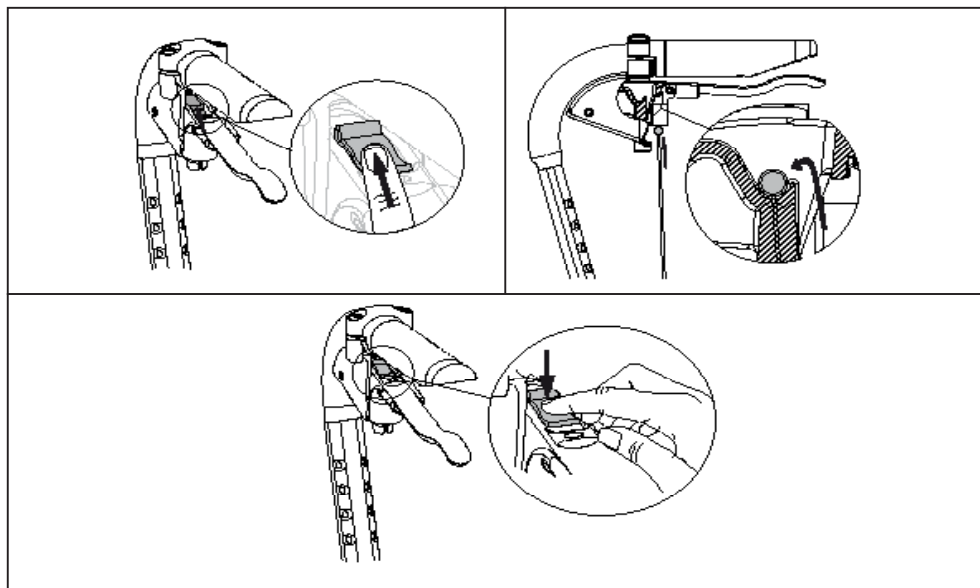

Om vajerlåset faller bort/If the wire lock is lost/Wenn der Draht Schloß verloren ist

