


7.


○ 4 mm, 2,5 Nm




8.

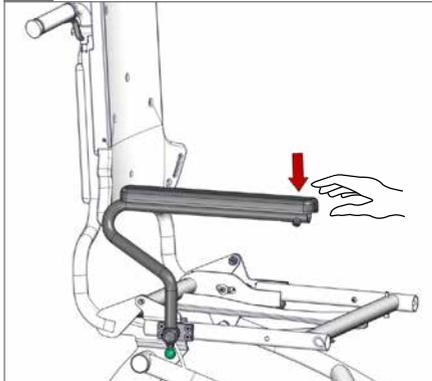

9.

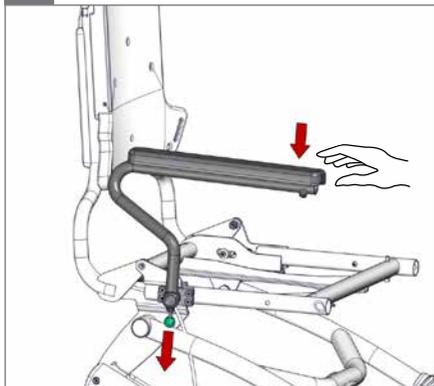


10.

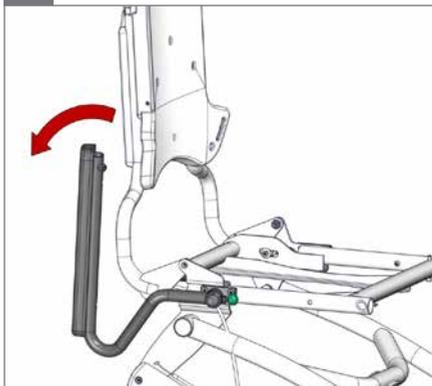

11.

○ 5 mm, 2,5 Nm

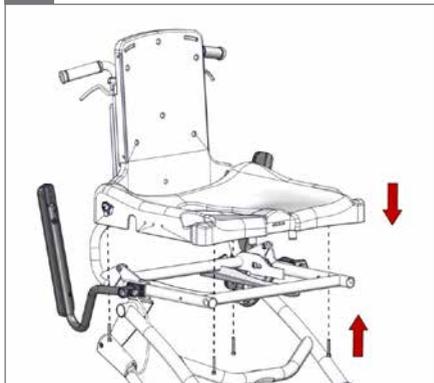

12.



## Armlehnen, wegklappbar

Für den Heron sind wegklappbare Armlehnen als Zubehör erhältlich. Diese können nachträglich am Grundrahmen montiert werden.

### **Bild 3**

Um die Armlehnen befestigen zu können, muss die Kunststoff-Sitzplatte vom Gestell entfernt werden. Lösen sie hierzu die 4 Inbusschrauben unter dem Sitzrahmen mit einem 5mm Inbusschlüssel. Die Sitzplatte kann dann nach oben herausgenommen werden.

### **Bild 4-6**

Die Armlehnen werden pro Seite mit vier Senkkopfschrauben (4mm) befestigt. An der Armlehne befinden sich hierfür 4 Bohrlöcher, am Grundrahmen vier passende Gewinde. Drehen sie alle Schrauben zunächst mit ein paar Umdrehungen in die Gewinde ein und ziehen sie diese im Anschluss mit 2,5 Nm fest.

### **Bild 8-10**

Die Armlehnen sind nach hinten senkrecht wegklappbar.

Hierfür ziehen sie die grüne Kugel am unteren Ende der Armlehne nach unten Richtung Boden und heben die Armlehne am Polster leicht an. Der Schwenkmechanismus ist nun entriegelt und die Armlehne bis zur senkrechten Position wegklappbar.

### **Bild 11**

Nach dem Beide Armlehnen vollständig montiert und senkrecht weggeklappt sind, kann die Kunststoff-Sitzplatte wieder aufgesetzt werden. Befestigen sie anschließend die Platte mit den vier Inbusschrauben wieder an der Unterseite des Grundrahmens.

Ziehen sie alle Schrauben mit dem 5mm Inbusschlüssel mit 2,5Nm fest.

### **Bild12**

Vorsicht, Achten sie beim zurückschwenken der Armlehnen darauf, dass Sie nicht Ihre Finger einklemmen.