





Spritzschutz /Abduktionsführung

Bild 1+2 Spritzschutz

Für den Heron ist ein Spritzschutz mit integrierter Abduktionsführung als Zubehör erhältlich. Dieser kann ohne Werkzeug am Sitz montiert werden.

Bild 3+4

Setzen Sie den Spritzschutz an der vorderen Kante der Sitzplatte mittig auf, Sie erkennen die Position an der runden Wölbung im Kunststoff. Drücken Sie anschließend den Spritzschutz senkrecht nach unten, bis er hörbar mit einem „Klick“ einrastet.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger einklemmen.

Bild 5+6

Um den Spritzschutz zu entfernen, greifen sie mit den Fingern in die Mulde unten vorn am Spritzschutz und ziehen ihn leicht zu sich heran, um das Einrasten zu lösen. Anschließend können sie den Spritzschutz senkrecht nach oben herausnehmen.

Achten Sie darauf, den Spritzschutz nicht zur Seite oder in Richtung Sitzfläche zu drücken, um ihn nicht zu beschädigen.

Bild 1 Topf

Der Heron kann mit einem Topf ausgestattet werden, um eine Nutzung fern von Toiletten zu ermöglichen.

Bild 2+3

Der Heron wird für die Nutzung über einem Toilettenbecken standardmäßig mit einem Silikonring (Spritzschutz) unter der Sitzfläche geliefert.

Dieser Silikonring muss vor der Montage des Topfes entfernt werden.

Fassen Sie den Silikonring hierfür am hinteren Griffende an und ziehen ihn waagrecht aus der Führungsschiene heraus.

Bild 4+5

Der Topf kann nun in die selbe Haltevorrichtung (Führungsschienen unter dem Sitzrahmen) eingeschoben werden

Achten Sie darauf, dass der Topf vollständig bis zur vorderen Kante eingeschoben wird, nur so ist die Funktion gewährleistet und der Topf gegen Herausrutschen gesichert.